




Mayo 2022

Guía de uso combinada de los instrumentos QIASymphony[®] SP/AS

Para uso con la versión 5.0 del software

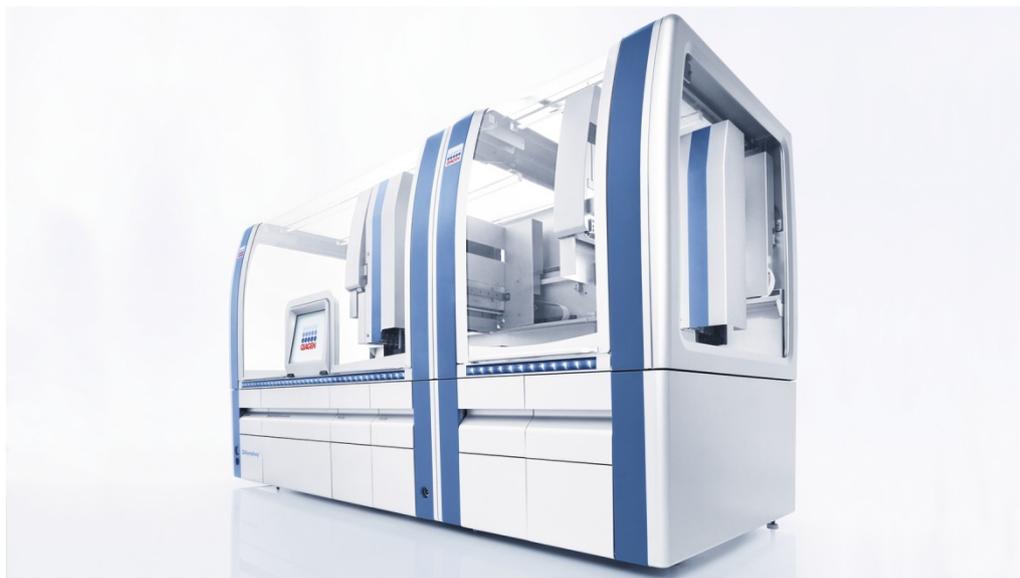

IVD

CE

REF

9001297, 9001301



QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden ALEMANIA

R1

Contenido

1	Introducción	11
1.1	Acerca de este manual del usuario	11
1.2	Información general.....	13
1.2.1	Asistencia técnica.....	13
1.2.2	Declaración de políticas.....	13
1.3	Uso previsto del instrumento QIASymphony SP/AS.....	14
1.3.1	Requisitos de los instrumentos QIASymphony SP/AS.....	14
1.3.2	Formación para los usuarios de los instrumentos QIASymphony SP/AS.....	15
1.4	Armario QIASymphony Cabinet SP/AS.....	15
1.5	Referencias a manuales del usuario	16
1.6	Glosario.....	16
1.7	Accesorios de los instrumentos QIASymphony SP/AS.....	16
1.8	Materiales necesarios	16
1.9	Materiales necesarios pero no suministrados	17
2	Información de seguridad	18
2.1	Uso adecuado	19
2.2	Seguridad eléctrica.....	21
2.3	Entorno	22
2.3.1	Condiciones de funcionamiento	22
2.4	Eliminación de residuos.....	23
2.5	Seguridad biológica	23
2.5.1	Muestras	24
2.6	Productos químicos	25
2.6.1	Gases tóxicos	25
2.7	Riesgos mecánicos	26
2.8	Riesgo por calor.....	26
2.9	Seguridad relativa al mantenimiento.....	27
2.10	Seguridad radiológica	29
2.11	Símbolos que aparecen en los instrumentos QIASymphony SP/AS.....	30

3	Procedimiento de puesta en funcionamiento	34
3.1	Requisitos del emplazamiento	34
3.1.1	Mesa de trabajo	34
3.2	Características generales	35
3.2.1	Tapas.....	35
3.2.2	Pantalla táctil	35
3.2.3	Puertos USB	36
3.2.4	Interfaz de red	36
3.2.5	Puertos USB	36
3.3	Encendido de los instrumentos QIASymphony SP/AS	37
3.3.1	Iniciación	37
3.3.2	Cierre de sesión	38
3.3.3	Apagado de los instrumentos QIASymphony SP/AS	39
4	Configuración de usuarios	40
4.1	Valores de configuración.....	40
4.2	Cuentas de usuario.....	40
4.2.1	Creación de usuarios nuevos	41
4.2.2	Activación/desactivación de cuentas de usuario	42
4.2.3	Solicitud del sistema de cambio de contraseña	43
4.2.4	Solicitud del usuario de cambio de contraseña	44
4.3	Instalación del paquete de idioma.....	46
4.3.1	Preparación del lápiz USB y transferencia de los archivos de idioma desde el lápiz USB.....	46
4.3.2	Transferencia de archivos por medio del programa QMC.....	47
4.3.3	Cambio del idioma en los instrumentos QIASymphony SP/AS.....	47
4.3.4	Cambio del idioma en el programa QIASymphony Management Console (QMC)	48
5	Interfaz de usuario de QIASymphony SP/AS	49
5.1	Diseño de la pantalla de QIASymphony SP/AS.....	49
5.1.1	Barra de estado	49
5.1.2	Menús de fichas	51

	5.2	Símbolos del software	52
6		Administración de archivos	53
	6.1	Opciones de transferencia.....	53
	6.2	Transferencia de datos a través del lápiz USB	54
	6.3	Transferencia de archivos de los instrumentos QIASymphony al lápiz USB	54
	6.4	Transferencia de archivos desde el lápiz USB.....	56
	6.5	Sincronización de archivos.....	57
	6.5.1	Sincronización de los archivos almacenados en los instrumentos con los archivos almacenados en el lápiz USB	58
	6.5.2	Sincronización de los archivos almacenados en el lápiz USB con los archivos almacenados en los instrumentos	59
	6.6	Eliminación de archivos	60
7		Características del instrumento QIASymphony SP	61
	7.1	Principio del flujo de trabajo.....	62
	7.1.1	Principio básico	62
	7.2	Características del instrumento.....	63
	7.2.1	Cabezal magnético	63
	7.2.2	Estación de lisis.....	63
	7.2.3	Brazo robótico	64
	7.3	Lector de códigos de barras	65
	7.3.1	Lector de códigos de barras de entrada de muestras	65
	7.3.2	Lector de códigos de barras 2D de reactivos y consumibles	66
	7.3.3	Tipos de códigos de barras	66
	7.3.4	Escáner de mano.....	67
8		Carga de los cajones del instrumento QIASymphony SP.....	68
	8.1	Uso del Asistente del software.....	68
	8.2	Carga del cajón "Waste" (Desechos)	69
	8.2.1	Estación de almacenamiento de puntas.....	70
	8.2.2	Recipiente de desechos líquidos	71
	8.2.3	Conducto para puntas	71
	8.2.4	Recogida de puntas de desecho.....	72

8.2.5	Cajas unitarias.....	72
8.2.6	Cierre del cajón "Waste" (Desechos).....	73
8.3	Carga del cajón "Eluate" (Eluidos)	74
8.3.1	Características del cajón "Eluate" (Eluidos).....	74
8.3.2	Procedimiento de carga	75
8.3.3	Módulo de transferencia	78
8.3.4	Descarga del cajón "Eluate" (Eluidos)	79
8.4	Carga del cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles)	82
8.4.1	Carga de consumibles	82
8.4.2	Cartuchos de reactivos	86
8.4.3	Frasco de disolución amortiguadora	88
8.4.4	Frasco de disolución amortiguadora	88
8.4.5	Descarga de reactivos y consumibles.....	89
8.5	Carga del cajón "Sample" (Muestras).....	91
8.5.1	Carga de soportes de tubos.....	91
8.5.2	Carga del soporte de placas	99
8.6	Realización de exámenes de inventario (SP)	100
8.6.1	Examen de inventario del cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles).....	100
8.6.2	Examen de inventario del cajón "Waste" (Desechos).....	103
8.6.3	Examen de inventario del cajón "Eluate" (Eluidos).....	103
8.7	Inicio, pausa, reanudación y detención de una serie	104
8.7.1	Inicio de una serie	104
8.7.2	Puesta en pausa de una serie.....	104
8.7.3	Reanudación de una serie	104
8.7.4	Detención de una serie.....	104
8.8	Final del procesamiento de lotes o de una serie	105
8.9	Final del día de trabajo.....	105
9	Definiciones de series en el instrumento QIASymphony SP.....	107
9.1	Configuración de un tipo de muestra	107
9.2	Uso de códigos de barras virtuales.....	107

9.3	Definición de un lote/serie (puesta en cola)	108
9.3.1	Muestras cargadas en el soporte de tubos	108
10	Características del instrumento QIASymphony AS	113
10.1	Principio del instrumento QIASymphony AS	113
10.2	Características del instrumento	114
10.2.1	Tapa del instrumento QIASymphony AS	115
10.2.2	Indicadores luminosos de estado del instrumento QIASymphony	115
10.2.3	Brazo robótico	115
11	Cajones del instrumento QIASymphony AS	116
11.1	Cajón "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos)	116
11.1.1	Puntas con filtro	117
11.2	Cajón "Assays" (Ensayos)	117
12	Funciones básicas del instrumento QIASymphony AS	118
12.1	Definiciones	118
12.1.1	Funcionamiento independiente	118
12.1.2	Funcionamiento integrado	119
12.1.3	Serie con normalización	119
12.1.4	Curva estándar	120
12.2	Preparación de una serie	120
12.2.1	Ensayos favoritos	120
12.3	Serie integrada	121
12.3.1	Definición de una serie integrada	123
12.3.2	Carga de una serie integrada	131
12.3.3	Comprobación de las temperaturas de refrigeración (opcional)	142
12.3.4	Inicio de una serie integrada	143
12.3.5	Extraer ensayos después de una serie en el AS	144
12.3.6	Procedimiento tras la finalización de una serie	145
12.3.7	Pausa, reanudación y detención de una serie integrada	145
12.4	Serie independiente	147
12.4.1	Definición de una serie independiente de ensayos	147
12.4.2	Definición/comprobación de gradillas de muestras	151

12.4.3	Definición de ensayos para procesar en la serie	156
12.4.4	Asignación de ensayos seleccionados a posiciones de muestras	158
12.4.5	Modificación de los parámetros de ensayo	161
12.4.6	Puesta en cola de una serie independiente de ensayos	163
12.4.7	Validación de la serie de ensayos	163
12.4.8	Carga de una serie independiente	164
12.4.9	Comprobación de las temperaturas de refrigeración	166
12.4.10	Inicio de una serie independiente	166
12.4.11	Extraer ensayos después de una serie independiente	167
12.4.12	Pausa, reanudación y detención de una serie independiente	171
12.5	Realización de exámenes de inventario (AS)	172
12.5.1	Examen de inventario del cajón "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos).....	172
12.5.2	Examen de inventario del cajón "Assays" (Ensayos)	174
12.5.3	Examen de inventario del cajón "Assays" (Ensayos)	174
13	Tareas de mantenimiento	175
13.1	Programador del mantenimiento.....	175
13.1.1	Confirmación de una tarea de mantenimiento.....	177
13.1.2	Posposición de una tarea de mantenimiento	177
13.1.3	Configuración de los valores del mantenimiento.....	177
13.2	Limpieza	179
13.3	Mantenimiento	180
13.4	Mantenimiento regular	181
13.4.1	Eliminación regular de puntas	181
13.4.2	Procedimiento de mantenimiento regular para el instrumento QIASymphony SP	181
13.4.3	Procedimiento de mantenimiento regular para el instrumento QIASymphony AS (integrado e independiente)	183
13.5	Mantenimiento diario (SP/AS)	184
13.5.1	Protectores de puntas del sistema de pipeteado (SP/AS)	184
13.5.2	Conducto para eliminación de puntas.....	184

13.5.3	Cajones y estación de lisis (SP)	185
13.5.4	Cajones (AS)	186
13.5.5	Bandeja basal del transportador (SP): opcional.....	186
13.5.6	Sujetador robótico (SP).....	186
13.5.7	Recipiente de desechos líquidos (SP).....	187
13.6	Mantenimiento semanal (SP/AS)	187
13.6.1	Administración de archivos.....	187
13.6.2	Pantalla táctil	187
13.6.3	Tapas de los instrumentos QIASymphony SP/AS	188
13.6.4	Soportes de tubos (SP)	188
13.6.5	Sensor óptico (SP).....	188
13.6.6	Cabezal magnético (SP)	188
13.6.7	Recipiente de desechos líquidos (SP).....	189
13.6.8	Adaptadores (AS).....	189
13.7	Descontaminación por radiación ultravioleta de la mesa de trabajo	190
13.8	Mantenimiento mensual (SP/AS)	192
14	Resolución de problemas	193
14.1	Mensajes de error y advertencia	194
14.1.1	Errores indicados en la barra de estado.....	194
14.1.2	Errores indicados en los encabezados de las fichas	194
14.1.3	Errores indicados en la barra de comandos	195
14.1.4	Mensajes con el botón Help (Ayuda)	195
14.1.5	Mensajes sin el botón Help (Ayuda).....	196
14.2	Cuadros de ayuda del software	196
14.2.1	Estructura de los cuadros de ayuda del software	197
14.3	Contacto con el servicio técnico de QIAGEN.....	198
14.3.1	Creación de un registro del incidente.....	198
14.3.2	Creación de un archivo de informe del instrumento	199
14.4	Errores generales que no tienen códigos de error.....	200
14.4.1	Errores relacionados con la administración de archivos	200
14.4.2	Errores relacionados con archivos	201

14.4.3	Errores relacionados con la eliminación de puntas	205
14.4.4	Errores relacionados con el menú "Configuration"	205
14.4.5	Errores relacionados con el examen de inventario.....	205
14.5	Errores del instrumento QIASymphony SP que no tienen códigos de error.....	207
14.5.1	Cajón "Eluate" (Eluidos)	207
14.5.2	Cajón "Sample" (Muestras)	209
14.5.3	Cajón "Waste" (Desechos)	210
14.5.4	Cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles).....	210
14.5.5	Errores que pueden producirse al iniciar un lote/serie	210
14.5.6	Errores relacionados con los protocolos	211
14.5.7	Errores que pueden producirse durante el funcionamiento del instrumento QIASymphony SP	211
14.5.8	Interrupción de la ejecución del protocolo	212
14.6	Errores del instrumento QIASymphony AS que no tienen códigos de error	213
14.6.1	Errores relacionados con la definición de ensayos	213
14.6.2	Errores ocurridos durante una serie de ensayos.....	213
14.6.3	Errores relacionados con el análisis de los datos.....	214
14.7	Errores en la serie integrada	215
14.7.1	Cajón "Eluate" (Eluidos)	215
14.7.2	Extracción de una serie integrada	215
14.7.3	Mantenimiento, servicio y configuración	215
15	Especificaciones técnicas	216
15.1	Condiciones ambientales y condiciones de funcionamiento	216
15.2	Datos mecánicos y características del hardware	216
16	Anexo sobre la interfaz de usuario.....	218
17	Apéndice	237
17.1	Declaración de conformidad.....	237
17.1.1	Declaración de conformidad – QIASymphony SP.....	237
17.1.2	Declaración de conformidad: QIASymphony AS	237
17.2	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	238
17.3	Declaración relativa a la FCC.....	239

17.4	Cláusula de responsabilidad.....	240
18	Historial de revisiones del documento.....	241

1 Introducción

Gracias por elegir los instrumentos QIASymphony SP/AS. Confiamos en que se conviertan en una parte integral de su laboratorio.

Esta guía de uso combinada le proporciona información básica sobre la utilización de los instrumentos QIASymphony SP y AS.

Antes de utilizar los instrumentos es esencial que lea atentamente esta guía de uso combinada. Se deben seguir las instrucciones y tener en cuenta la información de seguridad de la guía de uso combinada para garantizar el funcionamiento seguro de los instrumentos y para mantener la seguridad de los mismos.

1.1 Acerca de este manual del usuario

Este manual del usuario proporciona información sobre los instrumentos QIASymphony SP/AS en las secciones siguientes:

- Introducción
- Información de seguridad
- Procedimiento de puesta en funcionamiento
- Configuración de usuarios
- Interfaz de usuario de QIASymphony SP/AS
- Administración de archivos
- Características del instrumento QIASymphony SP
- Carga de los cajones del instrumento QIASymphony SP
- Definiciones de series en el instrumento QIASymphony SP
- Características del instrumento QIASymphony AS
- Cajones del instrumento QIASymphony AS
- Funciones básicas del instrumento QIASymphony AS.
- Tareas de mantenimiento
- Resolución de problemas
- Especificaciones técnicas
- Anexo sobre la interfaz de usuario
- Apéndice
- Información para pedidos
- Historial de revisiones del documento

El apéndice contiene la siguiente información:

- Declaración de conformidad
- Declaración de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
- Declaración relativa a la FCC
- Cláusula de responsabilidad

1.2 Información general

1.2.1 Asistencia técnica

En QIAGEN nos enorgullecemos de la calidad y disponibilidad de nuestra asistencia técnica. Nuestros departamentos de servicio técnico cuentan con científicos expertos con amplia experiencia en los aspectos prácticos y teóricos de la biología molecular y en el uso de los productos de QIAGEN. Si tiene dudas o experimenta dificultades con el instrumento QIASymphony SP/AS o con los productos de QIAGEN en general, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Los clientes de QIAGEN son una importante fuente de información sobre los usos avanzados o especializados de nuestros productos. Esta información es de utilidad para otros científicos y para los investigadores de QIAGEN. Por este motivo, lo animamos a ponerse en contacto con nosotros si tiene cualquier sugerencia sobre el rendimiento de nuestros productos o sobre nuevas aplicaciones y técnicas.

Para recibir asistencia técnica, póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.

Sitio web: support.qiagen.com

Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico de QIAGEN para notificar un error, tenga a mano la información siguiente:

- Número de serie, tipo y versión del QIASymphony SP/AS
- Código de error (si procede)
- Fecha y hora de la primera aparición del error
- Frecuencia de aparición del error (es decir, error intermitente o persistente)
- Copia de los archivos de registro

Si desea obtener información actualizada acerca de los instrumentos QIASymphony SP/AS, visite www.qiagen.com/goto/QIASymphony.

1.2.2 Declaración de políticas

La política de QIAGEN es mejorar sus productos conforme aparecen nuevas técnicas y componentes. QIAGEN se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones en cualquier momento. Con el fin de elaborar una documentación útil y adecuada le agradecemos cualquier comentario sobre este manual del usuario. Póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.

1.3 Uso previsto del instrumento QIASymphony SP/AS

Nota: Los instrumentos QIASymphony SP y AS están destinados a ser utilizados por usuarios profesionales, como técnicos y médicos que hayan recibido formación en técnicas de biología molecular y en el uso de los instrumentos QIASymphony SP y AS.

QIASymphony SP

El instrumento QIASymphony SP se ha diseñado para purificar ácidos nucleicos de forma automatizada en aplicaciones de diagnóstico molecular o de biología molecular.

Está destinado a utilizarse únicamente en combinación con kits QIASymphony indicados para su uso con el instrumento QIASymphony SP para las aplicaciones descritas en los manuales de los kits.

QIASymphony AS

El instrumento QIASymphony AS se ha diseñado para preparar ensayos automatizados en aplicaciones de diagnóstico molecular o de biología molecular.

Si se utiliza en combinación con kits de QIAGEN indicados para usarse con el instrumento QIASymphony AS, está destinado a utilizarse para las aplicaciones descritas en los manuales de los kits de QIAGEN respectivos.

Si el instrumento QIASymphony AS se utiliza con kits de otros fabricantes, es responsabilidad del usuario validar el rendimiento de dichas combinaciones de productos para cualquier aplicación específica.

1.3.1 Requisitos de los instrumentos QIASymphony SP/AS

La tabla siguiente indica el nivel general de competencia y de conocimiento necesario para el transporte, la instalación, el uso, el mantenimiento y el servicio técnico de los instrumentos QIASymphony SP/AS.

Tarea	Personal	Nivel de competencia y conocimiento
Entrega	No hay requisitos especiales	No hay requisitos especiales
Instalación	Solamente especialistas de servicio en campo de QIAGEN	Personal debidamente formado y experimentado, familiarizado con el uso de los ordenadores y la automatización en general
Uso sistemático (ejecución de protocolos)	Técnicos de laboratorio o equivalente	Usuarios profesionales, como técnicos y médicos, que hayan recibido formación en técnicas de biología molecular
Mantenimiento sistemático	Técnicos de laboratorio o equivalente	Usuarios profesionales, como técnicos y médicos, que hayan recibido formación en técnicas de biología molecular
Servicio técnico y mantenimiento anual	Solamente especialistas de servicio en campo de QIAGEN	Con formación habitual, certificación y autorización de QIAGEN

1.3.2 Formación para los usuarios de los instrumentos QIASymphony SP/AS

Los clientes reciben formación por un representante de QIAGEN tras la instalación de los instrumentos QIASymphony SP/AS. La formación tiene una duración de 1 a 3 días, según el tema y el nivel de conocimientos del cliente.

La formación básica cubre el uso general del sistema, la administración de usuarios, la configuración, el software QIASymphony Management Console (QMC), el mantenimiento regular y la resolución básica de problemas. Los temas específicos de la aplicación se tratarán en una formación avanzada

QIAGEN también puede proporcionar una repetición de la formación, por ejemplo, después de actualizaciones del software o para nuevo personal del laboratorio. Póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN si desea obtener más información sobre la repetición de la formación.

1.4 Armario QIASymphony Cabinet SP/AS

El armario QIASymphony Cabinet SP/AS es un accesorio opcional para los instrumentos QIASymphony SP/AS. Los armarios QIASymphony Cabinet están especialmente diseñados para colocar los instrumentos QIASymphony SP/AS en el laboratorio. Si desea obtener más información, visite www.qiagen.com/goto/QIASymphony o póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.

1.5 Referencias a manuales del usuario

En esta guía de uso combinada se hace referencia a los siguientes manuales del usuario:

- *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS — Descripción general*
- *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS — Uso del instrumento QIASymphony SP*
- *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS — Uso del instrumento QIASymphony AS*
- *Manual del usuario de QIASymphony Management Console*
- *Guía del usuario del armario de QIASymphony Cabinet SP/AS*

1.6 Glosario

Si desea ver un glosario de términos empleados en esta guía de uso combinada, consulte la sección 11 del *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS — Descripción general*.

1.7 Accesorios de los instrumentos QIASymphony SP/AS

Si desea obtener información sobre los accesorios de los instrumentos QIASymphony SP/AS, consulte el apéndice C del *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS — Descripción general*.

1.8 Materiales necesarios

Con el instrumento QIASymphony SP se proporcionan los siguientes materiales:

- Sample Carrier, plate, Qsym (n.º de cat. 9017659)
- Tip Disposal Bags (bolsas para eliminación de puntas) (n.º de referencia 9013395).
- Cooling Adapter, EMT, v2 (n.º de cat. 9020730)
- Insert tube 2.0ml (24) (n.º de cat. 9242083)
- Lápiz de memoria USB (n.º de cat. 9023312)
- Handheld barcode scanner (n.º de cat. 9244481)
- O-Ring Change Tool (n.º de cat. 9019164)
- QIASymphony Software (n.º de cat. 9002821)
- QIASymphony Management Console (n.º de cat. 9026029)

Con el instrumento QIASymphony AS se proporcionan los siguientes materiales:

- Cooling adapter, Reagent holder 1, Qsym (n.º de cat. 9018090)
- Cooling adapter, Reagent holder 2, Qsym (n.º de cat. 9018089)
- Cooling adapter, EMT, v2, Qsym (n.º de cat. 9020730)
- Cooling adapter, 2ml, v2, Qsym (n.º de cat. 9020674)

- Cooling adapter, RG strip tubes 72, Qsym (n.º de cat. 9018092)
- Cooling adapter, PCR, v2, Qsym (n.º de cat. 9020732)

1.9 Materiales necesarios pero no suministrados

- Filter-Tips 1500 µl (1024) (n.º de cat. 997024)
- Filter-Tips, 200 µl (1024) (n.º de cat. 990332)
- Filter-Tips, 50 µl (1024) (n.º de cat. 997120)
- Sample Prep Cartridges, 8-well (336) (n.º de cat. 997002)
- 8-Rod Covers (144) (n.º de cat. 997004)
- Elution Microtubes CL (24 x 96) (n.º de cat. 19588)
- Reagent Cartridge Holder (2) (n.º de cat. 997008)
- Accessory Trough (10) (n.º de cat. 997012)

Nota: Utilice únicamente accesorios suministrados por QIAGEN.

Es necesario un QIASymphony Extraction Kit para aislar y purificar automatizadamente ácidos nucleicos en el QIASymphony SP/AS (disponible para fines de IVD y Ciencias de la vida).

Nota: Los tipos de muestra y las instrucciones obligatorias para recoger, manipular y almacenar muestras se especifican en los manuales de uso del kit.

2 Información de seguridad

Antes de usar los instrumentos QIASymphony SP/AS, es fundamental que lea detenidamente este manual del usuario y que preste especial atención a la información de seguridad. Se deben seguir las instrucciones y tener en cuenta la información de seguridad del manual del usuario para garantizar el funcionamiento seguro del instrumento y para mantener su seguridad.

Los posibles riesgos que podrían causar lesiones al usuario o dañar el instrumento están claramente indicados en los lugares pertinentes en esta guía de uso combinada.

Si el equipo no se utiliza del modo especificado por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo podría verse mermada.

Los tipos siguientes de información de seguridad aparecen a lo largo de esta guía de funcionamiento consolidada.

ADVERTENCIA 	El término ADVERTENCIA se utiliza para informar de situaciones que podrían provocar daños personales a usted u otras personas. Los detalles de estas circunstancias se proporcionan en un cuadro idéntico a este.
---	---

PRECAUCIÓN 	El término PRECAUCIÓN se utiliza para informarle acerca de situaciones que podrían provocar daños en un instrumento o en otros equipos. Los detalles de estas circunstancias se proporcionan en un cuadro idéntico a este.
--	--

Las directrices proporcionadas en este manual tienen como finalidad complementar los requisitos de seguridad habituales vigentes en el país de los usuarios, pero nunca sustituirlos.

Tenga en cuenta que puede ser necesario que tenga que consultar las normativas locales para conocer los requisitos de notificación, en relación con los sucesos graves que hayan ocurrido en relación con el dispositivo; al fabricante y/o su representante autorizado y a la autoridad sanitaria del país en el que resida el usuario y/o el paciente.

2.1 Uso adecuado

Los instrumentos QIASymphony SP/AS solamente deben ser utilizados por personal cualificado que haya recibido una formación adecuada.

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Riesgo de lesiones personales y daños materiales</p> <p>El uso incorrecto de los instrumentos QIASymphony SP/AS puede provocar lesiones personales o dañar los instrumentos.</p> <p>Los instrumentos QIASymphony SP/AS solamente deben ser manejados por personal cualificado que haya recibido una formación adecuada.</p> <p>El servicio técnico de los instrumentos QIASymphony SP/AS solamente debe ser realizado por técnicos de campo especializados de QIAGEN.</p>
---	---

<p>PRECAUCIÓN</p> 	<p>Daños en el instrumento</p> <p>Evite el derramamiento de agua o productos químicos sobre los QIASymphony SP/AS. Los daños causados en el instrumento por el derramamiento de agua o productos químicos anularán la garantía.</p>
--	--

Realice el mantenimiento como se describe en la sección 13. QIAGEN le facturará las reparaciones necesarias causadas por un mantenimiento incorrecto.

Nota: No coloque objetos sobre las tapas de los instrumentos QIASymphony SP/AS.

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Daños en el instrumento</p> <p>No se apoye sobre la pantalla táctil cuando esté plegada hacia abajo.</p>
---	--

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Riesgo de lesiones personales y daños materiales</p> <p>Los instrumentos QIASymphony SP/AS pesa demasiado para que lo levante una sola persona. Para evitar lesiones personales o que se dañe el instrumento, no lo levante usted solo.</p> <p>Póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN en caso de que desee cambiar el instrumento de ubicación.</p>
---	--

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Riesgo de lesiones personales y daños materiales</p> <p>No intente mover los instrumentos QIASymphony SP/AS mientras esté en funcionamiento.</p>
---	--

En caso de emergencia, apague los instrumentos QIASymphony SP/AS y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

2.2 Seguridad eléctrica

Nota: Si se interrumpe por cualquier motivo el funcionamiento de los instrumentos (por ejemplo, por corte del suministro eléctrico o por un error mecánico), apague primero los instrumentos QIASymphony SP/AS y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Riesgo eléctrico</p> <p>Cualquier interrupción del conductor de tierra (cable de puesta a tierra) dentro o fuera del instrumento o la desconexión del borne del conductor de tierra puede hacer que el uso del instrumento resulte peligroso.</p> <p>Se prohíbe la interrupción intencionada.</p> <p>Tensiones letales en el interior del instrumento</p> <p>Cuando el instrumento está conectado a la red de alimentación eléctrica, los bornes pueden estar bajo tensión, y la apertura de las cubiertas o la extracción de componentes probablemente deje expuestos componentes que están bajo tensión.</p>
---	---

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Riesgo de descarga eléctrica</p> <p>No abra ningún panel de los instrumentos QIASymphony SP/AS.</p> <p>Riesgo de lesiones personales y daños materiales</p> <p>Realice únicamente las tareas de mantenimiento descritas específicamente en este manual del usuario.</p>
---	--

Para garantizar un uso satisfactorio y seguro de los instrumentos QIASymphony SP/AS, siga el siguiente consejo:

- El cable de alimentación eléctrica debe conectarse a una toma de corriente que disponga de un conductor de protección (puesta a tierra).
- Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado por QIAGEN.
- No ajuste ni sustituya los componentes internos del instrumento.
- No haga funcionar el instrumento si hay alguna cubierta o algún componente retirado.

- Si se ha derramado algún líquido en el interior del instrumento, apáguelo, desenchúfelo de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.
- El instrumento deberá instalarse de tal forma que se pueda acceder al cable de alimentación.

Si el instrumento supone algún riesgo eléctrico, impida que lo utilicen los usuarios y póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.

Es posible que el instrumento no sea seguro desde el punto de vista eléctrico si:

- El instrumento o el cable de alimentación de red parecen estar dañados.
- El instrumento se ha almacenado en condiciones desfavorables durante un período prolongado.
- El instrumento ha estado sometido a cargas y tensiones intensas durante su transporte.
- Se ha producido un contacto directo de líquidos con componentes eléctricos de los instrumentos QIASymphony SP/AS.
- El cable de alimentación se ha cambiado por un cable de alimentación no oficial.

2.3 Entorno

2.3.1 Condiciones de funcionamiento

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Atmósfera explosiva</p> <p>Los instrumentos QIASymphony SP/AS no están diseñados para utilizarse en una atmósfera explosiva.</p>
---	--

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Riesgo de sobrecalentamiento</p> <p>Para garantizar una ventilación correcta, mantenga una distancia mínima de 5 cm en la parte posterior de los instrumentos QIASymphony SP/AS.</p> <p>No cubra las ranuras y aberturas que permiten la ventilación de los instrumentos QIASymphony SP/AS.</p>
---	---

2.4 Eliminación de residuos

Los consumibles usados, tales como tubos de muestras, cartuchos de preparación de muestras, 8-Rod Covers, puntas con filtro desechables, tubos de reactivos y gradillas de elución, pueden contener sustancias químicas peligrosas o agentes infecciosos procedentes de los procesos de purificación o preparación de ensayos. Estos residuos deben recogerse y desecharse adecuadamente conforme a la normativa local en materia de seguridad.

<p>PRECAUCIÓN</p> 	<p>Materiales peligrosos y agentes infecciosos</p> <p>Los desechos contienen muestras y reactivos. Estos desechos pueden contener material tóxico o infeccioso y deben eliminarse adecuadamente. Consulte en la normativa local en materia de seguridad los procedimientos de eliminación adecuados.</p>
--	---

Si desea obtener información sobre la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), consulte el Apéndice, en la página 238.

2.5 Seguridad biológica

Nota: Las muestras y los reactivos que contengan materiales de origen humano deben tratarse como materiales potencialmente infecciosos. Utilice procedimientos de laboratorio seguros tales como los descritos en publicaciones como *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories* (Seguridad biológica en laboratorios microbiológicos y biomédicos), HHS (www.cdc.gov/biosafety.html).

2.5.1 Muestras

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Muestras que contienen agentes infecciosos</p> <p>Algunas muestras utilizadas con este instrumento pueden contener agentes infecciosos. Manipule dichas muestras con la máxima precaución y conforme a la normativa pertinente en materia de seguridad.</p> <p>Lleve siempre gafas protectoras, guantes y una bata de laboratorio.</p> <p>Las personas responsables (por ejemplo, el jefe de laboratorio) deben tomar las medidas de precaución necesarias para garantizar que el entorno del puesto de trabajo sea seguro y que los operadores del instrumento reciban una formación adecuada y no estén expuestos a niveles peligrosos de agentes infecciosos según se define en las hojas de datos de seguridad (safety data sheets, SDS) o en los documentos de la OSHA*, la ACGIH† o el COSHH‡.</p> <p>La ventilación de gases y la eliminación de residuos deben realizarse de acuerdo con todas las normativas y leyes nacionales, estatales y locales en materia de salud y seguridad.</p>
---	--

* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional; Estados Unidos).

† ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Conferencia de higienistas industriales oficiales de Estados Unidos).

‡ COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Control de sustancias peligrosas para la salud; Reino Unido).

Nota: Las muestras pueden contener agentes infecciosos. Debe tener en cuenta el riesgo para la salud que suponen estos agentes y utilizar, conservar y desechar estas muestras de acuerdo con la normativa pertinente en materia de seguridad.

2.6 Productos químicos

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Productos químicos peligrosos</p> <p>Algunos productos químicos empleados con este instrumento pueden ser peligrosos o llegar a ser peligrosos tras la finalización de la serie del protocolo. Lleve siempre gafas protectoras, guantes y una bata de laboratorio. La autoridad responsable (p. ej., el director del laboratorio) debe tomar las medidas preventivas necesarias para garantizar que el entorno del puesto de trabajo sea seguro y que los operadores del instrumento no estén expuestos a niveles peligrosos de sustancias tóxicas (químicas o biológicas) según se describe en las hojas de datos sobre seguridad (Safety Data Sheet, SDS) correspondientes o en los documentos de la OSHA*, la ACGIH† o la COSHH‡ pertinentes.</p> <p>La ventilación de gases y la eliminación de residuos deben realizarse de acuerdo con todas las normativas y leyes nacionales, estatales y locales en materia de salud y seguridad.</p>
---	--

* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional; Estados Unidos).

† ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Conferencia de higienistas industriales oficiales de Estados Unidos).

‡ COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Control de sustancias peligrosas para la salud; Reino Unido).

2.6.1 Gases tóxicos

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Gases tóxicos</p> <p>No utilice lejía para limpiar o desinfectar los instrumentos QIAsymphony SP/AS. La lejía en contacto con las sales de los tampones puede producir gases tóxicos.</p>
---	---

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Gases tóxicos</p> <p>No use lejía para desinfectar el material de laboratorio utilizado. La lejía en contacto con las sales de los tampones utilizados puede producir gases tóxicos.</p>
---	--

2.7 Riesgos mecánicos

Las tapas de los instrumentos QIASymphony SP/AS deben permanecer cerradas durante el funcionamiento de los instrumentos. Abra las tapas únicamente cuando así lo indique el software.

ADVERTENCIA 	Piezas móviles Para evitar el contacto con las piezas móviles durante el uso de los instrumentos QIASymphony SP/AS, estos deben utilizarse con las tapas cerradas. Si los sensores de las tapas no funcionan correctamente, póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.
---	--

ADVERTENCIA 	Campo magnético intenso No coloque los instrumentos QIASymphony SP/AS cerca de sistemas de almacenamiento magnético (por ejemplo, discos informáticos). No use herramientas metálicas cuando manipule las barras magnéticas. No permita que las barras magnéticas entren en contacto con otros imanes.
---	--

ADVERTENCIA 	Daños en los instrumentos Asegúrese de instalar los protectores del cabezal magnético antes de hacer funcionar el instrumento QIASymphony SP.
---	---

2.8 Riesgo por calor

El instrumento QIASymphony SP admite una estación de lisis que puede calentarse si lo exige el protocolo. Además, tanto el instrumento QIASymphony SP como el instrumento QIASymphony AS admiten una lámpara de luz ultravioleta.

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Superficie caliente</p> <p>La estación de lisis y las lámparas de luz ultravioleta pueden alcanzar temperaturas de hasta 90 °C (194 °F). No las toque durante su funcionamiento.</p>
---	--

2.9 Seguridad relativa al mantenimiento

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Riesgo de lesiones personales y daños materiales</p> <p>Realice solo el mantenimiento que se describe específicamente en esta guía de uso combinada.</p>
---	--

Realice el mantenimiento como se describe en la sección 13. QIAGEN le facturará las reparaciones necesarias causadas por un mantenimiento incorrecto.

<p>ADVERTENCIA/ PRECAUCIÓN</p> 	<p>Riesgo de lesiones personales y daños materiales</p> <p>El uso incorrecto de los instrumentos QIASymphony SP/AS puede provocar lesiones corporales o dañar los instrumentos.</p> <p>Los instrumentos QIASymphony SP/AS solamente deben ser manejados por personal cualificado que haya recibido una formación adecuada.</p> <p>El servicio técnico de los instrumentos QIASymphony SP/AS solamente debe ser realizado por técnicos de campo especializados de QIAGEN.</p>
---	---

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Riesgo de incendio</p> <p>Cuando limpie los instrumentos QIASymphony SP/AS con un desinfectante que contenga alcohol, deje abiertas las tapas de los instrumentos para permitir que los vapores inflamables se dispersen.</p> <p>Solo deben limpiarse los instrumentos QIASymphony SP/AS con un desinfectante que contenga alcohol una vez que se hayan enfriado los componentes de la mesa de trabajo.</p>
---	---

<p>PRECAUCIÓN</p> 	<p>Daños en el instrumento</p> <p>No utilice lejía, disolventes o reactivos que contengan ácidos, bases o sustancias abrasivas para limpiar o desinfectar los instrumentos QIASymphony SP/AS.</p>
--	--

<p>PRECAUCIÓN</p> 	<p>Daños en el instrumento</p> <p>No utilice pulverizadores que contengan alcohol o desinfectante para limpiar las superficies de los instrumentos QIASymphony SP/AS. Los pulverizadores deben utilizarse únicamente para limpiar elementos que se hayan retirado de las mesas de trabajo.</p>
--	---

<p>PRECAUCIÓN</p> 	<p>Daños en las tapas o en los paneles laterales de los instrumentos</p> <p>Nunca limpie las tapas o los paneles laterales de los instrumentos con alcohol o con soluciones que contengan alcohol. El alcohol dañará la tapa y los paneles laterales. Para limpiar las tapas y los paneles laterales, use agua destilada.</p>
--	--

<p>PRECAUCIÓN</p> 	<p>Daños en el instrumento</p> <p>Después de secar los cajones, la placa metálica perforada y la estación de lisis con papel absorbente, asegúrese de que no quedan restos de papel. La presencia de restos de papel absorbente en la mesa de trabajo podría causar el atasco de esta.</p>
--	---

<p>ADVERTENCIA/ PRECAUCIÓN</p> 	<p>Riesgo de descarga eléctrica personal No abra ningún panel de los instrumentos QIASymphony SP/AS.</p> <p>Realice el mantenimiento exclusivamente tal como se describe en esta guía de uso combinada.</p>
---	--

<p>PRECAUCIÓN</p> 	<p>Daños en el instrumento Asegúrese de instalar correctamente los protectores de puntas antes de hacer funcionar los instrumentos QIASymphony SP/AS.</p>
--	--

<p>PRECAUCIÓN</p> 	<p>Daños en el instrumento Asegúrese de instalar los protectores del cabezal magnético antes de hacer funcionar el instrumento QIASymphony SP.</p>
--	---

2.10 Seguridad radiológica

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Riesgo de lesiones personales No exponga su piel a la luz ultravioleta C (254 nm) de la lámpara ultravioleta.</p>
---	---


<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Riesgo de lesiones personales Luz láser con nivel de riesgo 2: No mire directamente el haz de luz.</p>
---	--

2.11 Símbolos que aparecen en los instrumentos QIASymphony SP/AS

Los siguientes símbolos aparecen tanto en el instrumento QIASymphony SP como en el instrumento QIASymphony AS, excepto el símbolo de riesgo por calor, que solo aparece en el instrumento QIASymphony SP.

Símbolo	Ubicación	Descripción
	Estación de lisis	Riesgo por calor: la temperatura de la estación de lisis puede alcanzar los 90 °C (194 °F).
	QIASymphony SP: en la parte delantera del cajón de desechos* y la bolsa para eliminación de puntas/panel del armario* QIASymphony AS: en la mesa de trabajo, junto al cierre magnético de la tapa†	Peligro biológico: las ranuras para gradillas de puntas, los desechos y la mesa de trabajo pueden estar contaminados* con material que comporte un peligro biológico y deben manipularse con guantes.
	Brazo robótico: panel de control‡ Junto a la etiqueta del riesgo de aplastamiento	Apague la lámpara ultravioleta antes de abrir la tapa o para realizar el mantenimiento. Durante la descontaminación, la carcasa debe permanecer cerrada. No mire directamente a la luz ultravioleta. No exponga su piel a la luz ultravioleta.
	Brazo robótico: panel de control‡	Piezas móviles: asegúrese de mantener la tapa y los cajones cerrados durante el funcionamiento.
	Junto a la placa de identificación en la parte posterior del instrumento	Radiación láser: no mire fijamente el haz.
	Posición 1: Brazo robótico: detrás de la tapa de entrada de muestra§	Radiación láser con nivel de riesgo 2: no mire fijamente el haz. Escáner de códigos de barras (BCL8) Láser de clase 2 (655 nm)
	Posición 2: Brazo robótico: panel de control¶	Radiación láser con nivel de riesgo 2: no mire fijamente el haz. Sensor de desplazamiento del láser (OADM13) Láser de clase 2 (650 nm)
	Placa de identificación en la parte posterior del instrumento	Marca RCM (antiguamente marca C-Tick) para Australia.
	Placa de identificación en la parte posterior del instrumento	Marca RoHS para China (limitaciones de uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).

Símbolo	Ubicación	Descripción
	Placa de identificación en la parte posterior del instrumento	Marca RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) para Europa.
	Placa de identificación en la parte posterior del instrumento	Fabricante legal.
	Placa de identificación en la parte posterior del instrumento	Consulte las instrucciones de uso.
	Sobre el instrumento, panel lateral derecho	Este producto contiene un láser de clase 2. No mire directamente el haz.
	En la parte frontal del instrumento, puerta abierta	Este producto contiene un láser de clase 2. No mire directamente el haz.
	Dentro del instrumento	Puesta a tierra
	Placa de identificación en la parte posterior del instrumento	Marca CE para Europa
	Placa de identificación en la parte posterior del instrumento	Marca IVD
	Placa de identificación en la parte posterior del instrumento	Número de serie del instrumento

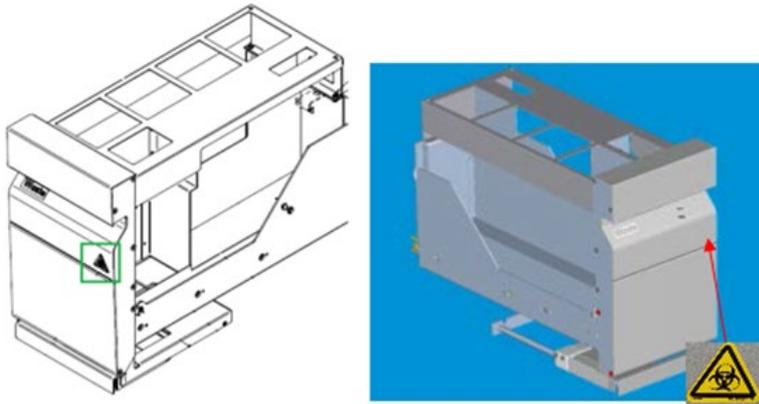


* Posición de la etiqueta de advertencia de peligro biológico en el panel de la parte delantera del cajón "Waste" (Desechos) (SP).



* Posición de la etiqueta de advertencia de peligro biológico en el panel del armario (SP).




† Posición de la etiqueta de advertencia de peligro biológico en la mesa de trabajo, junto al cierre magnético de la tapa (AS).

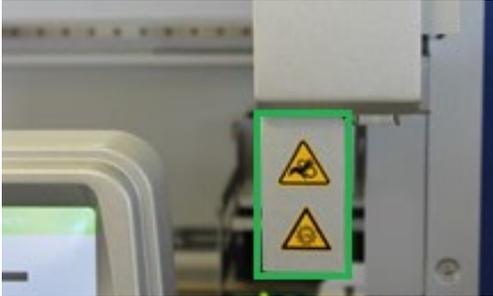

† Posición de la etiqueta de advertencia de peligro de aplastamiento y la etiqueta de advertencia de luz ultravioleta (SP/AS).



Posición 1 de la etiqueta de advertencia de la luz láser.

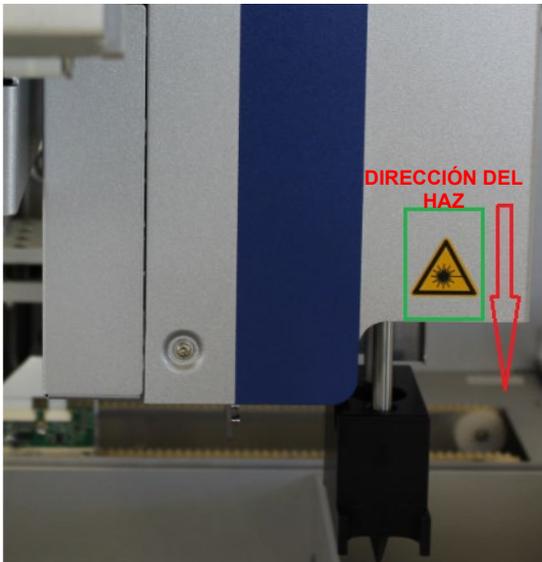

† Posición 2 de la etiqueta de advertencia de la luz láser (SP).†



Posición 2 de la etiqueta de advertencia de la luz láser (AS).

3 Procedimiento de puesta en funcionamiento

El desembalaje y la instalación de los instrumentos QIASymphony SP/AS son realizados por un técnico de campo especializado certificado de QIAGEN. Se recomienda que durante la instalación esté presente un miembro de su equipo familiarizado con su laboratorio y con su equipo informático.

Consulte los documentos "Packing List QIASymphony SP" y "Packing List QIASymphony AS" si desea ver una lista completa de los componentes que se entregan con cada instrumento.

3.1 Requisitos del emplazamiento

Los instrumentos QIASymphony SP/AS deben instalarse protegidos de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor, vibraciones e interferencias eléctricas. El lugar de instalación no debe estar sometido a corrientes de aire, humedad y polvo excesivos ni a variaciones intensas de la temperatura.

<p>ADVERTENCIA</p> 	<p>Riesgo de sobrecalentamiento</p> <p>Para garantizar una ventilación correcta, mantenga una distancia mínima de 5 cm en la parte posterior de los instrumentos QIASymphony SP/AS.</p> <p>No cubra las ranuras y aberturas que permiten la ventilación de los instrumentos QIASymphony SP/AS.</p>
---	---

3.1.1 Mesa de trabajo

Recomendamos colocar los instrumentos QIASymphony SP/AS en los armarios QIASymphony Cabinet SP/AS, no incluidos en el equipo suministrado.

Si coloca los instrumentos QIASymphony SP/AS en un banco de trabajo diferente, asegúrese de que este sea suficientemente grande y resistente para soportar los instrumentos. Asegúrese de que el banco de trabajo esté seco, limpio y a prueba de vibraciones y de que disponga de espacio adicional para accesorios.

Nota: Es sumamente importante que los instrumentos QIASymphony SP/AS estén colocados sobre una superficie estable.

Consulte la sección 1.5 si desea obtener más información acerca del peso y las dimensiones de los instrumentos QIASymphony SP/AS.

Si desea obtener información acerca de las especificaciones necesarias del banco de trabajo, póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.

3.2 Características generales

3.2.1 Tapas

Las tapas de los instrumentos protegen a los usuarios del brazo robótico móvil y del material potencialmente infeccioso presente en la mesa de trabajo. Las tapas pueden abrirse manualmente para acceder a la mesa de trabajo (por ejemplo, para limpiarla). Durante el funcionamiento del instrumento QIASymphony SP y/o del instrumento QIASymphony AS, las tapas deben permanecer cerradas y solamente deben abrirse cuando lo indique el software.

Las tapas están bloqueadas:

- Durante la preparación de las muestras en el instrumento QIASymphony SP
- Durante una serie de ensayos en el instrumento QIASymphony AS

Si abre a la fuerza las tapas durante una serie, esta se pondrá en pausa.

Nota: Si se abren las tapas durante una serie, los instrumentos no se detendrán inmediatamente. Los instrumentos se detendrán cuando haya finalizado el procesamiento del paso en curso del protocolo. En algunos casos esto puede tardar cierto tiempo.

3.2.2 Pantalla táctil

Los instrumentos QIASymphony SP/AS se controlan por medio de una pantalla táctil basculante. La pantalla táctil permite al usuario, por ejemplo, seleccionar y ejecutar protocolos y transferir/descargar archivos (por ejemplo, Assay Control Sets [juegos de controles del ensayo]) a/desde un lápiz USB.

3.2.3 Puertos USB

Los puertos USB situados en la parte frontal izquierda y en la parte frontal derecha del instrumento QIASymphony SP permiten conectar los instrumentos QIASymphony SP/AS a un lápiz USB y a un escáner de códigos de barras de mano (suministrado con el instrumento QIASymphony SP). A través del puerto USB pueden transferirse al instrumento QIASymphony SP protocolos nuevos, juegos de controles de ensayo, archivos de material de laboratorio nuevo (por ejemplo, archivos que permiten el uso de nuevos tipos de tubos con el instrumento QIASymphony SP) y listas de trabajo. A través del puerto USB también pueden transferirse archivos de datos (por ejemplo, archivos de registro del sistema, archivos de información de carga y archivos de gradillas) del instrumento QIASymphony SP al lápiz USB.

Nota: No extraiga el lápiz USB durante la descarga o la transferencia de archivos.

3.2.4 Interfaz de red


La interfaz de red permite conectar los instrumentos QIASymphony SP/AS a una red a través de un cable de red Ethernet CAT5.

3.2.5 Puertos USB

Los indicadores luminosos (LED) situados en la parte frontal de los instrumentos QIASymphony SP/AS se iluminan cuando la preparación de las muestras o la preparación de ensayos se encuentran en curso. Los indicadores luminosos de estado parpadean al finalizar un lote/serie o si se produce un error. Los indicadores luminosos dejan de parpadear si se toca la pantalla.

3.3 Encendido de los instrumentos QIASymphony SP/AS

3.3.1 Iniciación

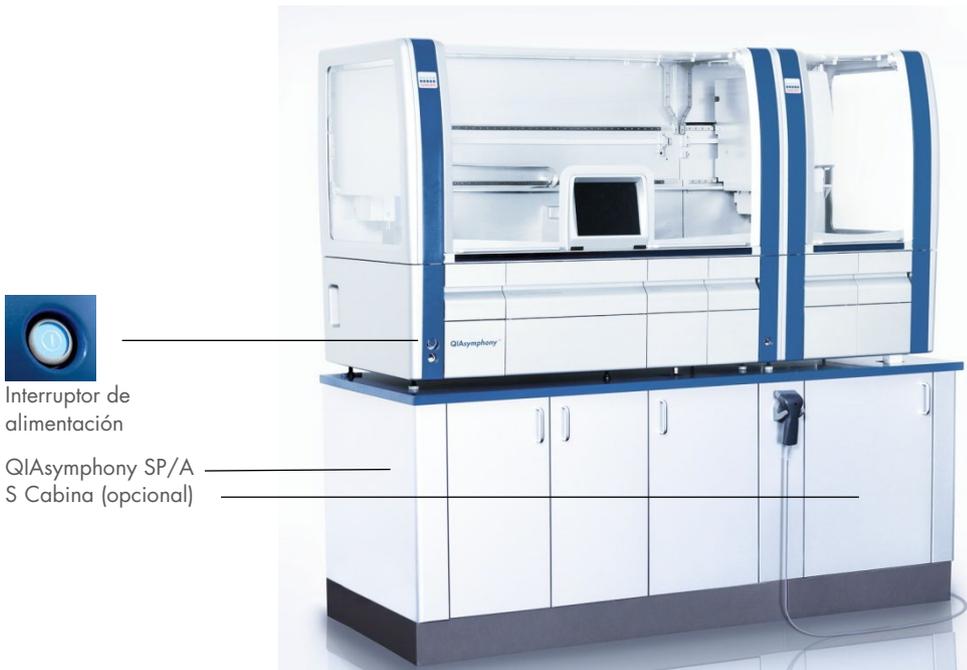


Preparación de los instrumentos QIASymphony SP/AS antes de su puesta en funcionamiento

Nota: Debe colocarse una caja unitaria vacía en la ranura 4 del cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles) debido a que, durante la inicialización, el manipulador desciende hasta la caja unitaria situada en la posición 4. Si la caja unitaria no estuviera vacía, el manipulador chocaría.

1. Asegúrese de que el frasco de desechos líquidos, las bolsas para eliminación de puntas y los recipientes de desechos estén vacíos
2. Asegúrese de que todos los cajones y las dos tapas estén cerrados. Si se abren las tapas durante la puesta en funcionamiento del instrumento, la prueba del sistema fallará.

Después de una puesta en funcionamiento satisfactoria, los instrumentos QIASymphony SP/AS están listos para usar. Se mostrará la pantalla **Integrated Run** (Serie integrada).

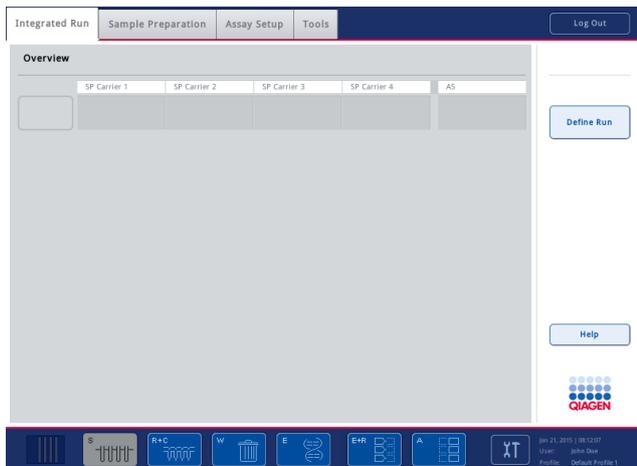


Nota: Antes de usar los instrumentos QIASymphony SP/AS, el usuario debe iniciar sesión. Si desea obtener información acerca de las cuentas de usuario, consulte la sección 4.2.

3.3.2 Cierre de sesión

Después de pulsar el botón **Run** (Serie), tiene la posibilidad de cerrar la sesión. La serie continuará.

Cierre de sesión activo

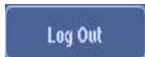

Para cerrar la sesión, pulse **Log Out** (Cerrar sesión) en la parte superior de las pantallas **Sample Preparation** (Preparación de muestras) o **Assay Setup** (Preparación de ensayos).



Si cierra la sesión, la barra de estado solamente mostrará la fecha y la hora.

Cierre de sesión automático

Después de un período definido de inactividad del usuario, la sesión del usuario se cerrará automáticamente. El valor de configuración predeterminado para este período de inactividad del usuario es de 15 minutos. Pida al "Supervisor" que ajuste el período de tiempo para adaptarlo a sus necesidades o para desactivarlo en caso necesario.

3.3.3 Apagado de los instrumentos QIASymphony SP/AS

Para apagar los instrumentos QIASymphony SP/AS, presione el interruptor de alimentación situado en la esquina inferior izquierda de la parte frontal del instrumento QIASymphony SP. Recomendamos apagar los instrumentos después de utilizarlos.

Nota: No apague los instrumentos durante la preparación de las muestras o durante la preparación de ensayos a menos que necesite detener los instrumentos debido a una emergencia. No podrá reanudar el protocolo o la serie de ensayos y los instrumentos QIASymphony SP/AS no podrán seguir procesando las muestras.

Nota: Los instrumentos QIASymphony SP/AS perderán toda la información del inventario al apagarlos.

Nota: Después de apagar los instrumentos QIASymphony SP/AS presionando el interruptor de alimentación, este parpadea varias veces. Cuando el interruptor de alimentación deje de parpadear, será seguro encender de nuevo los instrumentos QIASymphony SP/AS.

4 Configuración de usuarios

4.1 Valores de configuración

Nota: El "Supervisor" puede configurar los valores de configuración del sistema.

Si desea obtener más información, consulte la sección 6, "Configuración", del *Manual del usuario de QIAsymphony SP/AS – Descripción general*.

4.2 Cuentas de usuario

Los instrumentos QIAsymphony SP/AS reconocen dos funciones de usuario diferentes:

Supervisor La función "Supervisor" permite la preparación y la ejecución de lotes y series de ensayos. El "Supervisor" puede configurar los usuarios, los tipos de tubo predeterminados para el instrumento QIAsymphony SP y los adaptadores/soportes para el instrumento QIAsymphony AS. El "Supervisor" también puede configurar el sistema y definir perfiles de configuración personalizados. Además, el "Supervisor" puede:

- Transferir archivos de entrada y salida, archivos de proceso y la mayoría de los archivos de configuración del instrumento de los instrumentos QIAsymphony SP/AS al lápiz USB
- Transferir archivos de gradillas, archivos de lista de trabajo, archivos de proceso y la mayoría de los archivos de configuración del instrumento del lápiz USB a los instrumentos QIAsymphony SP/AS.
- Administrar las cuentas de usuario para otros usuarios; también pueden definir los valores de configuración.

Operador La función "Operator" (Operador) permite la preparación y la ejecución de lotes y series de ensayos. Además, el usuario de tipo "Operator" (Operador) puede:

- Transferir archivos de entrada y salida de los instrumentos QIAsymphony SP/AS a un lápiz USB.
- Transferir archivos de gradillas y listas de trabajo de un lápiz USB a los instrumentos QIAsymphony SP/AS.

Antes de usar los instrumentos QIAsymphony SP/AS, deben definirse las cuentas de usuario.

Si no hay ningún usuario con la sesión iniciada, todos los cajones están bloqueados.

4.2.1 Creación de usuarios nuevos

El "Supervisor" debe usar la siguiente contraseña predeterminada la primera vez que inicie una sesión: iue2ad.

Para crear usuarios nuevos o para restablecer las contraseñas de los usuarios, siga los pasos indicados a continuación.



1. Inicie sesión como "Supervisor".

Se abrirá la pantalla **Please select user:** (Seleccionar usuario).


2. Seleccione el botón "Supervisor".

Se abrirá la pantalla **Please enter password** (Introducir contraseña).

3. Introduzca la contraseña en el campo azul y pulse **OK** (Aceptar) para confirmar.

Nota: Si inicia sesión como "Supervisor" por primera vez, debe cambiar la contraseña predeterminada de supervisor. Para ello, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla táctil.

Se mostrará de nuevo la pantalla **Sample Preparation** (Preparación de las muestras).

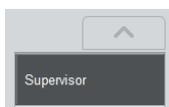

Ahora se ve el identificador de usuario "Supervisor" en la barra de estado en la parte inferior derecha.



4. Pulse la ficha **Tools** (Herramientas).

Se mostrará el menú **Tools** (Herramientas).



5. Pulse el botón **User Management** (Administración de usuarios).

Aparecerá la pantalla "User Management/Please Select User" (Administración de usuarios/Seleccionar usuario).



6. Pulse el botón **Add User** (Añadir usuario).

Aparecerá la pantalla **Create User** (Crear usuario).



7. Introduzca los valores de configuración del nuevo usuario en los campos azules y pulse **Next** (Siguiente) para confirmar.

Aparecerá la pantalla **Assign Roles** (Asignar funciones).



8. Seleccione la función de la cuenta de usuario que va a crear.

La función seleccionada se mostrará en resaltado inverso.



9. Pulse el botón de flecha para asignar la función seleccionada a la cuenta de usuario recién creada.

El nuevo usuario se añadirá a **User Roles** (Funciones del usuario).



10. Pulse **Finish** (Finalizar). Se guardará la información de inicio de sesión de la cuenta de usuario recién creada.

4.2.2 Activación/desactivación de cuentas de usuario

Las cuentas de usuario no pueden eliminarse. El usuario que tenga el identificador de usuario "Supervisor" debe desactivar la cuenta de usuario para que deje de aparecer en la lista **Activated Users** (Usuarios activados).

Para desactivar o activar una cuenta de usuario, siga los pasos indicados a continuación.



1. Inicie sesión como "Supervisor".

Consulte los pasos 1-3 de la sección 4.2.1 si desea obtener más información.




2. Pulse la ficha **Tools** (Herramientas).

Se mostrará el menú **Tools** (Herramientas).



3. Pulse el botón **User Management** (Administración de usuarios).


Aparecerá la pantalla **User Management/Please Select User** (Administración de usuarios/Seleccionar usuario) ("Inicio de sesión de supervisor").

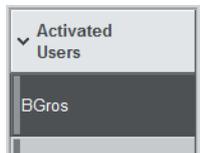

4. **Deactivation** (Desactivación): Seleccione el nombre de usuario en la lista del paquete **Activated Users** (Usuarios activados) y pulse el botón **No**.

El usuario seleccionado será eliminado de la lista y transferido a la lista **Deactivated Users** (Usuarios desactivados).



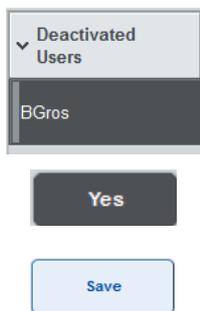

5. **Activation** (Activación): Seleccione el nombre de usuario en la lista del paquete **Deactivated Users** y pulse el botón **Yes** (Sí).

El usuario seleccionado será eliminado de la lista y transferido a la lista **Activated Users** (Usuarios activados).

6. Pulse **Save** (Guardar) para confirmar los cambios.

4.2.3 Solicitud del sistema de cambio de contraseña

Es posible que el software del instrumento le pida que introduzca una nueva contraseña. Esto puede suceder la primera vez que inicie una sesión, después de que el "Supervisor" restablezca la contraseña, si el "Supervisor" pasa de la política de contraseña estándar a una política de contraseña más segura (restrictiva) (vaya al menú "Tools" [Herramientas], "Configuration" [Configuración] en la ficha "System 1" [Sistema 1]), o si la contraseña ha caducado.

Nota: La contraseña debe tener 8 caracteres como mínimo. No debe ser igual al nombre de inicio de sesión y debe ser distinta de las 10 contraseñas anteriores.

Si se habilita la política de contraseña más segura, la contraseña debe tener 8 caracteres como mínimo: 2 mayúsculas, 2 minúsculas, 2 caracteres numéricos y 2 caracteres especiales. No debe ser igual al nombre de inicio de sesión y debe ser distinta de las 10 contraseñas anteriores.

Nota: Las contraseñas caducan de manera predeterminada después de 60 días.

Este valor de configuración puede ser modificado por el "Supervisor" en el menú **Configuration** (Configuración) en la ficha **System 1** (Sistema 1). También es posible desactivar el valor de configuración de caducidad de la contraseña.

Si una contraseña ha caducado, se le pedirá que introduzca una nueva contraseña después de iniciar la sesión.

Para cambiar la contraseña, siga los pasos indicados a continuación.


New Password:

1. Pulse el campo de texto **New Password** (Contraseña nueva).
Aparecerá la pantalla **Keyboard** (Teclado).

2. Introduzca una contraseña nueva y pulse **OK** (Aceptar).



Aparecerá la pantalla **Confirm New Password/Please enter new password again** (Confirmar contraseña nueva/Introducir la nueva contraseña otra vez).

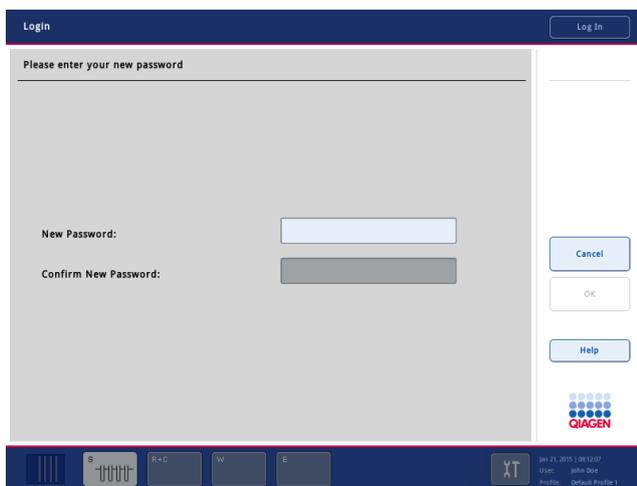

Confirm New Password:

3. Pulse el campo de texto **Confirm New Password** (Confirmar contraseña nueva).

Aparecerá de nuevo la pantalla **Keyboard** (Teclado).

4. Introduzca otra vez la contraseña nueva para confirmarla.
5. Pulse **OK** (Aceptar).



Aparecerá de nuevo la pantalla **Login/Please enter your new password** (Inicio de sesión/Introduzca su nueva contraseña).

4.2.4 Solicitud del usuario de cambio de contraseña

También es posible cambiar la contraseña de manera independiente de la caducidad de la contraseña.



1. Pulse **Log In** (Iniciar sesión) y seleccione su nombre de usuario de la lista.

Aparecerá la pantalla **Keyboard** (Teclado).

2. Introduzca su contraseña y pulse **OK** (Aceptar) para confirmar.



Aparecerá la pantalla **Sample Preparation** (Preparación de las muestras).

User Management

3. Pulse la ficha **Tools** (Herramientas) y seleccione **User Management** (Administración de usuarios).

Aparecerá la pantalla **User Management/Your user data** (Administración de usuarios/Sus datos de usuario).

Change PWD

4. Pulse **Change PWD** (Cambiar contraseña).

Aparecerá la pantalla **User Management/Please enter your new password** (Administración de usuarios/Introduzca su contraseña nueva).

Old Password:

5. Pulse el campo de texto **Old Password** (Contraseña anterior).

6. Introduzca la contraseña anterior en la pantalla **Keyboard** (Teclado) y pulse **OK** (Aceptar).

OK

Aparecerá de nuevo la pantalla **User Management/Please enter your new password** (Administración de usuarios/Introduzca su contraseña nueva).

New Password:

7. Pulse el campo de texto **New Password** (Contraseña nueva).

8. Introduzca la contraseña nueva en la pantalla **Keyboard** (Teclado) y pulse **OK** (Aceptar).

OK

Aparecerá de nuevo la pantalla **User Management/Please enter your new password** (Administración de usuarios/Introduzca su contraseña nueva).

Confirm New Password:

9. Pulse el campo de texto **Confirm New Password** (Confirmar contraseña nueva).

OK

10. Confirme la contraseña nueva y pulse **OK** (Aceptar).

La contraseña nueva ya está activa.


4.3 Instalación del paquete de idioma

Solamente la función “Supervisor” tiene la capacidad de transferir el paquete de idioma suministrado por QIAGEN. El paquete de idioma puede instalarse en los instrumentos QIASymphony SP/AS utilizando el lápiz USB o el programa QIAGEN Management Console (QMC).

4.3.1 Preparación del lápiz USB y transferencia de los archivos de idioma desde el lápiz USB

Añada la carpeta **/data/translation** al lápiz USB y copie el archivo de paquete de idioma ***.tar.gz** (por ejemplo, **QIASymphony_SingleLanguagePackage_English-5.0.3.34_Release.tar.gz**) en la carpeta.

1. Conecte el lápiz USB que contiene el paquete de idioma al puerto USB del instrumento.
2. Inicie sesión con la función “Supervisor”.
3. Pulse **Tools** (Herramientas).
4. Pulse **File Transfer** (Transferencia de archivos).
5. Pulse la ficha **Instr. Setup Files** (Archivos de config. del instrum).

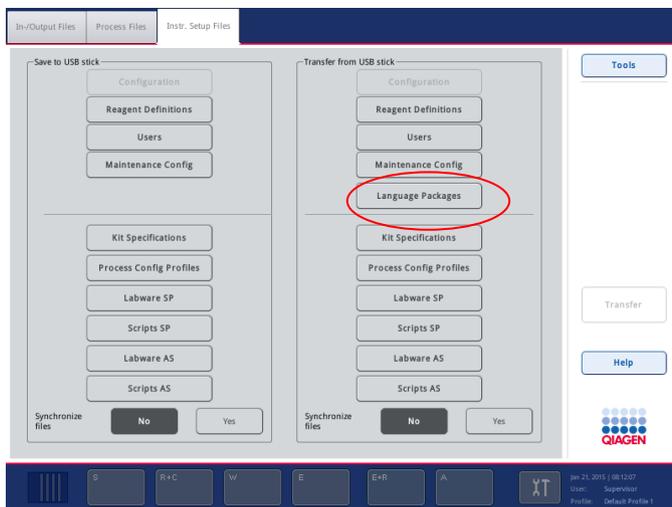

6. Pulse **Language Packages** (Paquetes de idiomas).
7. Pulse **Transfer** (Transferir).

Nota: Si se selecciona **Language Packages** (Paquetes de idiomas), no es posible usar la opción **Synchronize files** (Sincronizar archivos) (la selección predeterminada es **No**).

4.3.2 Transferencia de archivos por medio del programa QMC

Cada archivo "Translation" (Traducción) representa un paquete de idioma para un idioma.


Los archivos "Translation" (Traducción) pueden ser transferidos por la función "Supervisor" a los instrumentos QIASymphony SP/AS utilizando la herramienta de transferencia de archivos del programa QIASymphony Management Console (QMC) y son visibles en las selecciones respectivas. Los archivos "Translation" (Traducción) deben estar ubicados en la carpeta **root\data\translation**.

4.3.3 Cambio del idioma en los instrumentos QIASymphony SP/AS

Una vez finalizada la transferencia de paquetes de idiomas, el "Supervisor" puede configurar el idioma de la interfaz de usuario. El cambio de idioma tendrá efecto cuando se reinicie el sistema.

Para cambiar el idioma, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión con la función "Supervisor".
2. Pulse la ficha **Tools** (Herramientas).
3. Pulse el botón **Configuration** (Configuración). Aparecerá el menú **Configuration** (Configuración).
4. Seleccione la ficha **Time/Language** (Hora/idioma).

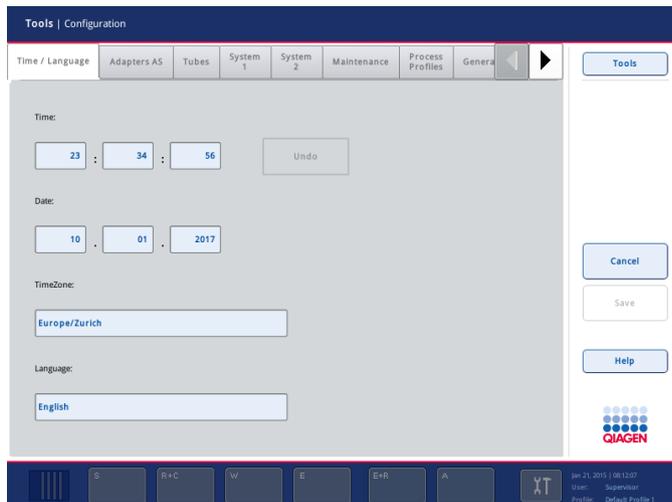

5. Seleccione el campo **Language** (Idioma).
6. Seleccione un idioma disponible de la lista **Language** (Idioma).
7. Pulse el botón **Save + Reboot** (Guardar y reiniciar) para guardar los cambios.


Se reiniciarán los instrumentos QIASymphony SP/AS.

4.3.4 Cambio del idioma en el programa QIASymphony Management Console (QMC)

Para cambiar el idioma de QMC, realice los pasos indicados a continuación.

Nota: En Windows®, el programa QMC tiene que estar en el modo "Run as Administrator" (Ejecutar como administrador). Para entrar en este modo, haga clic con el botón derecho del ratón en **<QMC Installation Directory>\bin\ qQMCAApplication.exe** (<Directorio de instalación de QMC>\papelera\qQMCAApplication.exe) y, a continuación, seleccione **Run as Administrator** (Ejecutar como administrador).

1. Seleccione **Tools** (Herramientas).
2. Seleccione **Options** (Opciones). Aparecerá el cuadro de diálogo **Options** (Opciones).
3. Seleccione la ficha **General**. Aparecerán los parámetros correspondientes.

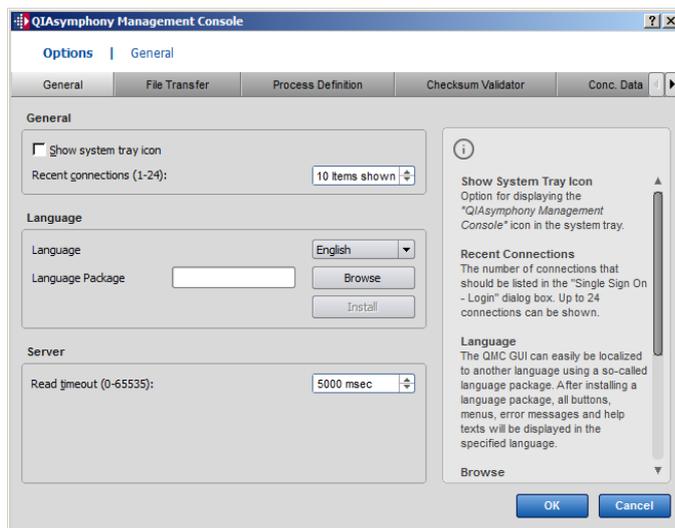


4. Haga clic en **Browse** (Examinar).
5. Vaya a la ubicación del paquete de idioma descargado.
6. Seleccione el archivo ZIP del paquete de idioma.
7. Haga clic en **Open** (Abrir).
8. Haga clic en **Install** (Instalar).
9. Seleccione el idioma.
10. Haga clic en **OK** (Aceptar).
11. Cierre (**File**→**Exit** [Archivo > Salir]) y reinicie el programa QMC.

5 Interfaz de usuario de QIASymphony SP/AS

5.1 Diseño de la pantalla de QIASymphony SP/AS

Esta sección presenta una introducción rápida de la interfaz de usuario de los menús del software QIASymphony SP/AS. Las descripciones de las fichas, herramientas y botones se presentan en tablas independientes.

Si desea obtener información más detallada, consulte la sección 16.

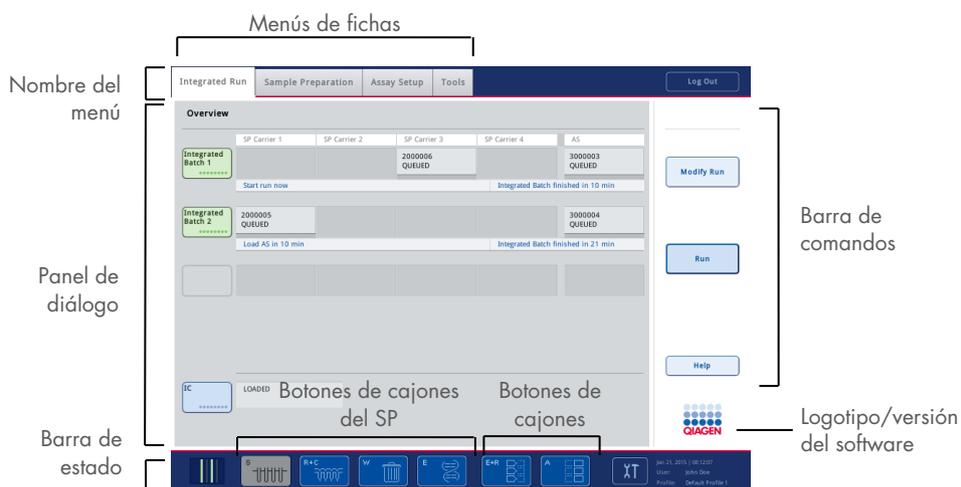

5.1.1 Barra de estado

Icono de la barra de estado

El icono de la barra de estado proporciona al usuario información sobre cada lote de muestras.



El color de cada soporte de tubos indica el estado del lote asociado.

El aspecto del icono de la barra de estado depende de que las muestras estén cargadas o no en un tubo en el instrumento QIASymphony SP.

Botones de cajones

Si se instala un módulo QIASymphony AS, aparecerá un botón para cada cajón del instrumento QIASymphony AS en la barra de estado de la interfaz de usuario común para los instrumentos QIASymphony SP/AS junto a los botones de los cajones del instrumento QIASymphony SP.



Pulse el botón "S" para abrir la pantalla "**Sample Preparation/Define Sample Rack Type**" (Preparación de muestras/Definir tipo de gradilla de muestras).

Si el botón "S" parpadea, púlselo para que pueda mostrarse el mensaje de advertencia o de error.

El botón para el cajón **Sample** (Muestras) está activo si se muestran las pantallas **Batch Overview** (Resumen de lotes) o **Sample View** (Vista de muestras) del menú **Sample Preparation** (Preparación de las muestras).



Pulse el botón "R+C" para abrir la pantalla **Consumables/Cartridges/Filter-Tips** (Consumibles/Cartuchos/Puntas con filtro). Cuando se utilizan los instrumentos QIASymphony SP/AS, el nombre de la pantalla es **Consumables/Cartridges/Filter-Tips** (Consumibles/Cartuchos/Puntas con filtro).

El botón está activo si se muestra la pantalla **Consumables/Cartridges/Filter-Tips** (Consumibles/Cartuchos/Puntas con filtro). Esta pantalla aparece al pulsar el botón "R+C".

Si no hay suficientes consumibles y reactivos cargados para los lotes en cola, el botón "R+C" parpadeará en color amarillo. Después de abrir la pantalla **Consumables/Cartridges/Filter-Tips** (Consumibles/Cartuchos/Puntas con filtro), el botón "R+C" recupera el color gris.



Pulse el botón "W" para abrir la pantalla **Waste** (Desechos).

El botón para el cajón **Waste** (Desechos) está activo cuando se muestra la pantalla **Waste** (Desechos). Esta pantalla aparece después de haber pulsado el botón "W".

Si no hay espacio suficiente en el cajón **Waste** (Desechos) para las 8-Rod Covers o para los cartuchos de preparación de muestras usados, el botón "W" parpadeará en color amarillo. Después de abrir la pantalla **Waste** (Desechos), el botón cambiará de nuevo al color gris.



Pulse el botón "E" para abrir la pantalla **Elution Slot/Configure Racks** (Ranura de elución/Configurar gradillas).

El botón para el cajón **Eluate** (Eluidos) está activo si se muestran las pantallas **Sample Preparation/Elution Slot/Configure Racks** (Preparación de muestras/Ranura de elución/Configurar gradillas) o **Sample Preparation/Elution Slot** (Preparación de muestras/Ranura de elución). Aparecerá una de estas pantallas al pulsar el botón "E" o al abrir el cajón **Eluate** (Eluidos).

Nota: El botón "E" cambia al color verde y los símbolos de flecha parpadean si hay una gradilla de elución lista para ser extraída del cajón **Eluate** (Eluidos).



Cuando se haya definido una serie de ensayos, pulse el botón "E+R" para abrir la pantalla **Loading Information** (Información de carga).

Este botón parpadea en amarillo si no hay suficientes adaptadores o posiciones de gradillas disponibles para las series definidas. En esta situación, si pulsa el botón, aparecerá un mensaje informando al usuario de la razón por la que no es posible iniciar la serie.



Cuando una serie de ensayos ha finalizado, el botón "A" parpadea en verde. En esta situación, si pulsa el botón, aparecerá un mensaje informando al usuario de que la serie ha finalizado. Pulse **OK** (Aceptar) para confirmar el mensaje.

Si no hay suficientes gradillas de ensayos disponibles para los ensayos seleccionados, este botón parpadea en amarillo. En esta situación, si pulsa el botón, aparecerá un mensaje informando al usuario de la razón por la que no es posible iniciar la serie.

5.1.2 Menús de fichas

Integrated Run

La ficha **Integrated Run** (Serie integrada) se utiliza para:

- Definir series integradas.
- Ver información sobre el estado de series integradas definidas (es decir, progreso, estado de los lotes, tiempo restante estimado y siguiente interacción del usuario necesaria para cada lote integrado).

Sample Preparation

La ficha **Sample Preparation** (Preparación de las muestras) se utiliza para ejecutar protocolos, controlar los distintos cajones e iniciar sesión en el instrumento y para el asistente.

Assay Setup

La ficha **Assay Setup** (Preparación de los ensayos) se utiliza para definir series independientes en el instrumento QIA Symphony AS. En esta ficha, el usuario puede:

- Asignar conjuntos de parámetros del ensayo.
- Ver información sobre el instrumento QIA Symphony AS (incluido el progreso y el estado de la preparación de ensayos).
- Quitar ensayos finalizados.

Tools

La ficha **Tools** (Herramientas) proporciona acceso a diversos menús necesarios para la utilización de los instrumentos QIA Symphony SP/AS.

Nota: Un protocolo es un conjunto de instrucciones que permite al instrumento QIA Symphony SP realizar una aplicación de biología molecular. El manual suministrado con el kit QIA Symphony le indicará qué protocolo debe utilizar.

5.2 Símbolos del software

Durante el funcionamiento de los instrumentos QIA Symphony SP/AS, pueden aparecer mensajes que proporcionan al usuario información general, informan al usuario de que se requiere la intervención del operador o proporcionan información sobre advertencias y errores. Cada tipo de mensaje contiene un símbolo para facilitar la identificación por el usuario.



Este símbolo se muestra si el mensaje contiene información sobre un error.



Este símbolo se muestra en los mensajes de advertencia.



Este símbolo se muestra si se requiere la intervención del usuario.



Este símbolo se muestra si el mensaje proporciona información al usuario.

6 Administración de archivos

Esta sección describe cómo los usuarios con el identificador de usuario "Operator" (Operador) pueden transferir y descargar archivos.

Si desea obtener información detallada acerca de la administración de archivos, consulte la sección 8, "Administración de archivos", del *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Descripción general*.

6.1 Opciones de transferencia

Si ha iniciado sesión como "Operator" (Operador), podrá transferir los siguientes tipos de archivo:

De los instrumentos QIASymphony SP/AS al lápiz USB (descarga)

- Archivos de registro
- Archivos de resultados
- Archivos de confirmación
- Información de carga
- Archivos de termociclador
- Informes del instrumento
- Archivos de seguimiento de auditoría
- Archivos QDef
- Archivos de gradilla
- Listas de trabajo

Del lápiz USB a los instrumentos QIASymphony SP/AS (transferencia)

- Archivo de concentración
- Archivos de gradilla
- Listas de trabajo

Sincronización de los tipos de archivo entre los instrumentos QIASymphony SP/AS y el lápiz USB

- Archivos de gradilla
- Listas de trabajo

Los archivos pueden administrarse directamente utilizando un lápiz USB o, de forma alternativa, utilizando la herramienta **File Transfer** (Transferencia de archivos) del programa QIASymphony Management Console. Los archivos de resultados, los archivos de listas de trabajo, los archivos de información de carga, los archivos de termociclador y los archivos de registro también pueden administrarse por medio de la herramienta **Automatic File Transfer** (Transferencia automática de archivos).

Si desea obtener más información acerca de ambas herramientas, consulte el Manual del usuario de *QIAsymphony Management Console*. Si se utiliza la herramienta **Automatic File Transfer** (Transferencia automática de archivos), el usuario que tenga el identificador de usuario "Supervisor" deberá asignar una contraseña al usuario de la herramienta **File Transfer** (Transferencia de archivos). Si desea obtener información acerca de cómo hacerlo, consulte el Manual del usuario de *QIAsymphony Management Console*.

Si desea obtener información detallada acerca de los tipos de archivo de QIAsymphony SP/AS, consulte la sección 8.1 del *Manual del usuario de QIAsymphony SP/AS – Descripción general*.

6.2 Transferencia de datos a través del lápiz USB

Nota: Si utiliza el programa QIAsymphony Management Console para sincronizar los datos, la estructura de archivos y carpetas del lápiz USB se configura automáticamente. La estructura de archivos y carpetas se muestra en la sección 8.3.1 del *Manual del usuario de QIAsymphony SP/AS – Descripción general*.

Nota: El lápiz USB de QIAGEN solamente debe utilizarse para la transferencia de datos de los instrumentos QIAsymphony SP/AS. Asegúrese de que la estructura de archivos y carpetas del lápiz USB es correcta y de que hay disponible suficiente espacio de almacenamiento.

Nota: No extraiga el lápiz USB durante la transferencia de datos.

6.3 Transferencia de archivos de los instrumentos QIAsymphony al lápiz USB


Para almacenar los datos generados por los instrumentos QIAsymphony SP/AS, puede transferir archivos al lápiz USB si no está disponible el programa QIAsymphony Management Console.

Si los instrumentos QIAsymphony SP/AS no están conectados a la red, esta función también puede utilizarse para suministrar a la herramienta de edición **Process Definition** (Definición de procesos) del programa QIAsymphony Management Console los datos necesarios para crear nuevos juegos de controles de ensayo y conjuntos de parámetros de ensayo.


Si utiliza el programa QIAsymphony Management Console, consulte el Manual del usuario de *QIAsymphony Management Console* para obtener más información.


Para transferir archivos de los instrumentos QIAasymphony SP/AS al lápiz USB, siga los pasos indicados a continuación.

1. Inicie una sesión en los instrumentos QIAasymphony SP/AS.
2. Inserte el lápiz USB en uno de los puertos USB situados en la parte frontal del instrumento QIAasymphony SP.
3. Pulse **File Transfer** (Transferencia de archivos) en la pantalla **Tools** (Herramientas). Se abrirá la ficha **In-/Output Files** (Archivos de entrada/salida) del menú **File Transfer** (Transferencia de archivos).

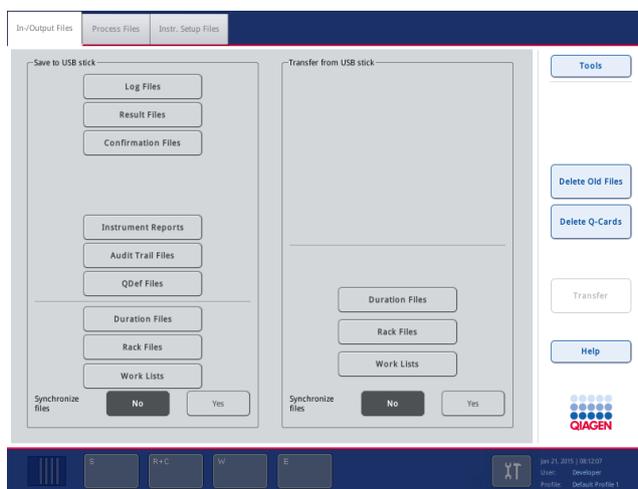

4. Seleccione una de las fichas de transferencia de archivos (**In-/Output Files** [Archivos de entrada/salida], **Process Files** [Archivos de proceso], **Instr. Setup Files** [Archivos de config. Del instrum.]).

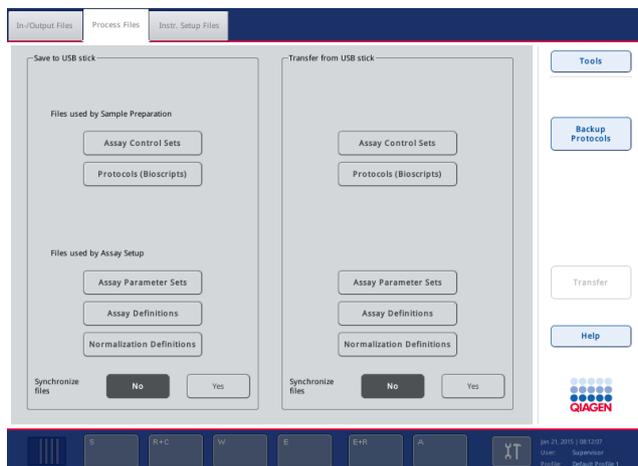

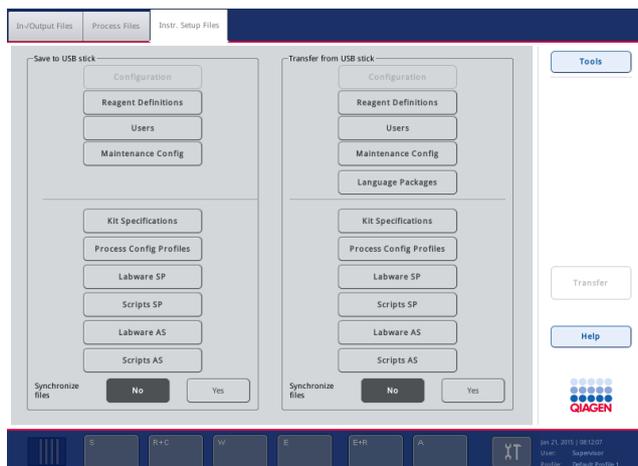

5. Seleccione los tipos de archivo que desea descargar al lápiz USB pulsando el botón correspondiente en el panel **Save to USB stick** (Guardar en el lápiz USB).
6. Pulse el botón **Transfer** (Transferir) en la barra de comandos de la pantalla para transferir los archivos seleccionados al lápiz USB.
Aparecerá un mensaje informándole de que los archivos se transferirán de los instrumentos QIASymphony SP/AS al lápiz USB.
7. Pulse **Yes** (Sí) para confirmar que los archivos deben transferirse.
Durante la transferencia de archivos se mostrará un mensaje de información.
Una vez finalizada satisfactoriamente la transferencia de datos, aparecerá un mensaje para confirmar la transferencia de datos.
8. Extraiga el lápiz USB.

6.4 Transferencia de archivos desde el lápiz USB

Nota: La transferencia de archivos de los instrumentos QIASymphony SP y QIASymphony AS se realiza por medio del menú **File Transfer** (Transferencia de archivos).

Puede transferir archivos del programa QIASymphony Management Console a los instrumentos QIASymphony SP/AS. De forma alternativa, si no está conectado a la red, puede transferir archivos utilizando el lápiz USB.

Para transferir archivos del lápiz USB a los instrumentos QIASymphony SP/AS, siga los pasos indicados a continuación.

1. Copie los archivos que desee transferir al directorio correspondiente en el lápiz USB.
2. Inicie una sesión en los instrumentos QIASymphony SP/AS.

3. Inserte el lápiz USB en uno de los puertos USB situados en la parte frontal del instrumento QIAsymphony SP.
4. Pulse **File Transfer** (Transferencia de archivos) en la pantalla **Tools** (Herramientas) para entrar en la ficha **In-/Output Files** (Archivos de entrada/salida).
5. Seleccione una de las fichas de transferencia de archivos (**In-/Output Files** [Archivos de entrada/salida], **Process Files** [Archivos de proceso], **Instr. Setup Files** [Archivos de config. Del instrum.]).
6. Seleccione los tipos de archivo que desea transferir a los instrumentos QIAsymphony SP/AS pulsando los botones correspondientes en el panel **Transfer from USB stick** (Transferencia desde un lápiz USB).
Al seleccionar el primer tipo de archivo, se activará el botón **Transfer** (Transferir).
7. Pulse el botón **Transfer** (Transferir) para transferir todos los tipos de archivo seleccionados del lápiz USB a los instrumentos QIAsymphony SP/AS.
Aparecerá un mensaje informándole de que los archivos se transferirán del lápiz USB a los instrumentos QIAsymphony SP/AS.
8. Pulse **Yes** (Sí) para confirmar que los archivos deben transferirse.
Durante la transferencia de archivos se mostrará un mensaje de información.
Una vez finalizada satisfactoriamente la transferencia de datos, aparecerá un mensaje para confirmar la transferencia de datos.
9. Extraiga el lápiz USB.

Nota: Puede seleccionar más de un tipo de archivo al mismo tiempo.

Nota: Asegúrese de que la opción **Synchronize files** (Sincronizar archivos) está configurada en **No**.

6.5 Sincronización de archivos

Los archivos almacenados en los instrumentos QIAsymphony SP/AS pueden sincronizarse con los archivos almacenados en el lápiz USB.

- Si el archivo ya existe en los instrumentos QIAsymphony SP/AS, se sobrescribirá.
- Los archivos que existan en los instrumentos QIAsymphony SP/AS pero no en el lápiz USB se eliminarán de los instrumentos QIAsymphony SP/AS
- Tras la sincronización, el contenido de los archivos del mismo tipo almacenados en los instrumentos QIAsymphony SP/AS y en el lápiz USB será idéntico.

6.5.1 Sincronización de los archivos almacenados en los instrumentos con los archivos almacenados en el lápiz USB

Para sincronizar los archivos almacenados en los instrumentos QIAsymphony SP/AS con los archivos almacenados en el lápiz USB, siga los pasos indicados a continuación.

1. Inicie una sesión en los instrumentos QIAsymphony SP/AS.
Prepare el lápiz USB con los archivos para sincronización. Almacene los archivos que desee transferir a los instrumentos QIAsymphony SP/AS en sus carpetas correspondientes del lápiz USB (por ejemplo, un archivo de gradilla recién definido en la carpeta **/data/Worklists/** [/datos/listas de trabajo]).
2. Inserte el lápiz USB en uno de los puertos USB situados en la parte frontal del instrumento QIAsymphony SP.
3. Pulse **File Transfer** (Transferencia de archivos) en la pantalla **Tools** (Herramientas) para entrar en el menú **In-/Output Files** (Archivos de entrada/salida).
4. Seleccione una de las fichas de transferencia de archivos (**In-/Output Files** [Archivos de entrada/salida], **Process Files** [Archivos de proceso], **Instr. Setup Files** [Archivos de config. del instrum.]).
Por ejemplo, para sincronizar listas de trabajo, seleccione la ficha **In-/Output Files** (Archivos de entrada/salida).
5. Seleccione los tipos de archivo almacenados en los instrumentos QIAsymphony SP/AS que deben sincronizarse con los archivos almacenados en el lápiz USB pulsando los botones correspondientes en el panel **Transfer from USB stick** (Transferencia desde un lápiz USB).
6. Configure la opción **Synchronize files** (Sincronizar archivos) en **Yes** (Sí); para ello, pulse el botón **Yes** (Sí).
7. Pulse el botón **Transfer** (Transferir) en la barra de comandos de la pantalla para sincronizar los tipos de archivo seleccionados.
Aparecerá un mensaje informándole de que se sincronizarán los archivos. Compruebe que la información es correcta.
8. Para continuar con la sincronización, pulse **Yes** (Sí).
Una vez finalizada satisfactoriamente la sincronización, aparecerá un mensaje para confirmar la sincronización.
9. Pulse **OK** (Aceptar) para continuar.
10. Extraiga el lápiz USB.

6.5.2 Sincronización de los archivos almacenados en el lápiz USB con los archivos almacenados en los instrumentos

Los archivos almacenados en el lápiz USB pueden sincronizarse con los archivos almacenados en los instrumentos QIAsymphony SP/AS.

Esto significa que los archivos almacenados en los instrumentos QIAsymphony SP/AS se transfieren al lápiz USB.

- Si el archivo ya existe en el lápiz USB, se sobrescribirá con el archivo procedente de los instrumentos QIAsymphony SP/AS.
- Los archivos que existan en el lápiz USB pero no en los instrumentos QIAsymphony SP/AS se eliminarán del lápiz USB.

Para sincronizar los archivos almacenados en un lápiz USB con los archivos almacenados en los instrumentos QIAsymphony SP/AS, siga los pasos indicados a continuación.

1. Inicie una sesión en el instrumento con el identificador de usuario "Supervisor".
2. Prepare el lápiz USB para la sincronización. Inserte el lápiz USB en uno de los puertos USB situados en la parte frontal del instrumento QIAsymphony SP.
3. Pulse **File Transfer** (Transferencia de archivos) en la pantalla **Tools** (Herramientas) para entrar en el menú de la ficha **In-/Output Files** (Archivos de entrada/salida).
4. Seleccione una de las fichas de transferencia de archivos (**In-Output Files** [Archivos de entrada/salida], **Process Files** [Archivos de proceso], **Instr. Setup Files** [Archivos de config. del instrum.]).
5. Seleccione los tipos de archivo que deben sincronizarse pulsando los botones correspondientes en el panel **Save to USB stick** (Guardar en el lápiz USB).
6. Configure la opción **Synchronize files** (Sincronizar archivos) en **Yes** (Sí); para ello, pulse el botón **Yes** (Sí).
7. Pulse el botón **Transfer** (Transferir) en la barra de comandos de la pantalla para sincronizar los archivos seleccionados.
Aparecerá un mensaje informándole de que se sincronizarán los archivos. Compruebe que la información es correcta.
8. Para continuar con la sincronización, pulse **Yes** (Sí).
Una vez finalizada satisfactoriamente la sincronización, aparecerá un mensaje para confirmar la sincronización.
9. Extraiga el lápiz USB.

6.6 Eliminación de archivos

Pueden utilizarse diferentes herramientas para eliminar archivos de los instrumentos QIAsymphony SP/AS. Recomendamos utilizar la herramienta **File Transfer** (Transferencia de archivos) del programa QIAsymphony Management Console.

Si los instrumentos QIAsymphony SP/AS no están conectados a la red, existe un método para eliminar todos los archivos de entrada y salida, excepto los archivos de registro, y un método para eliminar todos los demás archivos.

Si desea obtener información detallada acerca de la eliminación de archivos, consulte la sección 8.5 del *Manual del usuario de QIAsymphony SP/AS — Descripción general*.

7 Características del instrumento QIASymphony SP

La sección describe cómo usar el instrumento QIASymphony SP, incluido cómo cargar y descargar la mesa de trabajo.

El instrumento QIASymphony SP realiza la purificación totalmente automatizada de ácidos nucleicos utilizando tecnología de partículas magnéticas. Las muestras pueden procesarse en lotes de hasta 24 muestras. El instrumento controla componentes integrados tales como una estación de lisis, un sistema de pipeteado de 4 canales, un sujetador robótico y una matriz de barras magnéticas protegidas por cubiertas de barras. Estas barras pueden recoger o liberar partículas magnéticas en los pocillos de un cartucho de preparación de muestras, dependiendo de que las barras magnéticas estén insertadas en las cubiertas de barras o no.

El instrumento QIASymphony SP se entrega con la preinstalación de varios protocolos y juegos de controles de ensayo correspondientes para la purificación de ARN, ADN genómico y ácidos nucleicos virales y bacterianos. El usuario carga los reactivos (en cartuchos de reactivos prellenados y sellados) y los consumibles en el cajón apropiado, carga las muestras y selecciona un protocolo por medio de la pantalla táctil. A continuación, el usuario inicia el protocolo, que proporciona todos los comandos necesarios para la lisis y la purificación de las muestras. Un examen totalmente automatizado del inventario (tras el cierre de cada cajón o antes de que comience la serie) ayuda a confirmar que el instrumento QIASymphony SP está correctamente preparado para el protocolo.

7.1 Principio del flujo de trabajo



Muestra **Reactivos y consumibles** **Desechos** **Elución**

- | | | | | | |
|----------|------------------------|----------|--|-----------|--------------------------------------|
| 1 | Entrada de muestras | 5 | Compartimento de desechos | 9 | Cabezal magnético |
| 2 | Cartuchos de reactivos | 6 | "Elution slot 1" (Ranura de elución 1) (refrigerada) | 10 | Brazo robótico |
| 3 | Puntas con filtro | 7 | "Elution slots 2-4" (Ranuras de elución 2-4) | 11 | Conducto para eliminación de puntas |
| 4 | Consumibles | 8 | Estación de lisis (calentada) | 12 | Estación de almacenamiento de puntas |

7.1.1 Principio básico

La preparación de las muestras con el instrumento QIASymphony SP suele constar de 4 pasos principales: lisis, unión, lavado y elución.

- La lisis de las muestras tiene lugar en la estación de lisis, que puede calentarse si lo exige el protocolo.
- Los ácidos nucleicos se unen a la superficie de las partículas magnéticas y se lavan para eliminar contaminantes.
- A continuación, se eluyen los ácidos nucleicos purificados.


El instrumento QIASymphony SP procesa una muestra que contiene partículas magnéticas de la forma siguiente:

- Una barra magnética protegida por una cubierta de barra entra en un pocillo que contiene la muestra y atrae las partículas magnéticas.
- Los cartuchos de preparación de muestras están situados debajo de la barra magnética con su cubierta.
- El instrumento QIASymphony SP utiliza un cabezal magnético que contiene una matriz de 24 barras magnéticas, de modo que puede procesar simultáneamente 24 muestras. Los pasos 1 y 2 se repiten varias veces durante el procesamiento de las muestras.

7.2 Características del instrumento

7.2.1 Cabezal magnético

El cabezal magnético está compuesto por un conjunto de 24 barras magnéticas para el procesamiento de partículas magnéticas, un transportador y protectores del cabezal magnético.

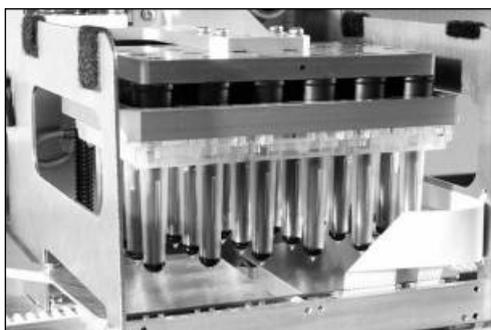

Cabezal magnético del instrumento QIASymphony SP.

El cabezal magnético dispone de un accionador de cubiertas para barras para mezclar las muestras y de un accionador de barras magnéticas para la separación y resuspensión de las partículas magnéticas. El transportador mueve los cartuchos de preparación de muestras desde la posición inicial hasta la posición de procesamiento y, finalmente, hasta la posición de salida. Los protectores del cabezal magnético se mueven por debajo del cabezal magnético y ayudan a impedir la contaminación de la mesa de trabajo o de las muestras por líquidos que puedan gotear desde las cubiertas de barras.

Nota: Para impedir la entrada de líquido en el instrumento QIASymphony SP, utilice el instrumento únicamente con el protector del cabezal magnético instalado.

7.2.2 Estación de lisis

La estación de lisis, un agitador orbital calentado, permite la lisis automática de un máximo de 24 muestras en 1 lote. Tras la lisis de las muestras, la estación de lisis asciende de manera que puedan transferirse las muestras para que prosiga su procesamiento.



Estación de lisis del instrumento QIASymphony SP.

7.2.3 Brazo robótico

El brazo robótico proporciona una colocación exacta y precisa del sujetador robótico y del cabezal de pipetas. El brazo robótico también incluye un sensor óptico, una cámara de códigos de barras 2D y una lámpara de luz ultravioleta.

Pinza robótica

El sujetador robótico transfiere consumibles (8-Rod Covers y cartuchos de preparación de muestras) a la posición necesaria en la mesa de trabajo durante la preparación de las muestras.

Cabezal de pipeteo

El cabezal de pipetas se monta en el brazo robótico y se mueve en las direcciones X, Y y Z para alcanzar diferentes posiciones de la mesa de trabajo.

El cabezal de pipetas contiene 4 canales de pipeteado con bombas de jeringa de alta precisión que están conectadas a adaptadores de puntas. Los adaptadores de puntas pueden acoplarse a puntas con filtro desechables. Las bombas de jeringa pueden funcionar al mismo tiempo para permitir la aspiración y la dispensación de pequeños volúmenes de líquido (20-1500 μ l, en función de la aplicación y del líquido) a través de las puntas con filtro desechables acopladas.

Cada canal de pipeteo puede realizar dos tipos de detección del nivel de líquido: detección del nivel de líquido basada en la capacitancia (cLLD, capacitive-based liquid-level detection) y detección del nivel de líquido basada en la presión (pLLD, pressure-based liquid-level detection). Para detectar el nivel de líquido, se miden los cambios en la capacitancia o en la presión entre la punta con filtro desechable y el líquido.

Protectores de puntas

Cada cabezal de pipetas está equipado con 4 protectores de puntas. Durante una serie, los protectores de puntas están situados debajo de las puntas desechables para recoger las gotas de líquido que puedan caer. Esto ayuda a reducir al mínimo el riesgo de contaminación cruzada.



Los protectores de puntas ayudan a prevenir la contaminación cruzada.

Sensor óptico

Durante un examen de inventario, el sensor óptico comprueba que los consumibles están correctamente cargados en los cajones y que hay cargados suficientes consumibles para la serie.

Lámpara ultravioleta

Se monta en el brazo robótico una lámpara de luz ultravioleta que se utiliza para descontaminar la mesa de trabajo del instrumento respectivo. Consulte la sección 13.7 si desea obtener información acerca del uso de la lámpara de luz ultravioleta.

7.3 Lector de códigos de barras

7.3.1 Lector de códigos de barras de entrada de muestras

El instrumento QIASymphony SP tiene un lector de códigos de barras integrado que puede leer los códigos de barras de los soportes de tubos y de los tubos de muestras. Debe definirse un tipo de tubo predeterminado para cada tipo de inserto que se utilice. El tipo de tubo se asigna automáticamente al leer el código de barras del inserto.

Los tubos primarios pueden etiquetarse con códigos de barras.

El lector de códigos de barras integrado del cajón "Sample" (Muestras) escanea:

- Los códigos de barras de posición de los soportes de tubos.
- Las etiquetas de código de barras de los tubos de muestras.

Cada ranura de un soporte de tubos tiene un código de barras en la parte posterior de la ranura. Si la posición está vacía, el lector de códigos de barras puede leer el código de barras situado en la parte posterior de la ranura. Esto permite al instrumento QIASymphony SP detectar qué posiciones del soporte de tubos contienen un tubo y cuáles están vacías.

Si utiliza tubos de muestras no etiquetados con códigos de barras, es posible que no se detecten tubos que contengan volúmenes pequeños de líquido o líquidos transparentes. En este caso, utilice una etiqueta de código de barras en blanco para permitir la detección del tubo de muestras. Si desea obtener más información, consulte el *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Descripción general*.

Las listas de identificadores de muestras escaneados pueden corregirse manualmente y asignarse en lotes en función de la información existente de las muestras o de la información introducida por el usuario. Si desea obtener más información, consulte el *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Descripción general*.

Se dispone de cuatro soportes de tubos para los tubos de muestras. En algunos protocolos, las muestras también pueden procesarse con controles positivos o negativos. Un quinto soporte de tubos admite tubos con controles internos que se añadirán a las muestras.

7.3.2 Lector de códigos de barras 2D de reactivos y consumibles

Como parte del examen de inventario del cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles), la cámara de códigos de barras 2D del instrumento QIASymphony SP identifica los diferentes reactivos del cartucho de reactivos y también comprueba que se ha cargado el cartucho de reactivos correcto. El lector de códigos de barras 2D está acoplado al brazo robótico.

7.3.3 Tipos de códigos de barras

El escáner de mano y el lector de códigos de barras de **Sample Input** (Entrada de muestras) pueden leer códigos de barras de los tipos siguientes:

- Code 39
- Code 128 y subtipos
- Codabar

Nota: No utilice códigos de barras Interleaved 2 of 5. Este tipo de código de barras tiene una elevada densidad de información y carece de suma de comprobación. Por consiguiente, puede generar errores.

Si desea obtener información acerca de cómo adherir etiquetas de código de barras 1D a los tubos, consulte el Apéndice A del *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Descripción general*.

7.3.4 Escáner de mano

El escáner de mano puede conectarse a través de una conexión USB a uno de los puertos USB de los instrumentos QIASymphony SP/AS. Cuando se utiliza el armario QIASymphony Cabinet SP/AS, el escáner de mano se entrega con un soporte magnético. El soporte magnético solamente puede fijarse a las partes metálicas del armario.




Escáner de mano.

Nota: Para facilitar el uso del escáner de códigos de barras, recomendamos colocar el soporte magnético en el panel metálico central.

Nota: Para un funcionamiento seguro, cuelgue el escáner de mano en su soporte después de usarlo.

8 Carga de los cajones del instrumento QIASymphony SP

En esta sección, se describe cómo cargar y descargar la mesa de trabajo y cómo realizar exámenes de inventario para usar el instrumento QIASymphony SP.

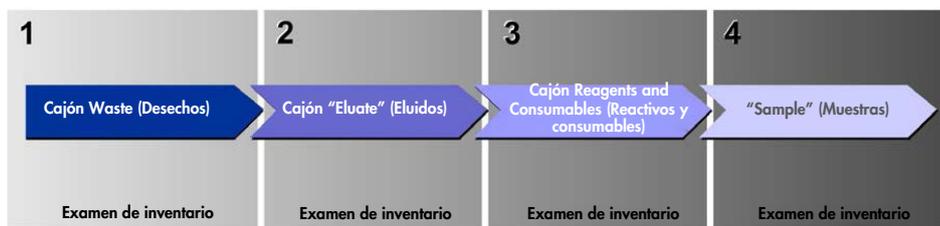

Flujo de trabajo de carga de los cajones de los instrumentos QIASymphony.

Recomendamos cargar los cajones en el siguiente orden:

1. Cajón "Waste" (Desechos)
2. Cajón "Eluate" (Eluidos)
3. Cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles)
4. Cajón "Sample" (Muestras)

8.1 Uso del Asistente del software



El software operativo QIASymphony SP dispone de un **Wizard** (Asistente) que le guía paso a paso en el proceso de preparación de una serie.

El **Wizard** (Asistente) le guía por las siguientes tareas:

- Carga del cajón "Waste" (Desechos)
- Carga del cajón "Eluate" (Eluidos)
- Carga del cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles)
- Carga del cajón "Sample" (Muestras)
- Definición de un lote/serie con o sin listas de trabajo.
- Carga de controles internos

Puede preparar una serie en el instrumento QIASymphony SP con o sin el **Wizard** (Asistente).

Nota: El **Wizard** (Asistente) solamente puede utilizarse para preparar series de preparación de muestras independientes. No puede usarse para preparar una serie integrada.

Nota: Aunque el **Wizard** (Asistente) no puede usarse con series integradas, los pasos para cargar el instrumento QIASymphony SP son los mismos para las series independientes (que permiten el uso del **Wizard** [Asistente]) y para las series integradas.

Nota: Si necesita ayuda para usar el instrumento QIASymphony SP, le recomendamos utilizar el **Wizard** (Asistente). El Wizard (Asistente) del instrumento QIASymphony SP es completo y fácil de entender y proporciona instrucciones paso a paso para cargar los cajones del instrumento QIASymphony.

Uso del Asistente del software

8.2 Carga del cajón “Waste” (Desechos)

El sujetador robótico desecha las 8-Rod Covers y los cartuchos de preparación de muestras usados en el cajón “Waste” (Desechos), donde se recogen en 4 cajas unitarias.

Un recipiente en el cajón “Waste” (Desechos) recoge los desechos líquidos del procedimiento de preparación de muestras.

Las puntas con filtro desechables usadas se desechan en una bolsa para eliminación de puntas o en un contenedor de desechos. Una estación de almacenamiento de puntas en el cajón de desechos permite almacenar temporalmente las puntas usadas en la mesa de trabajo para su reutilización en un paso posterior del protocolo.



- 1** Bolsa para eliminación de puntas
- 2** Conducto para puntas
- 3** Recipiente de desechos líquidos
- 4** Estación de almacenamiento de puntas
- 5** Cajas unitarias vacías

Recomendamos cargar los elementos en el cajón "Waste" (Desechos) en el siguiente orden:

1. Inserte el recipiente de desechos líquidos vacío (asegúrese de quitar la tapa antes de colocarlo en el cajón).
2. Inserte el conducto para puntas.
3. Inserte la estación de almacenamiento de puntas.
4. Inserte cajas unitarias vacías (asegúrese de que hay una caja unitaria vacía en la ranura 4).
5. Instale una bolsa para eliminación de puntas vacía.

8.2.1 Estación de almacenamiento de puntas

La estación de almacenamiento de puntas se encuentra en la parte superior del recipiente de desechos líquidos. Conduce los desechos líquidos desde las puntas con filtro hasta el recipiente de desechos líquidos y también permite el almacenamiento temporal de puntas con filtro que se reutilizarán en un paso subsiguiente del protocolo.

Para cargar la estación de almacenamiento de puntas en el cajón "Waste" (Desechos), siga los pasos indicados a continuación.

1. Abra el cajón "Waste" (Desechos).
2. Asegúrese de que la estación de almacenamiento de puntas está correctamente insertada; de lo contrario, puede producirse un error durante el examen de inventario.

La estación de almacenamiento de puntas se detectará automáticamente durante el examen de inventario.

8.2.2 Recipiente de desechos líquidos

El recipiente de desechos líquidos se utiliza para recoger todos los desechos líquidos generados durante la preparación de muestras.

Para cargar el recipiente de desechos líquidos en el cajón "Waste" (Desechos), siga los pasos indicados a continuación.

1. Abra el cajón.
2. Coloque el recipiente de desechos líquidos en la parte posterior derecha.
3. Presione el recipiente hacia abajo con suavidad para colocarlo correctamente en su posición.

Nota: Asegúrese de quitar la tapa del recipiente de desechos líquidos antes de cargarlo en el cajón.

Nota: Asegúrese de vaciar el recipiente de desechos líquidos al final de cada serie.

Nota: Tenga cuidado cuando manipule el recipiente de desechos líquidos. Puede contener material infeccioso.

Nota: El cajón "Waste" (Desechos) solamente puede cerrarse si el recipiente de desechos líquidos está colocado en su posición.

Nota: No esterilice en autoclave el recipiente de desechos líquidos.

8.2.3 Conducto para puntas

El conducto para puntas permite recoger las puntas con filtro desechables usadas del sistema de pipeteado. Las puntas usadas se recogen en una bolsa para eliminación de puntas o, cuando se utiliza el armario QIASymphony Cabinet SP/AS, en un contenedor de desechos.

Nota: Asegúrese de que el conducto para puntas está colocado en el cajón "Waste" (Desechos). Instale una bolsa para eliminación de puntas o coloque el contenedor de desechos antes de procesar un lote de muestras.

Nota: Si utiliza el instrumento QIASymphony SP con el armario QIASymphony Cabinet SP, consulte el Manual del usuario de *QIASymphony Cabinet SP/AS* para obtener información sobre la instalación de los conductos para puntas.

El conducto para puntas se detectará durante el examen de inventario.

8.2.4 Recogida de puntas de desecho

Bolsa para eliminación de puntas

Si se utiliza el instrumento QIASymphony SP sin el armario QIASymphony Cabinet SP, la bolsa para eliminación de puntas debe montarse debajo del cajón "Waste" (Desechos).

Si desea obtener más información, consulte la sección 9.6, "Montaje de la bolsa para eliminación de puntas", del *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Descripción general*.

Si se utiliza el instrumento QIASymphony SP en combinación con el armario QIASymphony Cabinet SP, consulte el Manual del usuario de *QIASymphony Cabinet SP/AS* para obtener más información sobre la eliminación de las puntas.

Nota: El instrumento no comprueba la presencia de una bolsa para eliminación de puntas. Si no se utiliza un armario QIASymphony Cabinet y no hay una bolsa para eliminación de puntas instalada, las puntas no se recogerán y caerán en la superficie que está debajo del instrumento.

Contenedor de desechos

Si se utiliza el armario QIASymphony Cabinet SP, las puntas se desechan directamente en el contenedor de desechos, situado debajo de la salida del conducto para eliminación de desechos.

8.2.5 Cajas unitarias

Los cartuchos de preparación de muestras y las cubiertas para 8 barras usados se recogen en cajas unitarias. Hay 4 ranuras para cajas unitarias en el cajón "Waste" (Desechos) y, para facilitar su uso y mejorar la seguridad del proceso, las cajas unitarias solamente pueden cargarse en la orientación correcta.

Dependiendo del procedimiento de purificación en ejecución y del número de muestras, el espacio necesario para los consumibles usados en el cajón "Waste" (Desechos) variará.

Para cargar cajas unitarias en el cajón "Waste" (Desechos), siga los pasos indicados a continuación.

1. Quite la tapa de la caja unitaria.
2. Si la caja unitaria contiene un separador, asegúrese de extraerlo.
3. Coloque la caja unitaria en una de las ranuras para cajas unitarias.



Ranura
4

Ranuras para cajas unitarias (se indica la ranura 4).

Nota: Debe quitarse el separador situado en el fondo de una caja unitaria vacía para cubiertas de 8 barras antes de colocar la caja unitaria en el cajón "Waste" (Desechos), ya que de lo contrario puede producirse un error durante el examen de inventario.

Nota: Debe colocarse una caja unitaria vacía en la ranura 4. Durante la inicialización, el manipulador desciende hasta la caja unitaria situada en la posición 4. Si la caja unitaria no estuviera vacía, el manipulador chocaría.

Nota: No vacíe las cajas unitarias parcialmente llenas. Las cajas unitarias parcialmente llenas se detectarán durante el examen de inventario y podrán utilizarse hasta que estén llenas.

Nota: No tire las tapas de las cajas unitarias abiertas. Pueden utilizarse para cubrir cajas unitarias más adelante.


8.2.6 Cierre del cajón "Waste" (Desechos)

Después de preparar el cajón "Waste" (Desechos), este debe cerrarse para iniciar el examen de inventario.

8.3 Carga del cajón “Eluate” (Eluidos)

8.3.1 Características del cajón “Eluate” (Eluidos)

Los ácidos nucleicos purificados se transfieren al cajón “Eluate” (Eluidos). El cajón “Eluate” (Eluidos) contiene 4 ranuras que pueden usarse para la elución en placas o tubos.

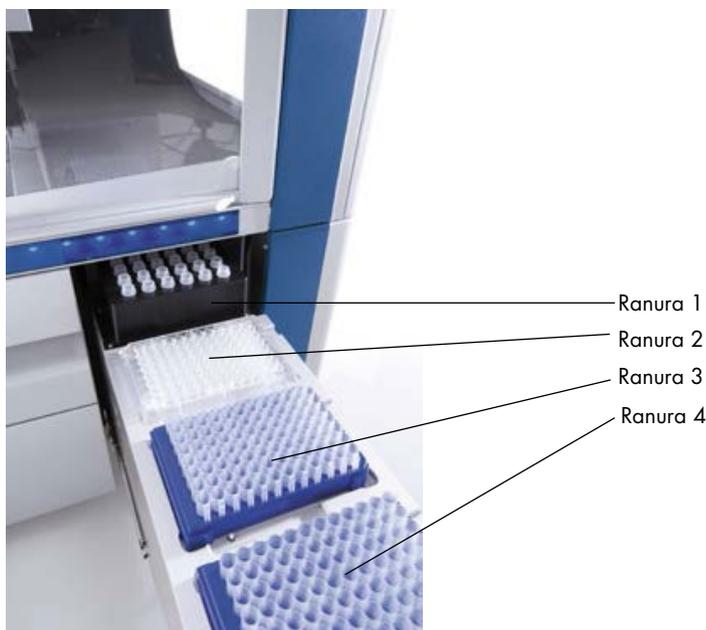

Cajón “Eluate” (Eluidos)

Las “Elution slots 2–4” (Ranuras de elución 2-4) pueden alojar placas o tubos en adaptadores especiales.

Ranura 1 La ranura “Elution slot 1” (Ranura de elución 1) permite la refrigeración del eluido y requiere el uso de un adaptador de refrigeración especialmente diseñado para diversos formatos de placas (por ejemplo, placas de 96 pocillos, tubos de PCR).

Los parámetros de refrigeración se definen en el protocolo. En algunos protocolos, el usuario puede elegir dejar activada la refrigeración de los eluidos o desactivarla. Sin embargo, no recomendamos desactivar la refrigeración de los eluidos si el protocolo la exige.

Ranura 2 Las “Elution slot 2” (Ranura de elución 2) y “Elution slot 3” (Ranura de elución 3) pueden alojar placas de 96 pocillos, placas de 24 pocillos y tubos.

- Ranura 4 La "Elution slot 4" (Ranura de elución 4) puede alojar placas de 24 pocillos o tubos en adaptadores especiales.
- Por razones técnicas, no pueden usarse gradillas de elución de 96 pocillos en la "Elution slot 4" (Ranura de elución 4).

Adaptadores

Se dispone de adaptadores para los siguientes tipos de consumibles:

- Microplaca, base redondeada
- Tubos de tapa de rosca Sarstedt® (2 ml)
- Placa de PCR
- Placas de 96 pocillos
- Microtubos con tapa a presión
- Elution Microtubes CL (microtubos de elución CL) (n.º de cat. 19588)

Si desea obtener más información acerca de los tipos de placas de 96 pocillos y tubos que pueden usarse en el cajón "Eluate" (Eluidos), visite www.qiagen.com/goto/QIASymphony.

Nota: Asegúrese de que los tubos o gradillas de elución son compatibles con el instrumento QIASymphony SP.

Si se van a procesar varios lotes de muestras, pueden extraerse los ácidos nucleicos eluidos del cajón "Eluate" (Eluidos) en cuanto esté listo cada lote. El cajón "Eluate" (Eluidos) se desbloqueará y el botón "E" se iluminará en color verde. El color verde del botón "E" informa al usuario de que pueden extraerse los eluidos.

Nota: Asegúrese de que las placas y los tubos engradillados están sujetos de forma segura en la ranura por los pernos blancos.

Nota: Se utiliza un escáner de mano para identificar los códigos de barras de las gradillas de elución y de las ranuras de elución en el cajón "Eluate" (Eluidos).

8.3.2 Procedimiento de carga

Para cargar el cajón "Eluate" (Eluidos), siga los pasos indicados a continuación.

1. Prepare las gradillas de elución.
2. Si es necesario, coloque las gradillas de elución en el adaptador apropiado.

3. Abra el cajón “Eluate” (Eluidos) para abrir la pantalla **Elution Slot/Configure Racks** (Ranura de elución/Configurar gradillas).
4. Pulse en la pantalla táctil el botón de la ranura correspondiente a la ranura de elución a la que desee añadir una gradilla.
5. Si la gradilla de elución tiene una etiqueta de código de barras, escanee el código de barras con el escáner de mano. De forma alternativa, pulse **Rack ID** (Identificador de gradilla) e introduzca manualmente el identificador de la gradilla de elución en la pantalla **Keyboard** (Teclado) que aparece.

Nota: Este paso es opcional para algunos instrumentos según su configuración. Si desea obtener más información, consulte el *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Descripción general*.

El identificador de gradilla de elución introducido se mostrará en la pantalla. La ranura aparece en color amarillo para indicar que debe definirse el tipo de gradilla.

Nota: Si utiliza una gradilla de eluidos con tubos con códigos de barras 2D, el código de barras del tubo de eluidos se añade al identificador de muestras con un espacio en blanco en el medio del archivo de resultados. Asegúrese de que el identificador de gradillas sea idéntico al identificador de gradillas utilizado durante la exploración manual de la gradilla de eluidos en el lector de códigos de barras 2D externo. Consulte la sección 6.2.2 del *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Descripción general*, para obtener más información sobre la activación de gradillas de eluidos con tubos con códigos de barras 2D.

6. Coloque la gradilla de elución con el pocillo A1 en la esquina superior izquierda en la ranura de elución que desee. Asegúrese de que la gradilla está sujeta de forma segura por los pernos blancos.

Si el protocolo requiere la refrigeración de los eluidos o si tiene previsto preparar una serie integrada, asegúrese de utilizar la ranura 1. Coloque la gradilla de elución en el adaptador de refrigeración apropiado.

Nota: La refrigeración de las gradillas de elución puede desactivarse pulsando el botón con la imagen de un copo de nieve situado a la izquierda de “Elution slot 1” (Ranura de elución 1). No recomendamos desactivar la refrigeración de las gradillas de elución si el protocolo la exige.

7. Puede ser necesario un adaptador según la gradilla de elución que utilice.
Seleccione en la lista el tipo de gradilla de elución. Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la lista.

Nota: El instrumento QIASymphony SP proporciona una asignación automática de las gradillas de elución. Si está utilizando una gradilla de microtubos de elución (EMTR, Elution Microtube Rack), escanee el código de barras y el instrumento QIASymphony SP seleccionará automáticamente el tipo de gradilla de elución.


Nota: Si corresponde, quite la tapa del material de laboratorio para eluidos antes de cargar el cajón.

Nota: Si utiliza gradillas de Elution Microtubes CL, retire el fondo girando con cuidado la gradilla hasta que el fondo se separe antes de cargarlas en el adaptador de refrigeración correspondiente.

Nota: Si la gradilla de elución se ha utilizado en una serie previa, el instrumento QIASymphony SP activará automáticamente la refrigeración cuando se solicite el siguiente lote que requiera refrigeración de los eluidos.

Nota: El número máximo de columnas que pueden reservarse depende del tamaño de la gradilla y de los lotes que ya estén en cola para esa ranura.

Importante: Si ya hay eluidos en una gradilla de elución cargada en el cajón "Eluate" (Eluidos) correspondiente a una serie previa, asegúrese de que las temperaturas de refrigeración son apropiadas para estos eluidos en la misma gradilla de elución. De lo contrario, los eluidos pueden recibir el estado "invalid" (no válido). El instrumento QIASymphony SP no puede detectar si las temperaturas de refrigeración son apropiadas para los eluidos de series previas ya presentes en el cajón "Eluate" (Eluidos).

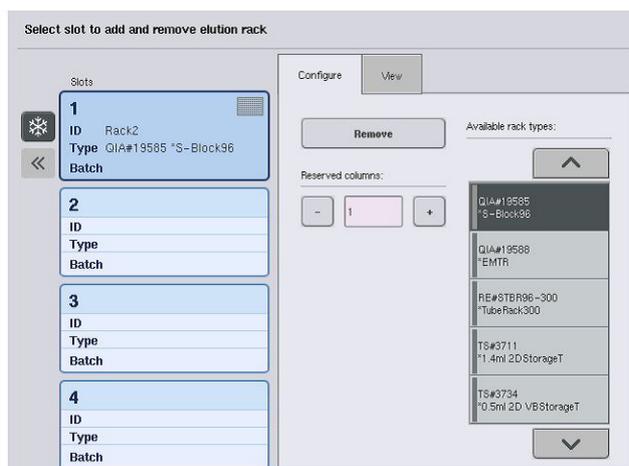

8. Si necesita cargar más gradillas de elución en el cajón "Eluate" (Eluidos), repita el procedimiento de carga tal como se ha descrito anteriormente en esta sección antes de avanzar al paso siguiente.

9. Cierre el cajón "Eluate" (Eluidos) y pulse **OK** (Aceptar).

El instrumento QIASymphony SP realiza un examen de inventario del cajón "Eluate" (Eluidos). El procesamiento de las muestras entra en pausa y el brazo robótico se mueve al cajón "Eluate" (Eluidos) para comprobar que las ranuras de elución seleccionadas contienen una gradilla de elución.

Nota: No es posible pasar a la siguiente pantalla hasta que finalice el examen de inventario.


8.3.3 Módulo de transferencia

En el modo integrado, las gradillas de elución pueden transferirse automáticamente por medio del módulo de transferencia desde el instrumento QIASymphony SP hasta la ranura 2 del cajón "Eluate and Reagent" (Eluidos y reactivos) del instrumento QIASymphony AS.

El marco de transferencia consta de un marco de base y de un asa. Si tiene previsto realizar la transferencia automática de una gradilla de elución al instrumento QIASymphony AS por medio del módulo de transferencia, asegúrese de que está instalado el marco de transferencia antes de colocar el adaptador pertinente en la ranura 1 del cajón "Eluate" (Eluidos).


Para instalar el marco de transferencia, siga los pasos indicados a continuación.

1. Coloque el marco de transferencia en la ranura 1, de manera que las 4 patillas situadas bajo el marco de base encajen en los orificios de la ranura 1. El asa debe estar orientada hacia la esquina posterior izquierda de la ranura 1.

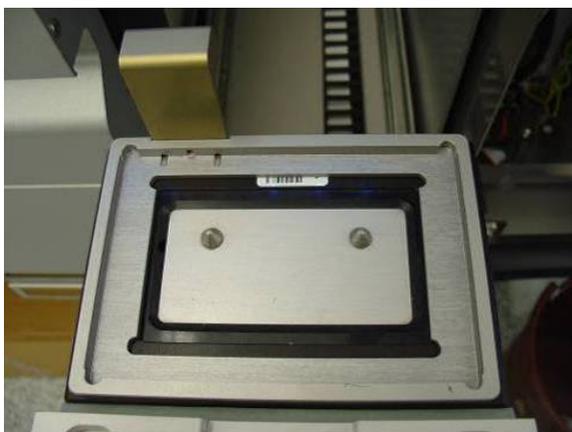

Marco de transferencia colocado en la ranura 1 del cajón "Eluate" (Eluidos).

2. Coloque la gradilla de elución y el adaptador apropiado en el marco de transferencia.

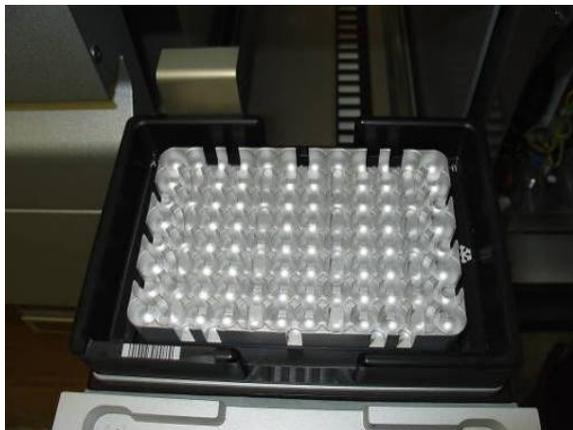

Adaptador colocado en el marco de transferencia en la ranura 1 del cajón "Eluate" (Eluidos).

El cajón "Eluate" (Eluidos) está bloqueado:

- Durante la transferencia de eluidos de los cartuchos de preparación de muestras a la gradilla de elución.
- Durante el examen de inventario del cajón "Eluate" (Eluidos).
- Durante la transferencia de eluidos del instrumento QIASymphony SP al instrumento QIASymphony AS a través del módulo de transferencia.
- Durante una serie integrada.

En todos los demás momentos, el cajón "Eluate" (Eluidos) puede abrirse o cerrarse.

8.3.4 Descarga del cajón "Eluate" (Eluidos)

Las gradillas de elución deben descargarse manualmente del cajón "Eluate" (Eluidos).

Si se utilizan los instrumentos QIASymphony SP/AS en el modo de serie integrada, se transferirá automáticamente una gradilla de elución situada en la "Elution slot 1" (Ranura de elución 1) del instrumento QIASymphony SP al módulo AS para iniciar la preparación de la reacción. Posteriormente, se transferirá automáticamente la gradilla de elución de nuevo al cajón "Eluate" (Eluidos) del instrumento QIASymphony SP

Si se utilizan los instrumentos QIASymphony SP/AS en el modo independiente, puede transferirse directamente la gradilla de elución al cajón "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos) del instrumento QIASymphony AS por medio del botón **Transfer** (Transferir).

Para transferir gradillas de elución de cualquier ranura de elución distinta de la "Elution slot 1" (Ranura de elución 1) debe realizarse una transferencia manual. Para mayor flexibilidad, las gradillas de elución pueden extraerse del cajón "Eluate" (Eluidos) antes de que haya finalizado una ejecución del protocolo en el modo independiente. En cuanto los eluidos hayan sido transferidos a una gradilla de elución, puede extraerse la gradilla de elución del cajón.

Nota: Si la gradilla se va a utilizar para otro lote, no se podrá retirar la gradilla de elución del cajón.

Nota: Si una gradilla de elución está lista para ser descargada, el botón "E" de la barra de estado situada en la parte inferior de la pantalla táctil cambia al color verde.


Nota: En el caso de preparaciones de muestras sin controles internos, compruebe la presencia de eluidos para cada muestra procesada.

Cuando se extrae una gradilla de elución, se finaliza el archivo de gradillas para la gradilla de elución y se genera el archivo de resultados para la gradilla de elución. El archivo de gradilla y el archivo de resultados pueden descargarse por medio del programa QIASymphony Management Console o mediante transferencia de archivos desde el instrumento QIASymphony SP al lápiz USB.


Si desea ver una descripción detallada de cómo extraer manualmente gradillas de elución, consulte las secciones siguientes.

Extracción manual de una gradilla de elución

1. Abra el cajón "Eluate" (Eluidos).
Aparecerá la pantalla **Eluate Drawer/Elution Slot** (Cajón de eluidos/Ranura de elución).
2. Seleccione la ranura de elución de la que debe extraerse la gradilla de elución.
Aparecerá la pantalla **Eluate Drawer/Elution Slot/Change Rack X** (Cajón de eluidos/Ranura de elución/Cambiar gradilla X).

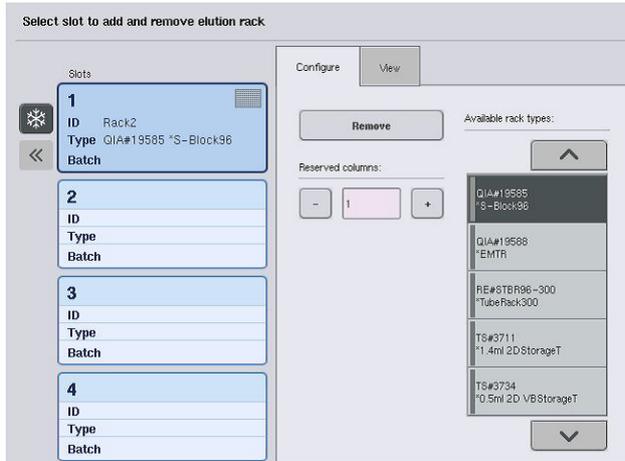

3. Pulse el botón **Remove** (Extraer) en la ficha **Configure** (Configurar) para extraer la gradilla de elución del inventario.

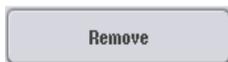


Aparecerá un mensaje preguntándole si desea extraer la gradilla de elución de la ranura seleccionada.



4. Pulse **Yes** (Sí) para continuar.



Aparecerá la pantalla **Eluate Drawer/Elution Slot/Change Rack X** (Cajón de eluidos/Ranura de elución/Cambiar gradilla X). Se ha extraído la gradilla de la ranura seleccionada.

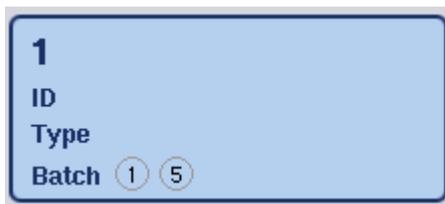

5. Extraiga la gradilla de elución de la ranura de elución.
Si la gradilla de elución se utilizó con un adaptador de elución, extraiga también el adaptador.
6. Para descargar gradillas de elución adicionales, repita el proceso.

7. Cuando se hayan descargado todas las gradillas de elución, cierre el cajón "Eluate" (Eluidos).

Aparecerá la pantalla **Eluate Drawer/Elution Slot/Configure Rack X** (Cajón de eluidos/Ranura de elución/Cambiar gradilla X).

8. Pulse **OK** (Aceptar).



El instrumento QIASymphony SP realiza un examen de inventario del cajón "Eluate" (Eluidos). A continuación, aparecerá la pantalla **Sample Preparation/Overview** (Preparación de muestras/Resumen).

Nota: Si la refrigeración de eluidos de la ranura "Elution slot 1" (Ranura de elución 1) estaba activada, se desactivará al pulsar el botón **OK** (Aceptar) o el botón **Yes** (Sí).

8.4 Carga del cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles)

El cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles) contiene todos los consumibles y reactivos necesarios para la ejecución del protocolo.

Antes de iniciar la ejecución de un protocolo, debe cargarse el cajón con los reactivos apropiados en cartuchos de reactivos prellenados y sellados, cartuchos de preparación de muestras, 8-Rod Covers y puntas de filtro desechables. En algunos casos puede ser necesario un recipiente accesorio y un frasco de disolución amortiguadora.

Dependiendo del kit utilizado, pueden ser necesarios diferentes tipos o cantidades de consumibles. Si desea obtener más información, consulte el manual del kit QIASymphony que esté utilizando.

8.4.1 Carga de consumibles

Cajas unitarias

Los consumibles necesarios para la preparación de las muestras se colocan en la mesa de trabajo del instrumento QIASymphony SP en cajas unitarias. Las cajas unitarias se proporcionan con una tapa. Hay 4 ranuras para cajas unitarias.

Para cargar cajas unitarias, siga los pasos indicados a continuación.

1. Quite la tapa de la caja unitaria y consérvela para un uso posterior. Las tapas pueden utilizarse para volver a cerrar cajas unitarias parcialmente usadas.
2. Coloque cajas unitarias que contengan 8-Rod Covers o cartuchos de preparación de muestras sin usar en el cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles).

Las cajas unitarias están diseñadas de manera que solamente caben en el cajón del instrumento en la orientación correcta.



Consumibles utilizados en la preparación de muestras en el instrumento QIASymphony SP.

Cada ranura para cajas unitarias del cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles) puede utilizarse para una caja unitaria con cartuchos de preparación de muestras o para una caja unitaria con 8-Rod Covers. Es posible cargar en el cajón cajas unitarias parcialmente usadas, ya que durante el examen de inventario se detectará el número de cartuchos de preparación de muestras o de 8-Rod Covers que contienen.

Generalmente, se necesitarán más cartuchos de preparación de muestras que 8-Rod Covers, circunstancia que debe tenerse en cuenta al cargar cajas unitarias en el instrumento QIASymphony SP.

Nota: Asegúrese de que haya al menos una caja unitaria vacía en la ranura 4 (la más cercana a usted).


Nota: No rellene cajas unitarias parcialmente usadas. Durante el examen de inventario se detecta el número de cartuchos de preparación de muestras o de 8-Rod Covers.

Nota: No tire las cajas unitarias vacías. Las cajas unitarias vacías pueden utilizarse en el cajón "Waste" (Desechos) para la recogida de cartuchos de preparación de muestras y de 8-Rod Covers usados durante el procedimiento de purificación.

8-Rod Covers

Una cubierta para 8 barras es un conjunto de 8 cubiertas de barras que cubre las barras magnéticas del cabezal magnético.

- Cada caja unitaria puede contener un máximo de 12 8-Rod Covers.
- Existe un separador entre el fondo de la caja unitaria y la última cubierta para 8 barras.
- Un relieve específico en el borde superior e inferior de una cubierta para 8 barras permite su detección automática por parte del instrumento QIASymphony SP durante el examen de inventario.
- Durante el examen de inventario también se detecta el número de 8-Rod Covers contenidas en una caja unitaria.

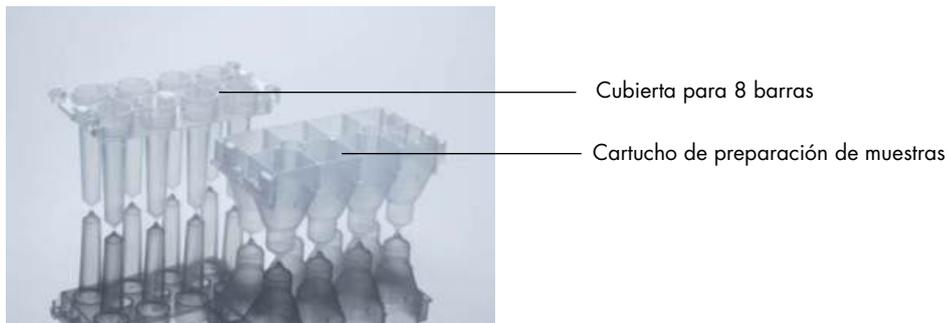

8-Rod Covers y cartucho de preparación de muestras.


Cartuchos de preparación de muestras

Los cartuchos de preparación de muestras son los recipientes que utiliza el instrumento QIASymphony SP durante la purificación de ácidos nucleicos. Cada pocillo de un cartucho de preparación de muestras tiene una capacidad máxima de 3 ml de líquido.

Los cartuchos de preparación de muestras se suministran en cajas unitarias selladas. Cada caja unitaria puede contener un máximo de 28 cartuchos. Un relieve específico en el borde superior e inferior de un cartucho de preparación de muestras permite su detección automática por el instrumento QIASymphony SP durante el examen de inventario. Durante el examen de inventario también se detecta el número de cartuchos de preparación de muestras contenidos en una caja unitaria. El sistema de manipulación robótica puede recoger un máximo de 3 cartuchos de preparación de muestras al mismo tiempo.

Gradillas de puntas

- El instrumento QIASymphony SP utiliza puntas con filtro de 1.500 µl y de 200 µl.
- Las puntas con filtro se suministran en envases alveolados sellados, con 32 puntas con filtro en una gradilla de puntas.
- Para facilitar su uso, las gradillas que contienen puntas con filtro de 1.500 µl son de color negro y las gradillas que contienen puntas con filtro de 200 µl son de color azul.
- Cada tipo de gradilla de puntas tiene un relieve diferente en los lados superior e inferior. Esto permite la detección del tipo de punta con filtro durante el examen de inventario.
- Hay 18 ranuras para gradillas de puntas.
- Las gradillas de puntas pueden colocarse en cualquiera de las ranuras, ya que durante el examen de inventario se detectan la posición de la gradilla, el tipo de punta y el número de puntas.
- El número de puntas necesario por muestra varía dependiendo del protocolo ejecutado.

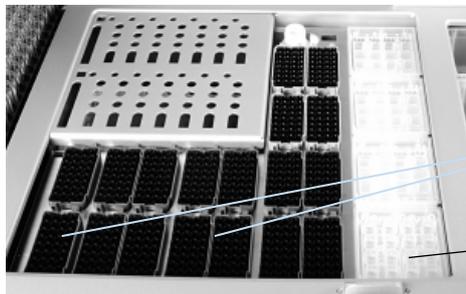

Ranuras para gradillas de puntas

Ranuras para cajas unitarias

Gradillas de puntas.

Para cargar gradillas de puntas en el instrumento QIASymphony SP, siga los pasos indicados a continuación.

1. Sujete la gradilla de puntas entre 2 dedos por las asas recortadas.
2. Comprima suavemente la gradilla de puntas y colóquela en una ranura para gradillas de puntas.

Nota: Para garantizar la detección de las gradillas de puntas durante el examen de inventario, asegúrese de que las gradillas de puntas están correctamente asentadas en la ranura para gradillas de puntas y de que ninguna de las protusiones de las gradillas de puntas está rota.

Nota: Cada tipo de punta contiene un filtro para prevenir la contaminación cruzada.

Recomendación: Cargue un número superior al necesario de puntas con filtro de cada tamaño con el objeto de tener suficientes puntas con filtro disponibles para la resolución automática de errores.

Además, recomendamos cargar las puntas preferiblemente en las ranuras para gradilla de puntas posteriores.

Si desea obtener más información sobre la carga de puntas, pulse el botón "R+C" para abrir la pantalla **Consumables/Cartridges/Filter-Tips** (Consumibles/Cartuchos/Puntas con filtro) o pulse el botón Tip Information (Información sobre las puntas) en la pantalla Loading Information del instrumento QIASymphony AS (consulte "Carga de puntas con filtro desechables", página 141).

Nota: No rellene gradillas de puntas parcialmente usadas. Una combinación de diversos tamaños de puntas en una gradilla generará un error durante la serie. Durante el examen de inventario se detectará el número de puntas con filtro.

8.4.2 Cartuchos de reactivos

El instrumento QIASymphony SP determina los cartuchos de reactivos necesarios a partir de los protocolos seleccionados por el usuario.

Los cartuchos de reactivos pueden proceder del mismo kit o de kits diferentes.

- Los reactivos necesarios para el procedimiento de purificación se suministran en cartuchos de reactivos prellenados y sellados.
- Pueden cargarse 2 cartuchos de reactivos como máximo en el cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles).
- Para facilitar su uso, los cartuchos de reactivos solamente caben en la orientación correcta.
 1. En primer lugar, el usuario agita el recipiente de partículas magnéticas en un agitador vorticial y, a continuación, retira el precinto del recipiente. (Consulte el manual del kit correspondiente para obtener información detallada).
 2. Quite las tapas de los tubos y colóquelos en la ranura apropiada para evitar confusiones.

Una vez instalada correctamente la tapa de perforación antes de proceder a la carga, el instrumento QIASymphony SP abre automáticamente el cartucho de reactivos, lo cual evita la manipulación y el vertido manuales de los reactivos.

Nota: La tapa de perforación tiene bordes afilados y puede romper los guantes.

- Cada reactivo individual del cartucho de reactivos está etiquetado con un código de barras 2D, lo cual permite el seguimiento de los reactivos durante todo el procedimiento de purificación.
- Antes de que comience la serie, el sistema comprueba si los volúmenes de reactivos son suficientes para el protocolo seleccionado.



- 1** Soporte del cartucho de reactivos
- 2** Soporte de partículas magnéticas
- 3** Recipientes de reactivos
- 4** Gradilla de enzimas
- 5** Tapa de perforación

El cartucho de reactivos contiene suficiente cantidad de reactivos para un máximo de 192 muestras, dependiendo del kit utilizado. Los recipientes de cartuchos de reactivos parcialmente usados deben sellarse inmediatamente después de su uso con tiras de sellado para reutilización (suministradas en el kit QIASymphony).

Nota: No rellene cartuchos de reactivos parcialmente usados ni cambie el cartucho de reactivos de un lote en curso, ya que esto puede causar errores de rendimiento y de pipeteo.

Nota: El tiempo que el cartucho de reactivos esté abierto debe ser el menor posible.

Todos los recipientes de reactivos y las gradillas de enzimas llevan una etiqueta en el lateral con el nombre de la disolución amortiguadora que contiene el recipiente. Un código de barras 2D exclusivo en la parte superior de cada recipiente permite al instrumento QIASymphony SP detectar el cartucho de reactivos y el contenido de cada recipiente.

La composición del cartucho de reactivos es específica para cada kit. No mezcle recipientes de diferentes kits o kits que tengan distintos números de lote.

Examine visualmente todos los recipientes de reactivos en busca de precipitados. Si existen precipitados, consulte el manual del kit QIASymphony que esté utilizando para obtener más información.

Nota: Asegúrese de que los reactivos y las enzimas se encuentran a temperatura ambiente (15-25 °C) antes de colocarlos en el cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles).

Nota: No esterilice en autoclave un cartucho de reactivos prellenado. No cambie el orden de los recipientes del cartucho de reactivos.

Nota: No agite el cartucho de reactivos, ya que esto puede crear espuma en las disoluciones amortiguadoras y causar errores en la detección del nivel de líquido.

8.4.3 Frasco de disolución amortiguadora

Dependiendo del kit utilizado, puede proporcionarse un frasco adicional de disolución amortiguadora. El frasco se suministra prellenado con un máximo de 60 ml de reactivo.

Para cargar el frasco de disolución amortiguadora en el instrumento QIASymphony SP, siga los pasos indicados a continuación.

1. Quite la tapa de rosca del frasco de disolución amortiguadora.
2. Pulse **Bottle ID** (Id. del frasco) en la pantalla **Load Reagents** (Cargar reactivos).
3. Escanee el código de barras del frasco de disolución amortiguadora con el escáner de códigos de barras de mano. De forma alternativa, introduzca el código de barras por medio de la pantalla **Keyboard** (Teclado).
4. Coloque el frasco en la ranura situada detrás del extremo posterior de las ranuras para gradillas de puntas 1 y 2.



Ranura del frasco de disolución amortiguadora.

El frasco de disolución amortiguadora y el volumen de disolución amortiguadora se detectarán automáticamente durante el examen de inventario.


8.4.4 Frasco de disolución amortiguadora

Si el procedimiento de purificación requiere etanol adicional, el usuario debe verterlo en un recipiente accesorio, que colocará a continuación en la ranura para gradillas de puntas 5 o 12. Estas ranuras pueden utilizarse para gradillas de puntas o para Accessory Troughs.

Si se requiere más etanol, consulte el manual del kit correspondiente para saber qué volumen debe utilizar.

Para cargar un recipiente accesorio en el instrumento QIASymphony SP, siga los pasos indicados a continuación.

1. Llene el o los Accessory Trough(s) con el volumen de etanol indicado en el manual del kit QIASymphony que esté utilizando.
2. Coloque el o los Accessory Trough(s) en la ranura para gradillas de puntas 5 o 12.

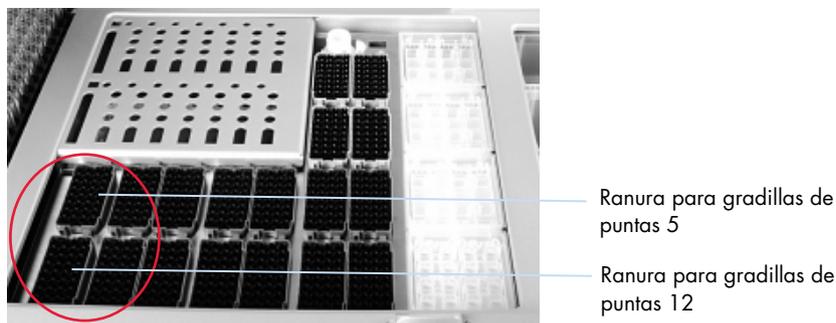

Posición de Accessory Trough(s).

Nota: Asegúrese de que el recipiente accesorio está correctamente asentado en la ranura para gradillas de puntas, ya que de lo contrario puede producirse un error durante el examen de inventario.

8.4.5 Descarga de reactivos y consumibles

Cartuchos de reactivos

Para extraer un cartucho de reactivos del cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles), siga los pasos indicados a continuación.

1. Abra el cajón.
2. Tire del cartucho de reactivos hacia la izquierda y extráigalo de la ranura.

Para evitar la evaporación de los reactivos, recomendamos volver a sellar los recipientes del cartucho de reactivos justo después de su uso. Vuelva a sellar los recipientes con las tiras de sellado para reutilización suministradas en los kits QIASymphony. Vuelva a colocar las tapas de rosca en los tubos de la gradilla de enzimas.

Para su almacenamiento, extraiga el cartucho de reactivos del soporte del cartucho de reactivos y almacénelo conforme a las instrucciones descritas en el manual del kit. Posteriormente puede utilizarse el soporte del cartucho de reactivos en combinación con otros kits. Almacene la gradilla de enzimas conforme a las instrucciones descritas en el manual del kit.

Si el cartucho de reactivos está vacío, extráigalo del soporte del cartucho de reactivos y deséchelo conforme a la normativa local en materia de seguridad.

Gradillas de puntas

Las gradillas de puntas pueden dejarse en el cajón “Reagents and Consumables” (Reactivos y consumibles). Solamente es necesario extraer las gradillas de puntas en las siguientes situaciones:

- Las gradillas de puntas están vacías.
- Se van a realizar tareas de mantenimiento (por ejemplo, descontaminación con la lámpara de luz ultravioleta).
- No se va a utilizar el instrumento durante un período largo de tiempo.

Para extraer una gradilla de puntas del instrumento QIASymphony SP, siga los pasos indicados a continuación.

1. Sujete la gradilla de puntas entre dos dedos por las asas recortadas.
2. Comprima suavemente la gradilla de puntas.
3. Extraiga la gradilla de puntas.
4. Si necesita extraer las gradillas de puntas antes de realizar procedimientos de mantenimiento, las gradillas de puntas pueden volver a colocarse una vez realizado el mantenimiento.

Cajas unitarias (cubiertas para 8 barras y cartuchos de preparación de muestras)

Las cajas unitarias pueden dejarse en el cajón “Reagents and Consumables” (Reactivos y consumibles). Solamente es necesario extraer las cajas unitarias en las siguientes situaciones:

- La caja unitaria está vacía.
- Se van a realizar tareas de mantenimiento (por ejemplo, descontaminación con la lámpara de luz ultravioleta).

Para extraer una caja unitaria del cajón “Reagents and Consumables” (Reactivos y consumibles), siga los pasos indicados a continuación.

1. Abra el cajón “Reagents and Consumables” (Reactivos y consumibles).
2. Sujete la caja unitaria por su borde superior.
3. Tire de ella para extraerla del cajón.
4. Vuelva a colocar las tapas de las cajas unitarias parcialmente usadas o no usadas.
5. Las cajas unitarias vacías deben guardarse para la recogida de cartuchos de preparación de muestras y cubiertas para 8 barras usados en el cajón “Waste” (Desechos).

8.5 Carga del cajón "Sample" (Muestras)

Las muestras pueden cargarse en el cajón "Sample" (Muestras) en tubos primarios o secundarios. Si desea obtener más información acerca de los tubos compatibles, visite www.qiagen.com/goto/QIASymphony.

El uso de soportes de tubos permite cargar muestras en diversos formatos. Con el instrumento QIASymphony SP, puede utilizarse un soporte de tubos con una capacidad máxima de 24 tubos primarios o tubos de controles internos de 8-16 mm de diámetro.

8.5.1 Carga de soportes de tubos

Carga de muestras con un soporte de tubos

El soporte de tubos QIASymphony SP admite un máximo de 24 tubos de muestras del siguiente diámetro externo:

- 14-16 mm (no se requiere un inserto)
- 13 mm (con el inserto para tubos 1a; n.º de cat. 9242058)
- 11 mm (con el inserto para tubos 2a; n.º de cat. 9242057)
- Insert Sarstedt tube 2 ml (con el inserto 3b; n.º de cat. 9242083)
- Insert snap cap tube (con el inserto 5a; n.º de cat. 9244701)



Ejemplo de inserto para soporte de tubos.

Nota: Coloque los tubos en el soporte de tubos de manera que todos los códigos de barras estén orientados hacia la izquierda para que puedan ser leídos por el lector de códigos de barras.

Nota: Según el **Configuration Profile** (Perfil de configuración), solo pueden usarse tubos de muestras que lleven una etiqueta de código de barras. Si se utilizan otros tubos, no podrá definirse un lote o serie.

El instrumento detecta el tamaño del tubo leyendo el código de barras del inserto o del soporte de tubos. Si se utiliza un tubo que no corresponde al tipo de tubo predeterminado para un determinado inserto, el usuario debe especificar el tipo de tubo al definir el lote de muestras. También pueden configurarse tubos predeterminados.

Introducción de muestras con un soporte de tubos

1. Abra el cajón "Sample" (Muestras) tirando de la puerta hacia usted.

Hay cinco ranuras disponibles: las cuatro primeras pueden alojar soportes de tubos que contengan tubos de muestras; la quinta ranura ("A") aloja un soporte de tubos que contiene un control interno.

El estado de cada ranura se muestra por los indicadores luminosos situados detrás de la línea de detención. Los indicadores luminosos pueden iluminarse en color verde, naranja o rojo.

Verde: la ranura está libre y lista para la carga.

Naranja: hay cargado un soporte de tubos.

Rojo: la ranura está actualmente bloqueada.



Ejemplos de iluminación de los indicadores luminosos de estado de las ranuras.

2. Deslice suavemente el soporte de tubos en la ranura correspondiente. Introdúzcalo hasta la línea de detención y espere a que el lector de códigos de barras haya avanzado.



Deslizamiento de un soporte de tubos en la ranura correspondiente.



Lector de códigos de barras (láser)

Separador

Ubicación del lector de códigos de barras y del separador.

3. En cuanto el lector de códigos de barras esté en posición, la ranura se desbloqueará y el indicador luminoso verde comenzará a parpadear. Deslice el soporte en la ranura hasta que se bloquee.
4. El lector de códigos de barras lee los códigos de barras del soporte, de los insertos y de los tubos correspondientes (si tienen códigos de barras). Cuando la carga se realice con éxito, el indicador luminoso cambiará de color verde a color naranja.
5. El lector de códigos de barras vuelve a la posición inicial.

6. Para añadir más tubos de muestras en ranuras diferentes, siga el procedimiento descrito en esta sección. De lo contrario, cierre el cajón "Sample" (Muestras).

Nota: Asegúrese de sujetar el soporte de tubos con su otra mano durante el proceso de carga. De lo contrario, existe el riesgo de que se rompa el asa.

Nota: Asegúrese de deslizar el soporte suavemente en la ranura, ya que de lo contrario puede producirse un error.

Nota: En la "Slot A" (Ranura A) puede cargarse exclusivamente un soporte de tubos que contenga un control interno. Los soportes de tubos que contengan muestras deben cargarse en las "Slot 1" (Ranura 1), "Slot 2" (Ranura 2,) "Slot 3" (Ranura 3) o "Slot 4" (Ranura 4).

Nota: Si necesita cargar dos tubos con el mismo código de barras/identificador en el mismo soporte de tubos, no los coloque en posición contigua. De lo contrario, se producirá un error.

Nota: Si está utilizando tubos de muestras que no están etiquetados con códigos de barras y que se encuentran en insertos diferentes, use un tipo de inserto por soporte de tubos o deje al menos una posición vacía entre tipos diferentes de inserto.

Nota: Si utiliza tubos de muestras no etiquetados con códigos de barras y el instrumento QIASymphony SP tiene una configuración distinta de la configuración 3, es posible que no se detecten tubos que contengan volúmenes más pequeños de líquido o líquidos transparentes. En este caso, utilice una etiqueta de código de barras en blanco para permitir la detección del tubo de muestras.

Nota: Para garantizar la detección correcta del nivel de líquido, empuje los tubos hacia el fondo del soporte de tubos o inserto, si se utilizan insertos.

Carga continua

También es posible cargar y poner en cola muestras adicionales cuando la serie ya esté en curso. En este modo, solamente puede asignar juegos de controles del ensayo que sean compatibles con el cartucho de reactivos actualmente cargado.

La carga continua en el instrumento QIASymphony SP es posible para un máximo de 96 muestras en cualquier número de lotes, siempre que el cajón de consumibles esté completamente cargado antes de comenzar el primer lote.

Después de cargar las muestras, el sistema permite al usuario corregir los errores de lectura de códigos de barras, cambiar el material de laboratorio, asignar juegos de controles de ensayo y definir la ranura de elución y el volumen correspondiente.

Antes de iniciar una serie con carga continua, haga las siguientes comprobaciones:

- Se han cargado suficientes puntas, reactivos, espacio para desechos y consumibles para todas las series, incluidas series subsiguientes cargadas mediante el proceso de carga continua.
- La gradilla de elución está correctamente colocada en el cajón "Eluate" (Eluidos) antes de preparar un lote. Si necesita asignar una ranura de elución durante la preparación de lotes (mientras una serie está activa), solamente podrán utilizarse las ranuras que ya contengan gradillas.
- Las gradillas de elución se preparan antes del inicio de una serie. Esto garantiza que no se realicen varios exámenes del cajón "Eluate" (Eluidos). Cada vez que se realiza un examen, se pone en pausa la serie en curso.

Descarga de un soporte de tubos

Si la ranura para soportes de tubos no está bloqueada (el indicador luminoso no está iluminado en rojo), el soporte de tubos puede simplemente extraerse de la ranura. El soporte de tubos puede extraerse en cuanto se hayan transferido las muestras.

Dependiendo del estado de los lotes, pueden realizarse diferentes acciones después de extraer el soporte de tubos.

Extracción de un lote cargado en el soporte de tubos

Si las muestras están cargadas en un soporte de tubos, es posible extraer el lote.

Estado	Acción	Descripción
QUEUED (En cola), STOPPED (Detenido) o COMPLETED (Finalizado)	Simplemente extraiga el soporte de tubos de la ranura correspondiente.	El soporte de tubos no se extrajo antes de la detención o finalización del lote.
STOPPED (DETENIDO) o COMPLETED (FINALIZADO)		El soporte de tubos se extrajo antes de la finalización del lote.

Para extraer un lote cargado en el soporte de tubos, siga los pasos indicados a continuación.



1. Pulse el botón **SP Batch** (Lote del SP) en la pantalla **Sample Preparation/Overview** (Preparación de muestras/Resumen).

Aparecerá un mensaje que le preguntará si desea extraer el lote.



2. Pulse **Yes** (Sí) para confirmar.

Carga de controles internos

Si un protocolo requiere el uso de un control interno, el control interno que se utilizará se define en el juego de controles del ensayo correspondiente. La asignación de un juego de controles del ensayo a una muestra no especifica únicamente qué protocolo debe utilizarse, sino también qué control interno debe añadirse a la muestra.

El instrumento QIA Symphony SP admite el uso de controles internos únicamente en combinación con muestras que estén bloqueadas en un soporte de tubos.

Nota: Los controles internos deben cargarse por medio de un soporte de tubos en la ranura de muestras "Slot A" (Ranura A).

Nota: No cargue los controles internos en las "Slots 1-4" (Ranuras 1-4).

Pueden utilizarse ocho controles internos diferentes por lote de 24 muestras y hasta 24 controles internos diferentes por serie. Los tubos que contienen controles internos deben colocarse en el inserto apropiado para el tipo de tubo antes de cargarlos en el soporte de tubos.

La carga de los controles internos necesarios para los lotes solicitados se valida antes del comienzo de la serie.

Si los tubos que contienen controles internos tienen etiquetas de código de barras y la identificación de los tubos está definida en un juego de controles del ensayo, el instrumento QIA Symphony SP detectará automáticamente qué control interno hay en cada posición.


Si los tubos no tienen etiquetas de código de barras, la información sobre el control interno deberá introducirse manualmente.

Tras insertar el soporte de tubos en la "Slot A" (Ranura A), siga los pasos indicados a continuación para introducir información sobre el control interno.




1. Pulse el botón **IC** (Control interno) para comprobar o modificar los controles internos.

Aparecerá la pantalla **Internal Controls** (Controles internos).

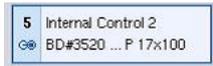

2. Seleccione la posición que necesita la asignación manual de un control interno pulsando el botón.

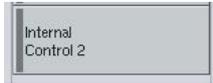

3. Seleccione el control interno en la lista **Internal controls** (Controles internos).



4. Pulse **OK** (Aceptar) para asignar los controles internos a las posiciones seleccionadas.



5. Pulse **OK** (Aceptar) para confirmar las asignaciones globales del control interno.

Los controles internos están ordenados en 3 grupos:

Opcional Todos los controles internos reconocidos por el instrumento que no están clasificados como "Required" (Necesarios) o "In use" (En uso) aparecen en la categoría "Optional" (Opcional).

Necesarios Hay lotes en cola. El instrumento QIAsymphony SP sabe qué controles internos son necesarios para ejecutar los lotes en cola. Los controles internos necesarios no se detectan automáticamente y deben asignarse a las posiciones detectadas.

En uso El instrumento QIASymphony SP ha detectado automáticamente un control interno o este ha sido asignado manualmente a una posición concreta del quinto soporte de tubos. Estos controles internos aparecen bajo la categoría "In use" (En uso).

Nota: Si el control interno tenía una etiqueta de código de barras pero este no se leyó correctamente, el botón de posición asociado cambiará al color amarillo. Para continuar, el control interno deberá asignarse manualmente utilizando los controles internos mostrados en la lista **Internal controls** (Controles internos). Si el control interno no tenía una etiqueta de código de barras, pero el instrumento QIASymphony SP detectó la presencia de un tubo, se mostrará **Unknown IC** (Control interno desconocido) en la posición correspondiente. Deberá asignarse manualmente el control interno utilizando los controles internos mostrados en la lista **Internal controls** (Controles internos).


Nota: Aunque puede salir de esta pantalla sin asignar manualmente las posiciones marcadas como **Unknown IC** (Control interno desconocido), asegúrese de asignar todos los controles internos necesarios antes de iniciar una serie, ya que de lo contrario no podrá iniciarse la serie.

Descarga de controles internos

Los controles internos colocados en un soporte de tubos pueden extraerse del instrumento QIASymphony SP cuando la ranura para soportes está desbloqueada.

- Si los lotes están en ejecución y necesita cargar controles internos adicionales, pulse el botón **IC** (Control interno) para desbloquear la ranura para soportes "Slot A" (Ranura A).
- Si el instrumento QIASymphony SP no necesita acceder al soporte de tubos de la ranura "Slot A" (Ranura A), pueden descargarse los controles internos.
- Extraiga el soporte con los controles internos de la ranura "Slot A" (Ranura A) deslizándolo suavemente hacia fuera para extraerlo del cajón "Sample" (Muestras).

El estado de los controles internos cambia de **LOADED** (CARGADO) a **ON HOLD** (EN ESPERA). El instrumento QIASymphony SP conservará la información sobre los controles internos anteriormente proporcionada.

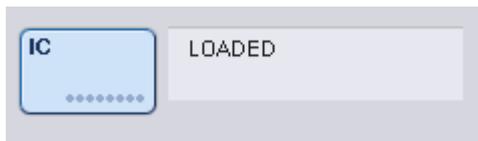

En las condiciones descritas, se vería **ON HOLD** (EN ESPERA) si aparece **LOADED** (CARGADO) en la imagen anterior.

Carga de controles internos durante una serie

Después de descargar el soporte de tubos que contiene el control interno, debe introducirse de nuevo el soporte de tubos que contiene un control interno nuevo. Defina los controles internos tal como se describe en “Carga de controles internos”, página 82.

Si desea obtener más información, consulte la sección 2.20.4, “Carga de controles internos durante una serie”, del *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Uso del instrumento QIASymphony SP*.

8.5.2 Carga del soporte de placas

El soporte de placas también puede utilizarse para la entrada de muestras. Si desea obtener más información, consulte el *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Descripción general*. Si tiene previsto usar el soporte de placas, póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.

8.6 Realización de exámenes de inventario (SP)

Para poder ejecutar un protocolo de preparación de muestras debe realizarse antes un examen de inventario de cada cajón del instrumento QIASymphony SP. El instrumento QIASymphony SP utiliza un láser para comprobar el tipo y el número de los consumibles, así como el tipo y la ubicación de los adaptadores cargados en cada cajón. Un sistema de detección de códigos de barras reconoce y escanea códigos de barras 1D o 2D (por ejemplo, en el cartucho de reactivos). El láser y la cámara de códigos de barras están integrados en el brazo robótico. Esto permite escanear posiciones sobre toda la mesa de trabajo. El examen de inventario es específico del cajón. Esto significa que solamente se examinará en busca de cambios el cajón que se haya abierto.

8.6.1 Examen de inventario del cajón “Reagents and Consumables” (Reactivos y consumibles)

El examen de inventario del cajón “Reagents and Consumables” (Reactivos y consumibles) se divide en 2 partes principales, cada una con varias subpartes.

Examen con láser: cartucho de reactivos

Se escanean las ranuras para cartuchos de reactivos. El instrumento comprobará primero si el cartucho de reactivos tiene recipientes sellados.

Nota: Si olvida colocar la tapa sobre el cartucho de reactivos, pueden perderse las muestras del lote. Sin embargo, la presencia de la tapa de perforación se detecta durante el examen de inventario, por lo que el error se detectará antes de que comience la serie.

Nota: Asegúrese de que el sensor tiene acceso a todos los códigos de barras 2D.

Se comprueban los códigos de barras 2D de los recipientes de reactivos, el recipiente de partículas magnéticas y la gradilla de enzimas. Además, se comprueba el estado de perforación del cartucho de reactivos.



Códigos de barras 2D

- Si el cartucho de reactivos está sellado y sin perforar, el nivel de líquido de todos los reactivos del cartucho de reactivos se configura con el valor original. No se realizará una comprobación adicional del nivel de líquido.
- Se escanean las dos ranuras para cartuchos de reactivos.

Nota: Asegúrese de que los recipientes de disolución amortiguadora encajan correctamente dentro del cartucho de reactivos; de lo contrario, pueden producirse errores de detección del nivel de líquido.

Nota: No agite el cartucho de reactivos, ya que esto puede crear espuma en las disoluciones amortiguadoras y causar errores en la detección del nivel de líquido.

Nota: No rellene cartuchos de reactivos parcialmente usados ni cambie el cartucho de reactivos de un lote en curso, ya que esto puede causar errores de rendimiento o de pipeteo.

Nota: No mezcle gradillas de enzimas, recipientes de disolución amortiguadora o recipientes de partículas magnéticas de cartuchos de reactivos diferentes o con distintos números de lote.

Examen con láser: ranuras para gradillas de puntas

- Se escanean las 18 ranuras para gradillas de puntas para determinar el tipo de gradilla de puntas cargado.
- Se escanean todas las ranuras para gradillas de puntas en las que se haya detectado una gradilla de puntas para determinar el número de puntas. Si se detecta una punta en la primera y en la última posición de la gradilla de puntas, la gradilla se clasificará como llena. Si no se detectan la primera o la última puntas, se realizará un examen completo para determinar el número de puntas que contiene la gradilla de puntas.

Examen con láser: cajas unitarias

- Se escanean las ranuras para cajas unitarias para detectar la presencia de cajas unitarias en las 4 ranuras.
- A continuación se determinan el tipo (cubierta para 8 barras o cartucho de preparación de muestras) y el número de los consumibles.

Examen del nivel de líquido de los reactivos detectados

Este examen solamente se realiza si no se conoce el nivel de líquido (por ejemplo, para un cartucho de reactivos parcialmente usado).

- Examen del nivel de líquido de los reactivos detectados.
- Comprobación del nivel de líquido del frasco de disolución amortiguadora (si se detecta).
- Comprobación del nivel de líquido del recipiente accesorio (si se detecta).

Nota: El examen de inventario solamente permitirá detectar el nivel de líquido de recipientes abiertos y reconocidos.

Nota: Estas comprobaciones utilizan puntas con filtro de 1.500 µl y de 200 µl. Si no se dispone de puntas suficientes o si falta uno de los tipos de puntas, se cancelará el examen de inventario y no podrán iniciarse los lotes de muestras en cola.

Examen de inventario parcial

Si necesita repetir un examen de inventario del cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles) (por ejemplo, si se ha producido un cambio en la mesa de trabajo), puede realizar un examen de inventario parcial.

The screenshot shows a software interface for confirming an inventory scan. At the top left, there is a question mark icon and the text "Do you want to start the inventory scan on 'Reagents and Consumables drawer'?" with a small ID number "71703" below it. The interface contains five rows of items, each with "Yes" and "No" buttons. The "Reagents" row has the "Yes" button selected. At the bottom, there are three buttons: "Scan", "No, nothing changed", and "Scan later".

Item	Yes	No
Tip Racks	<input type="button" value="Yes"/>	<input checked="" type="button" value="No"/>
Unit Boxes	<input type="button" value="Yes"/>	<input checked="" type="button" value="No"/>
Reagents	<input checked="" type="button" value="Yes"/>	<input type="button" value="No"/>
Buffer Bottle (optional)	<input type="button" value="Yes"/>	<input checked="" type="button" value="No"/>
Accessory Trough (optional)	<input type="button" value="Yes"/>	<input checked="" type="button" value="No"/>

Buttons at the bottom:

8.6.2 Examen de inventario del cajón "Waste" (Desechos)

El examen de inventario del cajón "Waste" (Desechos) consiste en un examen con láser. No realiza un examen de códigos de barras 2D, una detección del nivel de líquido ni comprobaciones del recipiente de desechos líquidos. Por consiguiente, es importante que el usuario compruebe el recipiente de desechos líquidos y que lo vacíe antes de iniciar un lote.

Examen con láser

- Se escanea la ranura de la estación de almacenamiento de puntas. Se comprueba si está montada la estación de almacenamiento de puntas.
- Se escanea la ranura del conducto para puntas. Se comprueba que esté instalado el conducto para puntas.
- Se escanean las ranuras para cajas unitarias. En primer lugar, se escanea cada una de las 4 ranuras para cajas unitarias para detectar si hay una caja unitaria en la ranura. Posteriormente, se determina el contenido de cada caja (por ejemplo, cantidad y tipo de consumibles contenidos en cada caja).

8.6.3 Examen de inventario del cajón "Eluate" (Eluidos)

El instrumento QIASymphony SP comprueba las ranuras de elución para asegurarse de que las ranuras de elución elegidas contienen una gradilla de elución. Puede seleccionar las ranuras de elución en las que se escanearán los códigos de barras de los adaptadores en la ficha **Process SP 1** (Proceso del SP 1) del menú **Configuration** (Configuración) (es decir, ninguna o 1-4).

Si el instrumento QIASymphony SP detecta una discrepancia entre las gradillas de elución esperadas y reales cargadas en el cajón "Eluate" (Eluidos), aparecerá un mensaje en la pantalla táctil para indicar al usuario que corrija el problema. Abra el cajón "Eluate" (Eluidos) y coloque las gradillas de elución en las posiciones correctas o modifique la asignación de ranuras/gradillas en la pantalla táctil.

Aparecerá un mensaje en las siguientes situaciones:

- El código de barras detectado y el código de barras del adaptador especificado en el archivo de material de laboratorio son diferentes.
- Se detecta un código de barras, pero el archivo de material de laboratorio seleccionado no especifica un código de barras de adaptador.
- No se detecta un código de barras, pero el archivo de material de laboratorio seleccionado especifica un código de barras de adaptador que es necesario.

Nota: El instrumento QIASymphony SP solamente detecta si una ranura de elución está ocupada por una gradilla de elución o por un adaptador, y no puede identificar el tipo de gradilla de elución contenido en la ranura de elución respectiva.

8.7 Inicio, pausa, reanudación y detención de una serie

8.7.1 Inicio de una serie

Tan pronto como un lote está en cola, aparece el botón **Run** (Serie).

Cuando haya terminado de definir las muestras que desea procesar, pulse el botón **Run** (Serie). A continuación, el software validará los lotes.

8.7.2 Puesta en pausa de una serie

Es posible poner en pausa una serie pulsado el botón **Pause SP** (Pausar el SP) en la ficha **Sample Preparation** (Preparación de las muestras). Si se pone en pausa una serie, el comando procesado finalizará antes de que se ponga en pausa la serie. Se pondrán en pausa todos los lotes en curso.

Si se pone en pausa la serie, hay dos opciones disponibles: la serie puede reanudarse o detenerse.

Nota: Al poner en pausa una serie se interrumpe el procedimiento de preparación de las muestras. Ponga en pausa una serie solamente en caso de emergencia.

Nota: La puesta en pausa de una serie puede causar que las muestras procesadas se marquen como "unclear" (dudosas).

8.7.3 Reanudación de una serie

Para reanudar una serie, pulse el botón **Continue SP** (Continuar SP). Si la serie se había puesto en pausa, las muestras se marcarán como "unclear" (dudosas).

8.7.4 Detención de una serie

Pulse el botón **Stop SP** (Detener SP) para detener la serie. Se detendrán todos los lotes que se estén procesando actualmente. Podrán procesarse otros lotes que tengan el estado **QUEUED** (En cola) en otra serie después de realizar el procedimiento de limpieza.

Si se detiene la serie, todas las muestras procesadas se marcarán como “invalid” (no válidas). No se podrá seguir procesando estas muestras más adelante ni reanudar la serie.

Serie cancelada

Después de detener una serie o si la serie se detiene a causa de un error, el botón “S” parpadea (consulte “Botones de cajones”, página 50). Pulse el botón “S” para mostrar el mensaje de advertencia o de error. Este mensaje muestra indicaciones para realizar el procedimiento de limpieza en la pantalla **Maintenance SP** (Mantenimiento del SP).

Nota: Tras una limpieza satisfactoria, es necesario vaciar todas las posiciones de ranuras de los cajones “Sample” (Muestras) y “Eluate” (Eluidos). A continuación, se pueden definir e iniciar nuevas series.

8.8 Final del procesamiento de lotes o de una serie

Nota: Si se han transferido los eluidos de un lote finalizado o de una serie detenida a una gradilla de elución destinada únicamente a eluidos de este lote, la gradilla de elución puede extraerse una vez finalizado el procesamiento del lote.

1. Descargue las gradillas de elución.
2. Descargue los soportes de tubos que contienen muestras procesadas.
3. Opcional: Descargue los controles internos (si no son necesarios para el siguiente lote de muestras).
4. Extraiga el cartucho de reactivos (si no es necesario para el siguiente lote de muestras). Selle los recipientes con tiras de sellado para reutilización y almacénelos conforme a las instrucciones descritas en el manual del kit.

8.9 Final del día de trabajo

1. Vacíe el recipiente de desechos líquidos.
2. Descargue las cajas unitarias del cajón de desechos.
3. Descargue todas las gradillas de elución.
4. Extraiga los consumibles, los cartuchos de reactivos, el frasco de disolución amortiguadora y los Accessory Troughs.
5. Realice los procedimientos de mantenimiento descritos en la sección 9 del *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS — Descripción general*.

Si desea obtener más información sobre la descarga de reactivos y consumibles, consulte la sección 8.4.5.

Nota: Asegúrese de sellar los cartuchos de reactivos parcialmente usados con tiras de sellado para reutilización. Almacene los cartuchos de reactivos parcialmente usados conforme a las instrucciones descritas en el manual del kit.

Nota: Los cartuchos de preparación de muestras que se encuentran en las cajas unitarias pueden contener líquido residual de la serie de extracción. Asegúrese de sellar las cajas unitarias con tapas antes de la eliminación para evitar que se derrame líquido residual.


9 Definiciones de series en el instrumento QIASymphony SP

En esta sección, se describe cómo preparar y configurar una serie de preparación de muestras.

9.1 Configuración de un tipo de muestra

Nota: El tipo de muestra predeterminado es "Sample" (Muestras). Si el instrumento QIASymphony SP no está conectado a un instrumento QIASymphony AS, ignore esta sección.

Para cambiar una muestra a un control de extracción positivo (EC+) o a un control de extracción negativo (EC-), siga los pasos indicados a continuación para garantizar un procesamiento correcto en el instrumento QIASymphony AS.

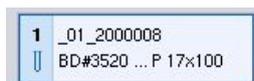


1. Pulse **ID/Type** (Id./Tipo) en la pantalla **Sample Preparation/Batch/Define Sample** (Preparación de muestras/Lote/Definir muestra).
2. Seleccione las muestras para las que se cambiará el tipo de muestra; para ello, pulse los botones correspondientes.
3. Pulse **EC+** o **EC-** para cambiar el tipo de muestra de "Sample" (Muestras) a control externo positivo (EC+) o a control externo negativo (EC-).

Nota: Los tipos de muestras se guardan en el archivo de gradilla para la gradilla de elución correspondiente. No es posible cambiar los tipos de muestras posteriormente.

9.2 Uso de códigos de barras virtuales

Según su configuración, el instrumento QIASymphony SP puede generar códigos de barras virtuales únicos para los tubos que no tienen etiquetas con códigos de barras físicos. La nomenclatura del código de barras es la siguiente: "**_Position number_Unique batch ID**" (_Número de posición_Identificador de lote exclusivo) (por ej., _01_1000031). Las posiciones que no estén incluidas en la serie, se pueden eliminar con el botón "Clear" (Borrar).

Si el software está configurado para generar códigos de barras virtuales y asignarlos a los tubos de muestras que no tengan etiquetas de código de barras, no es necesario que realice ninguna otra acción.

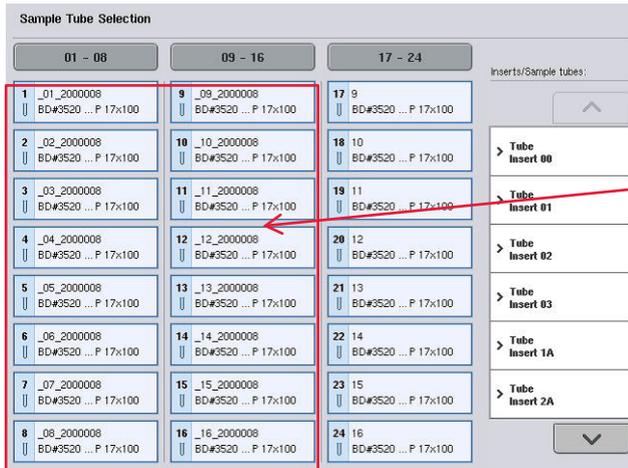

Tubos de muestras sin etiquetas de código de barras en las posiciones 1-16

9.3 Definición de un lote/serie (puesta en cola)

9.3.1 Muestras cargadas en el soporte de tubos

Asignación de juegos de controles de ensayo diferentes a un lote de muestras


Para asignar muestras a un lote, siga los pasos que se describen en las secciones “Without work list” (Sin lista de trabajo) o “With work list” (Con lista de trabajo), más adelante.

Sin lista de trabajo

1. Después de cargar un soporte de tubos, pulse el botón **SP Batch** (Lote de SP).



2. Introduzca o cambie los identificadores de muestras o el material de laboratorio, si es necesario. Pulse **Next** (Siguiete) cuando haya terminado.
3. Seleccione las muestras que deben procesarse con un juego de controles de ensayo concreto pulsando los botones de posición.
4. Seleccione la aplicación en la lista **Application/ACS** (Aplicaciones/ACS) en la que aparece el juego de controles de ensayo. La lista muestra todos los juegos de controles de ensayo disponibles para la aplicación seleccionada.
5. Seleccione el juego de controles del ensayo que debe usarse con las muestras seleccionadas.
6. En cuanto se haya seleccionado el primer juego de controles del ensayo, solamente se mostrarán los juegos de controles del ensayo que puedan ejecutarse con ese protocolo.

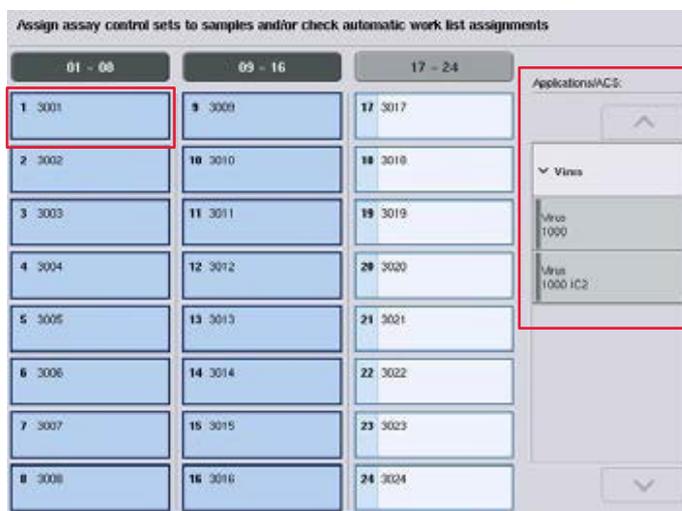


7. Repita los pasos 2-5 para asignar juegos de controles del ensayo a las otras muestras.
Nota: Solo puede ejecutarse un protocolo en un lote de 24 muestras.



8. Pulse **Next** (Siguiete) para continuar el flujo de trabajo de definición del lote.


9. Seleccione la ranura de elución para el lote que desee definir pulsando el botón de la ranura correspondiente.

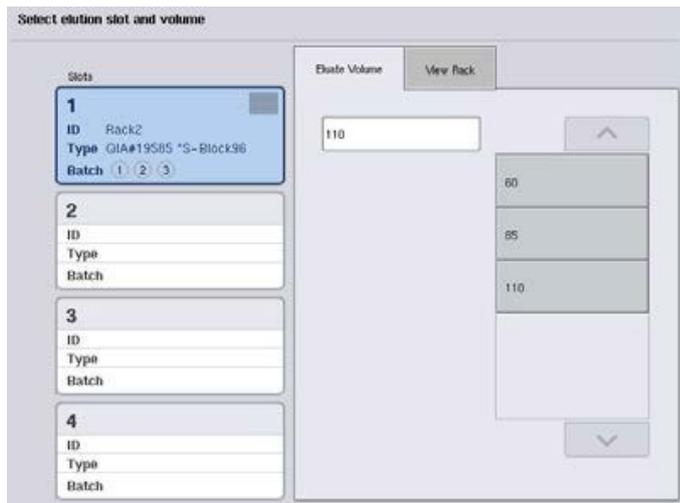

10. Para sobrescribir el volumen de elución predeterminado, seleccione en la lista el volumen de elución necesario pulsando el botón apropiado.
11. Pulse **Queue** (Poner en cola) o **Finish** (Finalizar) para finalizar el flujo de trabajo de definición del lote.

Con lista de trabajo


1. Si se han identificado correctamente todos los tubos de muestras y no hay muestras sin identificar ni entradas duplicadas (dependiendo de la configuración del software del instrumento QIAAsymphony SP), pulse el botón **Next** (Siguiete) para continuar con el proceso de definición del lote.

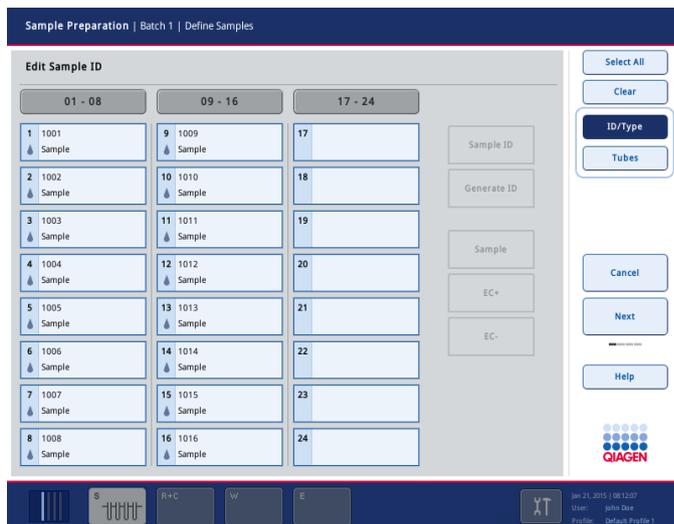

2. El instrumento QIAasymphony SP comprueba si hay asignaciones de listas de trabajo para las muestras cargadas del lote que se está definiendo.
3. Seleccione las listas de trabajo que desee utilizar para definir el lote. Para seleccionar una lista de trabajo, pulse su botón en la lista **Available Work Lists** (Listas de trabajo disponibles) y, a continuación, pulse el botón de flecha hacia la derecha. La lista de trabajo pasará al panel **Selected Work Lists** (Listas de trabajo seleccionadas).


Nota: Una vez seleccionada una lista de trabajo, solamente se mostrarán en la lista de listas de trabajo disponibles las listas de trabajo que sean compatibles con la lista de trabajo seleccionada.

Nota: Para anular la selección de una lista de trabajo, selecciónela en el campo **Selected Work Lists** (Listas de trabajo seleccionadas) y, a continuación, pulse el botón de flecha hacia la izquierda. A continuación, la lista de trabajo pasará al panel **Available Work Lists** (Listas de trabajo disponibles).

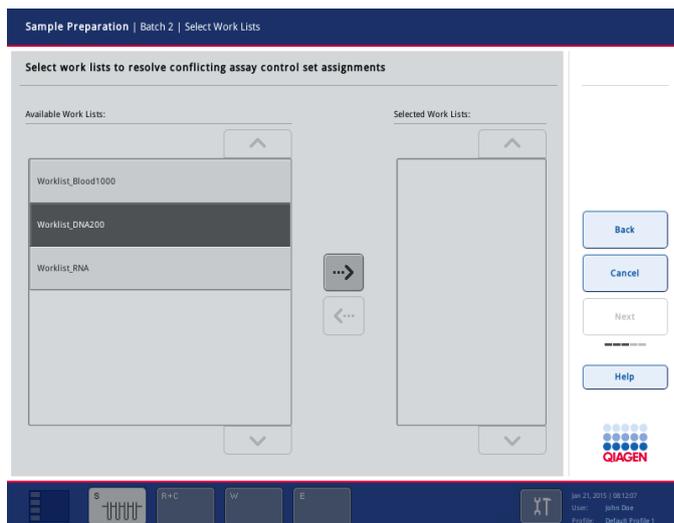


4. Pulse **Next** (Siguiente) para continuar.

5. Para las muestras asociadas a una lista de trabajo, se asignarán automáticamente los juegos de controles del ensayo definidos en la lista de trabajo. Estas muestras presentan el indicador  en la esquina inferior derecha. Para procesar muestras no asociadas a una lista de trabajo, deben asignarse juegos de controles de ensayo.

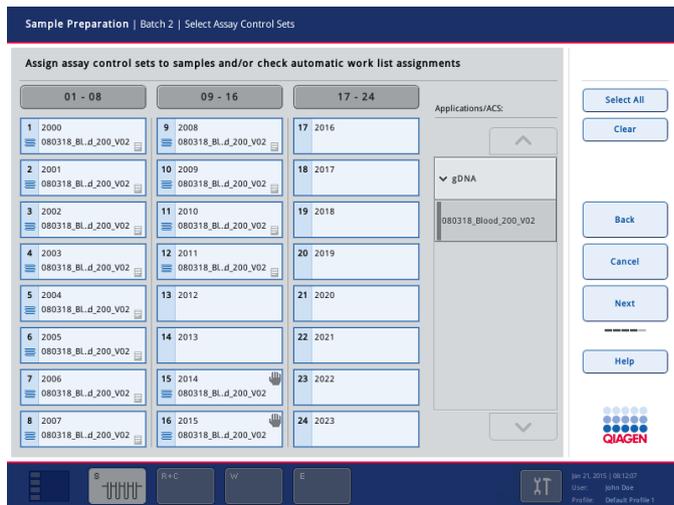

6. Pulse **Next** (Siguiete) para continuar el flujo de trabajo de definición del lote.

7. Seleccione la ranura de elución para el lote que desee definir pulsando el botón de la ranura correspondiente.

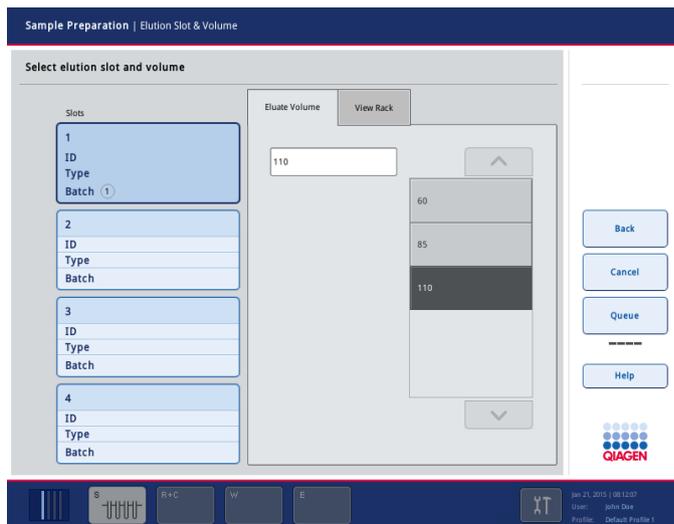

8. Para sobrescribir el volumen de elución predeterminado, seleccione en la lista el volumen de elución necesario pulsando el botón apropiado. Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la lista de volúmenes de elución disponibles.



9. Pulse el botón **Queue** (Poner en cola) para finalizar el flujo de trabajo de definición del lote.

10 Características del instrumento QIASymphony AS

El instrumento QIASymphony AS realiza la preparación totalmente automática de ensayos utilizando un sistema de pipeteo de 4 canales y se comunica directamente con el instrumento QIASymphony SP, lo cual permite la automatización de flujos de trabajo completos. Durante la preparación de ensayos, la pantalla táctil muestra la interfaz del usuario para la preparación de ensayos, que proporciona información sobre las series de ensayos, incluido su progreso.

Pueden prepararse uno o varios ensayos por serie de ensayos, y la mezcla maestra puede premezclarse o puede ser preparada por el instrumento. El instrumento QIASymphony AS se proporciona con protocolos predefinidos, diseñados específicamente para usarse con kits de PCR en tiempo real y de punto final de QIAGEN. Estos protocolos se denominan definiciones de ensayo. Los conjuntos de parámetros del ensayo definen los parámetros para un protocolo. Estos archivos, incluidos otros archivos del instrumento QIASymphony AS (por ejemplo, archivos de termociclador, archivos de resultados), pueden transferirse a y desde los instrumentos QIASymphony SP/AS a través de los puertos USB del instrumento QIASymphony SP.

Una vez definida una serie de ensayos, el software calcula automáticamente los requisitos de la mesa de trabajo para una serie definida (por ejemplo, número y tipo de puntas con filtro, volumen de reactivo). Un examen automático de inventario (que se realiza al cerrar los cajones o antes del inicio de una serie de ensayos) garantiza que los distintos cajones están correctamente preparados para la serie de ensayos definida. Es posible recargar puntas con filtro durante una serie.

Hay 2 modos de funcionamiento del sistema según los requisitos del flujo de trabajo del usuario: independiente e integrado. Si desea obtener información detallada, consulte las secciones 12.1.1 y 12.1.2.

Consulte las instrucciones para el módulo de transferencia en la sección 8.3.3.

10.1 Principio del instrumento QIASymphony AS

Una serie de preparación de ensayos con el instrumento QIASymphony AS suele constar de 3 pasos principales: preparación de la mezcla maestra, distribución de la mezcla maestra y transferencia de plantillas (por ejemplo, muestras, controles del ensayo y estándares del ensayo).

1. La mezcla maestra se prepara con los reactivos necesarios. El volumen de cada componente de la mezcla maestra depende del número de reacciones que se desee preparar. Tras la preparación, se realiza un paso de mezclado para garantizar la homogeneidad de la mezcla maestra.

Nota: Si se utiliza una mezcla maestra lista para usar, el paso de mezclado no se realizará.

Si las muestras extraídas ya contienen control interno, debe proporcionarse una mezcla maestra para los controles de ensayo y para los estándares de ensayo que contienen control interno, así como para las muestras sin control interno.

2. Se distribuye la mezcla maestra en las posiciones apropiadas de las placas/tubos en el cajón "Assays" (Ensayos).
3. Se transfieren los controles del ensayo, los estándares del ensayo y las muestras a las posiciones apropiadas de las placas/tubos en el cajón "Assays" (Ensayos).

10.2 Características del instrumento



1 Adaptadores de entrada (posiciones de transferencia)

2 Adaptadores de entrada

3 Adaptadores de salida para PCR

4 Puntas desechables

5 Puntas de desecho

6 Cajón "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos)

7 Cajón "Assays" (Ensayos)

8 Brazo robótico

10.2.1 Tapa del instrumento QIASymphony AS

Durante una serie de preparación de ensayos, la tapa del instrumento QIASymphony AS se bloquea. Si abre a la fuerza la tapa durante una serie de ensayos, la serie se pondrá en pausa.

Nota: Si se abre la tapa del instrumento QIASymphony AS, el instrumento no se detendrá inmediatamente. El instrumento se detendrá cuando haya finalizado el procesamiento del paso en curso del protocolo. En algunos casos esto puede tardar cierto tiempo.

10.2.2 Indicadores luminosos de estado del instrumento QIASymphony

Los indicadores luminosos situados en la parte frontal del instrumento QIASymphony AS se iluminan cuando hay una serie de ensayos en curso. Los indicadores luminosos de estado parpadean al finalizar una serie de ensayos o si se produce un error. Los indicadores luminosos dejan de parpadear si se toca la pantalla.

10.2.3 Brazo robótico

Este elemento es el mismo que para el instrumento QIASymphony SP, excepto que no admite un sujetador robótico. El cabezal de pipetas del instrumento QIASymphony AS puede dispensar 2-1500 µl (según la aplicación y el líquido). Como parte del examen de inventario de los cajones "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos) y "Assays" (Ensayos), la cámara de códigos de barras 2D del brazo robótico identifica las ranuras ocupadas y vacías y los tipos de adaptadores correspondientes.

11 Cajones del instrumento QIASymphony AS

11.1 Cajón "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos)

Los ácidos nucleicos purificados pueden transferirse al cajón "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos) desde el cajón "Eluate" (Eluidos) del instrumento QIASymphony SP mediante transferencia automática (por medio del módulo de transferencia) o mediante transferencia manual. El cajón "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos) tiene 3 posiciones (ranuras 1, 2 y 3) que cuentan con opciones para refrigeración y que pueden alojar placas y tubos en adaptadores especiales. Las ranuras 1 y 2 pueden utilizarse para alojar gradillas para muestras, y las ranuras 1 y 3 pueden utilizarse para alojar gradillas para reactivos. La ranura 1 puede definirse como ranura de muestras o como ranura de reactivos, según proceda. Además, hay 6 posiciones que pueden utilizarse para alojar puntas con filtro desechables en gradillas de puntas.

Se dispone de adaptadores para los siguientes tipos de consumibles:

- Placas de 96 pocillos
- Microplacas
- Tubos de tapa de rosca Sarstedt
- Placas de PCR
- Microtubos con tapa a presión
- Elution Microtubes CL (microtubos de elución CL) (n.º de cat. 19588)

Si desea obtener más información acerca de los tipos de placas de 96 pocillos y tubos que pueden usarse en el cajón "Eluate and Reagents", así como los nombres correspondientes utilizados en el software, visite www.qiagen.com/goto/QIASymphony.

Se dispone de soportes de reactivos para alojar reactivos en tubos de 2 ml y 5 ml y en frascos de 30 ml:

- Soporte de reactivos 1 (18 tubos de 2 ml, 6 tubos de 5 ml)
- Soporte de reactivos 2 (18 tubos de 2 ml, 2 tubos de 5 ml, 2 frascos de 30 ml)
- Microtubo con tapa de rosca QS (24 tubos de 2 ml)

11.1.1 Puntas con filtro

El instrumento QIASymphony AS utiliza las mismas puntas con filtro desechables que el instrumento QIASymphony SP. Además de las puntas con filtro de 200 µl y 1.500 µl, el instrumento QIASymphony AS utiliza también puntas con filtro de 50 µl. Las gradillas para puntas que contienen puntas con filtro de 50 µl son de color gris.

Nota: Utilice únicamente puntas con filtro diseñadas para utilizarse con los instrumentos QIASymphony SP/AS.

11.2 Cajón "Assays" (Ensayos)

Los ensayos se preparan en placas o tubos en el cajón "Assays" (Ensayos). El cajón "Assays" (Ensayos) tiene 3 posiciones (ranuras 4, 5 y 6) que pueden refrigerarse y que se utilizan para alojar gradillas de ensayos en adaptadores especiales. También tiene 6 posiciones que pueden utilizarse para alojar puntas con filtro desechables en gradillas de puntas (consulte la sección 11.1.1 si desea obtener más información acerca de las puntas con filtro desechables).

Nota: Para el análisis subsiguiente en el instrumento Rotor-Gene® Q, los ensayos también pueden prepararse en discos Rotor-Disc. En este caso, las ranuras 4-6 deben cubrirse con la unidad de base de adaptadores para discos Rotor-Disc® QS y un máximo de 2 bloques de carga Rotor-Disc 72. A continuación, pueden colocarse discos Rotor-Disc 72 en cada Rotor-Disc 72 Loading Block.

Nota: Los ensayos que incluyen un paso de normalización pueden usar la ranura 6 para colocar una gradilla de normalización (y, si es necesario, se puede añadir la ranura 4 para una dilución de dos pasos). En caso de que sea necesaria una gradilla de normalización, no puede usarse la ranura 6 (y potencialmente la ranura 4) para una gradilla de ensayos.

Nota: No mezcle reactivos de lotes diferentes; los instrumentos QIASymphony SP/AS no podrán registrar dichas mezclas.

Se dispone de adaptadores para los siguientes tipos de consumibles:

- Placas de PCR de 96 pocillos
- Tubos en tira Rotor-Gene
- Rotor-Disc 72
- Tubos capilares de vidrio (20 µl) (para uso con el instrumento LightCycler®)

Si desea obtener más información acerca de los tipos de placas y tubos que pueden usarse en el cajón "Assays" (Ensayos), así como los nombres correspondientes utilizados en el software, visite www.qiagen.com/goto/QIASymphony.

12 Funciones básicas del instrumento QIASymphony AS.

12.1 Definiciones

12.1.1 Funcionamiento independiente

Los instrumentos QIASymphony SP y QIASymphony AS pueden funcionar de forma independiente entre sí. Pueden realizarse dos series independientes (una en el instrumento QIASymphony SP y otra en el instrumento QIASymphony AS) al mismo tiempo de manera que ninguna de ellas influya en la otra.

También es posible realizar una serie independiente en el instrumento QIASymphony SP y, a continuación, transferir los eluidos por medio del módulo de transferencia al instrumento QIASymphony AS. Aquí, las muestras pueden procesarse en una serie de preparación de ensayos independiente. En este caso, primero deberá realizarse la definición de la serie de preparación de muestras y, una vez transferida la gradilla de eluidos al instrumento QIASymphony AS, se realizará la definición de la serie de preparación de ensayos.



Funcionamiento independiente.

12.1.2 Funcionamiento integrado

Una serie integrada consta de una serie de preparación de muestras en el instrumento QIAAsymphony SP y, a continuación, una serie de preparación de ensayos en el instrumento QIAAsymphony AS. Los eluidos se transfieren automáticamente del instrumento QIAAsymphony SP al instrumento QIAAsymphony AS a través del módulo de transferencia sin intervención del usuario. La serie integrada se define en el software para el flujo de trabajo completo antes de iniciar la serie.



Funcionamiento integrado.

12.1.3 Serie con normalización

El instrumento QIAAsymphony AS puede realizar una normalización de un paso y una de dos pasos (es decir, dilución de eluidos de concentración conocida a las concentraciones deseadas) antes de la preparación de ensayos. Para la normalización, el archivo de datos de concentración puede generarse con el Concentration Data Editor (Editor de datos de concentración) en el programa QIAAsymphony Management Console (QMC). Si desea conocer más detalles, consulte la sección 7 del Manual del usuario de *QIAAsymphony Management Console*.

Si se necesita una normalización de dos pasos, se lleva a cabo un paso de predilución previa adicional. Esta opción está disponible para la mayoría de las definiciones de ensayo en combinación con un archivo de definición de normalización, disponible a petición en QIAGEN Applications Laboratory. Póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN si desea obtener más información.

Nota: Durante el proceso de normalización, se prepara la dilución en una o dos gradillas de normalización. Puesto que QIAsymphony también crea archivos de gradilla para las gradillas de normalización, el usuario puede utilizar la gradilla de normalización como una gradilla de eluidos común y reutilizarla para definir una serie subsiguiente.

12.1.4 Curva estándar

El instrumento QIAsymphony AS puede realizar diluciones seriadas de estándares utilizando una solución estándar concentrada y una disolución amortiguadora de dilución, ambas suministradas por el usuario. Esta función solo está disponible si así se ha definido en un ensayo. Esta opción puede ser habilitada a petición por QIAGEN Applications Laboratory. Póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN si desea obtener más información.

12.2 Preparación de una serie

Antes de definir una serie, deben configurarse en el software los adaptadores y soportes disponibles. Si se van a utilizar listas de trabajo y archivos de gradilla en la serie, estos archivos deben transferirse a los instrumentos QIAsymphony SP/AS.

Si desea obtener información detallada acerca de la transferencia de archivos de proceso, listas de trabajo, archivos de gradilla y archivos de datos de concentración, consulte la sección 6.


12.2.1 Ensayos favoritos

En el modo integrado, pueden definirse ensayos favoritos personalizados que permiten una asignación más rápida en la pantalla de configuración del modo **Integrated Operation** (Funcionamiento integrado).



1. Pulse la ficha **Tools** (Herramientas) y seleccione **Assay Favorites** (Ensayos favoritos).

Aparecerá la pantalla **Define Assay Favorites** (Definir ensayos favoritos), como se muestra a continuación.

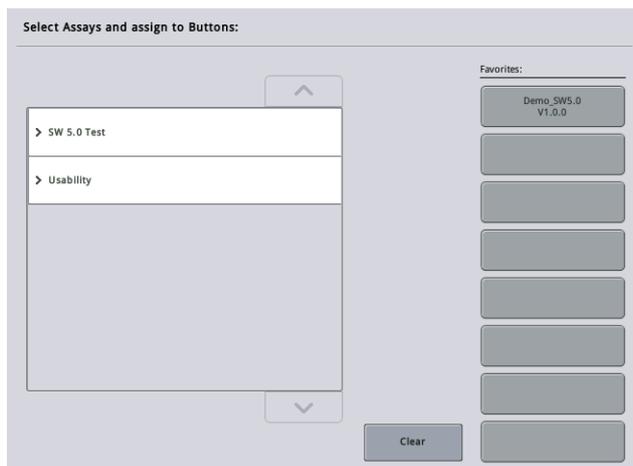

El cuadro de diálogo incluye una lista que muestra los ensayos disponibles para **Integrated Setup** (Configuración integrada) y el conjunto de botones de favoritos idénticos a los de la pantalla **Integrated Setup** (Configuración integrada).

2. Seleccione el ensayo que desea asignar como favorito.



3. Asigne el ensayo seleccionado a un botón en blanco seleccionado de la lista de botones **Favorites** (Favoritos). El ensayo se mostrará en el botón de favorito asignado.



4. Pulse **Save** (Guardar).

Los cambios se guardan en los datos del usuario, lo cual permite una configuración de los botones **Favorites** (Favoritos) específica del usuario.



5. Para quitar un ensayo de la lista de favoritos, seleccione el botón y, a continuación, pulse **Clear** (Borrar).



El ensayo seleccionado se eliminará de la lista **Assay Favorites** (Ensayos favoritos).



6. Si se pulsa **Cancel** (Cancelar), aparecerá un mensaje que advierte que se perderán todos los cambios.

12.3 Serie integrada

Siga los pasos indicados a continuación después de encender el instrumento e iniciar sesión como usuario.

1. Cargue todos los elementos de los instrumentos QIASymphony SP/AS retirados anteriormente durante el mantenimiento, si todavía no lo ha hecho (por ejemplo, conductos para puntas, recogegotas, protectores del cabezal magnético, bolsas para eliminación de puntas, frasco de desechos vacío y estación de almacenamiento de puntas). Cierre las tapas de los instrumentos QIASymphony SP/AS.
2. Pase a la interfaz de usuario de **Integrated Run** (Serie integrada).
3. Cargue el cajón "Waste" (Desechos) del instrumento QIASymphony SP.
4. Cargue la gradilla correcta en el cajón "Eluate" (Eluidos) dentro del adaptador de refrigeración correspondiente junto con el marco de transferencia en la "Elution slot 1" (Ranura de elución 1). Asigne la gradilla de eluidos a la "Elution slot 1" (Ranura de elución 1) en la pantalla táctil e inicie el examen.
5. Cargue el cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles) para la preparación de muestras según se indica en el manual del kit utilizado.
6. Pulse **Define Run** (Definir serie) para definir una serie integrada en los instrumentos QIASymphony SP/AS.


7. Cargue el cajón "Sample" (Muestras) con las muestras y, de forma opcional, con los controles internos.
8. Pulse **Edit Samples** (Editar muestras) para comprobar o cambiar los tipos de tubos de muestras y los insertos. Los tubos predeterminados están predefinidos para los insertos en la configuración y pueden cambiarse.
9. Pulse **Define Assays** (Definir ensayos) para asignar ensayos a posiciones de muestras o utilice los botones **Assay Favorites** (Ensayos favoritos) definidos anteriormente para asignar ensayos a las posiciones de muestras.
10. Cree lotes del AS con los lotes del SP definidos.
11. Ponga en cola la serie integrada pulsando **OK** (Aceptar).
12. **Optional** (Opcional): Defina controles internos.
13. Inicie la serie integrada pulsando **Run** (Serie).
14. Mientras se procesa la serie integrada en el instrumento QIASymphony SP, cargue el instrumento QIASymphony AS. Abra los cajones "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos) y "Assays" (Ensayos).
15. Cargue las gradillas de ensayos en los adaptadores prerrefrigerados apropiados y colóquelos en las ranuras "Assay" (Ensayo).
16. Pulse el botón naranja **Assay Rack** (Gradilla de ensayos) y pulse **Load** (Cargar) en la siguiente pantalla para cargar las gradillas de ensayos virtualmente.
17. Llene cada tubo de reactivo con el volumen necesario del reactivo correspondiente y coloque los tubos de reactivos, sin las tapas, en las posiciones apropiadas de los adaptadores prerrefrigerados para reactivos.
18. Pulse el botón naranja **Reagent Rack** (Gradilla de reactivos) y pulse **Load** (Cargar) en la siguiente pantalla para cargar las gradillas de reactivos virtualmente.
19. Coloque los adaptadores para ensayos preparados en las ranuras apropiadas.
Nota: Asegúrese de que los reactivos están completamente descongelados. Introduzca un código de barras de kit para cada kit de ensayo QIAGEN utilizado.
20. Cargue puntas con filtro desechables en los cajones "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos) y "Assays" (Ensayos). Cargue al menos el número necesario de cada tipo de punta.
21. Cierre los cajones "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos) y "Assays" (Ensayos) e inicie el examen de inventario.
22. La preparación de ensayos comenzará automáticamente una vez que se haya realizado con éxito el examen de inventario y cuando haya finalizado la preparación de las muestras para el lote integrado.
23. Si se procesa más de un lote integrado, quite el lote integrado previamente finalizado en la pantalla **Integrated Setup** (Configuración integrada). Vuelva a cargar los cajones "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos) y "Assays" (Ensayos) del QIASymphony AS para continuar con el siguiente lote del AS.

12.3.1 Definición de una serie integrada

Al definir una serie integrada, aparecerán en la pantalla táctil pantallas que le guiarán por los pasos pertinentes.

Solo es posible definir una serie integrada si se han cargado una gradilla de eluidos y un marco de transferencia en la "Eluate slot 1" (Ranura de elución 1) del instrumento QIASymphony SP. Para ahorrar tiempo, el sistema comprueba el marco de transferencia durante el examen de inventario de los soportes de gradillas.

Seleccione la ficha **Integrated Run** (Serie integrada) en la pantalla de resumen y, a continuación, pulse **Define Run** (Definir serie).

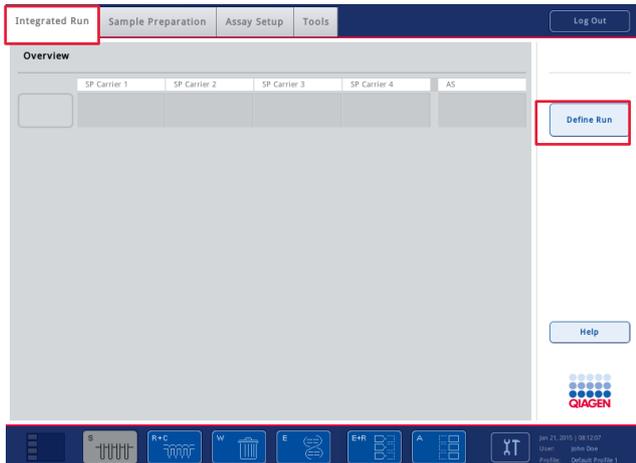


Aparecerá la pantalla **Integrated Setup** (Configuración integrada).

Si aparece un mensaje de error, consulte la sección 14 para obtener información sobre cómo resolver el problema.

La pantalla **Integrated Setup** (Configuración integrada) muestra un resumen de los lotes definidos y/o permite definir lotes.

Para definir un lote, siga los pasos indicados a continuación.

1. Seleccione el botón del lote. Edite las muestras (esto incluye resolver los errores en los identificadores de muestras de los tubos de muestras).
2. Asigne un ensayo a todas las muestras de un lote.
3. Defina los ensayos para un lote.
4. Cree o quite lotes del AS de su lote del SP relacionado.

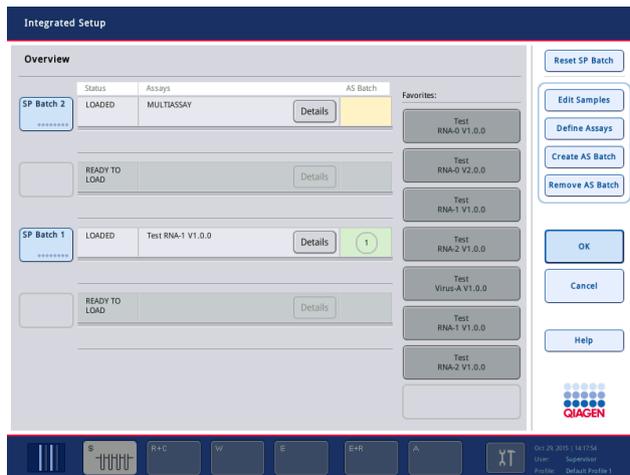

Una serie integrada consta de uno o más lotes integrados. Un lote integrado es una combinación de uno o más lotes del SP y un lote del AS. Por lo tanto, en un lote del AS pueden procesarse los eluidos de varios lotes del SP.

Asignación de ensayos a posiciones de muestras

Los ensayos pueden asignarse a muestras por medio de:

- Ensayos **Favorite** (Favoritos)
- La pantalla **Assay Assignment** (Asignación de ensayos) (asignación manual).
- Listas de trabajo

Ensayos favoritos

En primer lugar, prepare una lista de ensayos **Favorite** (Favoritos) (consulte la sección 12.2.1) y, a continuación, siga los pasos que se indican abajo.

1. Seleccione los lotes del SP que desee.
2. Seleccione el ensayo **Favorite** (Favorito) que desee.


Asignación de ensayos mediante la pantalla Assay Assignment (Asignación de ensayos)



1. Seleccione el lote del SP.



2. Pulse **Define Assays** (Definir ensayos) en la pantalla **Integrated Setup** (Configuración integrada).

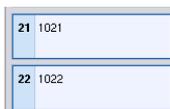

3. Aparecerá la pantalla **Assay Assignment** (Asignación de ensayos). En esta pantalla, pueden asignarse ensayos a posiciones de muestras específicas.

4. Seleccione las posiciones de muestras a las que debe asignarse el ensayo.

Las posiciones se mostrarán en color azul claro antes de su selección y en color azul oscuro después de su selección.



5. De forma alternativa, pulse **Select All** (Seleccionar todo) para seleccionar todas las muestras.


6. Seleccione el ensayo que desee en la lista **Assays** (Ensayos).

Los ensayos seleccionados se asignarán a las posiciones seleccionadas. Aparecerá un número en la esquina inferior derecha de las posiciones de muestras asignadas. Este número indica el número de ensayos que se han asignado a una muestra concreta.



7. Si tiene que asignar más de un ensayo, repita los pasos 4 y 5 para todos los ensayos.

Hay una ficha independiente para cada ensayo asignado. Cuando se selecciona una ficha de ensayo, todas las muestras que tienen asignado este ensayo aparecen en color verde y tienen el mismo número específico del ensayo en la esquina inferior izquierda de la posición de muestra.

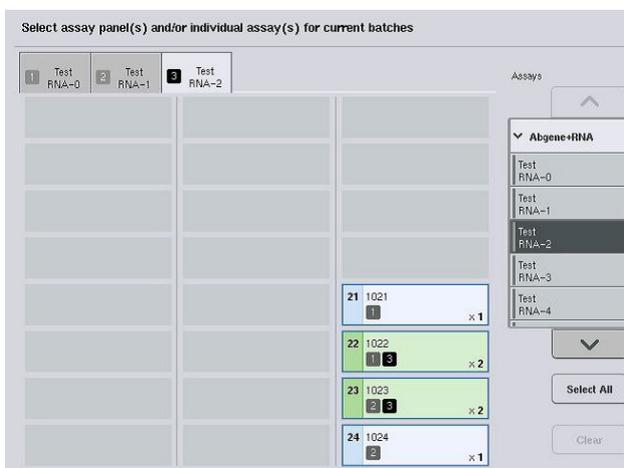

8. Pulse **OK** (Aceptar). El botón **OK** (Aceptar) queda inactivo cuando existe al menos un conflicto.

Modificación de las especificaciones de ensayos

Según la definición de ensayos, es posible modificar ciertas especificaciones de ensayos para la serie definida.

Nota: Para los conjuntos de parámetros de ensayo de tipo "Read only" (Solo lectura), está garantizado que, al definir una serie, solo puede modificarse el número de duplicados utilizando la pantalla táctil.

Nota: No es posible modificar ensayos en el modo de lista de trabajo.



1. Pulse el botón **Specification** (Especificación). Aparecerá la pantalla **Assay Specifications** (Especificaciones del ensayo).
2. Seleccione los ensayos para los que se cambiará el parámetro en las fichas.
3. Pulse **Yes** (Sí) o **No** para definir si se utilizará o no una mezcla maestra lista para usar.

Los parámetros aparecen bajo los encabezados **Sample** (Muestras), **Assay controls** (Controles del ensayo) y **Assay standards** (Estándares del ensayo).

4. Pulse uno de estos encabezados para ver una lista de parámetros. Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la lista.

Dependiendo del ensayo, no se verán algunos encabezados.


5. Modifique los parámetros que desee.

Después de modificar un parámetro, se mostrará el símbolo de una mano en la ficha de ensayo activa. Después de modificar los parámetros del ensayo, aparece el símbolo de una mano.

6. Si es necesario modificar los parámetros para más de un ensayo, repita los pasos 2-5 para los demás ensayos.



7. Para sobrescribir el volumen de elución predeterminado, en la lista **Eluate Volume** (Volumen de eluido), en la parte izquierda de la pantalla, pulse el botón correspondiente para seleccionar el volumen de elución necesario.

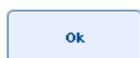

8. Pulse **OK** (Aceptar) para guardar los cambios y volver a la pantalla **Assay Assignment** (Asignación de ensayos).


Nota: Si se modifican los parámetros, los cambios no se guardarán en los ensayos. Solamente se utilizarán para la serie en curso. Para cambiar los parámetros de un ensayo para series futuras, utilice la herramienta de edición **Process Definition** (Definición del proceso) del programa QIASymphony Management Console.

Asignación de ensayos por medio de listas de trabajo

Si se utilizan listas de trabajo, los ensayos se asignan automáticamente a muestras por medio de sus códigos de barras escritos, según esté definido en las listas de trabajo. Los lotes que tengan ensayos asignados a ellos por las listas de trabajo aparecen marcados con un símbolo de lista de trabajo (rodeado con un círculo en la imagen siguiente) en la columna **Assays** (Ensayos). Según la configuración, las asignaciones pueden editarse en la pantalla **Assay Assignment** (Asignación de ensayos) pulsando el botón **Define Assays** (Definir ensayos).

Nota: Si la secuencia reconocida en el soporte de muestras no es la misma que la secuencia de muestras en la lista de trabajo, es posible que aparezca una advertencia. (Para obtener más información, consulte el parámetro "Warn, if sample sequence differs from work list entry sequence?" (¿Advertir, si la secuencia de muestras difiere de la secuencia de entrada de la lista de trabajo?) en la sección 6.2.2 del *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS — Descripción general*).

Nota: Si se ha asignado la lista de trabajo, el juego de controles del ensayo se asigna automáticamente a las muestras en las que el identificador de muestra coincide con el identificador de muestra definido en la lista de trabajo. Según el valor de configuración, es posible que no se pueda cambiar esta asignación automática.

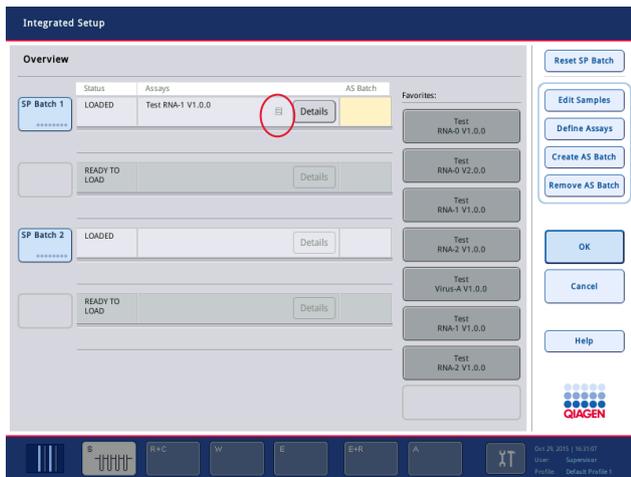

Creación de lotes del AS

Un lote del AS puede crearse a partir de un lote del SP o de más de un lote del SP.

Para crear un lote del AS, siga los pasos indicados a continuación.



- En la pantalla **Overview** (Resumen) de la configuración integrada, pulse uno o más lotes del SP para seleccionarlos.
- Una vez seleccionados, los botones de los lotes cambiarán a color gris.



- Pulse el botón **Create AS Batch** (Crear lote del AS).

Se creará un lote del AS para los lotes del SP seleccionados. Aparecerá un número en la columna **AS Batch** (Lote del AS). Este número indica a qué lote del AS está vinculado un lote del SP concreto.



- Pulse **OK** (Aceptar).



Los lotes integrados creados se ponen en cola. Posteriormente, aparecerá la **Main Screen** (Pantalla principal).


Nota: Para desvincular un lote del AS de un lote del SP, pulse el o los lotes del SP para seleccionarlos y, a continuación, pulse **Remove AS Batch** (Quitar lote del AS).

Definición de controles internos



1. En primer lugar, cargue los controles internos en la ranura "Slot A" (Ranura A) del cajón "Sample" (Muestras).
2. Pulse el botón IC (Control interno) en la ficha **Integrated Run** (Serie integrada). Aparecerá la pantalla **Sample**


Preparation/Internal Controls (Preparación de muestras/Controles internos).

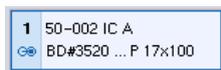

3. Pulse los controles internos cargados para seleccionarlos.




4. Si el tipo de tubo es diferente del predeterminado, pulse el botón **IC Tubes** (Tubos de control interno) y seleccione un tipo de tubo.

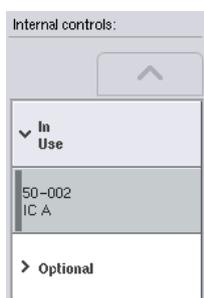

5. Seleccione un control interno de la lista **Internal controls** (Controles internos). El control interno seleccionado se asignará a los controles internos cargados seleccionados.

6. Pulse **OK** (Aceptar).

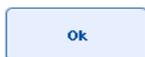


Los controles internos seleccionados se asignarán a los tubos de control interno seleccionados. Aparecerá de nuevo la pantalla **Integrated Run Overview** (Resumen de la serie integrada).

Inicio de una serie integrada

1. Cargue la mesa de trabajo del instrumento QIASymphony SP.
2. Inicie la serie integrada pulsando **Run** (Serie).
3. Mientras se procesa la serie integrada, cargue la mesa de trabajo del instrumento QIASymphony AS.

Modificación de una serie integrada

Si ya se ha definido una serie integrada, la pantalla **Integrated Run** (Serie integrada) muestra el estado de todos los lotes integrados definidos y la relación entre los lotes del SP y los lotes del AS.

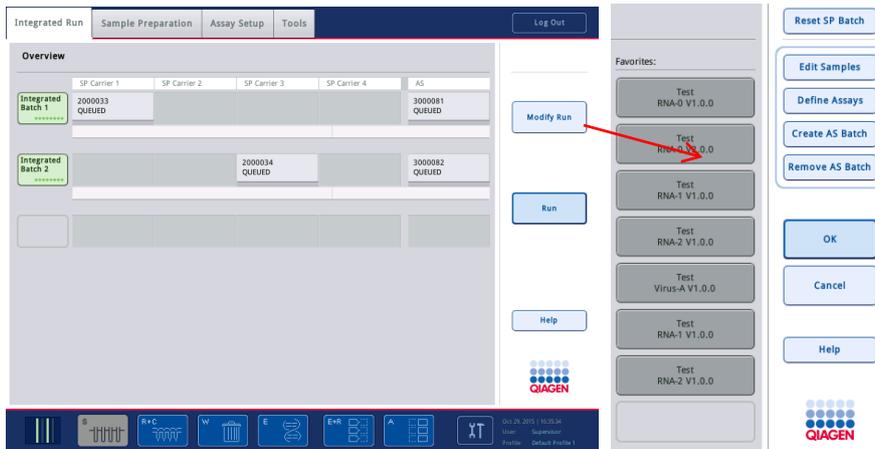

1. Pulse **Modify Run** (Modificar serie). Aparecerá la ventana **Integrated Setup** (Configuración integrada) mostrando un resumen de los lotes definidos.
2. Use el botón **Remove AS Batch** (Quitar lote del AS) para quitar un lote del AS de la serie integrada del lote del SP relacionado. El botón no estará disponible si no se ha iniciado un lote del AS.
3. El botón **Edit Samples** (Editar muestras) permite solucionar errores de lectura de códigos de barras de los tubos de muestras. Además, es posible modificar los identificadores de muestras, los tipos de muestras y el material de laboratorio de las muestras.
4. Asigne el ensayo a todas las muestras del lote con los botones favoritos.
5. Defina los ensayos para un lote.
6. Use el botón **Create AS Batch** (Crear lote del AS) para asignar un lote del AS a uno o más lotes del SP.

Nota: Es posible cambiar el orden de procesamiento de los lotes en una serie integrada; para ello, descargue, vuelva a cargar y redefina manualmente un lote integrado.

Nota: Tenga en cuenta que si usa las funciones **Modify Run** (Modificar serie) y **Create AS Batch** (Crear lote del AS) después de que una serie integrada esté en cola, el orden en el que el sistema procesa los lotes del SP y del AS podría ser diferente al orden en el que los lotes se procesarían si los lotes del AS se hubiesen creado antes de poner en cola la serie integrada.

Si desea obtener información más detallada, consulte el Apéndice A del *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Uso del instrumento QIASymphony AS*.

Nota: Se debe asignar al menos un ensayo a las muestras del lote del QIASymphony SP.

Nota: Esta acción también se puede realizar para los lotes completados del QIASymphony SP, lo que permite la preparación automática de ensayos de las muestras para las que ya se realizó la purificación.


12.3.2 Carga de una serie integrada

Primero, cargue el instrumento QIASymphony SP. A continuación, cargue el instrumento QIASymphony AS.

Opcional: cargue el instrumento QIASymphony AS mientras el QIASymphony SP está en ejecución.

Esta sección describe cómo cargar muestras, reactivos y consumibles en el instrumento QIASymphony AS.


Además, la pantalla **Loading Information** (Información de carga) proporciona un resumen del material de laboratorio, de los consumibles y de los adaptadores necesarios para una serie. Se muestran el número y el tipo de puntas con filtro necesarias. Pulse en una ranura concreta si desea obtener información más detallada.

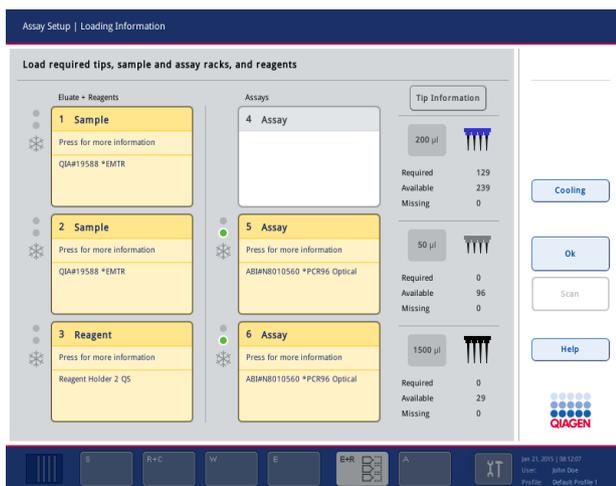

Carga de gradillas de muestras

Ranuras de muestras

Pulse en una ranura de muestra si desea obtener información detallada sobre la carga. Aparece un diagrama esquemático de la gradilla de muestras.

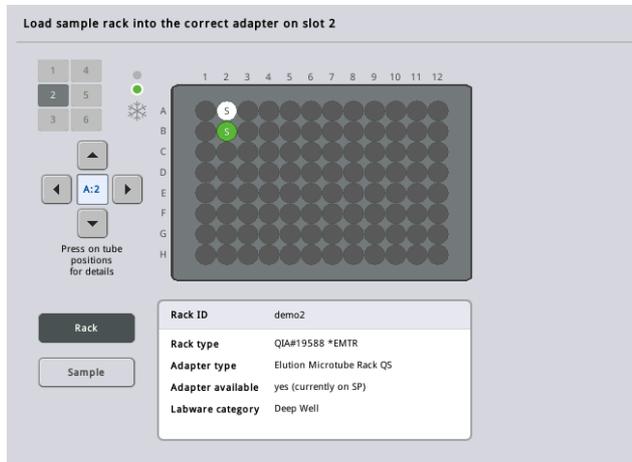

Pulse en una posición individual para ver información sobre una muestra concreta. También puede usar las flechas para seleccionar una posición. Al pulsar **Sample** (Muestras) se muestran el identificador de muestra, el tipo de muestra, el estado y el volumen de la muestra, así como el ensayo al que se ha asignado esta muestra.


Para ver información sobre todas las muestras de la gradilla de muestras en formato tabular, pulse **List View** (Vista de lista).

Nota: La gradilla de muestras se transfiere del instrumento QIASymphony SP al instrumento QIASymphony AS. Por ello, no es necesario cargar la gradilla de muestras en el instrumento QIASymphony AS para una serie integrada.

Carga de gradillas de ensayos

Ranuras de "Assay" (Ensayos)

Pulse en una ranura de ensayo para obtener información detallada sobre la carga. Aparece un diagrama esquemático de la gradilla de ensayos.

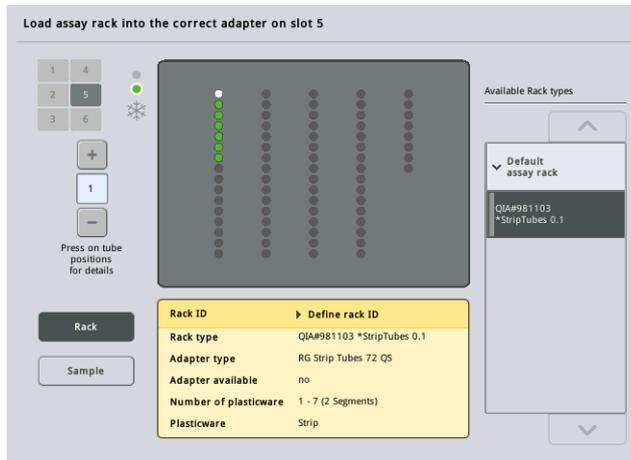


Pulse en una posición individual para ver información sobre la muestra de esa posición. También puede usar las flechas para seleccionar una posición. Al pulsar **Sample** (Muestras), se muestran el identificador de muestra, el tipo de muestra, el estado y el volumen, así como el ensayo al que se ha asignado esta muestra.

Para ver información sobre todas las posiciones de la gradilla de ensayos en formato tabular, pulse **List View** (Vista de lista).

Gradillas de ensayos


El software calcula el número necesario de gradillas de ensayos. El número máximo de gradillas de ensayos es 3. Si una serie de ensayos tiene un paso de normalización, se pueden usar hasta 2 gradillas de ensayos. Si se usa una dilución de dos pasos, en función del número de muestras, podrían necesitarse 2 posiciones de normalización (ranura 4 y ranura 6). Si se utiliza un disco Rotor-Disc como gradilla de ensayos, las ranuras 4-6 estarán cubiertas por la unidad de base de adaptadores para discos Rotor-Disc QS. Puede utilizarse un máximo de 2 discos Rotor-Disc.

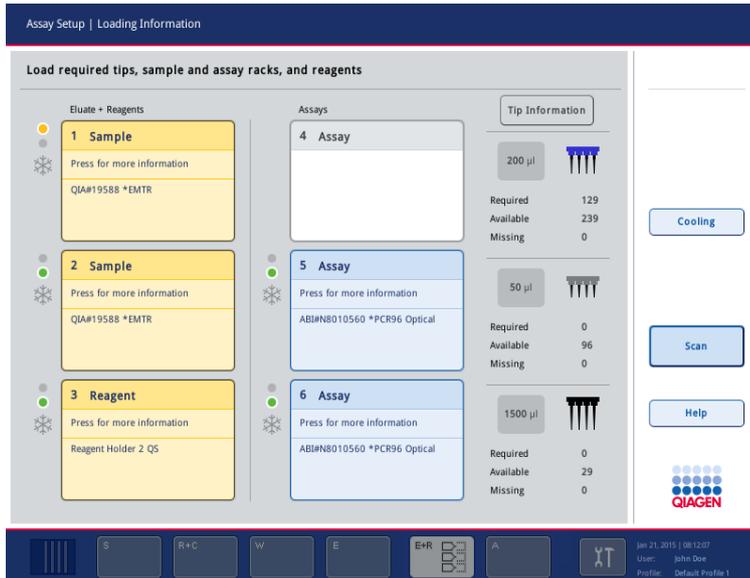

Pantalla **Loading information** (Información de carga) con gradillas de ensayos asignadas a las ranuras 5 y 6.

El software asigna automáticamente las ranuras “Assay” (Ensayo); el usuario no puede modificar la asignación. La asignación depende del flujo de trabajo de procesamiento. La ranura 5 se procesa primero, después la 6 y finalmente la 4.

Asignación de gradillas de ensayos

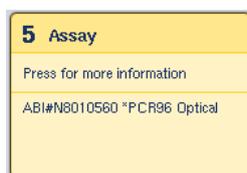

1. Abra el cajón “Assays” (Ensayos). Se inicia la refrigeración temporal de las ranuras definidas.
2. En la pantalla **Assay Setup/Loading information** (Preparación de ensayos/Información de carga), pulse la primera ranura “Assay” (Ensayo) que se va a cargar (resaltada en color amarillo). Se muestra la información detallada de la carga de la ranura.
3. Asigne el tipo de gradilla y el identificador de gradilla.
Para obtener información detallada, consulte la sección “Asignación de gradillas de ensayos” o la sección siguiente “Asignación de tipos de gradilla de ensayos”.
4. Coloque la gradilla de ensayos en el adaptador apropiado en las ranuras “Assay” (Ensayo) correctas.
Asegúrese de que se utiliza el adaptador apropiado con cada gradilla de ensayos.



5. Pulse Load (Cargar). Aparece nuevamente la pantalla Assay Setup>Loading information (Preparación de los ensayos/Información de carga). La ranura cargada tiene ahora color azul.

6. Si se van a cargar más gradillas de ensayos, repita los pasos 2-5 en la segunda ranura de ensayos.
7. Deje el cajón "Assays" (Ensayos) abierto para permitir la carga de la gradilla de normalización (opcional) y las puntas con filtro desechables.

Nota: Si se utiliza material de laboratorio segmentado, se mostrará el material de plástico necesario y las posiciones correspondientes. Asegúrese de que se utilizan las posiciones correctas. Durante el examen de inventario no se comprobarán las posiciones.

Asignación de tipos de gradilla de ensayos

En cada conjunto de parámetros del ensayo se define un tipo de gradilla de ensayos predeterminada. Este tipo de gradilla de ensayos predeterminada se muestra automáticamente en las ranuras "Assay" (Ensayo) en la pantalla **Assay Rack(s)** (Gradillas de ensayos). Para algunos tipos de gradilla de ensayos, la gradilla de ensayos solamente puede cambiarse por una gradilla de ensayos que utilice el mismo tipo de adaptador. Si se han asignado conjuntos de parámetros del ensayo que tienen tipos de gradilla predeterminada diferentes, no se especificará ningún tipo de gradilla en la ranura de ensayo correspondiente. Todos los tipos de gradillas especificados en uno o más ensayos se muestran en la categoría **Default** (Valor predeterminado), y las demás gradillas de ensayos que pueden utilizarse se muestran en la categoría **Other** (Otros).

Para cambiar el tipo de gradilla de ensayos o para asignar un tipo de gradilla de ensayos, siga los pasos descritos a continuación.

1. Seleccione un tipo de gradilla en la lista mostrada a la derecha. Puede utilizar los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la lista.



2. A continuación se mostrará el tipo de gradilla asignado en la ranura "Assay" (Ensayo) seleccionada.

Nota: La lista solamente muestra los tipos de gradillas que tienen el mismo formato de gradilla de ensayos.

Asignación de identificadores de gradillas de ensayos

El identificador de gradilla de ensayos asignado se utilizará para crear un archivo de gradillas. El nombre del archivo de gradillas tiene el formato RackFile_rack ID (Archivo de gradillas_Identificador de gradilla).

Nota: Tenga en cuenta que algunos símbolos no pueden usarse en el nombre del archivo de gradillas y que algunos símbolos se convertirán.

Nota: Si se cambia el tipo de gradilla de ensayos una vez introducido un identificador de gradilla, el identificador de gradilla no cambiará.

Para asignar identificadores de gradillas, siga los pasos indicados a continuación.

- Pulse **Rack ID** (Id. de gradilla). Aparecerá la pantalla **Manual Input** (Entrada manual).
- Introduzca manualmente un identificador de gradilla de ensayos. También puede usar el escáner de códigos de barras para introducir un identificador de gradilla.



Rack ID

El identificador de gradilla de ensayos introducido aparecerá en la ranura "Assay" (Ensayo) correspondiente. Si ya se ha asignado un tipo de gradilla a la ranura "Assay" (Ensayo), la ranura aparecerá ahora en color azul.


- Opcional: Pulse el botón **Automatic ID** (Identificador automático). El software asignará automáticamente un identificador con el formato **SlotNr_RunID_Suffix** (N.º de ranura_Identificador de serie_Sufijo) (por ejemplo, S5_1000017_0000).



Automatic ID

Se asigna automáticamente un identificador de gradilla a las ranuras "Assay" (Ensayo) seleccionadas. Si se ha asignado un tipo de gradilla a las ranuras "Assay" (Ensayo), las ranuras aparecerán ahora en color azul.

Nota: Si se utiliza un disco Rotor-Disc, coloque el disco en el adaptador para discos Rotor Disc, el adaptador en la unidad de base de adaptadores para discos Rotor-Disc QS y la unidad de base en las posiciones de ranura 4, 5 y 6.

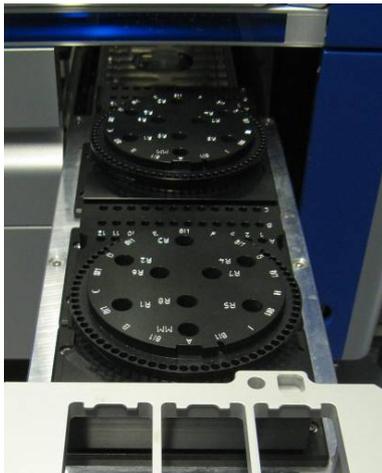


Carga de ranuras de reactivos

Nota: Asegúrese de que se utiliza el material de laboratorio correcto. Si se utiliza un material de laboratorio distinto del definido en la pantalla **Loading Information** (Información de carga), puede producirse un error durante la preparación o la transferencia de la mezcla maestra. Esto podría causar daños en el instrumento QIA Symphony AS.


Para cargar reactivos en un adaptador de reactivos, siga los pasos descritos a continuación.

1. Abra el cajón "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos).
2. En la pantalla **Assay Setup/Loading information** (Preparación de ensayos/Información de carga), pulse la primera ranura "Reagents" (Reactivos) (resaltada en color amarillo). Se muestra la información detallada de la carga de la ranura.

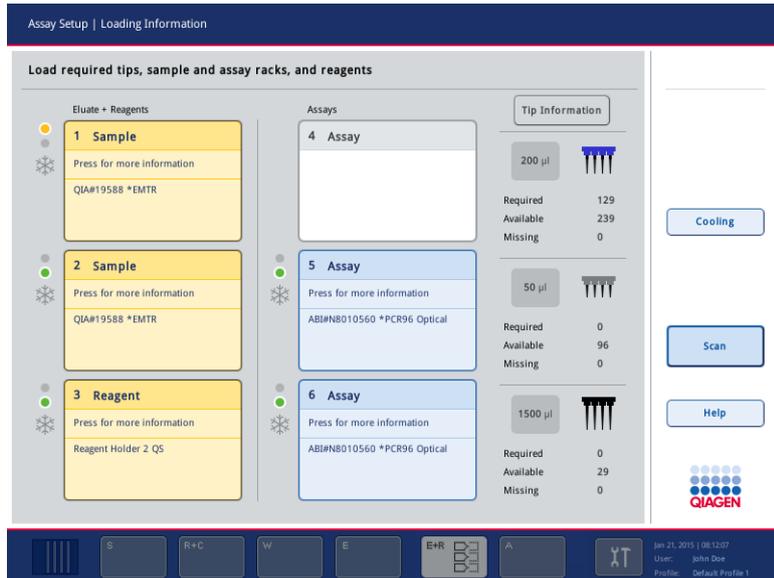

3. Coloque el adaptador de reactivos prerrefrigerado apropiado en la ranura "Reagent" (Reactivo) definida.
4. Pulse las ranuras "Reagent" (Reactivo) para ver información detallada sobre los reactivos, los tubos y los volúmenes correspondientes necesarios. Aparecerá la pantalla **Loading Reagents** (Reactivos de carga).

Se mostrará en la pantalla un esquema del adaptador de reactivos que se utilizará.

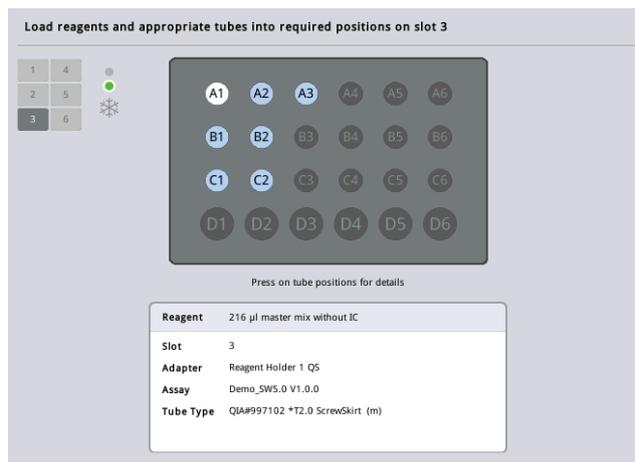

5. Pulse en una posición individual para ver la información de carga de esa posición.
La posición cambiará de color azul a color blanco y se mostrará en la tabla información detallada sobre el reactivo, el tipo de tubo y el volumen para esa posición del adaptador.

List View

6. Para ver la información de carga sobre todos los reactivos de un ensayo concreto, pulse **List View** (Vista de lista).

7. Seleccione las diferentes fichas de ensayos para ver la información de los reactivos de los distintos ensayos. Para ver los reactivos de todos los ensayos definidos para la serie, seleccione **All Reagents** (Todos los reactivos).

Si se ha seleccionado una mezcla maestra lista para usar para un conjunto de parámetros del ensayo, la lista contendrá información sobre la composición de la mezcla maestra, como se muestra en la captura de pantalla siguiente.

Slot	Pos.	Reagent	Tube type	Volume
3	A1	master mix with IC	QIA997102 *T2.0 ScrewSkirt	1347 µl
3	A2	Pos. Control	QIA997102 *T2.0 ScrewSkirt	27 µl
3	A3	NTC	QIA997102 *T2.0 ScrewSkirt	27 µl
3	A4	Q51	QIA997102 *T2.0 ScrewSkirt	27 µl
3	A5	Q52	QIA997102 *T2.0 ScrewSkirt	27 µl
3	A6	Q53	QIA997102 *T2.0 ScrewSkirt	27 µl
master mix with IC formula				
		Master		917.7 µl
		Primer1		305.9 µl
		IC		122.4 µl

8. Cargue los reactivos necesarios y tubos vacíos en las posiciones definidas.

Load


9. Pulse **Load** (Cargar). Aparece nuevamente la pantalla **Assay Setup/Loading information** (Preparación de los ensayos/Información de carga). La ranura cargada se muestra ahora en color azul.

Consulte los procedimientos de “Introducción de códigos de barras de kits de reactivos” y “Definición de códigos de barras de kit personalizados” más adelante.

Introducción de códigos de barras de kits de reactivos

Para introducir un código de barras de kit de reactivos para cada ensayo, siga los pasos indicados a continuación.

1. Cambie a **List View** (Vista de lista) o pulse el botón **Scan Kit Bar Code** (Escanear código de barras del kit).

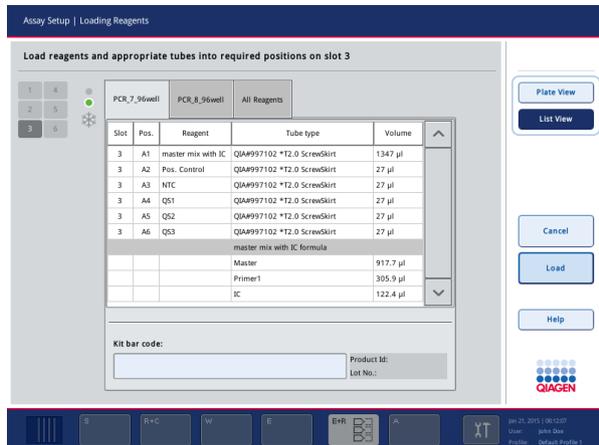

2. Pulse la ficha apropiada para seleccionar un ensayo.
3. Pulse el campo **Kit bar code** (Código de barras del kit).
4. Introduzca el código de barras manualmente o con el escáner de códigos de barras.
5. Pulse **OK** (Aceptar) para volver a la pantalla **Loading Reagents** (Reactivos de carga). Si se ha utilizado el escáner de códigos de barras, la pantalla **Loading Reagents** (Reactivos de carga) volverá a aparecer automáticamente.
6. El software valida el código de barras de kit de formato conocido y comprueba el número de lote y la fecha de caducidad.

Nota: Si hay más de un código de barras de kit para un ensayo, deben estar separados por un punto y coma. En este caso, no se realizará la validación del número de lote y de la fecha de caducidad.

Nota: En los ensayos QIAGEN, no mezcle números de lote diferentes en una serie.

Nota: Los códigos de barras de kit introducidos, incluida información adicional (es decir, la fecha de caducidad, el número de producto y el número de lote) se registran en el archivo de resultados.

Nota: Si el kit de código de barras introducido no sigue un formato reconocido, aparecerá un mensaje pidiéndole que acepte el código de barras. Pulse **OK** (Aceptar) para continuar.

Definición de códigos de barras de kit personalizados

Es posible usar códigos de barras de kit personalizados. Los instrumentos QIASymphony SP/AS realizan la validación del número de lote y de la fecha de caducidad, que se registra en el archivo de resultados. El código de barras debe tener el siguiente formato (p. ej., ***123456;20151231**).

*	Delimitador de inicio
n x dígitos	Número de lote
;	Delimitador
aaaammdd	Fecha de caducidad

Es posible usar otros códigos de barras de kit. Después de introducir el código de barras, no se realizará la validación del número de lote y de la fecha de caducidad. El código de barras se registra en el archivo de resultados.

Carga de puntas con filtro desechables

Puede colocarse un máximo de 6 gradillas de puntas en el cajón "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos) y en el cajón "Assays" (Ensayos) (es decir, un total de 12 gradillas de puntas). Durante el examen de inventario se detectan la posición de la gradilla de puntas, el tipo de punta y el número de puntas. El número de puntas necesario varía dependiendo de los ensayos ejecutados.

Pueden utilizarse tres tipos diferentes de puntas con filtro desechables en el instrumento QIASymphony AS: 50 µl, 200 µl y 1500 µl. La información sobre las puntas se muestra en el lado derecho de la pantalla **Loading Information** (Información de carga). Para cada tipo de punta se muestra el número de puntas necesarias, disponibles y ausentes.

Tip Information	
200 µl 	
Required	129
Available	239
Missing	0
50 µl 	
Required	0
Available	96
Missing	0
1500 µl 	
Required	0
Available	29
Missing	0

Recomendamos cargar un número de puntas superior al número real de puntas necesarias calculado por el software. La razón es que el consumo de puntas con filtro puede verse afectado por algunos procesos en el instrumento QIASymphony AS (p. ej., detección del nivel de líquido). Además, recomendamos cargar las puntas preferiblemente en las ranuras para gradilla de puntas posteriores. Si desea obtener más información sobre la carga de puntas, pulse el botón Tip Information (Información de la punta).

Nota: Se muestra el número de puntas individuales y no el número de gradillas de puntas.

Nota: El software calcula el número de puntas disponibles basándose en la serie y en el examen de inventario previos. Si el número de puntas disponibles no coincide con el número de puntas necesarias, aparecerá un mensaje durante el examen de inventario.

Para cargar una gradilla de puntas con filtro desechables, siga los pasos indicados a continuación.

1. Si todavía no están abiertos, abra el cajón "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos) y/o el cajón "Assays" (Ensayos).
2. Sujete la gradilla de puntas con 2 dedos por las asas.
3. Comprima suavemente la gradilla de puntas y colóquela en una ranura para gradillas de puntas.

Nota: Asegúrese de que las gradillas de puntas están correctamente colocadas en la ranura para gradillas de puntas de manera que se identifiquen las gradillas de puntas durante el examen de inventario.

12.3.3 Comprobación de las temperaturas de refrigeración (opcional)

Las temperaturas de refrigeración se muestran en una pantalla de resumen.

Pulse el botón **Cooling** (Refrigeración) en la pantalla **Loading Information** (Información de carga). Aparecerá la pantalla **Temperature Status** (Estado de la temperatura).

El instrumento QIASymphony AS comienza la refrigeración automáticamente después de que los adaptadores hayan sido cargados virtualmente en la pantalla táctil. La temperatura actual de las posiciones de refrigeración se actualiza en tiempo real. Si la temperatura actual se encuentra fuera de la temperatura deseada, la ranura aparecerá en color amarillo. Si la temperatura actual se encuentra dentro de la temperatura deseada, la ranura aparecerá en color verde.


La temperatura deseada está definida en la definición de ensayos y no puede modificarse por medio de la pantalla táctil.

Es posible desactivar los ajustes de refrigeración para las ranuras "Sample" (Muestra), "Reagents" (Reactivos) y "Assay" (Ensayo) si aún no se ha cargado la gradilla (prerrefrigeración).

Nota: La temperatura de las posiciones de refrigeración durante una serie de ensayos se documenta en el archivo de resultados.

Para activar la refrigeración, siga los pasos indicados a continuación.

1. Pulse el botón de copo de nieve situado a la izquierda de la posición de refrigeración que desea activar.
Se activará la refrigeración de esa posición y la ranura aparecerá en color negro.

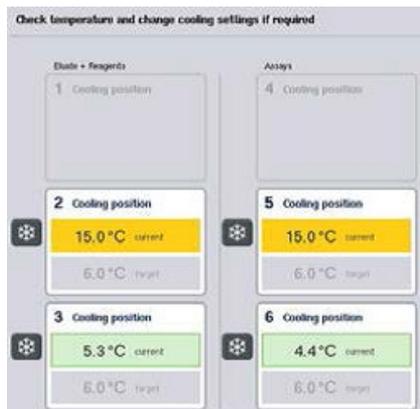

- Para desactivar la refrigeración, pulse el botón de copo de nieve situado a la izquierda de la posición de refrigeración que desea desactivar.


El botón de copo de nieve aparecerá en color gris.

Nota: Si se ha asignado un disco Rotor-Disc como gradilla de ensayos, las ranuras 4-6 estarán cubiertas por la unidad de base de adaptadores para discos Rotor-Disc QS. Por consiguiente, solamente se necesitará y mostrará un botón de copo de nieve para las ranuras 4-6.

Nota: Si una ranura está cargada, no será posible desactivar la refrigeración.

12.3.4 Inicio de una serie integrada

- Pulse **Run** (Serie) en la pantalla **Integrated Run** (Serie integrada).

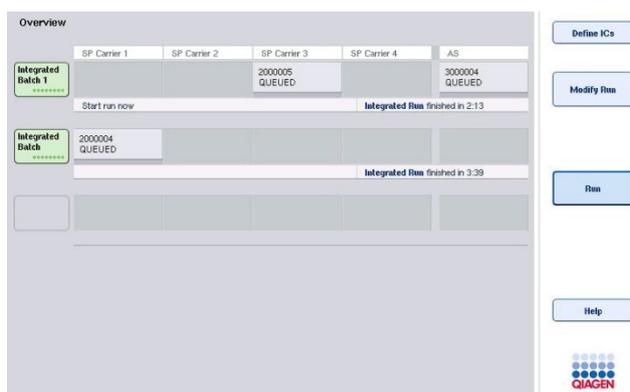

- El estado de una serie integrada puede verse en la pantalla **Integrated Run View** (Vista de la serie integrada).


12.3.5 Extraer ensayos después de una serie en el AS

Cuando finaliza o se cancela una serie de ensayos, los ensayos deben extraerse del cajón "Assays" (Ensayos). Los ensayos no se extraerán automáticamente del instrumento QIASymphony AS.

Si el estado mostrado de una serie es **QUEUED** (En cola), **STOPPED** (Detenido) o **COMPLETED** (Finalizado), pueden extraerse las gradillas de ensayos y los adaptadores.

1. Pulse el botón de lote de un lote integrado finalizado en la pantalla Integrated Run Overview (Resumen de la serie integrada).

Aparecerá el mensaje mostrado a continuación.

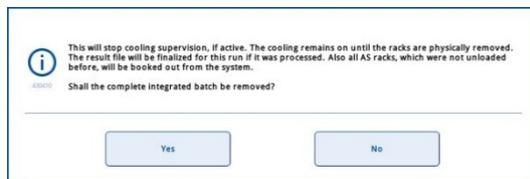

Pulse Yes (Sí) para quitar el lote.



Nota: Las gradillas no deben extraerse, ya que la supervisión de la refrigeración queda desactivada para todas las ranuras. En realidad, como el sistema no puede detectar errores en la temperatura, la refrigeración permanecerá activa hasta que las gradillas hayan sido descargadas físicamente.

2. Abra los cajones "Assays" (Ensayos) y "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos). Aparece la pantalla **Assay Setup/Loading Information** (Preparación de los ensayos/Información de carga).
3. Extraiga físicamente todas las gradillas, incluidas las gradillas de ensayos.
4. Cierre los cajones "Assays" (Ensayos) y "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos).

5. En la pantalla **Assay Setup/Loading Information** (Preparación de los ensayos/Información de la carga), pulse **Cancel** (Cancelar). Se abre la pantalla **Overview** (Resumen).



Si se van a realizar más series en el instrumento QIASymphony AS, cargue a continuación la siguiente serie en el instrumento QIASymphony AS.

Nota: En la pantalla ya se muestran las instrucciones de carga para la siguiente serie en el instrumento QIASymphony AS. Aunque no es necesario, se puede cargar ahora el siguiente lote.

Nota: En el modo integrado, no es posible quitar la gradilla de muestras en el instrumento QIASymphony SP en este paso.

12.3.6 Procedimiento tras la finalización de una serie

Después de que se realice el examen de inventario y aparezca nuevamente la pantalla **Assay Setup/Loading Information** (Preparación de los ensayos/Información de carga), siga los pasos indicados a continuación.


1. Extraiga las gradillas de eluidos, incluidos los adaptadores, del cajón "Eluate" (Eluidos) del instrumento QIASymphony SP.
2. Extraiga los tubos y frascos de reactivos, incluidos los adaptadores.
3. Sustituya la bolsa para eliminación de puntas después de cada serie.

12.3.7 Pausa, reanudación y detención de una serie integrada

Pausa de una serie en el instrumento QIASymphony SP o en el instrumento QIASymphony AS

Es posible poner en pausa una serie en el instrumento QIASymphony SP o en el instrumento QIASymphony AS pulsando el botón **Pause SP** (Pausar el SP) o el botón **Pause AS** (Pausar el AS) en la pantalla **Integrated Run** (Serie integrada). Si se pone en pausa una serie en el instrumento QIASymphony SP o el instrumento QIASymphony AS, el paso de pipeteado finalizará antes de que se ponga en pausa la serie.

La pantalla siguiente aparece cuando se pulsa el botón **Pause SP** (Pausar el SP) o el botón **Pause AS** (Pausar el AS).

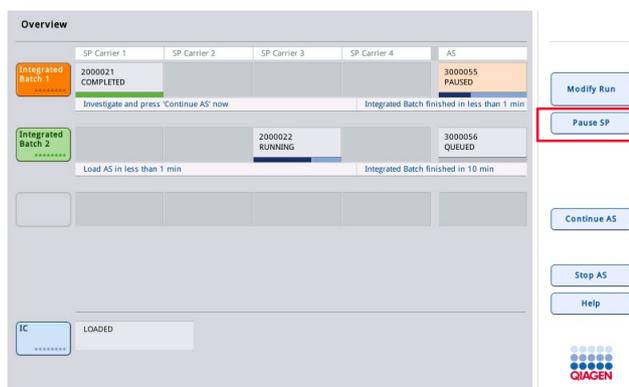

Si se pone en pausa la serie, hay dos opciones disponibles: la serie puede reanudarse o detenerse.

Nota: Si se pone en pausa una serie, se interrumpe la preparación de las muestras o el procedimiento de preparación de ensayos y puede alterarse el rendimiento.

Nota: Ponga en pausa una serie solamente en caso de emergencia.


Nota: Las muestras procesadas se marcarán como “unclear” (dudosas) tan pronto como se ponga en pausa el instrumento QIASymphony SP o el instrumento QIASymphony AS y se reanude la serie.

Reanudación de una serie

Para reanudar una serie, pulse el botón **Continue SP** (Continuar SP) o el botón **Continue AS** (Continuar AS). Las muestras procesadas se marcarán como “unclear” (dudosas) tan pronto como se ponga en pausa el instrumento QIASymphony SP/AS y se reanude.

Detención de una serie

Si se pone en pausa una serie en el instrumento QIASymphony SP o en el instrumento QIASymphony AS, pulse el botón **Stop SP** (Detener SP) o el botón **Stop AS** (Detener AS) para detener la serie integrada. Al pulsar **Stop SP** (Detener SP), se detendrán todos los lotes que se estén procesando actualmente. Sin embargo, se finalizarán todos los lotes del AS que ya se habían iniciado. Al pulsar **Stop SP** (Detener SP), se finalizarán todos los lotes del SP que se estén procesando actualmente.

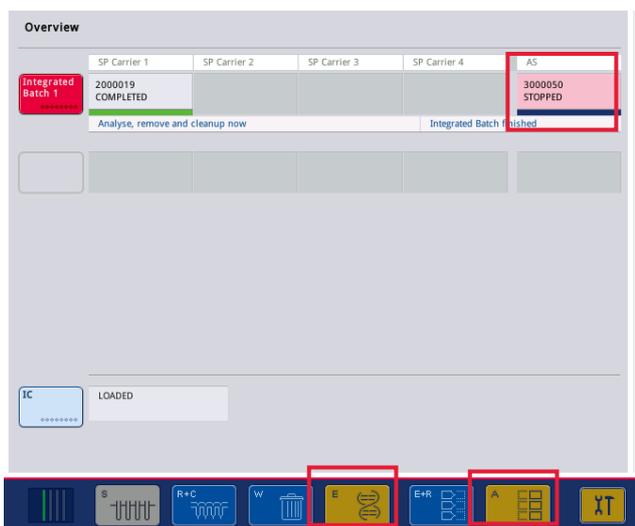

Si se detiene la serie, todas las muestras procesadas se marcarán como “invalid” (no válidas). No será posible procesar estas muestras más adelante.

Después de detener una serie en el instrumento QIASymphony SP o en el instrumento QIASymphony AS, o si se detiene la serie a causa de un error, los botones de los cajones afectados comenzarán a parpadear. Pulse los botones que parpadean para ver los mensajes de advertencia o error.

12.4 Serie independiente

12.4.1 Definición de una serie independiente de ensayos

Para iniciar el proceso de definición de ensayos, pulse el botón azul claro **New** (Nuevo) en la pantalla **Overview** (Resumen) de la preparación de ensayos.




Definición de las ranuras de "Sample" (Muestras) y asignación de gradillas de muestras

De manera predeterminada, la ranura 2 se define como ranura de tipo "Sample" (Muestra). No puede modificarse. La ranura 2 se preselecciona automáticamente en la pantalla **Sample Rack(s)** (Gradillas de muestras) y se resalta en color amarillo oscuro.


De manera predeterminada, la ranura 1 se define como ranura de tipo "Reagents" (Reactivos). En caso necesario, la ranura 1 puede redefinirse para crear una ranura "Sample" (Muestra) adicional.

Todas las ranuras "Sample" (Muestra) deben tener asignados un tipo de gradilla y un identificador de gradilla. Si hay disponible un archivo de gradillas, se asignarán automáticamente un tipo de gradilla y un identificador de gradilla al asignar el archivo de gradillas a la ranura "Sample" (Muestra). Si no hay ningún archivo de gradillas disponible, deberán asignarse manualmente el tipo de gradilla y el identificador de gradilla.

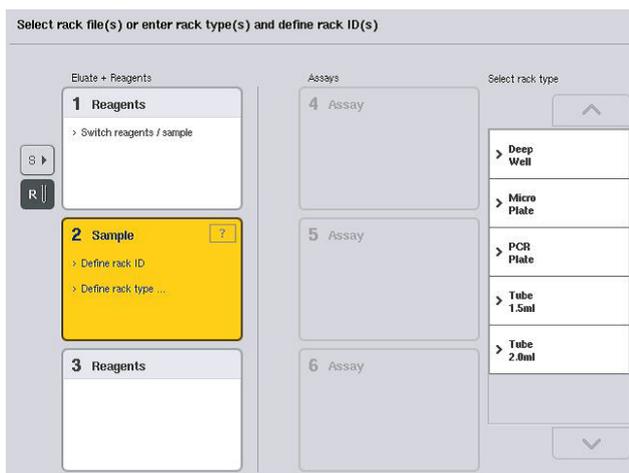

Definición de una ranura "Sample" (Muestra) adicional

1. Pulse el botón S situado a la izquierda de la ranura 1 en la pantalla Sample Rack(s) (Gradillas de muestras).

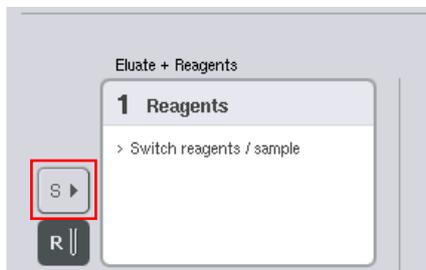

La ranura "Reagents" (Reactivos) pasará a ser una ranura "Sample" (Muestra). Esta ranura se seleccionará automáticamente y se resaltará en color amarillo oscuro.

2. Para hacer que la ranura 1 pase de nuevo de ser una ranura "Sample" (Muestra) a una ranura "Reagents" (Reactivos), pulse el botón R.

Asignación de un tipo de gradilla

Si no se va a utilizar un archivo de gradillas, deberá asignarse un tipo de gradilla a cada ranura "Sample" (Muestra) definida. Para asignar un tipo de gradilla, siga los pasos indicados a continuación.

1. Pulse una ranura "Sample" (Muestra) para seleccionarla. Una ranura "Sample" (Muestra) seleccionada se muestra resaltada en color amarillo oscuro.
2. Seleccione un tipo de gradilla en la lista Select rack type (Seleccionar tipo de gradilla).
Se asignará el tipo de gradilla seleccionado a las ranuras "Sample" (Muestra) seleccionadas.

Asignación de identificadores de gradillas de muestras

Si no se va a utilizar un archivo de gradillas, deberá asignarse un identificador de gradilla a cada ranura "Sample" (Muestra) definida.

Los identificadores de gradilla pueden asignarse de forma manual o automática. El identificador de gradilla asignado se utilizará para crear un archivo de gradillas. El nombre del archivo de gradillas tiene el formato **RackFile_rack ID** (Archivo de gradillas_Identificador de gradilla).

Nota: Tenga en cuenta que algunos símbolos no pueden usarse en el nombre del archivo de gradillas y que algunos símbolos se convertirán.

Nota: Si se cambia el tipo de gradilla una vez introducido un identificador de gradilla, el identificador de gradilla no cambiará.

Nota: En caso de usarse una gradilla de eluidos con tubos con códigos de barras 2D, el código de barras del tubo de eluidos se añade al identificador de muestra con un espacio en blanco en el medio dentro del archivo de resultados. Para obtener más información sobre la activación de gradillas de eluidos con tubos con códigos de barras 2D, consulte la sección 6.2.2 del *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Descripción general*.

Asignación manual de un identificador de gradilla de muestras


1. Seleccione una ranura "Sample" (Muestra).



2. Pulse "Rack ID" (Id. de gradilla). Aparecerá la pantalla "Manual Input" (Entrada manual).


3. Introduzca manualmente un identificador de gradilla por medio del teclado. También puede usar el escáner de códigos de barras para introducir un identificador de gradilla.
4. Pulse OK (Aceptar) para volver a la pantalla Sample Rack(s) (Gradillas de muestras).

Aparecerá el identificador de gradilla introducido. Si ya se ha asignado un tipo de gradilla a la ranura "Sample" (Muestra), la ranura aparecerá en color azul.

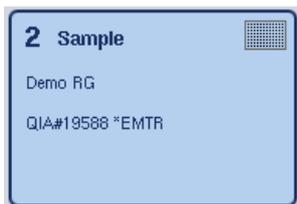

Asignación automática de un identificador de gradilla de muestras

1. Seleccione una ranura "Sample" (Muestra).

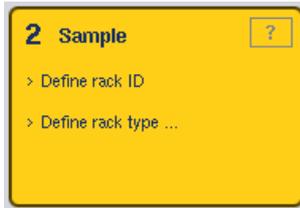

2. Pulse "Automatic ID" (Identificador automático).



El software asigna automáticamente un identificador con el formato **SlotNo._RunID_Suffix** (N.º de ranura_Identificador de serie_Sufijo) (por ejemplo, S2_1000002_000).

3. Se asigna automáticamente un identificador de gradilla a las ranuras "Sample" (Muestra) seleccionadas. Si ya se ha asignado un tipo de gradilla a las ranuras "Sample" (Muestra), las ranuras aparecerán en color azul.

Asignación de un archivo de gradillas

1. Pulse una ranura "Sample" (Muestra) para seleccionarla. Asegúrese de que solamente hay seleccionada una ranura "Sample" (Muestra). Una ranura "Sample" (Muestra) seleccionada se muestra resaltada en color amarillo oscuro.




2. Para anular la selección de una ranura "Sample" (Muestra), pulse en ella. A continuación aparecerá en color amarillo claro.



3. Pulse Rack Files (Archivos de gradilla).

Aparecerá la lista **Select rack file** (Seleccionar archivo de gradillas).


4. Pulse un archivo de gradillas para seleccionarlo de la lista.

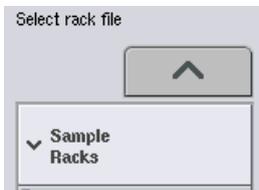

Hay tres tipos de archivos de gradillas: **Sample Racks** (Gradillas de muestras), **Normalization Racks** (Gradillas de normalización) y **Assay Racks** (Gradillas de ensayo). Las **Sample Racks** (Gradillas de muestras) son archivos de gradillas de muestras convencionales para definir una serie de preparación de ensayos. En algunos casos, la gradilla de ensayos puede utilizarse como gradilla de muestras (por ejemplo, para preparar ensayos de RT-PCR de dos pasos). En este caso, puede seleccionarse una **Assay Rack** (Gradillas de ensayo).



5. Cuando se selecciona un archivo de gradillas de ensayos, aparece un mensaje de información. Pulse Yes (Sí) para continuar.

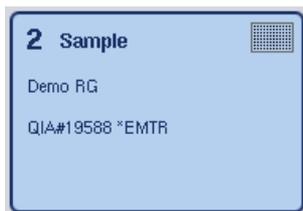

Se asignará el archivo de gradillas seleccionado a la ranura "Sample" (Muestra) seleccionada. Se asignarán a la ranura "Sample" (Muestra) seleccionada el tipo de gradilla y el identificador de gradilla definidos en el archivo de gradillas seleccionado. La ranura "Sample" (Muestra) aparecerá ahora en color azul y se activará el botón **Next** (Siguiente).

Nota: En caso de usarse una gradilla de eluidos con tubos con códigos de barras 2D, el código de barras del tubo de eluidos se añade al identificador de muestra con un espacio en blanco en el medio dentro del archivo de resultados. Para obtener más información sobre la activación de gradillas de eluidos con tubos con códigos de barras 2D, consulte la sección 6.2.2 del *Manual del usuario de QIA Symphony SP/AS – Descripción general*.

12.4.2 Definición/comprobación de gradillas de muestras

Una vez asignados los archivos de gradillas y los tipos de gradillas a las ranuras "Sample" (Muestra), deben definirse las posiciones de las muestras, los controles y los volúmenes asociados.

1. Pulse Next (Siguiente) en la pantalla Sample Rack(s) (Gradillas de muestras).
2. Aparece la pantalla Sample Rack Layout (Diseño de la gradilla de muestras).

Esta pantalla muestra un esquema de la gradilla de muestras situada en la ranura Sample (Muestra) seleccionada. Si se han definido dos ranuras "Sample" (Muestra), pueden utilizarse los botones **Slot 1** (Ranura 1) y **Slot 2** (Ranura 2) para alternar entre las vistas de las dos ranuras "Sample" (Muestra).

Si se han asignado archivos de muestras, las posiciones de las muestras, los controles de extracción y los volúmenes ya están definidos y se muestran en la distribución de la gradilla de muestras. Solamente es posible modificar los volúmenes de muestras. Esto puede ser necesario si se ha extraído manualmente de la gradilla algún eluido antes de colocarlo en el instrumento QIASymphony AS. No es posible definir posiciones adicionales de las muestras.


Si no se han asignado archivos de gradillas, deberán definirse manualmente las posiciones de las muestras, las posiciones de los controles y los volúmenes. Si no se ha asignado un archivo de gradillas, también es posible modificar los identificadores de muestras.

Nota: Las muestras y los controles de extracción que se han procesado en el instrumento QIASymphony SP y se han marcado como "invalid" (no válidos) aparecen marcados en rojo. Estas muestras y controles de extracción clasificados como "invalid" (no válidos) no pueden ser procesados por el instrumento QIASymphony AS y no pueden ser seleccionados por el usuario en la pantalla **Assay Assignment** (Asignación de ensayos). En la pantalla **Assay Assignment** (Asignación de ensayos), todas las muestras clasificados como "invalid" (no válidas) aparecen como pocillos vacíos.

Nota: Si se está utilizando un archivo de gradillas de ensayos como archivo de gradillas de muestras, no se mostrarán las abreviaturas empleadas para los estándares del ensayo (Std), los controles sin plantilla (NTC, NTC+IC, NTC-IC, donde IC significa control interno) y los controles del ensayo (AC); solamente se mostrará el volumen. Pulse en la posición (color amarillo claro) para seleccionarla y, a continuación, seleccione **Sample** (Muestra), **EC+** o **EC-** para definir el tipo de muestra (EC significa control de extracción).

El botón **Next** (Siguiente) se activa después de asignar los volúmenes y las posiciones de las muestras a la gradilla de muestras.

3. Pulse **Zoom in** (Ampliar) para ver el nombre de los identificadores de las muestras.

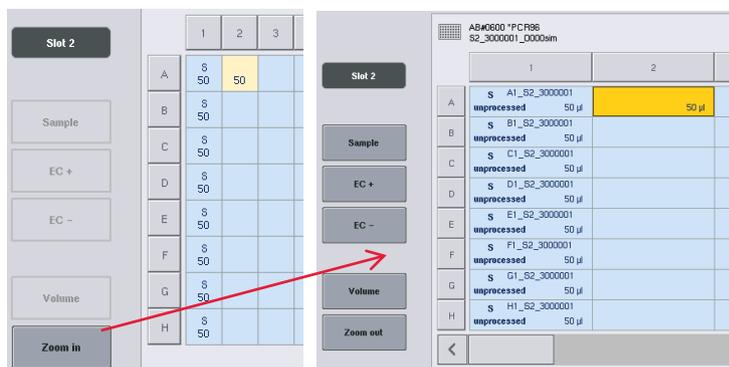

Nota: Las pequeñas fluctuaciones del volumen previsto de eluido dependen del protocolo QIA Symphony SP. Esto significa que el número máximo de reacciones que pueden configurarse por muestra puede dejar de corresponderse con el volumen disponible de eluido.

Selección de posiciones en la gradilla de muestras

Antes de poder definir muestras, controles y volúmenes, deben seleccionarse las posiciones de la gradilla de muestras.

- Para seleccionar posiciones individuales, pulse en las posiciones individuales de la gradilla.
- Para seleccionar una columna o fila completa, pulse en el número o letra asociados a esa columna o fila concreta.
- Para seleccionar todas las posiciones, pulse **Select All** (Seleccionar todo).
- Para seleccionar un bloque de posiciones, pulse una posición y arrastre el dedo para seleccionar otras posiciones adyacentes.

Nota: Las posiciones seleccionadas aparecen en color azul oscuro.

Definición de posiciones de muestras y controles de extracción

Si no se ha asignado un archivo de gradillas, deben asignarse posiciones de muestras. Para definir posiciones de muestras, siga los pasos indicados a continuación.



1. Seleccione las posiciones que contienen muestras.
2. Pulse **Sample** (Muestra), **EC+** o **EC-** para asignar muestras a las posiciones seleccionadas. Aparecerá **S**, **EC+** o **EC-** en cada posición seleccionada. Estas posiciones aparecerán en color amarillo y su selección se anulará automáticamente.

	1	2
A	S	S
B	EC-	EC+



3. Para eliminar posiciones asignadas, seleccione las posiciones y pulse **Clear** (Borrar).

Modificación/definición de volúmenes de muestras

El volumen de cada posición de una gradilla de muestras no se comprueba durante el examen de inventario, por lo que es importante que los volúmenes definidos manualmente sean exactos.

4. Seleccione en la gradilla de muestras mostrada las posiciones que desea definir o modificar.



5. Pulse **Volume** (Volumen).



Aparecerá la pantalla **Manual Input** (Entrada manual).

6. Introduzca un volumen por medio de la pantalla **Keyboard** (Teclado).



Nota: 0 µl no es un volumen válido. Si una posición de muestra no contiene volumen de muestra, elimine la asignación de muestra de esta posición (véase más adelante).

7. Pulse **OK** (Aceptar).



Aparecerá la pantalla **Sample Rack Layout** (Diseño de la gradilla de muestras) y se mostrarán los volúmenes actualizados.

8. Para eliminar entradas para posiciones de muestras concretas, seleccione las posiciones de muestras y pulse **Clear** (Borrar).



Nota: Si una posición de muestra no contiene volumen de muestra, elimine la asignación de muestra de esta posición. Para ello, seleccione la posición de muestra en la pantalla **Sample Rack Layout** (Diseño de la gradilla de muestras) y pulse **Clear** (Borrar). Si se utiliza un archivo de gradillas, no es posible eliminar una asignación de muestra.


Visualización y modificación de identificadores de muestras

Se asignan automáticamente identificadores predeterminados a las muestras según su posición, número de ranura e identificación de serie (por ejemplo, **B1_S2_100000061**). Los controles de extracción también se marcan como **EC+** o **EC-**. Para ver los identificadores de muestras, pulse **Zoom In** (Ampliar). Utilice los botones de flecha para desplazarse por la gradilla de muestras.


Si lo desea, puede modificar los identificadores de muestras asignados automáticamente.

Nota: Si se ha utilizado un archivo de gradillas, no pueden modificarse los identificadores de muestras.

Modificación de un identificador de muestra

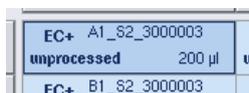

1. Pulse Zoom In (Ampliar). Aparecerá una vista ampliada de las posiciones de muestras.
2. Pulse la ficha **Tools** (Herramientas).
Se mostrará el menú **Tools** (Herramientas).
3. Utilice las flechas para desplazarse por las posiciones de muestras.
4. Seleccione una posición de muestra pulsándola. La posición seleccionada aparecerá en color azul oscuro.
5. Pulse Sample ID (Id. de muestra).
Aparecerá la pantalla **Manual Input** (Entrada manual).
6. Introduzca un identificador de muestra por medio del teclado o utilizando el escáner de códigos de barras.
7. Pulse OK (Aceptar).
8. Repita los pasos 1-6 para todos los identificadores de muestras que sea necesario modificar.
9. Para volver a la vista original, pulse Zoom Out (Reducir).

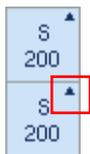


Las posiciones de muestras que tengan identificadores de muestras modificados se marcarán con un pequeño triángulo en la esquina superior derecha.

12.4.3 Definición de ensayos para procesar en la serie

Para definir qué ensayos se procesarán en la serie, pulse **Next** (Siguiete) en la pantalla **Sample Rack Layout** (Diseño de la gradilla de muestras).

Aparecerá la pantalla **Assay Selection** (Selección de ensayos).

Con esta pantalla pueden seleccionarse **Assay panels** (Paneles de ensayos) y conjuntos de parámetros del ensayo.

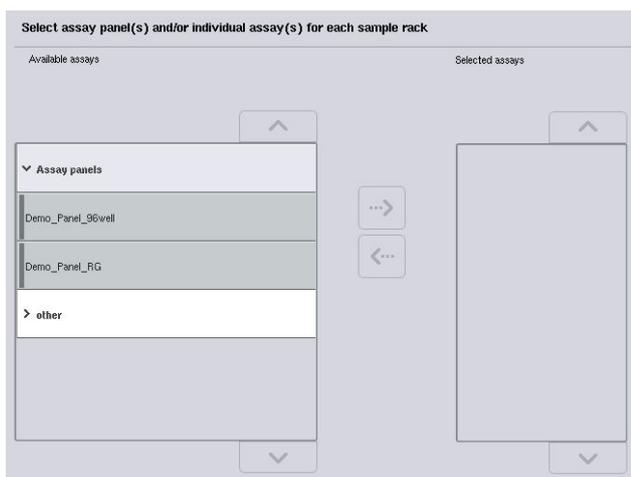

Un conjunto de parámetros del ensayo contiene toda la información relativa a un ensayo (por ejemplo, número de duplicados, controles del ensayo y estándares del ensayo). Cada conjunto de parámetros del ensayo hace referencia a un archivo de definición de ensayos. La definición de ensayos define el flujo de trabajo, los reactivos y las especificaciones de pipeteado de los ensayos. Además, un conjunto de parámetros del ensayo puede hacer referencia a un archivo de definición de normalización, si el ensayo utiliza la normalización. La definición de normalización define los reactivos y las especificaciones de pipeteado del paso de normalización.

Es posible realizar varios ensayos diferentes en la misma serie, pero solamente si los conjuntos de parámetros del ensayo utilizan el mismo formato de salida. Es posible definir y modificar el número de duplicados de un conjunto de parámetros del ensayo, incluido el número de estándares del ensayo y de controles para ensayos específicos por medio de la pantalla táctil. Los parámetros

también pueden modificarse utilizando la herramienta de edición **Process Definition** (Definición del proceso) del programa QIASymphony Management Console.

Si desea obtener más información, consulte la sección 14.7 del Manual del usuario de *QIASymphony Management Console*.

Los conjuntos de parámetros del ensayo pueden agruparse en paneles de ensayos. Un conjunto de parámetros del ensayo concreto puede formar parte de más de un panel de ensayos. Cuando se selecciona un panel de ensayos, se seleccionan y muestran en la lista **Selected assays** (Ensayos seleccionados) todos los conjuntos de parámetros del ensayo relacionados. Si no debe procesarse uno de los ensayos relacionados, deberá anularse su selección manualmente.

Además, los conjuntos de parámetros del ensayo pueden clasificarse en diferentes categorías. Todos los paneles y categorías disponibles aparecen en la lista **Available assays** (Ensayos disponibles). Todos los conjuntos de parámetros del ensayo que no forman parte de una categoría aparecen en la lista **Other** (Otros).

Selección de conjuntos de parámetros del ensayo

Los conjuntos de parámetros del ensayo pueden asignarse manualmente o utilizando listas de trabajo.


Una lista de trabajo define qué muestras deben procesarse y por qué conjuntos de parámetros del ensayo. Si hay disponible al menos una lista de trabajo para los identificadores de muestras definidos, se utilizará de forma predeterminada el modo **Work List** (Lista de trabajo).



A continuación, se activará el botón **Work Lists** (Listas de trabajo), que aparecerá en color azul oscuro.

En la lista **Available assays** (Ensayos disponibles) solamente se muestran los conjuntos de parámetros del ensayo definidos por la lista de trabajo.

Si no hay disponible ninguna lista de trabajo, o si es necesario procesar ensayos no especificados en una lista de trabajo, pueden seleccionarse manualmente paneles de ensayos y ensayos individuales.

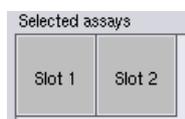


1. Si se ha definido más de una ranura "Sample" (Muestra), seleccione la ranura a la que desee que se asignen los ensayos utilizando las fichas situadas en la parte superior de la lista

Selected assays (Ensayos seleccionados). Si desea asignar los ensayos a ambas ranuras, pulse la ficha Slots 1/2 (Ranuras 1/2).

2. Pulse en los paneles de ensayos o en ensayos individuales en la categoría Available assays (Ensayos disponibles) para seleccionarlos.

Los ensayos pueden dividirse en secciones (por ejemplo, **Assay panels** [Paneles de ensayo] y **Other** [Otros]), pero esto puede modificarse utilizando la herramienta de edición **Process Definition** (Definición del proceso) del programa QIASymphony Management Console.

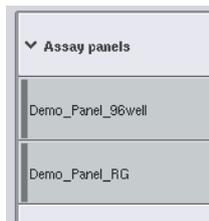

3. Pulse el panel de ensayos que desee.

Se mostrarán todos los conjuntos de parámetros del ensayo relacionados.




4. Pulse la flecha que señala hacia la derecha en el centro de la pantalla para mover el panel de ensayos seleccionado.

Todos los conjuntos de parámetros del ensayo relacionados con el panel de ensayos se mostrarán automáticamente en la lista **Selected assays** (Ensayos seleccionados).

Nota: Si no desea procesar alguno de estos ensayos mostrados, pulse en el ensayo para seleccionarlo y, a continuación, pulse en la flecha que señala hacia la izquierda. Se anulará la selección del ensayo y se eliminará este de la lista **Selected assays** (Ensayos seleccionados).

12.4.4 Asignación de ensayos seleccionados a posiciones de muestras

Si se selecciona más de un conjunto de parámetros del ensayo en la pantalla **Assay Selection** (Selección del ensayo), aparecerá la opción **Assign each assay individually?** (¿Asignar cada ensayo de forma individual?).

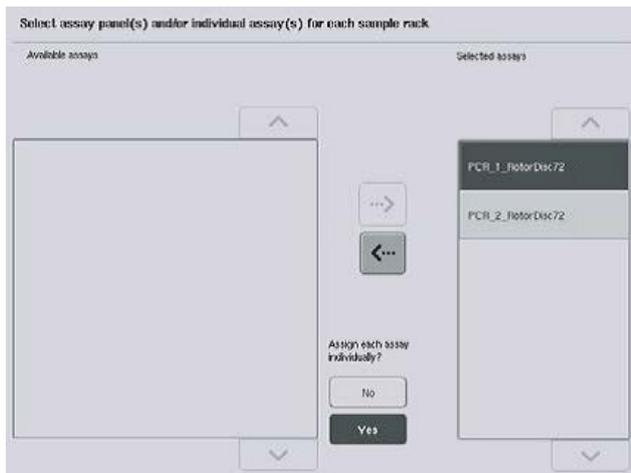

De manera predeterminada está seleccionada la opción **Yes** (Sí).


Esto significa que los conjuntos de parámetros del ensayo seleccionados tienen que estar asignados individualmente a posiciones de muestras de una gradilla de muestras (es decir, no hay que asignar cada conjunto de parámetros del ensayo a todas las muestras).

Si las muestras deben ser procesadas por todos los conjuntos de parámetros del ensayo seleccionados, seleccione **No**.

1. Pulse Next (Siguiente) para continuar.



Aparecerá la pantalla **Assay Assignment** (Asignación de ensayos). Esta pantalla muestra un esquema de la gradilla de muestras situada en la ranura "Sample" (Muestra) seleccionada.

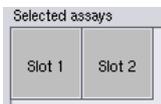

2. Si se ha definido más de una ranura "Sample" (Muestra), utilice los botones Slot 1 (Ranura 1) y Slot 2 (Ranura 2) para alternar entre las vistas de las dos ranuras.



3. Pulse Zoom In (Ampliar).

Se muestra información detallada de las posiciones del ensayo, incluido el identificador de muestra y, para un ensayo con normalización, la concentración.



4. Pulse Zoom out (Reducir).

Regrese a la vista anterior de la pantalla **Assay Assignment** (Asignación de ensayos).



5. Si se utilizan listas de trabajo, se asignan automáticamente conjuntos de parámetros del ensayo a las muestras, según esté definido en las listas de trabajo.

Las muestras que tengan ensayos asignados a ellas aparecen en verde y marcadas con un símbolo de lista de trabajo.



6. Para ver un resumen detallado de cada posición de muestra, pulse List View (Vista de lista).



7. Después de asignar ensayos a las posiciones de muestras, pulse Queue (Poner en cola) en la pantalla Assay Assignment (Asignación de ensayos) para continuar con la carga del instrumento QIA Symphony AS. Aparecerá la pantalla **Loading Information** (Información de carga). El botón **Queue** (Poner en cola) solamente está activo cuando se ha asignado cada conjunto de parámetros del ensayo al menos a una posición en cada ranura "Sample" (Muestra) definida.

Si no hay ninguna lista de trabajo disponible, deberán asignarse manualmente conjuntos de parámetros del ensayo a las muestras.

Solamente se procesarán en la serie de ensayos las muestras que tengan ensayos asignados a ellas.

Nota: Después de pulsar **Queue** (Poner en cola), la asignación y la modificación de conjuntos de parámetros del ensayo se guardan y no pueden modificarse; no es posible volver a la pantalla **Assay Assignment** (Asignación de ensayos). Si pulsa **Cancel** (Cancelar), se eliminarán todos los valores de configuración definidos. Pulse **Yes** (Sí) para confirmar.

Asignación manual de conjuntos de parámetros del ensayo

1. Seleccione entre las fichas un conjunto de parámetros del ensayo para asignar.


	1	2	3	4
A	S	EC+	EC-	
B	S	EC+	EC-	

Si se ha seleccionado **No** para la opción "**Assign each assay individually?**" (¿Asignar cada ensayo de forma individual?) en la pantalla **Assay Selection** (Selección de ensayos), no es posible seleccionar ensayos individuales. Se selecciona automáticamente una ficha, **All Assays** (Todos los ensayos).



2. Seleccione las posiciones de muestras a las que deben asignarse los conjuntos de parámetros del ensayo y pulse Assign (Asignar)..

Se asignarán los conjuntos de parámetros del ensayo a las posiciones seleccionadas. Aparecerá un número en la esquina inferior derecha de las posiciones de muestras asignadas. Este número indica el número de conjuntos de parámetros del ensayo que se han asignado a una muestra concreta.

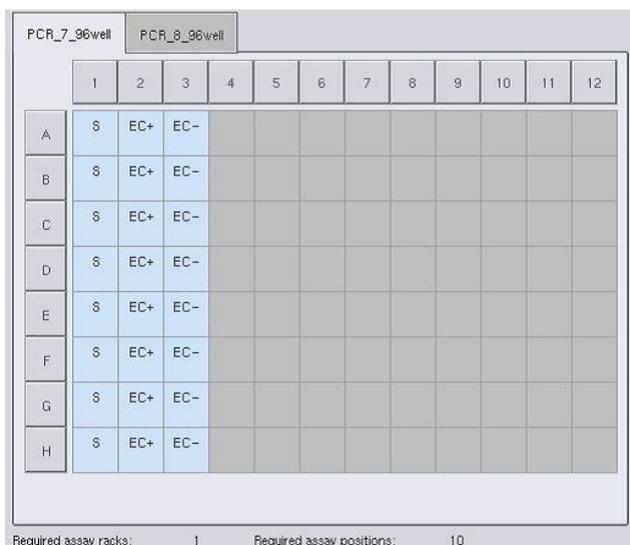

Nota: El botón **Queue** (Poner en cola) se activa cuando hay al menos una muestra asignada a cada ensayo y cuando hay al menos una muestra asignada a cada ranura.

12.4.5 Modificación de los parámetros de ensayo

El conjunto de parámetros del ensayo asignado define los parámetros predeterminados para una serie. Para cambiar los parámetros del ensayo, haga lo siguiente:

1. Pulse Specifications (Especificaciones).




Aparecerá la pantalla **Assay Specifications** (Especificaciones del ensayo).

2. Seleccione la ficha del conjunto de parámetros del ensayo. Aparecerá la lista Assay Parameter Set (Conjunto de parámetros del ensayo).



3. Seleccione el conjunto de parámetros del ensayo para el que se cambiará el parámetro de la lista de la ficha.

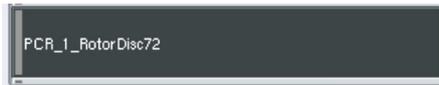

4. Pulse Yes (Sí) o No para definir si se utilizará o no una mezcla maestra lista para usar.

> **Sample**

> **Assay controls**

5. Seleccione uno de los tres encabezados para ver una lista de parámetros.

> **Assay standards**

6. Modifique los parámetros que desee.



Después de modificar un parámetro, el valor asociado aparecerá en color verde. Se mostrará el símbolo de una mano en la ficha del ensayo activo y junto al parámetro modificado.

7. Pulse OK (Aceptar).



Todos los cambios se guardarán y el sistema regresará a la pantalla **Assay Assignment** (Asignación de ensayos).

Nota: Para los conjuntos de parámetros del ensayo de tipo "Read only" (Solo lectura), únicamente puede modificarse el número de duplicados.

Nota: En los patrones de salida definidos por el usuario no es posible modificar el número de duplicados de los controles del ensayo ni los estándares del ensayo.

Nota: No es posible analizar las posiciones vacías definidas con el patrón de salida indicado por el usuario con el software Rotor-Gene AssayManager.

Nota: No es posible modificar parámetros del ensayo en el modo de listas de trabajo.

Nota: Si se modifican los parámetros, los cambios no se guardarán en el conjunto de parámetros del ensayo. Solamente se utilizarán para la serie en curso. Para cambiar los parámetros de un conjunto de parámetros del ensayo para futuras series, utilice la herramienta de edición **Process Definition** (Definición del proceso) del programa QlAsymphony Management Console. Si desea obtener más información, consulte el Manual de usuario de *QlAsymphony Management Console*.

12.4.6 Puesta en cola de una serie independiente de ensayos

Una vez finalizada la definición de ensayos, puede ponerse en cola la serie de ensayos. Haga lo siguiente:



1. Pulse Queue (Poner en cola) en la pantalla Assay Assignment (Asignación de ensayos).

Los instrumentos QlAsymphony SP/AS validarán ahora la serie de los ensayos y crearán un archivo de información de carga.

Una vez puesta en cola una serie de ensayos, no es posible volver al proceso de definición de ensayos.

2. Aparecerá la pantalla Loading Information (Información de carga).

Ahora puede cargar la mesa de trabajo del instrumento. Consulte la sección 12.4.1 para obtener más información.

12.4.7 Validación de la serie de ensayos

Los instrumentos QlAsymphony SP/AS validan todos los valores definidos para la serie de ensayos y determinan si se puede cargar la serie de ensayos. El proceso de validación incluye las siguientes comprobaciones:

- Comprueba que el número de posiciones de ensayos necesario no es superior al número de posiciones disponibles en las gradillas de ensayos, conforme a los conjuntos de parámetros del ensayo definidos (comprobación interna del software).
- Comprueba que el volumen total de mezcla maestra necesario no es superior al volumen disponible en el frasco de mezcla maestra más grande (comprobación interna del software).
- Para las posiciones de muestras que necesitan normalización, comprueba que los parámetros de dilución estén dentro del rango especificado.

Si hay algún fallo, aparecerá un mensaje de error que informa al usuario de cuál es el problema exactamente. No se podrá cargar la serie hasta que se haya confirmado el mensaje y se haya corregido el problema.

Creación del archivo de información de carga

El archivo de información de carga se creará e imprimirá cuando se pulse **Queue** (Poner en cola) mientras la herramienta **Auto Transfer** (Transferencia automática) está activa. El archivo de información de carga contiene toda la información que necesita el usuario para cargar reactivos, gradillas de muestras, gradillas de ensayos y puntas con filtro desechables en los cajones del instrumento QIASymphony AS.

Para obtener más información sobre la herramienta **Auto Transfer** (Transferencia automática), consulte la sección 8 del Manual del usuario de *QIASymphony Management Console*.


12.4.8 Carga de una serie independiente

Si desea obtener información acerca de cómo cargar el instrumento QIASymphony AS, consulte la sección 12.4.8.

Si la serie independiente incluye un paso de normalización, consulte las siguientes secciones.

Visualización de la información de carga (solo para la serie de ensayos con normalización)

Pulse la ranura **Normalization** (Normalización) en la pantalla **Loading information** (Información de carga) para ver información detallada sobre la gradilla de normalización necesaria.

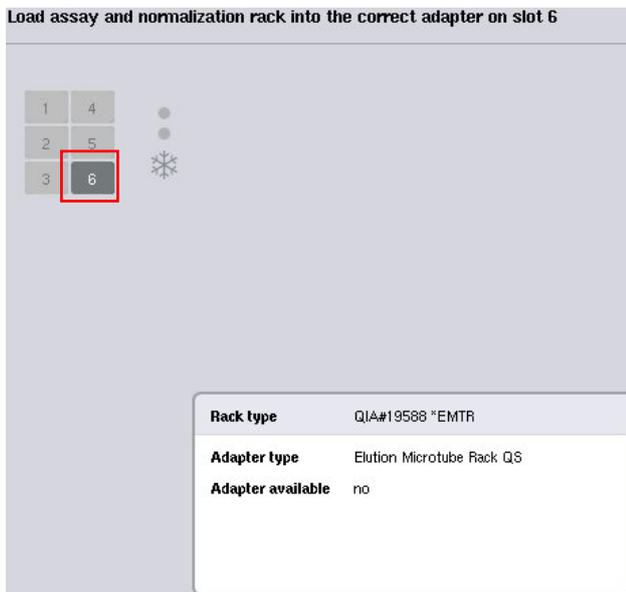


Pantalla **Assay Setup/Loading Information** (Preparación de los ensayos/Información de carga).

Carga de una gradilla de normalización (solo para la serie de ensayos con normalización)

Para cargar una gradilla de normalización, haga lo siguiente:

1. Si todavía no está abierto, abra el cajón "Assays" (Ensayos). Se inicia la refrigeración temporal de las ranuras definidas.
2. En la pantalla **Assay Setup/Loading Information** (Preparación de los ensayos/Información de carga), pulse la ranura **Normalization** (Normalización) (resaltada en color amarillo).

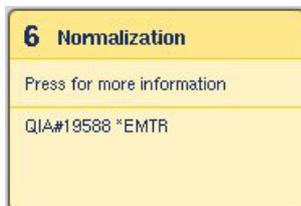

Se muestra la información detallada de la carga de la ranura.



3. Coloque la gradilla de normalización vacía en el adaptador adecuado en la ranura 6, o, si lo solicita el software, en la ranura 4 para una normalización de dos pasos o cuando se excede el número de posiciones de reacción para una gradilla de normalización.



4. Pulse Load (Cargar). Vuelve a aparecer la pantalla Assay Setup/Loading Information (Preparación de los ensayos/Información de carga).

La ranura cargada queda resaltada en color azul.

5. Deje abierto el cajón "Assays" (Ensayos) para cargar las puntas con filtro desechables- (consulte "Carga de puntas con filtro desechables" en la página 141).

Nota: Asegúrese de que se utiliza el adaptador apropiado con cada gradilla de normalización.

Nota: No cargue gradillas de normalización parcialmente llenas.

12.4.9 Comprobación de las temperaturas de refrigeración

Para obtener instrucciones sobre cómo comprobar las temperaturas de refrigeración, consulte la sección 12.3.3.

12.4.10 Inicio de una serie independiente

Espere a que las posiciones de refrigeración hayan alcanzado sus temperaturas deseadas (es decir, cuando aparezcan en color verde en la pantalla **Overview** (Resumen) de la preparación de ensayos).

Pulse **Run** (Serie) en la pantalla **Overview** (Resumen) de la preparación de ensayos.

The screenshot shows the 'Overview' screen with the following data:

Slot	Current Temperature	Target Temperature
Slot 1	--	--
Slot 2	5.6°C	6.0°C
Slot 3	5.9°C	6.0°C
Slot 4	--	--
Slot 5	5.6°C	6.0°C
Slot 6	5.2°C	6.0°C

The 'Run' button is highlighted with a red box.

Si se ha realizado un examen de inventario después de pulsar el botón **Queue** (Poner en cola), siempre y cuando la validación no haya mostrado ningún error y no haya cambiado nada después de ese momento, se omitirá el examen de inventario y se iniciará inmediatamente la serie de ensayos.

Si no se ha realizado un examen de inventario después de pulsar el botón **Queue** (Poner en cola), aparecerá un mensaje preguntando al usuario si se debe realizar un examen de inventario para cada cajón.

Consulte la sección 12.4.7 para obtener más información sobre la validación de la serie de ensayos.

12.4.11 Extraer ensayos después de una serie independiente


Cuando finaliza o se cancela una serie de ensayos, los ensayos deben extraerse del cajón "Assays" (Ensayos). Los ensayos no se extraerán automáticamente del instrumento QIASymphony AS.

Si el estado mostrado de una serie es **QUEUED** (En cola), **STOPPED** (Detenido) o **COMPLETED** (Finalizado), pueden extraerse las gradillas de ensayos y los adaptadores.


Es posible extraer los ensayos después de una serie independiente de la misma manera que se hace después de una serie en el AS; consulte la sección 12.3.5. De forma alternativa, siga los pasos indicados a continuación.

1. Abra el cajón "Assays" (Ensayos).


Aparece la pantalla **Assay Setup/Loading Information** (Preparación de los ensayos/Información de carga).

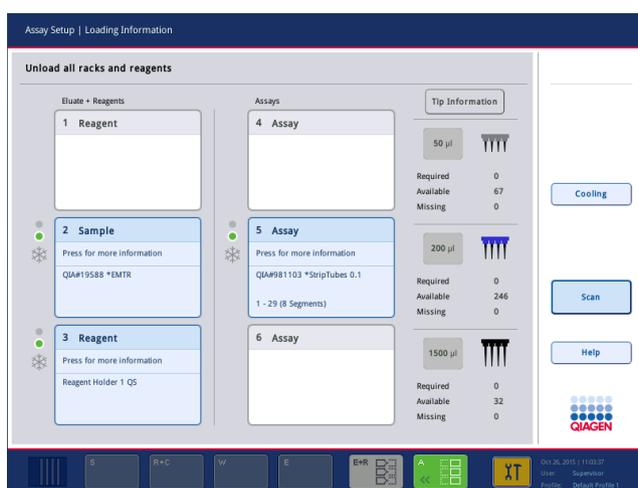

2. Pulse la primera gradilla de ensayos que se va a extraer.

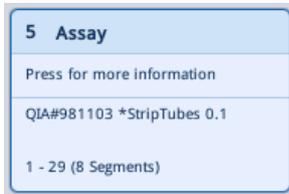


Aparece la pantalla con información detallada de la ranura.

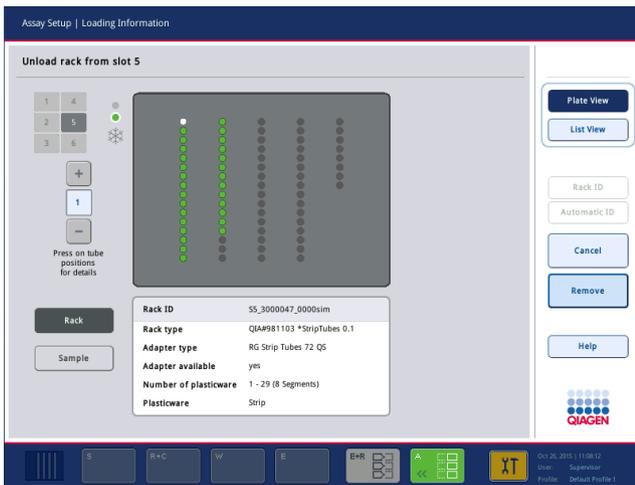

3. Pulse Remove (Extraer) y descargue la gradilla.



Aparece nuevamente la pantalla **Assay Setup/Loading Information** (Preparación de los ensayos/Información de carga). La ranura "Assay" (Ensayo) aparece ahora de color blanco y se desactiva la refrigeración de la ranura.

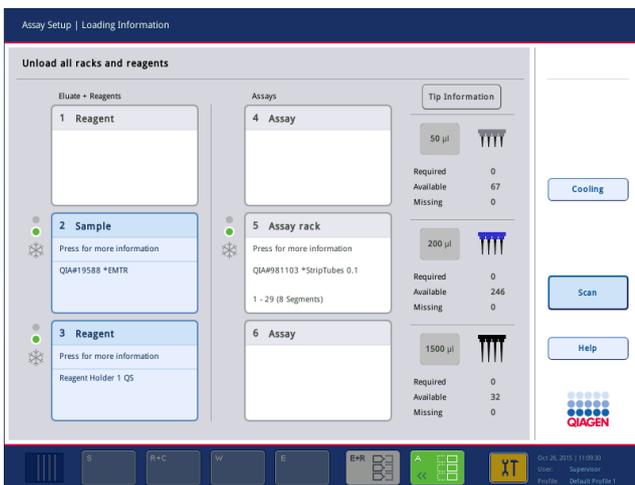


4. Cierre el cajón "Assays" (Ensayos).



5. Pulse Scan (Escanear).

Aparece un cuadro de diálogo.

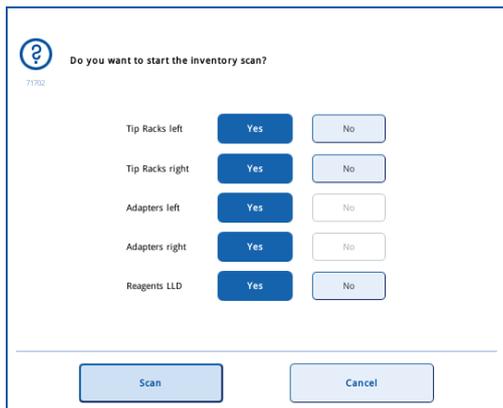

6. Seleccione Yes (Sí) únicamente para Adapters right (Adaptadores derecha). Pulse Scan (Escanear).

Descarga de la mesa de trabajo

Después de que se realiza el examen de inventario, aparece de nuevo la pantalla **Assay Setup/Loading Information** (Preparación de los ensayos/Información de carga). Haga lo siguiente:

1. Abra los cajones "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos) y "Assays" (Ensayos). Aparecerá la pantalla Loading Information (Información de carga).
2. Pulse la gradilla de ensayos que se va a extraer.




Aparece la pantalla con información detallada de esa ranura.



3. Descargue la gradilla de muestras seleccionada del cajón y, a continuación, pulse Remove (Extraer) en la pantalla táctil. Si hay una segunda gradilla de muestras, repita el proceso para la otra gradilla.

4. Pulse la gradilla de reactivos que se va a extraer.

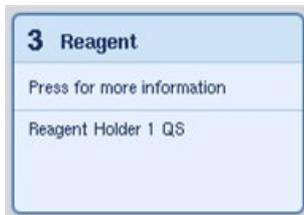


Aparece la pantalla con información detallada de esa ranura.



5. Descargue la gradilla de reactivos del cajón y, a continuación, pulse Remove (Extraer) en la pantalla táctil. Si hay una segunda gradilla de reactivos, repita el proceso para la otra gradilla.

6. Si hay una gradilla de normalización, pulse esta ranura.

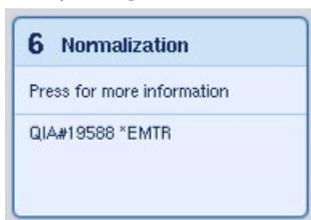

Aparece la pantalla con información detallada de esa ranura.

7. Descargue la gradilla de normalización del cajón.



8. Pulse Remove (Extraer) en la pantalla táctil.


9. Extraiga las gradillas de puntas vacías.

10. Vacíe la bolsa para eliminación de puntas.



11. Cierre los cajones y pulse Scan (Escanear) para realizar un examen de inventario.

Cuando finalice el examen de inventario, aparecerá la pantalla **Assay Setup Overview** (Resumen de la preparación de ensayos).

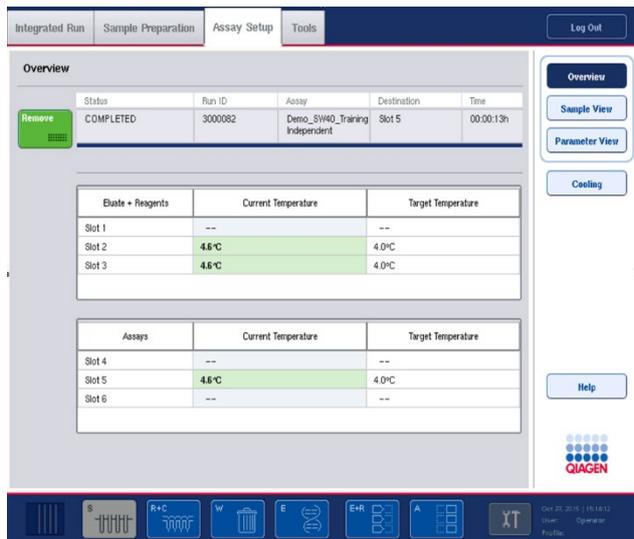

12. Pulse Remove (Extraer) en la pantalla Overview (Resumen) de la preparación de ensayos.

Nota: No es posible usar una gradilla de normalización con posiciones no utilizadas para volver a realizar series como una gradilla de normalización, pero se puede cargar como una gradilla de eluidos.

12.4.12 Pausa, reanudación y detención de una serie independiente



1. Para poner en pausa o cancelar una serie en curso, pulse Pause AS (Pausar AS) en la pantalla Assay Setup Overview (Resumen de la preparación de los ensayos).



2. Después de pulsar Pause AS (Pausar AS), aparecerán los botones Continue AS (Continuar AS) y Stop AS (Detener AS). Ahora se puede reanudar o detener la serie.




Las muestras estarán marcadas como "unclear" (dudosa) en todo momento si la serie se ha puesto en pausa.

El instrumento QIAAsymphony AS finalizará el paso de pipeteado actual antes de ponerse en pausa.



3. Para reanudar una serie, pulse Continue AS (Continuar AS). Para detener una serie, pulse Stop AS (Detener AS).



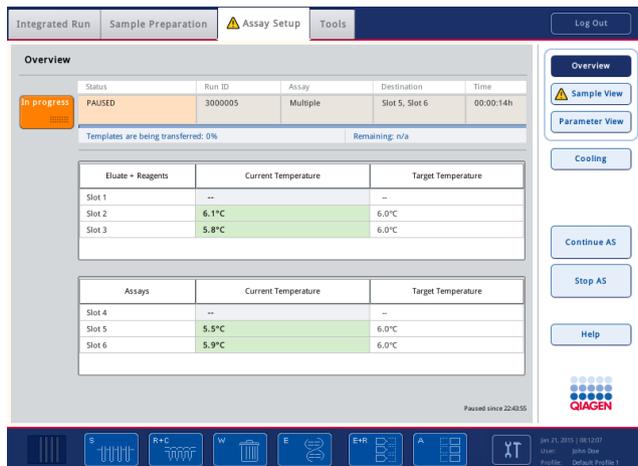

Nota: Si se pone en pausa una serie, se interrumpe el procedimiento de preparación de ensayos y puede alterarse el rendimiento de los ensayos. Ponga en pausa una serie solamente en caso de emergencia.

Si se cancela una serie, todas las muestras se marcarán como “invalid” (no válidas) en el archivo de resultados. No es posible procesar estas muestras más adelante en el instrumento QIASymphony AS.

Si se ha cancelado una serie, siga el procedimiento descrito en la sección 12.3.5 para extraer los ensayos. Puede ser posible seguir procesando las muestras manualmente; para obtener más información, consulte la sección 2.19, “Recuperación de protocolos”, del *Manual del usuario QIASymphony SP/AS – Uso del instrumento QIASymphony AS*.

12.5 Realización de exámenes de inventario (AS)

Para poder iniciar una serie de ensayos debe realizarse antes un examen de inventario de los cajones del instrumento QIASymphony AS. El procedimiento es el mismo que para los cajones del instrumento QIASymphony SP.

12.5.1 Examen de inventario del cajón “Eluate and Reagents” (Eluidos y reactivos)

El examen de inventario del cajón “Eluate and Reagents” (Eluidos y reactivos) consta de los siguientes pasos en el orden indicado a continuación:

1. Lectura de los códigos de barras de las ranuras 1-3 o de los códigos de barras de los adaptadores de las ranuras 1-3.

Nota: Para una ranura dada, se lee el código de barras de la ranura o, si hay un adaptador en la ranura, se lee el código de barras del adaptador.

- Se leen los códigos de barras de las ranuras 1-3 para determinar qué ranuras están vacías y cuáles están ocupadas.
- Se leen los códigos de barras de los adaptadores de las ranuras 1-3 para determinar si hay un tipo de adaptador específico en una ranura concreta.

Si los estados previsto y real de las ranuras/adaptadores no coinciden, aparecerá un mensaje para indicar al usuario que corrija el problema.

Nota: El instrumento QIASymphony AS no puede identificar el tipo de consumibles que hay en el adaptador. Por consiguiente, es importante cargar las placas o los tubos correctos en los adaptadores, según se define en el software.

2. Se escanean las ranuras para gradillas de puntas.

- Se escanean las puntas con filtro desechables para garantizar que se ha cargado el tipo de punta correcto y que hay suficientes puntas con filtro para la serie de ensayos definida.
- Si se detecta una punta en la primera y en la última posición de la gradilla de puntas, la gradilla se clasificará como llena. Si no se detectan la primera o la última puntas, se realizará un examen completo para determinar el número de puntas que contiene la gradilla de puntas.
- Si no hay suficientes puntas con filtro del tipo correcto, aparecerá un mensaje en la pantalla táctil para indicar al usuario que cargue más puntas.

Nota: Si no hay suficientes puntas para la serie de ensayos definida y no es posible cargar más puntas antes de que comience la serie, es posible recargar puntas durante la serie de ensayos. Esta circunstancia se documentará en el archivo de información de carga y, si se requiere interacción con el usuario, en el archivo de resultados. La puesta en pausa de la serie para recargar puntas causará que se marquen todas las muestras como “unclear” (dudosa).

Examen de inventario parcial

Si necesita repetir un examen de inventario del cajón "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos) (por ejemplo, si se ha producido un cambio en la mesa de trabajo), puede realizar un examen de inventario parcial. Puede elegir escanear los siguientes elementos de la mesa de trabajo por separado:

- Tip Racks left (Gradillas de puntas [izquierda])
- Tip Racks right (Gradillas de puntas [derecha])
- Adapters left (Adaptadores [izquierda])
- Adapters right (Adaptadores [derecha])
- Reagents LLD (LLD de reactivos)

12.5.2 Examen de inventario del cajón "Assays" (Ensayos)

El examen de inventario del cajón "Assays" (Ensayos) se realiza en las ranuras 4-6 de manera similar al procedimiento para las ranuras 1-3 del cajón "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos).

En caso de que sea necesario repetir un examen de inventario del cajón "Assays" (Ensayos), también es posible realizar un examen de inventario parcial en el que pueden escanearse por separado las gradillas de puntas y los adaptadores.

Una vez realizado el examen de inventario, se actualizará el inventario de los instrumentos QIASymphony SP/AS. El sistema desactiva temporalmente la refrigeración de las ranuras y activa la refrigeración de las ranuras cargadas.

Nota: Para que pueda iniciarse una serie antes debe realizarse el examen de inventario.

12.5.3 Examen de inventario del cajón "Assays" (Ensayos)

Tras la preparación de los ensayos, estos se extraen del instrumento QIASymphony AS y pueden transferirse manualmente a un termociclador para PCR para la detección. La elección del formato de salida permite utilizar diferentes termocicladores para PCR (por ejemplo, Rotor-Gene Q, termocicladores de 96 pocillos, termocicladores de 32 tubos capilares) para la detección. Es posible exportar archivos de termociclador de instrumentos QIASymphony SP/AS a termociclador para PCR seleccionadas.

13 Tareas de mantenimiento

La tabla siguiente describe el personal que se necesita para realizar el mantenimiento y garantizar el rendimiento óptimo de sus instrumentos QIASymphony SP/AS.

Tipo de tarea	Frecuencia	Personal
Mantenimiento regular	Al final de cada serie	Técnicos de laboratorio o equivalente
Mantenimiento diario	Al final de cada día, después del mantenimiento regular	Técnicos de laboratorio o equivalente
Mantenimiento semanal	Una vez por semana, después del mantenimiento regular y diario	Técnicos de laboratorio o equivalente
Servicio técnico y mantenimiento anual	Una vez al año	Solamente especialistas de servicio en campo de QIAGEN

13.1 Programador del mantenimiento

El programador del mantenimiento ayuda al usuario a gestionar todas las tareas de mantenimiento. Le recuerda al usuario cuáles son las tareas que esperan ser completadas, proporciona un resumen de la programación del mantenimiento y mantiene un registro de los datos relacionados con el mantenimiento.

Las tareas de mantenimiento pueden dividirse en dos categorías:

- Mantenimiento regular
- Mantenimiento por tiempo

Los procedimientos de mantenimiento regular son tareas generadas por eventos que deben realizarse después de que el evento respectivo ha finalizado (p. ej., mantenimiento regular del instrumento SP o del instrumento AS, mantenimiento regular de la serie integrada).

Los procedimientos de mantenimiento por tiempo son tareas dependientes del tiempo que tienen horarios establecidos (p. ej., tareas diarias, semanales y mensuales para mantenimiento de los instrumentos QIASymphony SP/AS, así como el mantenimiento anual). Solamente el servicio técnico de QIAGEN puede confirmar el mantenimiento anual. Todas las tareas de mantenimiento que realiza QIAGEN son obligatorias.

Nota: No es posible posponer ni modificar una tarea de mantenimiento obligatoria. Las tareas obligatorias deben realizarse en la fecha programada. Dependiendo de los archivos de proceso de la aplicación, es posible utilizar el instrumento QIASymphony con marcación, sin marcación, o el instrumento QIASymphony no iniciará una serie.


Se puede acceder al programador del mantenimiento con el icono Tools (Herramientas) en la barra de estado (vea la imagen a continuación). El color del icono Tools (Herramientas) indica el estado:




Azul: no hay tareas de mantenimiento por realizar.



Amarillo: hay una o más tareas de mantenimiento por realizar.

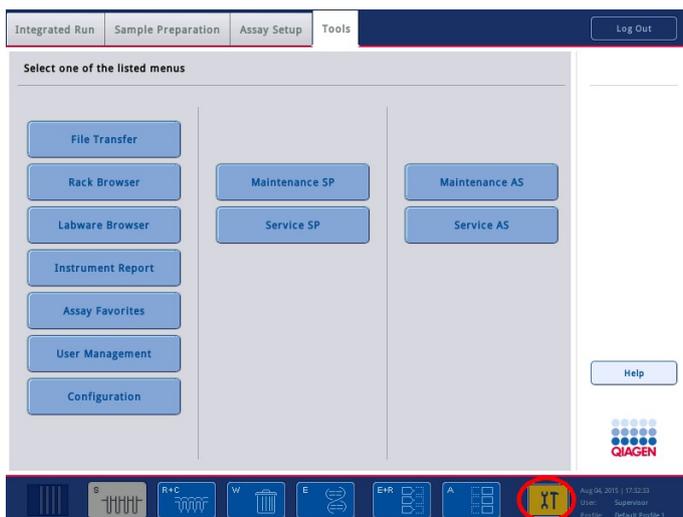

Todas las tareas de mantenimiento aparecen en la ventana Confirm Maintenance Task (Confirmar tarea de mantenimiento) con su título, clasificación, hora/fecha programada y patrón de recurrencia. Una vez finalizado el mantenimiento programado, es necesario pulsar el botón Done (Terminado) para confirmarlo.

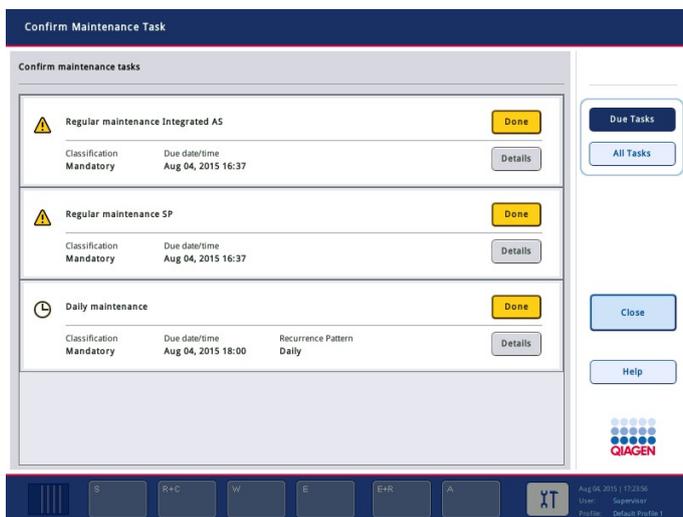

La confirmación se puede cancelar si se pulsa el botón Undo (Deshacer). El botón Details (Detalles) abre un cuadro de mensaje con todos los pasos que tiene una tarea de mantenimiento. Las tareas de mantenimiento están ordenadas con las tareas generadas por eventos en la parte superior de la lista, seguidas por las tareas con fechas establecidas clasificadas de acuerdo con la fecha límite de realización.

13.1.1 Confirmación de una tarea de mantenimiento

Para confirmar una tarea de mantenimiento:

1. Pulse el icono de color amarillo Tools (Herramientas) que parpadea en la barra de estado.
2. Después de realizar el mantenimiento respectivo, pulse Done (Terminado). La tarea seleccionada queda confirmada, el color de fondo cambia a gris, el icono cambia al símbolo de aprobación OK (Aceptar) y se muestra la fecha de confirmación.

Si la tarea se repite en el tiempo, se programará la siguiente fecha de realización.

Nota: Si por equivocación confirma una tarea de mantenimiento, pulse Undo (Deshacer) para regresar el estado de la tarea a no confirmada.

Visualización de los pasos detallados de una tarea de mantenimiento


Para ver todos los pasos requeridos de una tarea de mantenimiento en particular, pulse el icono Tools (Herramientas) y, a continuación, pulse Details (Detalles) para una tarea específica. Aparece un cuadro de mensaje con la descripción de todos los pasos de mantenimiento necesarios.

13.1.2 Posposición de una tarea de mantenimiento

Las tareas de mantenimiento con horario establecido se pueden posponer una vez, por ejemplo, si está trabajando en un lote que se está demorando mucho y no es posible iniciar el mantenimiento inmediatamente. Cuando se pospone una tarea, la hora límite se fija a las 23:59 del día en curso. El usuario debe confirmar la tarea al día siguiente, pero no podrá posponerla por segunda vez. Para posponer una tarea, seleccione Postpone (Posponer).

13.1.3 Configuración de los valores del mantenimiento

El "Supervisor" puede configurar los valores del mantenimiento en el menú Tools/Configuration (Herramientas/Configuración). Solo se pueden modificar la hora límite y la hora de advertencia.

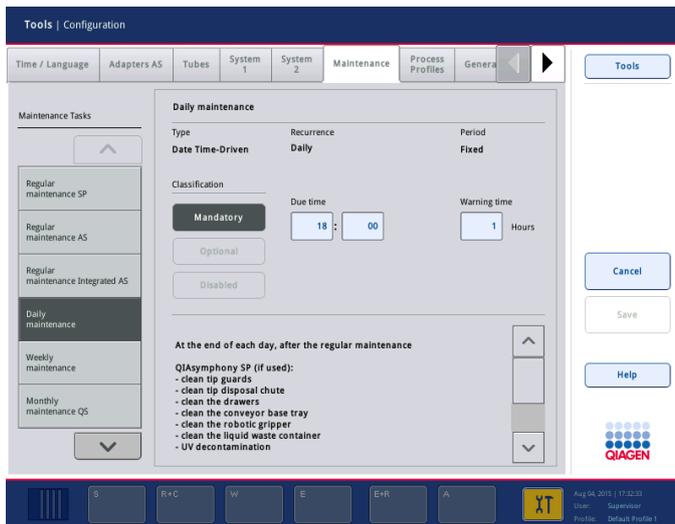

En la lista Maintenance Tasks (Tareas de mantenimiento) se pueden seleccionar distintas tareas de mantenimiento:

- Para Daily maintenance (Mantenimiento diario), es posible seleccionar Due time (Hora límite) y Warning time (Hora de advertencia).
- Para Weekly maintenance (Mantenimiento semanal), además de Due time (Hora límite) y Warning time (Hora de advertencia), se puede seleccionar el día de la semana en el que debe realizarse el mantenimiento.
- Para Monthly maintenance QS (Mantenimiento mensual del QS), es posible seleccionar Due time (Hora límite), Warning time (Hora de advertencia) y Day of month (Día del mes).
- La opción Annual maintenance and servicing (Servicio técnico y mantenimiento anual) solo se puede establecer inicialmente después de que el "Supervisor" haya realizado la actualización del software. Es necesario establecer los valores Due time (Hora límite), Warning time (Hora de advertencia) y Day (Día), Month (Mes) y Year (Año) de la última Annual service visit (Visita de servicio anual). Solamente el servicio técnico de QIAGEN puede confirmar las tareas Annual maintenance and servicing (Servicio y mantenimiento anuales) subsiguientes.

Nota: La tarea Annual service visit (Visita de servicio anual) solo puede ser confirmada por los técnicos de campo de QIAGEN.

Nota: Es necesario leer a fondo la información de seguridad y comprenderla bien antes de iniciar tareas de mantenimiento y reparación. Preste especial atención a la sección 2.9.

13.2 Limpieza

Nota: Si se derrama líquido sobre las mesas de trabajo de los instrumentos QIASymphony SP/AS, elimínelo tan pronto como la serie haya terminado conforme a la normativa de seguridad pertinente. No permita que se seque el líquido.

Agentes limpiadores

Desinfectantes y detergentes para la limpieza

- Mikrozyd® Liquid (Schülke & Mayr GmbH; www.schuelke-mayr.com): desinfectante que contiene etanol para pulverizar sobre los elementos que han sido retirados de las mesas de trabajo de los instrumentos QIASymphony SP/AS.
- Mikrozyd Wipes (Schülke & Mayr GmbH; www.schuelke-mayr.com): toallitas humedecidas con un desinfectante que contiene etanol para limpiar las superficies de los instrumentos QIASymphony SP/AS.
- Mikrozyd Sensitive Liquid (Schülke & Mayr GmbH; www.schuelke-mayr.com): desinfectante que contiene sales de amonio cuaternario. Contiene 0,26 g de compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-C16-alquildimetilo, cloruros; 0,26 g de cloruro de didecildimetilamonio y 0,26 g de compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-14-alquil[(etilfenil)metil]dimetil, cloruros, por 100 g de Mikrozyd Sensitive Liquid. Para superficies sensibles al alcohol.

Eliminación de la contaminación con ARNasa

- 5 PRIME RNaseKiller (5 PRIME, n.º de cat. 2500080): para la limpieza de superficies y elementos sumergibles de la mesa de trabajo.
- NaOH 0,1 M: como alternativa a 5 PRIME RNaseKiller para la limpieza de superficies y elementos sumergibles de la mesa de trabajo.

Eliminación de la contaminación con ácidos nucleicos (ADN y ARN)

DNA-ExitusPlus™ IF (AppliChem, n.º de cat. A7409,0100; variante sin indicador de DNA-ExitusPlus): para la limpieza de superficies y elementos sumergibles de la mesa de trabajo.

Nota: No utilice alcohol ni desinfectantes que contengan alcohol para limpiar las tapas o los paneles laterales de los instrumentos QIASymphony SP/AS. La exposición de las tapas y de los paneles laterales de los instrumentos QIASymphony SP/AS al alcohol y a desinfectantes que contengan alcohol causará grietas en su superficie. Limpie las tapas y los paneles laterales de los instrumentos QIASymphony SP/AS únicamente con agua destilada o con Mikrozyd Sensitive Liquid.

Europa

Gigasept® Instru AF (Schülke & Mayr GmbH; www.schuelke-mayr.com): contiene 14 g de diacetato de cocospipileno-diamina-guanidina, 35 g de fenoxipropanoles y 2,5 g de cloruro de benzalconio por 100 g de Gigasept Instru AF, con componentes anticorrosión, aromatizantes y surfactante no iónico al 15-30 %. Desinfectante para elementos sumergibles de la mesa de trabajo.

EE. UU.

DECON-QUAT® 100 (Veltek Associates, Inc.; www.sterile.com): desinfectante concentrado que contiene sales de amonio cuaternario. Contiene un 5 % de cloruro de alquildimetilbencilamonio y un 5% de cloruro de alquildimetiletilbencilamonio. Para elementos sumergibles de la mesa de trabajo.

Nota: Si desea usar desinfectantes distintos de los recomendados, asegúrese de que su composición es similar a las anteriormente descritas. Una alternativa adecuada a Mikrozid Liquid es Incidin® Liquid (Ecolab; www.ecolab.com).

Nota: Si se derraman disolventes o soluciones salinas, ácidas o alcalinas sobre los instrumentos QIASymphony SP/AS, elimínelos inmediatamente.

Nota: No utilice alcohol ni reactivos que contengan alcohol para limpiar las tapas o los paneles laterales de los instrumentos QIASymphony.

Importante: Si tiene dudas acerca del uso de agentes limpiadores, póngase en contacto con el proveedor del instrumento.

PRECAUCIÓN 	Daños en los instrumentos Después de secar los cajones, la placa metálica perforada y la estación de lisis con papel absorbente, asegúrese de que no quedan restos de papel. La presencia de restos de papel absorbente en la mesa de trabajo podría causar el atasco de esta.
--	--

13.3 Mantenimiento

Si desea obtener más información sobre los contratos de asistencia técnica flexibles de QIAGEN, póngase en contacto con su técnico de campo de QIAGEN o con su proveedor local.

Nota: Desconecte el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento.

13.4 Mantenimiento regular

Se requiere un mantenimiento regular después de cada serie en los instrumentos QIASymphony SP/AS. Debe realizarse una rutina de mantenimiento diferente para los instrumentos QIASymphony SP y QIASymphony AS.

Nota: Antes de ejecutar un protocolo de servicio del menú **Maintenance SP** (Mantenimiento del SP) o **Maintenance AS** (Mantenimiento del AS), asegúrese de que las tapas de los instrumentos QIASymphony SP/AS están cerradas.

13.4.1 Eliminación regular de puntas

Nota: Para evitar la contaminación, es necesario vaciar la bolsa para eliminación de puntas antes de iniciar la siguiente serie.

Nota: El líquido residual del conducto para eliminación de puntas puede gotear.

Nota: Preste atención a la información de seguridad.

Nota: Cuando use el armario QIASymphony Cabinet SP/AS, debe vaciarse el contenedor de desechos para evitar la contaminación en el interior del armario.

Nota: Compruebe periódicamente el contenedor de desechos.

Nota: El líquido residual del conducto para eliminación de puntas puede gotear dentro del armario.

Si desea obtener información detallada, consulte la Guía del usuario de *QIASymphony Cabinet SP/AS*.

13.4.2 Procedimiento de mantenimiento regular para el instrumento QIASymphony SP

Las palabras subrayadas son las palabras clave que el usuario ve en la pantalla táctil en el programador del mantenimiento (consulte "Visualización de los pasos detallados de una tarea de mantenimiento" en la página 177).

1. Remove eluates (Quitar eluidos): extraiga los eluidos del cajón "Eluate" (Eluidos).
2. Download the result file(s)[optional] (Descargar los archivos de resultados [opcional]): como paso opcional, descargue los archivos de resultados y asegúrese de que se ha realizado una copia de seguridad de los archivos.
3. Remove used sample tubes/plates (Extraer los tubos/placas de muestras usados): extraiga los tubos/placas de muestras usados del cajón "Sample" (Muestra) y deséchelos de conformidad con la normativa local en materia de seguridad.

4. Remove reagent cartridges (Extraer los cartuchos de reactivos): extraiga los cartuchos de reactivos del cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles).
Selle los cartuchos de reactivos parcialmente usados y guárdelos conforme a las instrucciones indicadas en el manual del kit QIASymphony que esté utilizando. Deseche los cartuchos de reactivos usados conforme a la normativa local en materia de seguridad y medioambiental.
5. Replace the tip disposal bag (Sustituir la bolsa para eliminación de puntas): sustituya la bolsa para eliminación de puntas antes de iniciar la siguiente serie.
6. Discard unit boxes (Desechar cajas unitarias): cierre las cajas unitarias con material de plástico para desechos y deséchelas conforme a la normativa local en materia de seguridad.
7. Check the magnetic-head guards (Comprobar los protectores del cabezal magnético): compruebe los protectores del cabezal magnético y límpielos si es necesario.
8. UV decontamination (Descontaminación por radiación ultravioleta) (opcional): realice la descontaminación por radiación ultravioleta de la mesa de trabajo (opcional).

Nota: Cuando use el armario QIASymphony Cabinet SP/AS, debe vaciarse el contenedor de desechos para evitar la contaminación en el interior del armario.

Si desea obtener información detallada, consulte el Manual del usuario de *QIASymphony Cabinet SP/AS*.

En caso necesario, limpie los protectores del cabezal magnético antes de iniciar la siguiente ejecución de protocolo. Haga lo siguiente:

9. Abra el menú **Maintenance SP** (Mantenimiento del SP) y ejecute el protocolo de servicio **Magnetic head guards** (Protectores del cabezal magnético). Levante con cuidado los cierres para liberar los protectores del cabezal magnético.
10. Limpie los protectores del cabezal magnético con un desinfectante que contenga etanol (por ejemplo, Mikrozyd) e incúbelos según proceda.
11. Límpielos con un paño sin pelusa humedecido con agua y séquelos con papel absorbente. Vuelva a colocar los protectores del cabezal magnético.
12. Abra el menú **Maintenance SP** (Mantenimiento del SP) y ejecute el protocolo de servicio **Open magnetic head guards** (Abrir protectores del cabezal magnético).

<p>PRECAUCIÓN</p> 	<p>Daños en los instrumentos</p> <p>Asegúrese de instalar los protectores del cabezal magnético antes de hacer funcionar el instrumento QIASymphony SP.</p>
--	--

13.4.3 Procedimiento de mantenimiento regular para el instrumento QIASymphony AS (integrado e independiente)

Las palabras subrayadas son las palabras clave que el usuario ve en la pantalla táctil en el programador del mantenimiento (consulte “Visualización de los pasos detallados de una tarea de mantenimiento” en la página 177).

1. Remove assay run (Quitar una serie de ensayos): extraiga los ensayos pulsando el botón Remove (Extraer).
2. Remove assays (Quitar ensayos): extraiga los ensayos del cajón “Assays” (Ensayos).
Si lo desea, transfiera los ensayos directamente al termociclador para PCR.
3. Download the result file(s) (Descargar los archivos de resultados) (opcional): descargue el archivo de resultados y, si está disponible, el archivo de termociclador. Asegúrese de que se ha realizado una copia de seguridad de estos archivos.
4. Remove used sample tubes/plates (Extraer los tubos/placas de muestras usados): extraiga los tubos/placas de muestras usados del cajón “Eluate and Reagents” (Eluidos y reactivos).
Guárdelos de forma segura o deséchelos conforme a la normativa local en materia de seguridad.
5. Remove reagent tubes and bottles (Extraer los frascos y tubos de reactivos): extraiga los frascos y tubos de reactivos del cajón “Eluate and Reagents” (Eluidos y reactivos). Deséchelos conforme a la normativa local en materia de seguridad.
6. Discard empty tip racks.
7. Replace the tip disposal bag (Desechar las gradillas de puntas vacías. Sustituir la bolsa para eliminación de puntas): sustituya la bolsa para eliminación de puntas antes de iniciar la siguiente serie de ensayos.
8. UV decontamination (Descontaminación por radiación ultravioleta) (opcional): realice la descontaminación por radiación ultravioleta de la mesa de trabajo.

Nota: No rellene las gradillas de puntas usadas.

Nota: Si utiliza el armario QIASymphony Cabinet AS, compruebe si la bolsa para eliminación de puntas está llena. Debe vaciarse el contenedor de desechos para evitar la contaminación en el interior del armario.

Si desea obtener información detallada, consulte la Guía del usuario de QIASymphony Cabinet SP/AS.

13.5 Mantenimiento diario (SP/AS)

Después de realizar la última serie del día, realice tanto el procedimiento de mantenimiento regular como el procedimiento de mantenimiento diario.

Nota: Antes de ejecutar un protocolo de servicio del menú **Maintenance** (Mantenimiento), asegúrese de que las tapas de los instrumentos QIAsymphony SP/AS estén cerradas.

Nota: Preste atención a la información de seguridad.

Las palabras subrayadas son las palabras clave que el usuario ve en la pantalla táctil en el programador del mantenimiento (consulte “Visualización de los pasos detallados de una tarea de mantenimiento” en la página 177).

13.5.1 Protectores de puntas del sistema de pipeteado (SP/AS)

Clean pipetting system tip guards (Limpiar los protectores de puntas del sistema de pipeteado)

1. Abra la pantalla **Tools** (Herramientas) y pulse **Maintenance SP** (Mantenimiento del SP) o **Maintenance AS** (Mantenimiento del AS).
2. Pulse **Tip guards** (Protectores de puntas) para mover el brazo robótico a la posición de limpieza.
3. Extraiga los 4 protectores de puntas empujando cada protector hacia arriba hasta que salga de su posición (se oye un clic) y pueda extraerse.
4. Sumérjalo en un desinfectante que contenga sales de amonio cuaternario y glixal (por ejemplo, Gigasept Instru AF) durante al menos 15 minutos.
5. Enjuáguelo con agua y séquelo con papel absorbente.

PRECAUCIÓN 	Daños en los instrumentos Asegúrese de instalar correctamente los protectores de puntas antes de hacer funcionar los instrumentos QIAsymphony SP/AS.
--	--

13.5.2 Conducto para eliminación de puntas

Nota: Si utiliza el armario QIAsymphony Cabinet SP/AS, consulte las instrucciones en la sección “Mantenimiento” en el Manual del usuario de *QIAsymphony Cabinet SP/AS*.

QIASymphony SP

Clean tip disposal chute (Limpiar el conducto para eliminación de puntas)

1. Extraiga el conducto para eliminación de puntas del cajón "Waste" (Desechos).
2. Sumérjalo en un desinfectante que contenga sales de amonio cuaternario y glioxal (por ejemplo, Gigasept Instru AF) durante al menos 15 minutos.
3. Enjuáguelo con agua y séquelo con papel absorbente.

QIASymphony AS

Clean tip disposal chute (Limpiar el conducto para eliminación de puntas)

1. Abra la pantalla Tools (Herramientas) y pulse Maintenance AS (Mantenimiento de AS).
2. Pulse Robotic arm left (Brazo robótico a la izquierda) para mover el brazo robótico a la izquierda.
3. Abra la tapa del instrumento QIASymphony AS.
4. Extraiga el conducto para eliminación de puntas de la mesa de trabajo.
5. Sumérjalo en un desinfectante que contenga sales de amonio cuaternario y glioxal (por ejemplo, Gigasept Instru AF) durante al menos 15 minutos.
6. Enjuáguelo con agua y séquelo con papel absorbente.

Nota: El líquido residual del conducto para eliminación de puntas puede gotear.

13.5.3 Cajones y estación de lisis (SP)

Clean drawer and lysis station (Limpie el cajón y la estación de lisis)

1. Extraiga todos los objetos extraíbles (soportes de tubos, adaptadores, insertos, estación de desechos líquidos/estación de almacenamiento de puntas, conducto para eliminación de puntas, frasco de desechos líquidos, soporte de la bolsa de desechos, soporte de la caja de reactivos) de los cajones.
2. Limpie los cajones, los objetos extraídos y la estación de lisis con un desinfectante que contenga etanol (por ejemplo, Mikrozid) e incúbelos según proceda. A continuación, límpiela con un paño humedecido con agua y séquela con papel absorbente. Vuelva a colocar los objetos en los cajones.
3. Limpie la placa superior del dispositivo de perforación.
4. Opcional: Limpie los objetos extraídos sumergiéndolos en un desinfectante que contenga sales de amonio cuaternario y glioxal (por ejemplo, Gigasept Instru AF) conforme a las instrucciones del fabricante. Tras la incubación conforme a las instrucciones del fabricante, enjuague bien con agua los objetos extraídos.

Nota: Debajo del dispositivo de perforación en el cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles) hay unas puntas que garantizan la posición correcta del cartucho de reactivos. Tenga cuidado al limpiar el cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles).

13.5.4 Cajones (AS)

Clean the drawers (Limpiar los cajones)

1. Extraiga todos los objetos extraíbles (tubos/placas, adaptadores) de los cajones.
2. Limpie los cajones y los adaptadores extraídos con un desinfectante que contenga sales de amonio cuaternario (por ejemplo, Gigasept Instru AF) e incúbelos según proceda.
A continuación, límpiela con un paño humedecido con agua y séquela con papel absorbente.
Vuelva a colocar los objetos en los cajones.

Clean adapters (Limpiar los adaptadores) (opcional)

3. Limpie los adaptadores extraídos sumergiéndolos en un desinfectante que contenga sales de amonio cuaternario y glixal (por ejemplo, Gigasept Instru AF) conforme a las instrucciones del fabricante. Tras la incubación conforme a las instrucciones del fabricante, enjuague bien con agua los objetos extraídos.
4. Recomendamos almacenar los adaptadores a una temperatura de 4 °C para que estén prerrefrigerados y listos para usar en la siguiente serie de ensayos.

13.5.5 Bandeja basal del transportador (SP): opcional

Clean the conveyor base tray (Limpiar la bandeja basal del transportador) (opcional)

1. Extraiga con cuidado la bandeja basal del transportador de debajo del cabezal magnético.
2. Sumérjala en un desinfectante que contenga sales de amonio cuaternario y glixal (por ejemplo, Gigasept Instru AF) durante al menos 15 minutos.
3. Enjuáguelo con agua y séquelo con papel absorbente.

Nota: La bandeja también puede esterilizarse en autoclave a 121 °C durante 20 minutos.

13.5.6 Sujetador robótico (SP)

Clean the robotic gripper (Limpiar el sujetador robótico)

1. Limpie el sujetador robótico con un paño sin pelusa humedecido con un desinfectante que contenga etanol (por ejemplo, Mikrozid). Incúbelo según proceda.
2. Límpielo con un paño sin pelusa humedecido con agua y séquelo con papel absorbente.

Nota: Limpie únicamente el peso. No limpie las barras, ya que podría atascarse el mecanismo de bola.

13.5.7 Recipiente de desechos líquidos (SP)

Clean the liquid waste container (Limpiar el recipiente de desechos líquidos)

1. Extraiga el recipiente de desechos líquidos del cajón "Waste" (Desechos).
2. Vacíe el recipiente de desechos líquidos. Elimine los desechos líquidos conforme a la normativa local en materia de seguridad.
3. Limpie el recipiente de desechos líquidos con un desinfectante que contenga sales de amonio cuaternario y glixal (por ejemplo, Gigasept Instru AF) conforme a las instrucciones del fabricante.
4. Enjuague el recipiente de desechos líquidos con agua desionizada.
5. Vuelva a colocar el recipiente de desechos líquidos en el cajón "Waste" (Desechos).

13.6 Mantenimiento semanal (SP/AS)

Las palabras subrayadas son las palabras clave que el usuario ve en la pantalla táctil en el programador del mantenimiento (consulte "Visualización de los pasos detallados de una tarea de mantenimiento" en la página 177).

13.6.1 Administración de archivos

Download files (SP/AS) (Descargar archivos [SP/AS])

1. Descargue los archivos de resultados (de los instrumentos QIASymphony SP y QIASymphony AS) y los archivos de información de carga (solamente del instrumento QIASymphony AS) según se describe en la sección 6.3 y asegúrese de que se realice una copia de seguridad de los archivos.
2. Elimine los archivos de resultados que tengan una antigüedad superior a 10 días (valor de configuración predeterminado) según se describe en la sección 6.6.

13.6.2 Pantalla táctil

Clean the touchscreen (Limpiar la pantalla táctil)

Limpie la pantalla táctil con un desinfectante que contenga etanol (por ejemplo, Mikrozyd). A continuación, límpiela con un paño humedecido con agua y séquela con papel absorbente.

13.6.3 Tapas de los instrumentos QIASymphony SP/AS

Clean the hoods (Limpiar las tapas)

Para limpiar las tapas de los instrumentos QIASymphony SP/AS, pase por su superficie un paño suave que no deje pelusas humedecido con agua desionizada o use toallitas empapadas con Mikrozid Sensitive Liquid. A continuación, seque la superficie con un paso suave sin pelusa seco o con papel absorbente.

Nota: No utilice desinfectantes que contengan etanol; utilice únicamente agua destilada o Mikrozid Sensitive Liquid.

13.6.4 Soportes de tubos (SP)

Clean the tube carrier and inserts (Limpiar los soportes de tubos y los insertos)

1. Extraiga los soportes de tubos, los adaptadores y los insertos y sumérjalos en desinfectante (por ejemplo, Gigasept Instru AF). Incúbelos durante al menos 15 minutos y, a continuación, enjuáguelos con agua y séquelos con papel absorbente.
2. Compruebe el estado de las etiquetas de código de barras y asegúrese de que no presentan arañazos.

13.6.5 Sensor óptico (SP)

Clean the optical sensor (Limpiar el sensor óptico)


Limpie la ventana del sensor óptico con un paño sin pelusa.

Humedezca el paño con etanol al 70% en caso necesario.

13.6.6 Cabezal magnético (SP)

Clean the magnetic head (Limpiar el cabezal magnético)

1. Retire la cubierta del cabezal magnético.
2. Mueva el cabezal magnético hacia arriba y presione con cuidado el soporte de la cubierta de barra hacia abajo.

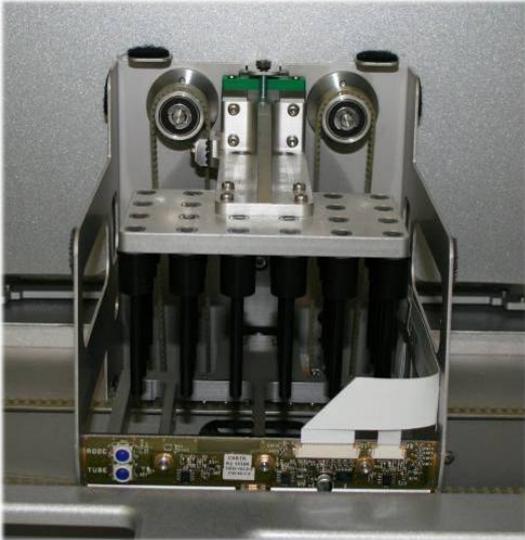

3. Limpie el exterior del cabezal magnético con un paño sin pelusa humedecido con un desinfectante que contenga etanol (por ejemplo, Mikrozid) e incúbelo según proceda.
4. Límpielo con un paño sin pelusa humedecido con agua y séquelo con papel absorbente.

Nota: Introduzca el paño desde los laterales del cabezal magnético para evitar dañar el cable y la placa electrónica situados en la parte frontal.

13.6.7 Recipiente de desechos líquidos (SP)

Clean the liquid waste container (Limpiar el recipiente de desechos líquidos)

1. Extraiga el recipiente de desechos líquidos del cajón "Waste" (Desechos).
2. Vacíe el recipiente de desechos líquidos. Elimine los desechos líquidos conforme a la normativa local en materia de seguridad.
3. Desinfecte el recipiente de desechos líquidos con un desinfectante que contenga etanol (por ejemplo, Mikrozid).
4. Vuelva a colocar el recipiente de desechos líquidos en el cajón "Waste" (Desechos).

13.6.8 Adaptadores (AS)

Clean adapters (Limpiar los adaptadores)

1. Extraiga los adaptadores de los cajones "Eluate and Reagents" (Eluidos y reactivos) y "Assays" (Ensayos) y sumérjalos en desinfectante (por ejemplo, Gigasept Instru AF). Incúbelos durante al menos 15 minutos.
2. Enjuáguelos con agua y séquelos con papel absorbente.

3. Compruebe el estado de las etiquetas de código de barras y asegúrese de que no presentan arañazos.

13.7 Descontaminación por radiación ultravioleta de la mesa de trabajo

Las palabras subrayadas son las palabras clave que el usuario ve en la pantalla táctil en el programador del mantenimiento (consulte “Visualización de los pasos detallados de una tarea de mantenimiento” en la página 177).

UV decontamination (Descontaminación por radiación ultravioleta)

La descontaminación por radiación ultravioleta debe realizarse todos los días. Ayuda a reducir la posible contaminación por patógenos de las mesas de trabajo de los instrumentos QIASymphony SP/AS. Debe determinarse la eficiencia de inactivación para cada microorganismo específico, que depende de, por ejemplo, el grosor de la capa y del tipo de muestra. QIAGEN no puede garantizar la erradicación completa de patógenos específicos. La descontaminación por radiación ultravioleta de los instrumentos QIASymphony SP y AS puede iniciarse secuencialmente o en paralelo.

Nota: Antes de iniciar el procedimiento de irradiación ultravioleta, asegúrese de que se han extraído todas las muestras, eluidos, reactivos, consumibles y ensayos de la mesa de trabajo. Cierre todos los cajones y las tapas. Una vez iniciado el procedimiento de irradiación ultravioleta, este continuará durante el período de tiempo definido o hasta que sea interrumpido por el usuario.

Recomendamos utilizar la siguiente fórmula para calcular la duración de la descontaminación en minutos:

$$\text{Dosis (mW x s/cm}^2\text{)} \times 10,44 = \text{Duración (segundos)}$$

1. Extraiga de los cajones todos los objetos extraíbles (tubos/placas, adaptadores, consumibles, conducto para eliminación de puntas), excepto el frasco de desechos líquidos.

A rectangular button with a blue gradient background and white text that reads "Maintenance SP".

2. Abra la pantalla Maintenance (Mantenimiento) y pulse Maintenance SP (Mantenimiento del SP) o Maintenance AS (Mantenimiento del AS).

A rectangular button with a blue gradient background and white text that reads "Maintenance AS".

El botón **Maintenance AS** (Mantenimiento del AS) solo está disponible si está utilizando los instrumentos QIASymphony SP/AS.

Start UV light AS

Start UV light SP

Start UV light SP+AS

3. Pulse el botón Start UV light AS (Iniciar luz UV en el AS), el botón Start UV light SP (Iniciar luz UV en el SP) o el botón Start UV light SP+AS (Iniciar luz UV en el AS y el SP).

Se abrirá la pantalla **Input/UV cleanup/Duration** (Entrada/Limpieza UV/Duración).

15

4. Introduzca la duración de la descontaminación en minutos.

El valor de configuración predeterminado es 15 minutos. El tiempo de irradiación ultravioleta depende del patógeno. Utilice la fórmula anteriormente mostrada para calcular el tiempo de irradiación y, a continuación, introduzca el tiempo en el cuadro de entrada.

Aparecerá un mensaje en el que se le pedirá que compruebe si se han extraído todos los materiales de plásticos y consumibles de la mesa de trabajo.

Before performing UV irradiation:

1. Remove all removable objects from the worktable:

- samples
- reagent cartridges
- consumables
- eluates
- tube/plate carriers
- adapters
- inserts
- tip park/liquid waste station
- tip disposal chute
- tip racks
- unit boxes
- buffer bottle
- accessory trough(s) ...

2. Close all drawers and the instrument hood.

Press "Ok" to start the UV lamp.

5. Pulse OK (Aceptar) para confirmar que se han extraído todos los objetos extraíbles de la mesa de trabajo.

Ok

Se iniciará el procedimiento de irradiación ultravioleta y el brazo robótico se moverá por la superficie de la mesa de trabajo durante el tiempo de irradiación definido.

Nota: Para detener el procedimiento de irradiación ultravioleta antes de que haya transcurrido el período de tiempo definido, pulse **Cancel** (Cancelar). El procedimiento se detendrá en cuanto el brazo robótico complete el movimiento actual.

 **UV light procedure in progress...**

70307

Cancel

13.8 Mantenimiento mensual (SP/AS)

Las palabras subrayadas son las palabras clave que el usuario ve en la pantalla táctil en el programador del mantenimiento (consulte “Visualización de los pasos detallados de una tarea de mantenimiento” en la página 177).

Change tip adapter O-ring (Cambiar la junta tórica de un adaptador de punta)

Esta sección describe la sustitución de la junta tórica de un adaptador de punta utilizando el O-Ring Change Tool Set (n.º de cat. 9019164) para realizar el cambio de la junta tórica. Las juntas tóricas deben cambiarse todos los meses utilizando el kit O-Ring Change Tool Set.

Antes de extraer la junta tórica antigua, debe prepararse la junta tórica nueva. Estos pasos deben realizarse tanto para el instrumento QIASymphony SP como para el instrumento QIASymphony AS.

Si desea obtener instrucciones, consulte la guía rápida que se entrega con el kit O-Ring Change Tool Set. Si no se dispone de un kit O-Ring Change Tool Set, póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.

14 Resolución de problemas

En esta sección se proporciona información acerca de qué hacer si se produce un error durante el uso de los instrumentos QIASymphony SP/AS.

Si necesita asistencia adicional, póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN mediante la información de contacto que se indica a continuación:

Sitio web: support.qiagen.com

Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico de QIAGEN por un error con el [Nombre del producto], anote los pasos que han dado lugar al error y cualquier información que aparezca en los cuadros de diálogo. Esta información ayudará al servicio técnico de QIAGEN a resolver el problema.

Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico de QIAGEN para notificar un error, tenga a mano la información siguiente:

- Número de serie del instrumento QIASymphony SP/AS
- Versión del software
- Fecha y hora de la primera aparición del error
- Frecuencia de aparición del error (es decir, error intermitente o persistente)
- Descripción detallada de la situación de error
- Si es posible, una fotografía del error
- Copia de un archivo de informe del instrumento

Esta información le ayudará a usted y al especialista de servicio técnico de QIAGEN a abordar el problema de la manera más eficiente.


Nota: La información sobre las versiones más recientes del software y del protocolo se puede encontrar en www.qiagen.com. En algunos casos, puede que se disponga de actualizaciones para abordar problemas específicos.

14.1 Mensajes de error y advertencia

Si se produce un problema durante el funcionamiento de los instrumentos QIASymphony SP y/o AS, aparecerá un mensaje de error o una advertencia en la pantalla táctil.

Consulte la sección 3.2.3 del *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Uso del instrumento QIASymphony SP* para obtener más información sobre los diferentes símbolos que pueden aparecer en los mensajes de error.

Si el error tiene un código de error, este se muestra en el lado izquierdo del mensaje, debajo del símbolo de error (véase más adelante). El mensaje de error se muestra en la parte central del cuadro de diálogo.

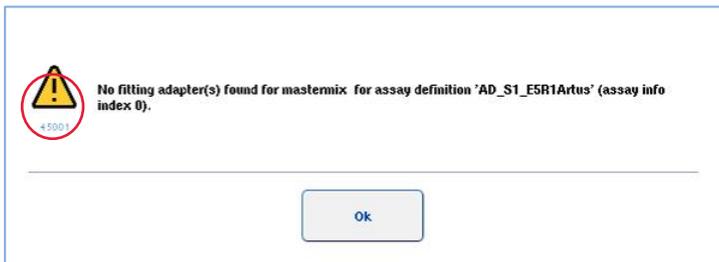

14.1.1 Errores indicados en la barra de estado

En algunos casos, los errores se indican con los botones de los cajones parpadeando en color amarillo en la barra de estado. Pulse el botón que parpadea para ver el mensaje de error y siga las instrucciones.




14.1.2 Errores indicados en los encabezados de las fichas

Los encabezados de las fichas tienen un indicador de errores dentro de la ficha. Por ello, en algunos casos, los errores se indican mediante un icono con una señal de advertencia junto al nombre del encabezado de la ficha.

14.1.3 Errores indicados en la barra de comandos

En caso de error, un icono con una señal de advertencia se mostrará dentro del botón de menú afectado, junto al nombre.


Cambie a la ficha afectada o pulse el botón correspondiente de la barra de comandos para ver un resumen de la situación que produce el error dentro del cuadro de diálogo.

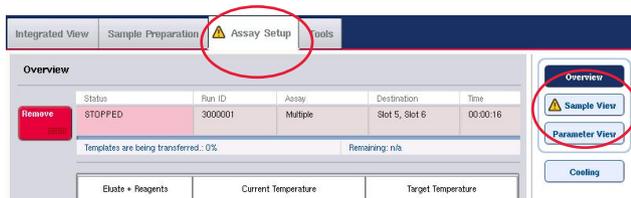

Indicación de error en los encabezados de las fichas y los botones de la barra de comandos.


14.1.4 Mensajes con el botón **Help** (Ayuda)

Si aparece un mensaje con el botón **Help** (Ayuda), el usuario tiene acceso a instrucciones para resolver el problema.

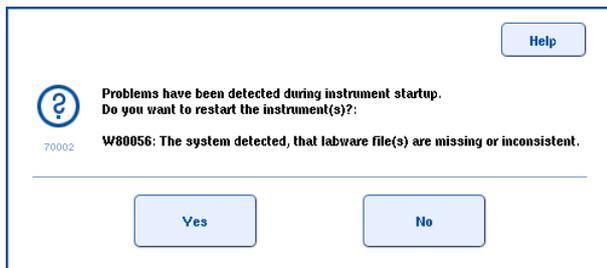

Haga lo siguiente:


6. Pulse el botón **Help** (Ayuda). Aparecerá un nuevo mensaje.

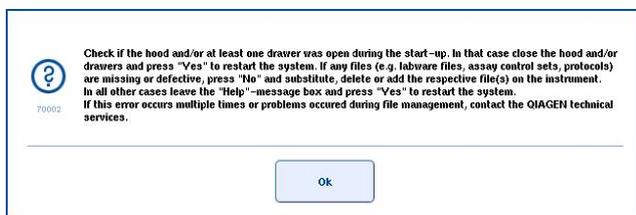

7. Lea atentamente las instrucciones y, a continuación, pulse **OK** (Aceptar).

8. Cierre el mensaje y siga las instrucciones.

Nota: Si desea leer de nuevo el mensaje, seleccione **Instrument Report** (Informe del instrumento) en la pantalla **Tools** (Herramientas). A continuación, seleccione la ficha **Errors** (Errores). Allí se mostrarán los mensajes de error recientes.

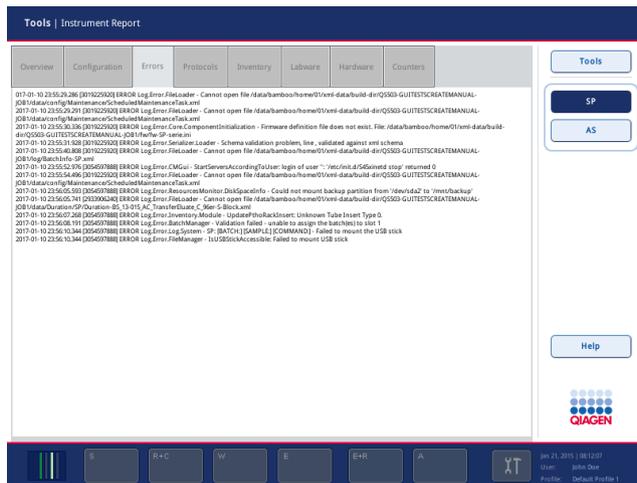

14.1.5 Mensajes sin el botón **Help** (Ayuda)

Si aparece un mensaje sin un botón **Help** (Ayuda), haga lo siguiente:



- Confirme el mensaje y, a continuación, siga las instrucciones indicadas en el mensaje.
- Si el mensaje no contiene un código de error, siga las instrucciones para errores con contexto específico enumeradas en las secciones 14.4, 14.5, 14.6 y 14.7.
- Llame al servicio técnico de QIAGEN si está recomendado o es necesario.

14.2 Cuadros de ayuda del software

Para brindar asistencia y guía a los usuarios, el software de los instrumentos QIASymphony SP/AS proporciona ayuda en todas las pantallas.

Para acceder a los textos de ayuda del software, pulse el botón **Help** (Ayuda) en la barra de comandos, la cual aparece en todas las pantallas.

Al pulsar este botón **Help** (Ayuda), se abrirá un cuadro de diálogo frente a la pantalla activa. El texto mostrado dentro del mensaje de ayuda brinda consejos sobre cómo abordar el problema que se presenta en la pantalla actual.

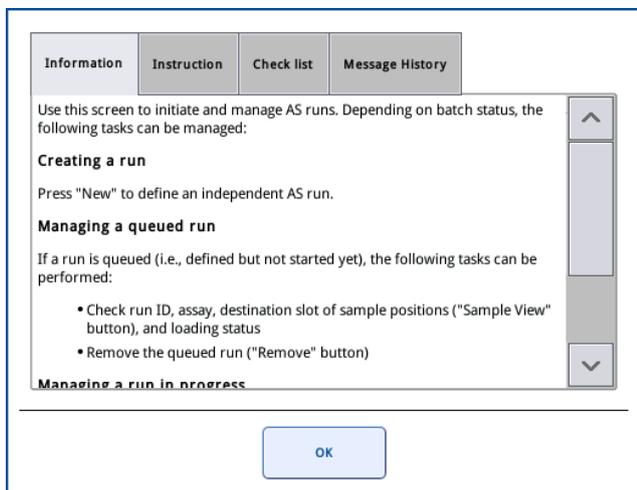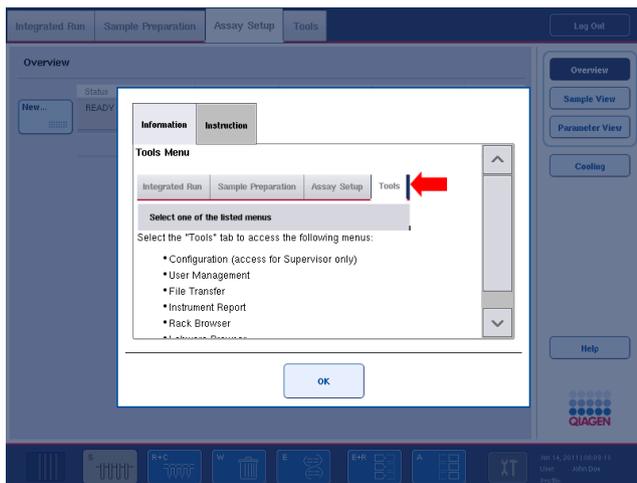

Para regresar a la pantalla original, pulse **OK** (Aceptar) dentro del cuadro de diálogo de la ayuda.

14.2.1 Estructura de los cuadros de ayuda del software

Cada cuadro de ayuda tiene un máximo de 5 fichas diferentes (en la siguiente secuencia): **Errors** (Errores), **Information** (Información), **Instruction** (Instrucciones), **Check list** (Lista de comprobación) y **Message History** (Historial de mensajes).

Errors (Errores)	La ficha Errors (Errores) muestra información adicional sobre el contenido del cuadro del diálogo que está marcado como erróneo. La ficha filtra la información para posiciones seleccionadas, si las hay.
Information (Información)	La ficha Information (Información) muestra notas sobre el comportamiento de la pantalla e información sobre la vista de la pantalla. El texto de ayuda indica opciones para el usuario dentro del contexto.
Instructions (Instrucciones)	La ficha Instructions (Instrucciones) muestra una descripción detallada de los pasos que deberá seguir el usuario.
Check list (Lista de comprobación)	La ficha Check list (Lista de comprobación) incluye diversos temas que el usuario puede comprobar relacionados con el contexto de la situación. No es necesario llevar a cabo todas las comprobaciones específicas dentro de la lista de manera obligatoria.
Message History (Historial de mensajes)	Al hacer clic en la fila relevante en Message History (Historial de mensajes), se mostrará el mensaje correspondiente junto con el texto de ayuda correspondiente, si está disponible.

Nota: Un cuadro de diálogo **Help** (Ayuda) del software puede tener una cantidad menor de estos tipos de texto.

14.3 Contacto con el servicio técnico de QIAGEN

Si un error persiste y necesita ponerse en contacto con el servicio técnico de QIAGEN, haga un registro del incidente y cree un archivo de informe del instrumento.

14.3.1 Creación de un registro del incidente

1. Anote todos los pasos realizados antes y después de que se produjera el error.
2. Documente los mensajes que hayan aparecido en la pantalla táctil.

Nota: Es importante que pueda indicarnos el código de error y el texto asociado. Esta información ayudará al técnico de campo especializado y al servicio técnico de QIAGEN a resolver el error.

Nota: En algunos casos, el software no muestra el mensaje de error en la pantalla táctil. El error se documenta en el archivo de registro del sistema del instrumento QIASymphony AS o QIASymphony SP.

3. Anote la fecha y la hora a las que se produjo el error.
4. Proporcione una descripción detallada del incidente. Por ejemplo, proporcione una fotografía de la mesa de trabajo y anote la siguiente información:
 - ¿En qué parte de los instrumentos QIASymphony SP/AS se produjo el error?
 - ¿En qué paso del protocolo se produjo el error?

- ¿Qué se observó (p. ej., hay algo roto, hay puntas o cartuchos de preparación de muestras en lugares no habituales en la mesa de trabajo) y qué se esperaba?
- ¿Se oyó algún ruido inesperado?


Además, si procede, proporcione la siguiente información.

- Si se perdieron puntas durante el pipeteado, indique el número de lote y el tipo de punta.
- ¿Se rellenaron manualmente las gradillas de puntas?
- ¿Qué adaptador de reactivos, incluido el fabricante y el número de pedido, se utilizó?
- ¿Qué gradillas de muestras y de eluidos, incluido el fabricante y el número de pedido, se utilizaron?
- ¿Qué gradilla de ensayos, incluido el fabricante y el número de pedido, se utilizó?

14.3.2 Creación de un archivo de informe del instrumento

Si el servicio técnico de QIAGEN le pide que cree un archivo de informe del instrumento, haga lo siguiente:

1. Inicie una sesión en el (los) instrumento(s).
2. Seleccione **Instrument Report** (Informe del instrumento) en el menú **Tools** (Herramientas). Aparecerá la ficha **Overview** (Resumen) del menú **Instrument Report** (Informe del instrumento) y se recuperarán los datos del instrumento.

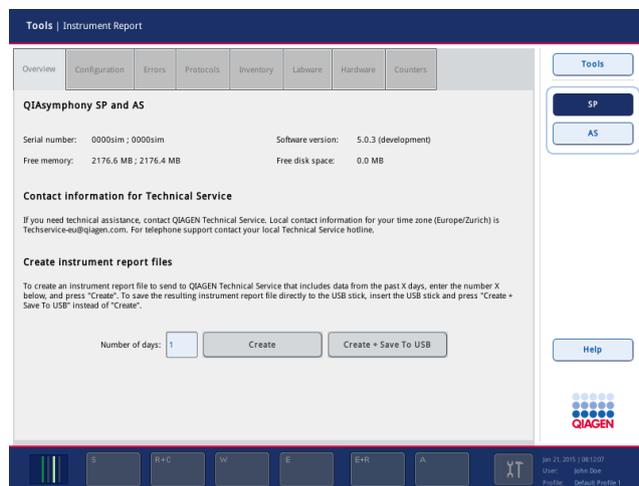

3. Para crear un informe del instrumento para el instrumento QIASymphony SP, seleccione **SP**. Para crear un informe del instrumento para el instrumento QIASymphony AS, seleccione **AS**.
4. Introduzca el número de días que desea que cubra el archivo de informe del instrumento.

5. Pulse **Create** (Crear). También puede guardar el archivo directamente en el lápiz USB; para ello, inserte el lápiz USB y, a continuación, pulse **Create + Save to USB** (Crear + Guardar en lápiz USB).

Para descargar todos los archivos de informe del instrumento al lápiz USB, consulte el la sección 8.3.2 del *Manual del usuario de QIAsymphony SP/AS – Descripción general*. Los archivos de informe del instrumento también pueden descargarse por medio del programa QIAsymphony Management Console. Si desea obtener más información, consulte la sección 4 del Manual del usuario de *QIAsymphony Management Console*.

Nota: Si surge un problema, una colisión o algún otro incidente en el instrumento, genere un archivo de informe del instrumento y asegúrese de que toda la información y los archivos necesarios estén disponibles para el servicio técnico de QIAGEN.

14.4 Errores generales que no tienen códigos de error

Error	Comentarios y sugerencias
The startup screen does not appear and the status LEDs are not illuminated. (La pantalla de inicio no aparece y los indicadores luminosos de estado no están iluminados)	Póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.
Error occurs during an assay run. (Se produce un error durante una serie de ensayos)	Estaba en curso una serie de ensayos en el instrumento QIAsymphony AS y se produjo un error. Deben apagarse los instrumentos QIAsymphony SP/AS. Tras reiniciar los instrumentos, no es posible continuar con la serie de ensayos o con un protocolo que estaban en curso al mismo tiempo en el instrumento QIAsymphony SP.
Error occurs during a protocol. (Se produce un error durante un protocolo)	Si había un protocolo en curso en el instrumento QIAsymphony SP y se produjo un error, deben apagarse los instrumentos QIAsymphony SP/AS. Tras reiniciar los instrumentos, no es posible continuar con el protocolo o con una serie de ensayos que estaba en curso en el instrumento QIAsymphony AS. Si desea obtener información acerca de cómo continuar con la preparación manual de ensayos, consulte la sección 2.13 del Manual del usuario de QIAsymphony SP/AS – Uso del instrumento QIAsymphony AS.

14.4.1 Errores relacionados con la administración de archivos

Error	Comentarios y sugerencias
USB stick or other USB device was not recognized. (No se ha reconocido el lápiz USB u otro dispositivo USB)	Utilice únicamente el lápiz USB suministrado con el instrumento QIAsymphony SP. Pruebe a conectar el lápiz USB en el otro puerto USB. Reinicie los instrumentos QIAsymphony SP/AS. Nota: Para la transferencia de archivos, utilice el programa QIAsymphony Management Console.

Error	Comentarios y sugerencias
Signature invalid/Invalid checksum. (Firma no válida/suma de comprobación no válida)	<p>Durante la transferencia de archivos a través de un lápiz USB, los archivos nuevos se cargan otra vez. Si un archivo (p. ej. un juego de controles de ensayo o un conjunto de parámetros del ensayo) no está firmado, se mostrará un mensaje de error ("signature invalid" [firma no válida] o "invalid checksum" [suma de comprobación no válida]). Sin embargo, no se indica el nombre del archivo no válido. El archivo recién transferido podría no ser válido, pero no necesariamente.</p> <p>Compruebe la validez en el programa QIASymphony Management Console. Borre todos los archivos no firmados. No elimine otros tipos de archivos.</p>

14.4.2 Errores relacionados con archivos

Errores generales relacionados con archivos

Error	Comentarios y sugerencias
File not transferred. (Archivo no transferido)	Compruebe que el archivo se encuentra en la carpeta correcta en el lápiz USB.
Invalid checksum. (Suma de comprobación no válida)	Asegúrese de que el archivo se creó con los instrumentos QIASymphony SP/AS o utilizando el programa QIASymphony Management Console.

Errores relacionados con los archivos de gradillas

Error	Comentarios y sugerencias
Rack file could not be loaded. (No pudo cargarse el archivo de gradillas)	<p>Asegúrese de que el archivo de gradillas se ha cargado en los instrumentos QIASymphony SP/AS.</p> <p>Compruebe el parámetro Ready for AS (Listo para el instrumento AS). Este parámetro debería estar configurado en Yes (Si).</p> <p>Si no está configurado en Yes (Si), será necesario modificar el archivo de gradillas. Para ello, convierta el archivo *.xml al formato *.csv utilizando la herramienta CSV Conversion (Conversión de CSV) del programa QIASymphony Management Console. A continuación, corrija el parámetro utilizando los programas Microsoft Excel® o Notepad. Si desea obtener más información, consulte la sección 8.12 del <i>Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Descripción general</i>.</p>
Rack file contains wrong labware. (El archivo de gradillas contiene material de laboratorio incorrecto)	<p>Asegúrese de que las gradillas/tubos y los adaptadores especificados en el archivo de gradillas son compatibles con los instrumentos QIASymphony SP/AS. Si desea ver una lista completa de las gradillas y de los adaptadores, visite www.qiagen.com/goto/QIASymphony.</p> <p>Asegúrese de que los nombres de las gradillas y de los adaptadores están escritos correctamente y de que no hay espacios en blanco incorrectos al comienzo o al final de los nombres.</p>
Sample positions are incorrect. (Las posiciones de las muestras son incorrectas)	<p>Si se trata de un archivo de gradillas generado por el usuario, convierta el archivo *.xml de nuevo al formato *.csv utilizando la herramienta CSV Conversion (Conversión de CSV) del programa QIASymphony Management Console. Corrija las posiciones de las muestras utilizando los programas Microsoft Excel o Notepad.</p> <p>Asegúrese de que está seleccionado el tipo de gradilla correcto.</p>
Rack file could not be found. (No ha podido encontrarse el archivo de gradillas)	<p>Asegúrese de que se ha transferido el archivo de gradillas correcto a los instrumentos QIASymphony SP/AS.</p> <p>Asegúrese de que se ha transferido el archivo de gradillas correcto a los instrumentos QIASymphony SP/AS antes de iniciar la definición de ensayos.</p> <p>El archivo de gradillas debe tener un formato que pueda ser reconocido por los instrumentos QIASymphony SP/AS (es decir, *.xml). Asegúrese de que se ha convertido el archivo de gradillas del formato *.csv al formato *.xml utilizando la herramienta CSV Conversion (Conversión de CSV) del programa QIASymphony Management Console.</p>
Content of system generated file is wrong. (El contenido del archivo generado por el sistema es erróneo)	<p>Compruebe si la actualización es correcta.</p> <p>Asegúrese de que no se produzcan errores durante el proceso.</p>

Errores relacionados con las listas de trabajo

Error	Comentarios y sugerencias
Work list could not be found. (No ha podido encontrarse la lista de trabajo.)	<p>Asegúrese de que se ha transferido la lista de trabajo correcta a los instrumentos QIASymphony SP/AS antes de iniciar la definición de ensayos.</p> <p>Asegúrese de que se ha convertido la lista de trabajo al formato *.xml utilizando la herramienta CSV Conversion (Conversión de CSV) del programa QIASymphony Management Console.</p> <p>Si está utilizando el instrumento QIASymphony AS, asegúrese de que la lista de trabajo no ha caducado. Pulse Assay Lists (Listas de ensayos) y compruebe si aparecen los conjuntos de parámetros del ensayo necesarios. Si aparecen los conjuntos de parámetros del ensayo necesarios, es probable que la lista de trabajo haya caducado.</p>

Error	Comentarios y sugerencias
Assay list does not display expected Assay Parameter Set. (La lista de ensayos no muestra el conjunto de parámetros del ensayo esperado)	<p>Asegúrese de que la lista de trabajo no ha caducado. Pulse Assay Lists (Listas de ensayos) y compruebe si aparecen los conjuntos de parámetros del ensayo necesarios. Si aparecen los conjuntos de parámetros del ensayo necesarios, es probable que la lista de trabajo haya caducado.</p> <p>Asegúrese de que se han transferido los conjuntos de parámetros del ensayo y los archivos de definición de ensayos definidos en la lista de trabajo a los instrumentos QIASymphony SP/AS antes de iniciar la definición de ensayos.</p> <p>Asegúrese de que el nombre y el identificador exclusivo del conjunto de parámetros del ensayo definido en la lista de trabajo son idénticos al nombre y al identificador exclusivo definidos en el conjunto de parámetros del ensayo.</p>

Errores relacionados con el material de laboratorio

Error	Comentarios y sugerencias
The labware is not visible in the Assay Setup Sample Rack(s) and Assay Setup Assay Rack(s) screen. (El material de laboratorio no aparece en las pantallas Assay Setup Sample Rack(s) [Configuración de ensayos Gradillas de muestras] o Assay Setup Assay Rack(s) [Configuración de ensayos Gradillas de ensayos]).	<p>Compruebe el menú Labware Browser (Navegador de material de laboratorio) (consulte la sección 3.16 del <i>Manual del usuario de QIASymphony SP/AS — Uso del instrumento QIASymphony SP</i> y la sección 3.8 del <i>Manual del usuario de QIASymphony SP/AS — Uso del instrumento QIASymphony AS</i>).</p> <p>Asegúrese de que se ha transferido el archivo de material de laboratorio a la carpeta Labware AS (Material de laboratorio del instrumento AS).</p> <p>Asegúrese de que se ha guardado el archivo de material de laboratorio en la carpeta correcta del lápiz USB (data/Labware/AS/).</p> <p>Asegúrese de que se ha transferido el archivo de material de laboratorio a los instrumentos QIASymphony SP/AS antes de iniciar la definición de ensayos.</p> <p>Compruebe todas las categorías del material de laboratorio listado.</p>

Errores relacionados con los archivos de termociclador

Error	Comentarios y sugerencias
Cycler file is not created or is not correct for the cycler. (No se ha creado el archivo de termociclador o este no es correcto para el termociclador)	<p>Los instrumentos QIASymphony SP/AS crean automáticamente un archivo de termociclador al finalizar una serie de ensayos. El formato del archivo de termociclador depende del tipo de gradilla de ensayos. Asegúrese de que está definido el formato de archivo de termociclador correcto para las gradillas de ensayos en el conjunto de parámetros del ensayo. En caso necesario, modifique el formato del archivo de termociclador en el conjunto de parámetros del ensayo utilizando la herramienta de edición Process Definition (Definición del proceso) del programa QIASymphony Management Console.</p> <p>Si no está disponible para seleccionarse el formato de gradilla de ensayos necesario para un formato de archivo de termociclador concreto en el programa QIASymphony Management Console, asegúrese de que las gradillas de ensayos disponibles están actualizadas en el programa QIASymphony Management Console. Consulte el Manual del usuario de <i>QIASymphony Management Console</i> si desea obtener más información acerca de cómo hacerlo.</p>

Errores relacionados con los archivos de resultados del instrumento QIASymphony AS

Error	Comentarios y sugerencias
The final result file is not created./Only a preliminary result file is visible. (El archivo de resultados final no se ha creado./Solo aparece un archivo de resultados preliminar)	<p>Los instrumentos QlAsymphony SP/AS crean automáticamente un archivo de resultados preliminar al iniciarse una serie de ensayos. El archivo de resultados final se crea al pulsar Remove (Extraer) al final de una serie de ensayos.</p> <p>Si está utilizando la transferencia automática, compruebe si aparece la impresora correcta en la carpeta relacionada.</p> <p>Asegúrese de que está buscando en la carpeta correcta los archivos de resultados del instrumento QlAsymphony SP o del instrumento QlAsymphony AS. La carpeta correcta es log/Results/SP o log/Results/AS.</p>
Result file AS is not accessible because QlAsymphony is started up without AS. (El archivo de resultados del AS no está accesible debido a que el instrumento QlAsymphony se inició sin el AS)	<p>Una serie en el AS de detiene debido a un error técnico y el sistema crea un archivo de resultados del AS. Posteriormente, si se inicia el instrumento QlAsymphony sin el módulo de AS conectado, no es posible acceder al archivo de resultados del AS utilizando el programa QMC o el lápiz USB.</p> <p>Reinicie el sistema con el módulo de AS conectado para descargar los archivos del AS. Si esto no es posible, póngase en contacto con el servicio técnico de QlAGEN.</p>
Sample status. (Estado de las muestras)	<p>Si se producen errores o problemas durante una serie de ensayos, puede verse afectado el estado de las muestras.</p> <p>Si las muestras se han procesado satisfactoriamente, el estado de las muestras es "valid" (válido). Si el lote se había puesto en pausa, las muestras estarán marcadas como "unclear" (dudosa) y si, por ejemplo, se presentan problemas de refrigeración durante una serie, el estado de las muestras podría ser "unclear" (dudoso). Si se producen problemas durante la transferencia de la mezcla maestra o de las muestras, el estado de las muestras es "invalid" (no válidas).</p> <p>Si se utiliza un archivo de gradillas del instrumento QlAsymphony SP en el instrumento QlAsymphony AS, el estado de las muestras solamente cambiará si se producen errores o problemas durante la serie de ensayos. Si se modifica el estado de las muestras, se registrará el motivo de este cambio en el archivo de resultados del instrumento QlAsymphony AS. El mensaje, el identificador del mensaje y el estado de las muestras se indican en la sección Detailed Run Information (Información detallada de la serie) del archivo de resultados del instrumento QlAsymphony AS.</p>

Errores relacionados con los archivos de información de carga

Error	Comentarios y sugerencias
The loading information file is not created or printed. (No se ha creado el archivo de información de carga o no está impreso)	<p>Debería generarse un archivo de información de carga después de pulsar Queue (Poner en cola).</p> <p>Asegúrese de que está buscando el archivo de información de carga en la carpeta correcta. La carpeta correcta es \log>LoadingInformation.</p> <p>Si está utilizando la herramienta de transferencia automática de archivos del programa QlAsymphony Management Console, compruebe la configuración relacionada para ver si aparece la impresora correcta.</p>

Errores relacionados con los archivos de registro

Error	Comentarios y sugerencias
General transfer problems. (Problemas generales de transferencia)	<p>Asegúrese de que los instrumentos QlAsymphony SP/AS están conectados a la red cuando utilice el programa QlAsymphony Management Console para la transferencia de archivos.</p> <p>Asegúrese de que el lápiz USB esté bien conectado.</p>

14.4.3 Errores relacionados con la eliminación de puntas

Error	Comentarios y sugerencias
Tips are stacking in the tip chute. (Se están amontonando puntas en el conducto para puntas)	Asegúrese de que la bolsa para eliminación de puntas está vacía y de que no está atrapada entre el cajón y la mesa de trabajo.
Tips are spilled in the lab. (Caen puntas en el laboratorio)	Asegúrese de que la bolsa para eliminación de puntas está correctamente fijada al soporte de la bolsa de desechos.

14.4.4 Errores relacionados con el menú "Configuration"

Error	Comentarios y sugerencias
The adapter for AS is not displayed in the configuration dialog. (El adaptador para el instrumento QIASymphony AS no aparece en el cuadro de diálogo de configuración)	Asegúrese de que ha transferido los archivos de adaptadores a la carpeta Labware AS (Material de laboratorio del instrumento AS).

14.4.5 Errores relacionados con el examen de inventario

Error	Comentarios y sugerencias
Run cannot be started because an inventory scan has to be performed. (No puede iniciarse la serie porque debe realizarse un examen de inventario)	Antes de que el usuario pueda iniciar una serie, debe realizarse un examen de inventario de cada cajón, excepto del cajón "Sample". Abra y cierre los cajones para iniciar el examen de inventario. Si ya se ha realizado un examen de inventario, no abra la tapa antes de iniciar la serie. Si se ha abierto la tapa después de realizar un examen de inventario, deberá realizarse de nuevo el examen.
Inventory scan does not start. (El examen de inventario no se inicia)	Compruebe que la tapa y todos los cajones están cerrados correctamente.
The inventory scan of the drawers detects an adapter on "slot X" although no adapter has been placed there. Adapter bar code not readable. (El examen de inventario de los cajones detecta un adaptador en la "ranura X" aunque no se ha colocado en ellos un adaptador. El código de barras del adaptador no es legible)	Asegúrese de que los códigos de barras del cajón están limpios y pueden leerse fácilmente. No exponga los instrumentos QIASymphony SP/AS a la luz directa del sol (consulte la sección 3.1). Si hay un adaptador en la ranura de elución que no se necesite, asegúrese de extraerlo.

Error	Comentarios y sugerencias
Consumables are not recognized correctly by inventory scan. (Los consumibles no se reconocen correctamente en el examen de inventario)	<p>Compruebe que los consumibles (cajas unitarias, frasco de disolución amortiguadora, gradillas para puntas, recipiente accesorio, conducto para puntas, etc.) estén colocados correctamente en el cajón correspondiente.</p> <p>Compruebe que se han retirado las tapas de las cajas unitarias y el frasco de disolución amortiguadora.</p> <p>Coloque los Accessory Troughs únicamente en las ranuras para gradillas de puntas 5 y 12 (SP).</p> <p>Abra y cierre el cajón e inicie nuevamente el examen de inventario.</p> <p>Asegúrese de que el conducto para puntas está correctamente instalado en el instrumento QIASymphony (SP y AS).</p> <p>Nota: Se recomienda cargar solo gradillas de puntas llenas.</p> <p>Nota: No rellene cajas unitarias parcialmente usadas.</p>
Volume check of buffer bottle failed. (Ha fallado la comprobación de volumen del frasco de disolución amortiguadora)	Asegúrese de que el frasco contiene un volumen suficiente de disolución amortiguadora.
Volume check of the Accessory Trough failed. (Ha fallado la comprobación de volumen del recipiente accesorio)	<p>Asegúrese de que el recipiente accesorio contiene un volumen suficiente de etanol. Si desea obtener más información, consulte el manual del kit QIASymphony que esté utilizando.</p> <p>Realice otro examen de inventario del cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles).</p>
Reagent cartridge was not opened automatically by the system. (El sistema no abrió automáticamente el cartucho de reactivos)	<p>Asegúrese de que hay una tapa de perforación acoplada al cartucho de reactivos.</p> <p>Nota: Si el examen de inventario detecta un cartucho de reactivos sin abrir, se abrirá automáticamente el cartucho de reactivos antes de que sea usado por primera vez en un protocolo.</p>
One or more buffers were not recognized. (No se han reconocido una o más disoluciones amortiguadoras)	Asegúrese de que se han extraído las tiras de sellado para reutilización de los recipientes del cartucho de reactivos.
The elution drawer was opened while an inventory scan was running and the "Elution Rack" screen cannot be exited. (Se ha abierto el cajón de elución durante un examen de inventario y no es posible salir de la pantalla "Elution Rack" [Gradilla de elución])	El examen del cajón "Elution" (Elución) está en cola y se realizará en cuanto haya finalizado el examen de inventario actual.

Error	Comentarios y sugerencias
After starting and closing the "Eluate Drawer" dialog without changes, the inventory scan of the "Eluate" drawer starts. (Después de iniciar y cerrar el cuadro de diálogo "Eluate Drawer" [Cajón de eluidos] sin hacer modificaciones, inicia el examen de inventario del cajón "Eluate" [Eluidos])	Este es el comportamiento correcto si abre y cierra la tapa y pulsa No, nothing changed (No, no hay cambios) en el cuadro de diálogo del mensaje que se muestra. Después de esto, se realizará un examen completo al salir del cuadro de diálogo "Eluate Drawer" (Cajón de eluidos) sin hacer cambios.
The bar code of an elution or assay rack cannot be read using the handheld bar code scanner. (El código de barras de una gradilla de elución o de una gradilla de ensayos no puede leerse con el escáner de códigos de barras de mano)	Asegúrese de que el escáner de códigos de barras de mano está correctamente conectado a los instrumentos QIASymphony SP/AS. Intente leer otros códigos de barras con el escáner. Asegúrese de que todos los códigos de barras pueden leerse fácilmente. Compruebe que el escáner de códigos de barras de mano puede leer el formato del código de barras. Consulte el apéndice A del <i>Manual del usuario de QIASymphony SP/AS — Descripción general</i> para ver una lista de los tipos de código de barras compatibles. Defina la ranura de elución/gradilla de elución utilizando la pantalla táctil.
Sample bar codes are not read properly/not detected. (Los códigos de barras de las muestras no se leen correctamente o no se detectan)	Utilice únicamente códigos de barras compatibles. Si desea obtener información acerca de los códigos de barras compatibles, consulte el Apéndice A del <i>Manual del usuario de QIASymphony SP/AS — Descripción general</i> . Asegúrese de que los códigos de barras pueden leerse fácilmente y están orientados hacia la izquierda.
Tube/plate carrier was not recognized during loading. (No se ha reconocido el soporte de tubos/placas durante la carga)	Asegúrese de colocar el código de barras a una altura apropiada en la gradilla. Asegúrese de que el código de barras encaja en la ventana del soporte de tubos y coloque el código de barras a la altura de los códigos de barras del soporte de placas. Si está utilizando códigos de barras de muestras duplicados, no los coloque juntos en el soporte de muestras. En este caso, coloque códigos de barras de muestras diferentes entre códigos de barras idénticos. Extraiga el soporte e insértelo de nuevo de forma más lenta. Recuerde parar en la línea de detención.

14.5 Errores del instrumento QIASymphony SP que no tienen códigos de error

14.5.1 Cajón "Eluate" (Eluidos)

Error	Comentarios y sugerencias
Filter-tips are bent or deformed after eluate transfer. (Las puntas de filtro están dobladas o deformadas tras la transferencia de eluidos)	Asegúrese de definir el tipo correcto de gradilla de eluidos en la ranura de elución correspondiente. Asegúrese de que la gradilla de elución está correctamente colocada en la ranura de elución. Utilice únicamente gradillas de elución compatibles con el adaptador especificado.

Error

Comentarios y sugerencias

Tips/channels are incorrectly positioned on the elution slot during the elution step. (Hay puntas/canales colocados incorrectamente en la ranura de elución durante el paso de elución)	Asegúrese de colocar la gradilla de elución en la ranura de elución en la orientación correcta. Asegúrese de insertar y definir el mismo tubo de muestra. Utilice únicamente tubos o gradillas de muestras compatibles. Si desea obtener información acerca de los tubos y gradillas, visite www.qiagen.com/goto/QIASymphony .
The "Eluate" drawer cannot be opened. (No puede abrirse el cajón "Eluate" [Eluidos])	El cajón "Eluate" (Eluidos) está bloqueado durante la transferencia de eluidos. Tras la transferencia de eluidos a la gradilla de elución, el sistema desbloquea el cajón "Eluate" (Eluidos). Si no puede abrirse el cajón "Eluate" (Eluidos) tras la transferencia de eluidos, abra el menú Maintenance (Mantenimiento) y pulse el botón Drawers (Cajones) en Unlock (Desbloquear).
It is not possible to define an elution rack. (No es posible definir una gradilla de elución)	Abra el cajón "Eluate" (Eluidos) y déjelo abierto mientras define una gradilla de elución.
Eluates are not in the corresponding elution rack as described in the result file. (Los eluidos no se encuentran en la gradilla de elución correspondiente descrita en el archivo de resultados)	Asegúrese de colocar la gradilla de elución con el pocillo A1 en la esquina superior izquierda.
After closing the "Eluate" drawer, the information about the elution rack entered by the user was not stored by the system and an error message is displayed after performing the inventory scan. (Después de cerrar el cajón "Eluate" [Eluidos], el sistema no almacenó la información sobre la gradilla de elución introducida por el usuario y aparece un mensaje de error después de realizar el examen de inventario)	Una vez introducida la información sobre la gradilla de elución, pulse el botón Add (Añadir) antes de cerrar el cajón para guardar los cambios de la información.

14.5.2 Cajón "Sample" (Muestras)

Error	Comentarios y sugerencias
Sample carrier locks do not release and/or bar code reader does not move forward. (Los cierres del soporte de muestras no se abren o el lector de códigos de barras no avanza)	Asegúrese de que el instrumento QIASymphony SP está encendido y de que los indicadores luminosos del cajón "Sample" (Muestra) están iluminados en verde. Asegúrese de insertar todos los soportes de tubos/placas con los códigos de barras orientados hacia la izquierda. Eleve el soporte hasta la línea de detención y espere. Asegúrese de que todos los códigos de barras pueden leerse. Si no se resuelve el problema, reinicie los instrumentos QIASymphony SP/AS. Abra el menú Maintenance SP (Mantenimiento del SP) y pulse el botón Sample carrier (Soporte de muestras) en Unlock (Desbloquear).
Samples have been physically removed from the system but a result file cannot be downloaded. (Se han extraído físicamente muestras del sistema pero no puede descargarse un archivo de resultados)	Para descargar un archivo de resultados que contenga información detallada sobre las muestras, extraiga la gradilla de elución correspondiente del inventario.

14.5.3 Cajón “Waste” (Desechos)

Error	Comentarios y sugerencias
Liquid in the “Waste” drawer. (Líquido en el cajón “Waste” [Desechos])	Compruebe que se ha retirado la tapa del recipiente de desechos líquidos. Asegúrese de insertar el recipiente de desechos líquidos en la orientación correcta. Si hay rebosamiento en el recipiente de desechos líquidos, póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN para asegurarse de que el líquido no ocasione fallos en el funcionamiento.
“Waste” drawer cannot be opened. (No puede abrirse el cajón “Waste” [Desechos])	El cajón “Waste” (Desechos) se bloquea durante una serie y durante el examen de inventario. Si no puede abrirse el cajón una vez finalizado el protocolo, abra el menú Maintenance SP (Mantenimiento del SP) y seleccione Drawers (Cajones) en Unlock (Desbloquear).
“Waste” drawer cannot be closed. (No puede cerrarse el cajón “Waste” [Desechos])	Asegúrese de colocar el recipiente de desechos líquidos en el cajón “Waste” (Desechos) en el lado derecho del cajón. Retire la tapa del recipiente de desechos líquidos antes de colocarlo en el cajón “Waste” (Desechos).

14.5.4 Cajón “Reagents and Consumables” (Reactivos y consumibles)

Error	Comentarios y sugerencias
The “Reagents and Consumables” drawer cannot be opened. (No puede abrirse el cajón “Reagents and Consumables” [Reactivos y consumibles])	<p>El cajón “Reagents and Consumables” (Reactivos y consumibles) se bloquea durante una serie y durante el examen de inventario.</p> <p>Si no puede abrirse el cajón una vez finalizado el protocolo, abra el menú Maintenance SP (Mantenimiento del SP) y seleccione Drawers (Cajones) en Unlock (Desbloquear).</p> <p>Asegúrese de que se han movido los dispositivos de perforación/cartuchos de reactivos a la posición inferior. Si no es así, abra el menú Maintenance SP (Mantenimiento del SP) y seleccione Piercing Device 1/2 (Dispositivo de perforación 1/2) abajo en Move (Mover).</p> <p>Nota: No fuerce la apertura del cajón.</p>

14.5.5 Errores que pueden producirse al iniciar un lote/serie

Error	Comentarios y sugerencias
Run button is inactive. (El botón “Run” [Serie] está inactivo)	Asegúrese de que se ha cargado el soporte de tubos/placas y de que el estado del lote es QUEUED (En cola).
One or more batches cannot be queued. (No se puede poner en cola uno o más lotes)	<p>El sistema detectó 2 o más muestras con el mismo identificador de muestra. Asegúrese de que el identificador de muestra es único.</p> <p>No pudo leerse el identificador de muestra durante la carga del soporte de tubos/placas. Extraiga el soporte de tubos/placas y cárguelo de nuevo de forma más lenta. Asegúrese de que todos los códigos de barras están orientados hacia la izquierda y de que pueden leerse.</p>
Wrong sample IDs are shown in sample view. (En la vista de muestras se muestran identificadores de muestras erróneos)	<p>Si se insertan dos o más soportes de tubos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extraiga todos los soportes. • Inserte un soporte y espere a que la cámara de códigos de barras haya vuelto a su posición inicial y a que haya cambiado el estado del lote correspondiente. • Inserte los soportes restantes de la misma forma. • Antes de insertar un nuevo soporte, espere a que haya cambiado el estado del lote correspondiente.

14.5.6 Errores relacionados con los protocolos

Error	Comentarios y sugerencias
Assay Control Set is not displayed. (No se muestra el juego de controles del ensayo)	Asegúrese de que se ha transferido el juego de controles del ensayo al instrumento QIASymphony SP. Compruebe todas las categorías en la lista Assay Control Set (Juego de controles del ensayo).

14.5.7 Errores que pueden producirse durante el funcionamiento del instrumento QIASymphony SP

Error	Comentarios y sugerencias
One or more channels had a Z-drive movement error. (Uno o más canales sufrieron un error de movimiento del accionador Z)	<p>Asegúrese de insertar y definir el mismo tubo/placa. Utilice únicamente tubos/gradillas compatibles. Para obtener más información, visite www.qiagen.com/goto/QIASymphony.</p> <p>Asegúrese de que los tubos/placas están correctamente insertados en el adaptador/soporte de tubos. Utilice un tubo o gradilla del tamaño apropiado para el volumen.</p> <p>Si todavía hay puntas con filtro acopladas a los adaptadores de puntas, abra el menú Maintenance SP (Mantenimiento del SP) y seleccione Cleanup (Limpieza) en Cleanup (Limpieza). Seleccione la rama Crash occurred (Se ha producido una colisión) del procedimiento de limpieza.</p> <p>Importante: Tras una limpieza satisfactoria, es necesario vaciar todas las posiciones de ranuras de los cajones "Sample" (Muestra) y "Eluate" (Eluidos) y reiniciar el instrumento. A continuación pueden iniciarse nuevas ejecuciones.</p>
Sample is not detected by the system and is flagged as "invalid". (El sistema no detecta la muestra y esta es marcada como "invalid" [no válida])	Asegúrese de que las muestras no contienen espuma. Asegúrese de usar al menos el volumen de muestra mínimo necesario para el protocolo. Si desea obtener más información, consulte el manual del kit QIASymphony que esté utilizando.
Nothing happens when the Cleanup button in the Maintenance SP menu is pressed. (No sucede nada al pulsar el botón Cleanup [Limpieza] en el menú Maintenance SP [Mantenimiento del SP])	Compruebe que la tapa y todos los cajones están cerrados.
Lysis timer exceeded the time limit. (El cronómetro de lisis ha superado el límite de tiempo)	<p>Se ha superado el tiempo de lisis del lote de muestras. No ponga en pausa la serie durante el paso de lisis.</p> <p>Nota: Si se realiza otro examen de inventario del cajón "Eluate" (Eluidos) una vez iniciada la ejecución, es posible que se marquen las muestras como "unclear" (dudosas).</p>

14.5.8 Interrupción de la ejecución del protocolo

Error	Comentarios y sugerencias
System paused due to too few consumables in the "Reagents and Consumables" drawer. (El sistema entró en pausa debido a que había una cantidad demasiado escasa de consumibles en el cajón "Reagents and Consumables" [Reactivos y consumibles])	<p>Abra el cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles) y añada los elementos que falten. Cierre el cajón y realice un examen de inventario.</p> <p>Nota: Las muestras estarán marcadas como "unclear" (dudosas).</p> <p>Nota: Si uno o más adaptadores de puntas no pueden recoger puntas con filtro, póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.</p>
Inventory scan of the "Eluate" drawer starts even though a batch is running. (El examen de inventario del cajón "Eluate" [Eluidos] se inicia aunque hay un lote en ejecución)	<p>Cada vez que se abre y se cierra el cajón "Eluate" (Eluidos), debe realizarse un examen de inventario. Debido a que el lote o la serie se ponen en pausa durante el examen, las muestras quedarán marcadas como "unclear" (dudosas). El lote continuará cuando el examen de inventario haya finalizado. Tras el examen satisfactorio del cajón "Eluate" (Eluidos), el usuario debe pulsar "Close" (Cerrar) para continuar.</p> <p>Nota: Todos los cajones excepto el cajón "Eluate" (Eluidos) se desbloquean durante un examen de inventario del cajón "Eluate" (Eluidos).</p>
The protocol was interrupted or stopped by the system due an error. (El sistema interrumpió o detuvo el protocolo debido a un error)	<p>Debe limpiarse la mesa de trabajo. Abra el menú Maintenance SP (Mantenimiento del SP) y seleccione Cleanup (Limpieza) en Cleanup (Limpieza). Seleccione la rama Crash occurred (Se ha producido una colisión) del procedimiento de limpieza. Consulte la sección 2.23.1 del <i>Manual del usuario de QIASymphony SP/AS — Uso del instrumento QIASymphony SP</i>.</p> <p>Importante: Tras una limpieza satisfactoria, es necesario vaciar todas las posiciones de ranuras de los cajones "Sample" (Muestra) y "Eluate" (Eluidos) y reiniciar el instrumento. A continuación pueden iniciarse nuevas ejecuciones.</p>
The system stopped because an 8-Rod Cover or sample prep cartridge could not be released from the robotic gripper. (El sistema se detuvo debido a que no pudo liberarse una cubierta para 8 barras o un cartucho de preparación de muestras del sujetador robótico)	<p>Apague los instrumentos QIASymphony SP/AS e intente extraer manualmente la cubierta para 8 barras o el cartucho de preparación de muestras del instrumento QIASymphony SP. Si no puede extraerse manualmente, póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.</p> <p>Nota: No inicialice los instrumentos QIASymphony SP/AS.</p>

14.6 Errores del instrumento QIASymphony AS que no tienen códigos de error

14.6.1 Errores relacionados con la definición de ensayos

Error	Comentarios y sugerencias
Wrong rack file content. (Contenido erróneo del archivo de gradillas)	Asegúrese de que el contenido del archivo de gradillas seleccionado es correcto. Si el contenido no es correcto, puede modificarse utilizando la pantalla táctil o el programa QIASymphony Management Console.
Wrong rack type. (Tipo de gradilla erróneo)	Si es posible, vuelva a la pantalla Sample Rack(s) (Gradillas de muestras) y cambie el tipo de gradilla. Si esto no es posible, pulse Cancel (Cancelar) y reinicie el proceso de definición de ensayos. Si está utilizando un archivo de gradillas, asegúrese de que se ha seleccionado el archivo de gradillas correcto.
Wrong volume information for the eluate rack. (Información de volumen errónea para la gradilla de eluidos)	Si el volumen de muestra real disponible es mayor que el volumen definido en la pantalla Sample Rack Layout (Disposición de la gradilla de muestras), puede producirse un rebosamiento durante la aspiración. Si el volumen de muestra real disponible es menor que el volumen definido en la pantalla Sample Rack Layout (Disposición de la gradilla de muestras), podrían faltar señales.
Sample cannot be assigned to an APS. (No puede asignarse la muestra a un APS)	Las muestras con el estado "invalid" (no válidas) no pueden procesarse en el instrumento QIASymphony AS y, por consiguiente, no pueden seleccionarse durante la definición de ensayos. Asegúrese de que la muestra que desea seleccionar no está marcada como "invalid" (no válida).
Assay list does not display expected Assay Parameter Set. (La lista de ensayos no muestra el conjunto de parámetros del ensayo esperado)	Asegúrese de que se han transferido los conjuntos de parámetros del ensayo y los archivos de definición de ensayos necesarios a los instrumentos QIASymphony SP/AS antes de iniciar la definición de ensayos. Compruebe todas las categorías de la lista Available assays (Ensayos disponibles) en busca de los conjuntos de parámetros del ensayo esperados. Compruebe si el conjunto de parámetros del ensayo esperado se configuró para su uso en modo independiente o integrado. En la pantalla Assay Setup/Assay Selection (Preparación de los ensayos/Selección del ensayo), si está utilizando una lista de trabajo, cambie entre los modos Assay list (Lista de ensayos) y Work list (Lista de trabajos) y compruebe todas las categorías de la lista Available assays (Ensayos disponibles) en busca de los conjuntos de parámetros del ensayo esperados. Nota: Esto solo es aplicable en el modo "Independent" (Independiente).

14.6.2 Errores ocurridos durante una serie de ensayos

Problemas con el material de laboratorio o con derramamientos de líquidos

Error	Comentarios y sugerencias
Liquids in adapter. (Líquidos en el adaptador)	Asegúrese de que todos los consumibles están colocados en las posiciones correctas en la mesa de trabajo. El examen de inventario no comprueba si se han colocado los tubos/placas correctos en los adaptadores correspondientes.
Condensation on the worktable. (Condensación en la mesa de trabajo)	Dependiendo de las características del medio del laboratorio, es posible que se forme condensación en la mesa de trabajo. Elimine la condensación conforme a los procedimientos de mantenimiento diario; consulte la sección 9.2 del <i>Manual del usuario de QIASymphony SP/AS — Descripción general</i> .

Error	Comentarios y sugerencias
Filter-tips are bent or deformed after liquid transfer. (Las puntas con filtro están dobladas o deformadas tras la transferencia de líquidos)	Asegúrese de que se ha definido el tipo de gradilla correcto en la ranura correcta. Asegúrese de que la gradilla está correctamente colocada en el adaptador. Utilice únicamente tipos de gradillas compatibles con el adaptador definido.

Interrupción de la serie de ensayos

Error	Comentarios y sugerencias
The protocol was interrupted or stopped by the system due to an error. (El sistema interrumpió o detuvo el protocolo debido a un error)	<p>Extraiga los consumibles de la mesa de trabajo. En caso necesario, consulte la sección 2.13 del <i>Manual del usuario de QIASymphony SP/AS — Uso del instrumento QIASymphony AS</i> si desea obtener información acerca de la recuperación de protocolos y la finalización manual de la preparación de ensayos.</p> <p>Cualquier detención, pausa o interrupción de un protocolo hará que las muestras se marquen como "unclear" (dudosas).</p>
Not enough liquid found. (No hay suficiente líquido)	<p>Asegúrese de que se proporciona el volumen correcto y de que se proporcionan las placas/tubos y adaptadores definidos en la definición de ensayos.</p> <p>Asegúrese de que no hay burbujas de aire en la superficie del líquido.</p> <p>Añada más líquido.</p>

14.6.3 Errores relacionados con el análisis de los datos

Error	Comentarios y sugerencias
Missing sample signal. (Señal de muestras ausente)	<p>Evaporación posible: Si se dejan los eluidos/ensayos en los instrumentos QIASymphony SP/AS durante mucho tiempo después de finalizada una serie, se producirá evaporación. Asegúrese de extraer inmediatamente las gradillas de eluidos y las gradillas de ensayos una vez finalizada una serie.</p> <p>Compruebe si el volumen de eluido definido en el archivo de gradillas o en la pantalla táctil es mayor que el volumen de eluido real. Es posible que los instrumentos QIASymphony SP/AS no puedan transferir los volúmenes de muestras correctos. Esto puede causar una disminución del rendimiento.</p> <p>Fluctuaciones en los volúmenes de eluido: se recomienda comprobar visualmente la gradilla de ensayos para detectar diferencias en los volúmenes de las muestras. Si se observan diferencias grandes de volumen, significa que el volumen real de eluido es diferente del volumen esperado y que se ha transferido una cantidad insuficiente de eluido a la gradilla de ensayos. Si el problema persiste, reduzca el volumen de eluido.</p> <p>Asegúrese de que se han cargado en la mesa de trabajo los adaptadores y consumibles correctos, definidos para la serie actual. El uso de consumibles diferentes puede causar daños en los instrumentos QIASymphony SP/AS y problemas de pipeteado.</p> <p>Asegúrese de que la gradilla de ensayos y la gradilla de elución estén bien orientadas, con el pocillo A1 en la esquina superior izquierda. Si se están utilizando dos gradillas de elución, asegúrese de que las gradillas de elución de las ranuras 1 y 2 están correctamente colocadas.</p> <p>Asegúrese de que se han cargado los tubos de muestras correctos, definidos en la serie. Utilice únicamente tubos/gradillas de muestras compatibles con los instrumentos QIASymphony SP/AS. Si desea ver una lista completa de los tubos y gradillas de muestras compatibles, visite www.qiagen.com/goto/QIASymphony.</p>

14.7 Errores en la serie integrada

14.7.1 Cajón “Eluate” (Eluidos)

Error	Comentarios y sugerencias
The “Eluate” drawer cannot be opened. (No puede abrirse el cajón “Eluate” [Eluidos])	<p>El cajón “Eluate” (Eluidos) se bloquea al momento de seleccionar el botón “Define Run” (Definir serie) en la pantalla “Integrated Run/Overview” (Serie integrada/Resumen) (consulte la sección 2.4, “Definición de una serie integrada” en el <i>Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Uso del instrumento QIASymphony AS</i>).</p> <p>El cajón “Eluate” (Eluidos) solo se puede abrir si no hay lotes integrados cargados o puestos en cola en la pantalla Integrated Run/Overview (Serie integrada/Resumen). Para abrir el cajón “Eluate” (Eluidos), retire los Integrated Batch(es) (Lotes integrados) en la pantalla Integrated Run/Overview (Serie integrada/Resumen) (consulte la sección 2.16.1, “Descarga de la mesa de trabajo” en el <i>Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Uso del instrumento QIASymphony AS</i>).</p>

14.7.2 Extracción de una serie integrada

Error	Comentarios y sugerencias
Integrated batch cannot be removed in the Integrated Run/Overview. (No es posible quitar los lotes integrados en la pantalla Integrated Run/Overview [Serie integrada/Resumen])	<p>Si no es posible quitar una Integrated Run (Serie integrada) en la pantalla Integrated run/Overview (Serie integrada/Resumen), será necesario retirar la Assay Setup (Preparación de los ensayos) del sistema para extraerla (p. ej. si la preparación de muestras ha finalizado y no es posible iniciar el lote del AS debido a que anteriormente se detuvo un lote del AS).</p> <p>Para retirar manualmente el lote del AS de la serie integrada, seleccione la ficha Assay Setup (Preparación de ensayo) y pulse Remove (Extraer) en la pantalla Overview (Resumen) para quitar el lote del AS (consulte la sección 2.9, “Extraer ensayos después de una serie en el AS” en el <i>Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Uso del instrumento QIASymphony AS</i>). Después de quitar el lote del AS, vuelva Integrated Run/Overview (Serie integrada/Resumen) y extraiga la Integrated run (Serie integrada) pulsando el botón Integrated Batch X (Lote X integrado) (consulte la sección 2.16.1, “Descarga de la mesa de trabajo” en el <i>Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Uso del instrumento QIASymphony AS</i>).</p>

14.7.3 Mantenimiento, servicio y configuración

Error	Comentarios y sugerencias
Maintenance is not accessible. (El mantenimiento no está accesible)	Retire los lotes integrados cargados para acceder al menú Maintenance (Mantenimiento).
Service is not accessible. (El servicio no está accesible)	Retire los lotes integrados cargados para acceder al menú Service (Servicio).
Configuration is not accessible. (La configuración no está accesible)	Retire la placa de eluidos y escanee el cajón de eluidos vacío.

15 Especificaciones técnicas

QIAGEN se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones en cualquier momento.

15.1 Condiciones ambientales y condiciones de funcionamiento

Condiciones de funcionamiento

Consumo de energía QIAsymphony SP	100-240 V de CA, 50/60 Hz, 800 VA
Consumo de energía QIAsymphony AS	100-240 V de CA, 50/60 Hz, 600 VA
	Las fluctuaciones de la tensión de red no deben superar el 10% de las tensiones de alimentación nominales. La entrada se encuentra en el QIAsymphony SP; en el funcionamiento combinado, el consumo de energía máximo es de 1400 VA.
Categoría de sobretensión	II
Temperatura del aire	15-32 °C
Humedad relativa	15-75% (sin condensación) Humedad relativa máxima del 75% para temperaturas hasta 31 °C, con reducción lineal hasta una humedad del 50% a 32 °C
Altitud	Hasta 2000 m
Ubicación de funcionamiento	Para uso exclusivo en interiores
Nivel de contaminación	2
Clase de entorno	3K2 (IEC 60721-3-3) 3M2 (IEC 60721-3-3)

Condiciones de transporte

Temperatura del aire	De -25 °C a 70 °C en el embalaje del fabricante
Humedad relativa	Máximo del 75% (sin condensación)
Clase de entorno	2K2 (IEC 60721-3-2) 2M2 (IEC 60721-3-2)

Condiciones de almacenamiento

Temperatura del aire	De 5 °C a 40 °C en el embalaje del fabricante
Humedad relativa	Máximo del 85% (sin condensación)
Clase de entorno	1K2 (IEC 60721-3-1) 1M2 (IEC 60721-3-1)

15.2 Datos mecánicos y características del hardware

QIAsymphony SP

Dimensiones	Anchura:	128 cm
	Altura:	103 cm
	Profundidad:	73 cm
Peso		175 kg

QIAsymphony AS

Dimensiones	Anchura:	59 cm
	Altura:	103 cm
	Profundidad:	73 cm
Peso		90 kg

QIASymphony SP y AS (funcionamiento integrado)

Dimensiones	Anchura:	185 cm
	Altura:	103 cm
	Profundidad:	73 cm
Peso		265 kg

16 Anexo sobre la interfaz de usuario

En esta sección se presenta un resumen de la interfaz del usuario de las aplicaciones QIASymphony SP/AS. Los nombres de las fichas, herramientas y botones se muestran en orden alfabético. La disponibilidad de las opciones de software se indica por medio de las siguientes abreviaturas:

- AS = aplicación QIASymphony AS
- SP = aplicación QIASymphony SP
- SI = aplicación de series integradas (QIASymphony SP/AS)
- Hrm = opciones de herramientas para las aplicaciones QIASymphony SP/AS

Además, se proporciona el nombre de cada opción de menú junto con una descripción de la opción. La opción puede ser utilizada por varios flujos de trabajo, y se incluyen descripciones específicas del flujo de trabajo.


Si desea obtener información detallada acerca de la interfaz del usuario, consulte las siguientes referencias:

- Sección 3 del *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Uso del instrumento QIASymphony SP*.
- Sección 3 del *Manual del usuario de QIASymphony SP/AS – Uso del instrumento QIASymphony AS*.

Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	AS	Assay Specifications (Especificaciones del ensayo) Permite añadir un control personalizado.
	SP	Tls User Management/User Overview (Administración de usuarios/Resumen del usuario) Permite crear una nueva cuenta de usuario.
	AS	IR Assay Assignment (Asignación de ensayos) Muestra todos los conjuntos de parámetros de ensayo seleccionados en la vista de ficha.

Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	AS	<p>Tools/Labware SP/AS (Herramientas/Material de laboratorio de SP/AS)</p> <p>Abre el panel de diálogo Assays (Ensayos). Se presentan en una tabla los ensayos que pueden ejecutarse con el elemento de material de laboratorio seleccionado (solo está visible si está instalado el instrumento QIA Symphony AS).</p>
		<p>Tls File transfer/Process Files (Transferencia de archivos/Archivos de proceso)</p> <p>Permite descargar y transferir archivos de juegos de controles de ensayo.</p>
		<p>Tls File transfer/Process Files (Transferencia de archivos/Archivos de proceso)</p> <p>Permite descargar y transferir archivos de definición de ensayos. Solo está visible si está instalado el instrumento QIA Symphony AS.</p>
	AS	<p>Tls Tools (Herramientas)</p> <p>Abre el menú Assay Favorites (Ensayos favoritos). Permite definir ensayos favoritos.</p>
	AS	<p>Assay Selection (Selección de ensayos)</p> <p>Muestra las listas de ensayos. El botón Assay Lists (Listas de ensayos) está activo cuando la pantalla se encuentra en el modo de listas de trabajo.</p>
	AS	<p>IR Tls File transfer/Process Files (Transferencia de archivos/Archivos de proceso)</p> <p>Permite descargar y transferir archivos de conjuntos de parámetros de ensayo. Solo está visible si está instalado el instrumento QIA Symphony AS.</p>
	AS	<p>Assay Assignment (Asignación de ensayos)</p> <p>Permite al usuario asignar un conjunto de parámetros de ensayo seleccionado en la ficha en la ranura 1, la ranura 2 u otra vista a las posiciones de muestras seleccionadas. Después de asignar un conjunto de parámetros de ensayo a una muestra, cambia el color y aparece el número de conjuntos de parámetros de ensayo asignados.</p>

Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	AS	Sample Rack(s)/Loading Information (Gradillas de muestras/Información de carga) Permite generar un identificador de gradilla (solo para gradillas de ensayos).
	AS SP	Integrated Setup/Sample Preparation (Configuración integrada/Preparación de las muestras) Abre la pantalla anterior.
	Tls	File transfer/Process Files (Transferencia de archivos/Archivos de proceso) Pulse para transferir todos los protocolos, los juegos de controles del ensayo y, si está instalado el instrumento QIASymphony AS, definiciones de ensayo adicionales, definiciones de normalización y conjuntos de parámetros del ensayo del instrumento QIASymphony SP al lápiz USB.
	SP	Consumables/Cartridges/Filter-Tips (Consumibles/Cartuchos/Puntas de filtro) Muestra la pantalla "Keyboard" (Teclado) para introducir o escanear el identificador del frasco.
	AS SP IR Tls	Miscellaneous (Varios) Cancela un flujo de trabajo completado sin guardar los cambios.
	Tls	User Management (Administración de usuarios) Le permite cambiar su contraseña.
	Tls	User Management (Administración de usuarios) Permite cambiar la función de un usuario existente. Esta opción solamente está disponible para el usuario de tipo "Supervisor".
	AS SP	Sample Preparation/Sample ID/ Assay Setup (Preparación de las muestras/Id. de muestra/Preparación de los ensayos) Borra el texto del campo de texto.

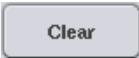Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	SP IR	<p>Integrated Setup (Configuración integrada)</p> <p>Elimina los conjuntos de parámetros de ensayo asignados de las posiciones de muestras seleccionadas.</p> <p>Permite al usuario borrar posiciones y quitar identificadores de muestras y tipos de muestras.</p>
	SP	<p>Consumables (Consumibles)</p> <p>Vuelve de la pantalla Sample Calculation (Cálculo de la muestra) a la vista Consumables (Consumibles).</p>
		<p>Tls Tools (Herramientas)</p> <p>Muestra el menú Configuration (Configuración). Solo está disponible para el usuario "Supervisor".</p>
		<p>Tls Transfer files/In-/Output Files (Archivos de transferencia/Archivos de entrada/salida)</p> <p>Permite descargar archivos de confirmación de inicio de lote.</p>
	AS SP	<p>Sample Preparation/Command bar/Assay Setup (Preparación de las muestras/Barra de comandos/Configuración del ensayo)</p> <p>Continúa la serie. El botón Continue (Continuar) aparece si se pone en pausa la serie actual. Después de la pausa, las muestras del lote procesado se marcarán como "unclear" (dudosas).</p> <p>Nota: Una serie solamente debe ponerse en pausa en caso de emergencia.</p>
		<p>Tls Instrument Report (Informe del instrumento)</p> <p>Crea un archivo de informe del instrumento.</p>
		<p>Tls Transfer files/In-/Output Files (Archivos de transferencia/Archivos de entrada/salida)</p> <p>Permite descargar archivos de termociclador. Solo está visible si está instalado el instrumento QIAsymphony AS.</p>

Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	IR	<p>Integrated Run (Serie integrada)</p> <p>Permite definir un control interno. Este botón solo está activo si se cargan controles internos en un soporte de tubos.</p>
	IR	<p>Integrated Setup (Configuración integrada)</p> <p>Abre la pantalla Assay Assignment (Asignación de ensayos).</p>
	Tls	<p>File transfer/In-/Output Files (Archivos de transferencia/Archivos de entrada/salida)</p> <p>Elimina los archivos de entrada y salida (excepto los archivos de registro) que tengan una antigüedad superior a un número definido de días. El valor predeterminado es 10 días y puede ser ajustado por los técnicos de campo especializados de QIAGEN previa solicitud.</p>
	IR	<p>Integrated Setup (Configuración integrada)</p> <p>Abre un cuadro de mensaje que proporciona información detallada sobre los ensayos asignados y el lote integrado.</p>
	AS	<p>Assay Setup/Integrated Setup (Configuración del ensayo/Configuración integrada)</p> <p>Permite al usuario anular la selección de todas las posiciones seleccionadas.</p>
	IR	<p>Integrated Setup (Configuración integrada)</p> <p>Abre la pantalla "Sample Preparation/ Batch X/Define Samples" (Preparación de muestras/Lote X/Definir muestras).</p>
	SP	<p>Sample Preparation/Internal Controls (Preparación de las muestras/Controles internos)</p> <p>Muestra la lista Internal controls (Controles internos), lo cual permite al usuario asignar el control interno correcto a la posición seleccionada.</p>


Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	AS SP	<p>Define Samples/Sample Rack Layout (Definir las muestras/Disposición de la gradilla de muestras)</p> <p>Configura el tipo de muestra de las muestras seleccionadas en EC+ (control externo positivo).</p>
	AS SP	<p>Define Samples/Sample Rack Layout (Definir las muestras/Disposición de la gradilla de muestras)</p> <p>Configura el tipo de muestra de las muestras seleccionadas en EC- (control externo negativo).</p>
		<p>Tls Sample Preparation/Tools (Preparación de las muestras/Herramientas)</p> <p>Abre el menú File transfer (Transferencia de archivos), que permite transferir los tipos de archivo seleccionados a los instrumentos QIA Symphony SP/AS o al lápiz USB.</p>
		<p>Tls Rack browser/Sample Racks (Explorador de gradillas/Gradillas de muestras) Rack browser/Eluate racks (Explorador de gradillas/Gradillas de eluidos) Rack browser/Assay Rack (Explorador de gradillas/Gradilla del ensayo)</p> <p>Permite al usuario introducir manualmente y después buscar identificadores utilizando la pantalla Keyboard (Teclado).</p>
	SP	<p>Sample Preparation (Preparación de las muestras)</p> <p>Finaliza el Wizard (Asistente). Este botón solamente está visible en el Wizard (Asistente) cuando se ha definido el último lote y no se requiere ningún control interno.</p>
	SP IR	<p>Sample Preparation/Integrated Setup (Preparación de las muestras/Configuración integrada)</p> <p>Permite al usuario asignar un identificador virtual a las muestras seleccionadas sin códigos de barras. El identificador virtual se muestra como: "PositionNumber on Tube Carrier_Unique Batch ID" (Número de Posición en el soporte de tubos_Identificador de lote único).</p>

Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	AS SP IR Tls	<p>Miscellaneous (Varios)</p> <p>Proporciona información para ayudar al usuario a completar la pantalla actual.</p>
		<p>Tls Instrument Report (Informe del instrumento)</p> <p>Muestra el menú Instrument Report (Informe del instrumento).</p>
	SP IR	<p>Sample Preparation/Integrated Setup (Preparación de las muestras/Configuración integrada)</p> <p>Permite al usuario modificar los identificadores de muestras y los tipos de muestra.</p>
	SP IR	<p>Sample Preparation/Integrated run (Preparación de las muestras/Serie integrada)</p> <p>Muestra la lista Inserts/Tube types (Insertos/Tipos de tubo). Esto permite al usuario asignar el tipo de tubo correcto a la posición.</p>
		<p>Tls Service SP/Service AS (Servicio del SP/Servicio del AS)</p> <p>Permite al usuario inicializar el instrumento QIA Symphony. Después de pulsar el botón, pulse Yes (Sí) para realizar la inicialización o No para cancelarla.</p>
		<p>Tls Labware browser/Labware SP (Navegador de material de laboratorio/Material de laboratorio del SP)</p> <p>Abre el panel de diálogo "Input Racks" (Gradillas de entrada) e indica qué gradillas de muestras pueden usarse.</p>
		<p>Tls Labware browser/Labware AS (Navegador de material de laboratorio/Material de laboratorio del AS) Labware browser/Labware SP (Navegador de material de laboratorio/Material de laboratorio del SP)</p> <p>Abre el panel de diálogo Labware (Material de laboratorio).</p>

Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	SP	File transfer/Instr. Setup Files (Transferencia de archivos/Archivos de config. del instrum.) Permite descargar y transferir archivos de material de laboratorio del instrumento QIASymphony AS.
	Tls	Tools (Herramientas) Abre el menú Labware Browser (Navegador de material de laboratorio).
	Tls	Instr. Setup Files (Archivos de config. del instrum.) Permite descargar y transferir archivos de material de laboratorio del instrumento QIASymphony SP.
	Tls	Instr. Setup Files (Archivos de config. del instrum.) Pulse este botón para transferir nuevos paquetes de idiomas.
	Tls	Service SP/Service AS (Servicio del SP/Servicio del AS) Abre la salida de comandos. Este botón se habilita una vez realizado un comando de servicio del operador.
	Tls	Rack browser/Sample Racks (Explorador de gradillas/Gradillas de muestras) Rack browser/Eluate racks (Explorador de gradillas/Gradillas de eluidos) Rack browser/Assay Rack (Explorador de gradillas/Gradilla del ensayo) Muestra los archivos de gradillas modificados entre las 00:00 del lunes de la semana anterior y las 00:00 del lunes de la presente semana.
	AS	Assay Setup/Loading Information (Configuración del ensayo/Información de carga) Muestra una pantalla que contiene información sobre los conjuntos de parámetros de ensayo asignados en una tabla.


Botón	Disponibilidad		Opción de menú y descripción
	AS	IR	<p>Assay Setup/Loading Information (Configuración del ensayo/Información de carga)</p> <p>Permite cargar una gradilla de reactivos/normalización. Pulse este botón cuando se cargue la gradilla de reactivos/normalización. El sistema comprobará durante el examen de inventario si se han cargado correctamente las gradillas de reactivos/normalización, muestras y ensayos.</p>
			<p>Tls File Transfer/In-/Output Files (Archivos de transferencia/Archivos de entrada/salida)</p> <p>Permite descargar archivos de información de carga. Solo está visible si está instalado el instrumento QIASymphony AS.</p>
			<p>Tls File Transfer/In-/Output Files (Archivos de transferencia/Archivos de entrada/salida)</p> <p>Permite descargar archivos de registro del sistema.</p>
	AS		<p>Tls Tools (Herramientas)</p> <p>Cambia a la interfaz del usuario para la preparación de ensayos y muestra el menú Maintenance AS (Mantenimiento del AS) para el QIASymphony AS.</p>
	AS	SP	<p>Tls Tools (Herramientas)</p> <p>Muestra el menú Maintenance SP (Mantenimiento del SP).</p>

Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	AS SP	<p>Sample Preparation (Preparación de las muestras) Assay Setup (Preparación de ensayos)</p> <p>Guarda los cambios y abre la siguiente pantalla.</p>
	SP	<p>Sample Preparation (Preparación de las muestras)</p> <p>Guarda los cambios y abre la siguiente pantalla. Se activa si se selecciona una ranura de muestras que contiene una gradilla de 24 pocillos o si una ranura de muestras que contiene una gradilla de 96 pocillos tiene la mitad/un cuarto de las posiciones seleccionadas. Este botón está disponible durante el proceso de definición de ensayos. El botón se habilita cuando se proporciona toda la información necesaria para el paso actual.</p>
	AS	<p>Sample Rack Layout (Diseño de la gradilla de muestras)</p> <p>Guarda los cambios y abre la siguiente pantalla. Se activa para cada ranura "Sample" (Muestra) disponible cuando se ha asignado al menos una muestra/EC+/EC- y todas las posiciones asignadas tienen definido un volumen.</p>
	SP	<p>General Buttons (Botones generales)</p> <p>Abre la siguiente pantalla del flujo de trabajo.</p>
	AS	<p>Assay Setup (Preparación de ensayos)</p> <p>Define una serie de ensayos nueva. Está disponible cuando no hay actualmente ninguna serie de ensayos definida.</p>
	Tls	<p>File Transfer (Archivos de transferencia)</p> <p>Garantiza que los archivos seleccionados no deben sincronizarse al pulsar el botón Transfer (Transferir).</p>

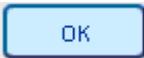Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	AS IR	Assay Setup (Preparación de ensayos) Guarda los cambios y vuelve a la pantalla reciente.
	AS SP IR	Assay Setup/Eluate Drawer (Preparación de ensayos/Cajón de eluidos) Cierra la pantalla.
	SP IR	Eluate Drawer (Cajón de eluidos) Realiza un examen de inventario del cajón “Eluate” (Eluidos) para cotejar el inventario de dicho cajón con la asignación de ranuras/gradillas realizada en la pantalla Eluate Drawer/Elution Slot/Change Rack X (Cajón de eluidos/Ranura de elución/Cambiar gradilla X).
	AS SP	Sample Racks/Eluate Racks/Assay Racks (Gradillas de muestras/Gradillas de eluidos/Gradillas de ensayos) Muestra los archivos de gradillas modificados antes de las 00:00 del lunes de la semana anterior.
	Tls	Labware browser/Labware SP (Navegador de material de laboratorio/Material de laboratorio del SP) Abre el panel de diálogo Output Racks (Gradillas de salida) e indica qué gradillas de elución pueden usarse.
	AS SP	Sample Preparation/Assay Setup (Preparación de las muestras/Preparación de ensayos) Abre la pantalla Overview (Resumen) de la preparación de ensayos. Este botón se habilita al abrir las pantallas Sample View (Vista de muestra) o Parameter View (Vista de parámetros).

Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	SP	<p>Sample Preparation (Preparación de las muestras)</p> <p>Pone en pausa el instrumento QIAsymphony SP. El botón Pause (Pausa) solamente debe pulsarse en caso de emergencia. Después de pulsar el botón Pause (Pausa), el instrumento QIAsymphony SP completa el comando que esté procesándose en ese momento, pone en pausa el protocolo y cambia el estado de las muestras a “unclear” (dudoso). Si el protocolo se ha puesto en pausa por la acción del usuario o a causa de un error, aparecerán los botones Stop (Parar) y Continue (Continuar).</p>
	IR	<p>Command bar (Barra de comandos)</p> <p>Pone en pausa el instrumento QIAsymphony AS. Este botón solamente debe pulsarse en caso de emergencia. El instrumento QIAsymphony AS completa el comando actual y, a continuación, pone en pausa la serie de ensayos. Las muestras estarán marcadas como “unclear” (dudosa) en todo momento si la serie se ha puesto en pausa.</p>
	IR	<p>Command bar (Barra de comandos)</p> <p>Pone en pausa el instrumento QIAsymphony SP. El botón Pause SP (Pausar el SP) solamente debe pulsarse en caso de emergencia. El instrumento QIAsymphony SP completa el comando que se esté procesando en ese momento y, a continuación, pone en pausa el protocolo. Las muestras estarán marcadas como “unclear” (dudosa) en todo momento si la serie se ha puesto en pausa.</p>
	AS	<p>Assay Setup (Preparación de ensayos)</p> <p>Abre la pantalla Parameter View (Vista de parámetros). Esta pantalla muestra información en formato de tabla sobre los conjuntos de parámetros de ensayo y las especificaciones de las muestras que van a procesarse, que se están procesando actualmente o que se han procesado.</p>
	AS	<p>Assay Setup (Preparación de ensayos)</p> <p>Abre la pantalla Plate View (Vista de placa) Esta pantalla proporciona información detallada sobre la carga para la ranura “Sample” (Muestra) o “Assay” (Ensayo) seleccionada.</p>

Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
		<p>Tls File Transfer/Instr. Setup Files (Archivos de transferencia/Archivos de config. del instrum.)</p> <p>Permite descargar perfiles de configuración de proceso personalizados.</p>
		<p>Tls File transfer/Process Files (Transferencia de archivos/Archivos de proceso)</p> <p>Permite descargar y transferir archivos de protocolo.</p>
	AS	<p>Assay Setup (Preparación de ensayos)</p> <p>Guarda los cambios y abre la pantalla Loading Information (Información de carga). El botón está activo para todos los conjuntos de parámetros del ensayo cuando se ha asignado al menos una posición.</p>
	SP	<p>Sample Preparation (Preparación de las muestras)</p> <p>Abre la pantalla Sample Preparation/Batch X (Preparación de las muestras/Lote X). El botón Next (Siguiete) se activa si se selecciona una ranura de muestras que contiene una gradilla de 24 pocillos o si una ranura de muestras que contiene una gradilla de 96 pocillos tiene la mitad/un cuarto de las posiciones seleccionadas.</p>
	AS SP	<p>Tls Miscellaneous (Varios)</p> <p>Muestra los tipos de gradillas de muestras disponibles en el panel de control.</p>
		<p>Tls Miscellaneous (Varios)</p> <p>Muestra el menú Rack Browser (Explorador de gradillas) para ver los archivos de gradillas guardados en los instrumentos QIAsymphony SP/AS.</p>
	AS SP	<p>Assay Setup/Sample Preparation (Preparación de ensayos/Preparación de las muestras)</p> <p>Muestra los archivos de gradillas disponibles en el panel de control.</p>
		<p>Tls File Transfer/In-/Output Files (Archivos de transferencia/Archivos de entrada/salida)</p> <p>Permite transferir y descargar archivos de gradillas.</p>

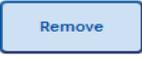
Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	AS SP	<p>Assay Setup/Eluate Drawer (Preparación de ensayos/Cajón de eluidos)</p> <p>Permite escanear o introducir manualmente un identificador de gradilla.</p>
	AS	<p>Assay Setup (Preparación de ensayos)</p> <p>Muestra la lista de tipos de gradilla.</p>
	AS SP	<p>Loading Information/Loading Reagents (Información de carga/Carga de reactivos)</p> <p>Permite extraer una gradilla de reactivos/normalización. Pulse este botón para extraer la gradilla de reactivos/normalización. El sistema comprobará durante el examen de inventario si se ha extraído correctamente la gradilla.</p>
		<p>Tls Files transfer/Instr. Setup Files (Transferencia de archivos/Archivos de config. del instrum.)</p> <p>Permite cargar y transferir información de cartuchos de reactivos nuevos.</p>
	AS	<p>Labware browser/Labware AS (Navegador de material de laboratorio/Material de laboratorio del AS)</p> <p>Abre la vista Reagent Holders (Soporte de reactivos), en la que se muestra información sobre los soportes de reactivos.</p>
	AS IR	<p>Sample Rack Layout (Diseño de la gradilla de muestras)</p> <p>Configura el tipo de muestra de las muestras seleccionadas en "Sample" (Muestra).</p>
	SP	<p>Consumables (Consumibles) Cartridges (Cartuchos)</p> <p>Abre el panel de diálogo Sample Calculation (Cálculo de la muestra).</p>

Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	AS	<p>Assay Setup (Preparación de ensayos)</p> <p>Permite al usuario modificar los identificadores de las posiciones seleccionadas en la cuadrícula de la gradilla. Al pulsar el botón, aparece la pantalla Manual Input (Entrada manual).</p>
	AS SP IR	<p>Sample Preparation/Eluate Drawer/Integrated Setup (Preparación de las muestras/Cajón de eluidos/Configuración integrada)</p> <p>Muestra la pantalla Keyboard (Teclado), que permite al usuario introducir manualmente los identificadores de muestras.</p>
	AS SP	<p>Overview (Resumen)</p> <p>Abre la pantalla Sample View (Vista de la muestra). Esta pantalla muestra información en formato de tabla.</p>
		<p>Tls User Management (Administración de usuarios)</p> <p>Guarda los cambios.</p>
	AS	<p>Assay Setup (Preparación de ensayos)</p> <p>Permite al usuario introducir un código de barras de kit. Pulse el campo. Puede introducir un código de barras en la pantalla que aparece.</p>
		<p>Tls File Transfer/Instr. Setup Files (Transferencia de archivos/Archivos de config. del instrum.)</p> <p>Permite transferir y descargar comandos de servicio del operador para el instrumento QIAsymphony AS.</p>
		<p>Tls File Transfer/Instr. Setup Files (Transferencia de archivos/Archivos de config. del instrum.)</p> <p>Permite transferir y descargar comandos de servicio del operador para el instrumento QIAsymphony SP.</p>
	SP IR	<p>Integrated Setup/Sample Preparation (Configuración integrada/Preparación de las muestras)</p> <p>Permite al usuario seleccionar todas las muestras.</p>

Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	SP	<p>Sample Preparation (Preparación de las muestras)</p> <p>Selecciona todas las posiciones de controles internos.</p>
	AS	<p>Assay Setup (Preparación de ensayos)</p> <p>Selecciona todas las posiciones. Solo está disponible si no se ha seleccionado ninguna posición en la gradilla. De lo contrario, estará habilitado el botón Deselect All (Anular selección de todo).</p>
		<p>Tls Tools (Herramientas)</p> <p>Abre el menú Service AS (Servicio del AS), en el que pueden iniciarse funciones especiales de servicio (por ejemplo, para el mantenimiento o la reinicialización del instrumento).</p>
		<p>Tls Tools/Sample Preparation (Herramientas/Preparación de las muestras)</p> <p>Abre el menú Service SP (Servicio del SP), en el que pueden iniciarse funciones especiales de servicio (por ejemplo, para el mantenimiento o la reinicialización del instrumento).</p>
	AS	<p>IR Assay Assignment (Asignación de ensayos)</p> <p>Abre la pantalla Assay Specifications (Especificaciones del ensayo).</p>
		<p>Tls Tools (Herramientas)</p> <p>Inicia el comando de servicio del operador seleccionado.</p>
	SP	<p>Sample Preparation (Preparación de las muestras)</p> <p>Detiene la serie. El botón Stop (Parar) aparece si se pone en pausa la serie actual.</p>
		<p>IR Command bar (Barra de comandos)</p> <p>Detiene la serie del AS. El botón Stop AS (Detener AS) aparece si se pone en pausa la serie de ensayos actual.</p>

Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	IR	<p>Command bar (Barra de comandos)</p> <p>Detiene la serie del SP. El botón Stop SP (Detener SP) aparece si se pone en pausa la serie actual.</p>
	AS SP	<p>R&C Drawer (Cajón R&C) W Drawer (Cajón W) E Drawer (Cajón E) E & R Drawer (Cajón E & R) A Drawer (Cajón A)</p> <p>Detiene el examen de inventario del cajón "Eluate" (Eluidos) en curso y, a continuación, abre la pantalla anterior.</p>
		<p>Tls Rack browser/Sample Racks (Explorador de gradillas/Gradillas de muestras) Rack browser/Eluate Racks (Explorador de gradillas/Gradillas de eluidos) Rack browser/Assay Rack (Explorador de gradillas/Gradillas de ensayos)</p> <p>Muestra los archivos de gradillas modificados desde las 00:00 del lunes de la presente semana, incluidos los archivos de gradillas modificados hoy. Esta opción está preseleccionada de manera predeterminada.</p>
		<p>Tls Rack browser/Sample Racks (Explorador de gradillas/Gradillas de muestras) Rack browser/Eluate Racks (Explorador de gradillas/Gradillas de eluidos) Rack browser/Assay Rack (Explorador de gradillas/Gradillas de ensayos)</p> <p>Muestra los archivos de gradillas que se han modificado hoy.</p>
		<p>Tls Maintenance SP (Mantenimiento del SP)</p> <p>Abre/vuelve al menú Tools (Herramientas).</p>

Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	SP	<p>File transfer/Instr. Setup Files (Transferencia de archivos/Archivos de config. del instrum.) File transfer/Process Files (Transferencia de archivos/Archivos de proceso) File transfer/In-/Output Files (Transferencia de archivos/Archivos de entrada/salida)</p> <p>Permite transferir los tipos de archivo seleccionados a los instrumentos QIAsymphony SP/AS o al lápiz USB.</p>
	SP	<p>Labware SP (Material de laboratorio del SP)</p> <p>Abre la pantalla Tube Carrier (Portador de tubos).</p>
	SP	<p>Tls Integrated Setup/Sample Preparation (Configuración integrada/Preparación de las muestras)</p> <p>Permite al usuario cambiar el tipo de tubo.</p>
		<p>Tls Instr. Setup Files (Archivos de config. del instrum.)</p> <p>Guarda información sobre todos los usuarios creados en un lápiz USB. Pulse este botón para descargar los archivos de juegos de controles del ensayo.</p>
		<p>Tls Tools/Sample Preparation (Herramientas/Preparación de las muestras)</p> <p>Abre el menú User Management (Administración de usuarios) para administrar los usuarios y las contraseñas.</p>
	AS	<p>Assay Setup (Preparación de ensayos)</p> <p>Permite al usuario modificar el volumen de las posiciones seleccionadas en la cuadrícula de la gradilla.</p>
	SP	<p>Sample Preparation (Preparación de las muestras)</p> <p>Inicia el Wizard (Asistente).</p>

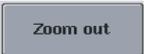Botón	Disponibilidad	Opción de menú y descripción
	Tls	File Transfer/In-/Output Files (Transferencia de archivos/Archivos de entrada/salida) Permite transferir listas de trabajo.
	AS	Assay Setup (Preparación de ensayos) Cambia al modo de listas de trabajo. Si hay disponible al menos una lista de trabajo para las muestras y la pantalla se encuentra en el modo manual, el botón Work Lists (Listas de trabajo) estará activo.
	Tls	File Transfer/In-/Output Files (Transferencia de archivos/Archivos de entrada/salida) Determina que los archivos seleccionados se sincronicen al pulsar el botón Transfer (Transferir).
	AS	Assay Setup (Preparación de ensayos) Permite al usuario ampliar la vista de la cuadrícula de la gradilla para mostrar información adicional.
	AS	Assay Setup (Preparación de ensayos) Permite al usuario volver a la vista normal después ampliarla.

17 Apéndice

17.1 Declaración de conformidad

17.1.1 Declaración de conformidad — QIASymphony SP

Nombre y dirección del fabricante legal

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Alemania

Puede solicitar una declaración de conformidad actualizada al servicio técnico de QIAGEN.

17.1.2 Declaración de conformidad: QIASymphony AS

Nombre y dirección del fabricante legal

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Alemania

Puede solicitar una declaración de conformidad actualizada al servicio técnico de QIAGEN.

17.2 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

En esta sección encontrará información sobre la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de los usuarios.

El símbolo de contenedor con ruedas tachado (consulte más abajo) indica que este producto no se puede eliminar con otros residuos, sino que debe llevarse a un centro de tratamiento de residuos aprobado o a un punto de recogida para reciclaje conforme a la normativa y la legislación locales.

La recogida selectiva y el reciclaje de residuos de aparatos electrónicos en el momento de su eliminación ayudan a preservar los recursos naturales y garantizar que el producto se recicle de manera que contribuya a proteger la salud humana y el medio ambiente.



QIAGEN ofrece servicios de reciclaje a petición con un coste adicional. En la Unión Europea, de acuerdo con los requisitos de reciclaje de RAEE específicos y cuando QIAGEN suministre un producto de sustitución, se ofrece el reciclaje gratuito de equipos electrónicos con marcado RAEE.

Para reciclar equipos electrónicos, póngase en contacto con su oficina comercial de QIAGEN para solicitar el formulario de devolución necesario. Una vez enviado el formulario, QIAGEN se pondrá en contacto con usted para solicitarle información de seguimiento a fin de programar la recogida de los residuos electrónicos o proporcionarle un presupuesto individualizado.

17.3 Declaración relativa a la FCC

La "United States Federal Communications Commission" (USFCC) (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.) ha declarado (en el título 47 del CFR, apartado 15. 105) que los usuarios de este producto deben ser informados de los hechos y de las circunstancias siguientes.

"Este dispositivo cumple con las estipulaciones establecidas en el apartado 15 de la normativa de la FCC:

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado."

"Este aparato digital de Clase A cumple los requisitos establecidos en la norma canadiense ICES-0003."

La siguiente declaración se aplica a los productos mencionados en esta guía de uso combinada, salvo que se especifique lo contrario. La frase para otros productos aparecerá en la documentación correspondiente.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase A, de conformidad con el apartado 15 de la Normativa de la FCC. Estos límites se han diseñado para garantizar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. La utilización de este equipo en zonas residenciales puede causar interferencias perjudiciales; el usuario deberá corregir estas interferencias a su costa.

QIAGEN GmbH Alemania no se responsabiliza de las interferencias de radio o de televisión causadas por modificaciones no autorizadas de este equipo o por la sustitución o la conexión de cables de conexión y de equipos diferentes a los especificados por QIAGEN GmbH, Alemania. La eliminación de estas interferencias causadas por dichas modificaciones, sustituciones o conexiones no autorizadas será responsabilidad del usuario.

17.4 Cláusula de responsabilidad

QIAGEN se verá eximida de todas sus obligaciones de garantía si las reparaciones o las modificaciones son llevadas a cabo por personas ajenas al personal de la empresa, excepto en los casos en los que la empresa haya dado su consentimiento por escrito para la realización de dichas reparaciones o modificaciones.

Todos los materiales sustituidos en los términos de esta garantía estarán garantizados exclusivamente durante el período de garantía original y en ningún caso más allá de la fecha de vencimiento de esta, salvo que lo haya autorizado por escrito un responsable de la empresa. Los dispositivos de lectura, los dispositivos de interconexión y el software relacionado únicamente están garantizados durante el período ofrecido por parte del fabricante original de estos productos. Las declaraciones y garantías realizadas por cualquier persona, incluidos los representantes de QIAGEN, que sean incoherentes o entren en conflicto con las condiciones de la presente garantía no serán vinculantes para la empresa excepto si se especifican por escrito y se aprueban por un responsable de QIAGEN.

18 Historial de revisiones del documento

Fecha	Cambios
R1, mayo de 2022	Adición de materiales requeridos y materiales requeridos pero no suministrados. Adición de la marca IVD.

Acuerdo de licencia limitada para la Guía de uso combinada de los instrumentos QIASymphony AS/SP

La utilización de este producto implica por parte de cualquier comprador o usuario del producto la aceptación de los siguientes términos:

1. El producto puede utilizarse únicamente conforme a los protocolos suministrados con el producto y a estas instrucciones de uso y para su uso exclusivo con los componentes incluidos en el kit. QIAGEN no ofrece licencia alguna bajo ninguna de sus propiedades intelectuales para utilizar o incorporar los componentes suministrados en este kit con componentes no incluidos en él, excepto según se describe en los protocolos proporcionados con el producto, estas instrucciones de uso y los protocolos adicionales disponibles en www.qiagen.com. Algunos de estos protocolos adicionales han sido proporcionados por usuarios de QIAGEN para usuarios de QIAGEN. QIAGEN no ha probado ni optimizado estos protocolos en profundidad. Por ello, QIAGEN no los garantiza ni asegura que no infrinjan los derechos de terceros.
2. Aparte de las licencias expresamente especificadas, QIAGEN no garantiza que este kit y/o su uso no infrinjan los derechos de terceros.
3. Este kit y sus componentes tienen licencia para un solo uso y no se pueden reutilizar, reacondicionar ni revender.
4. QIAGEN renuncia específicamente a toda responsabilidad respecto a cualquier otra licencia, explícita o implícita, distinta de las licencias expresamente especificadas.
5. El comprador y el usuario del kit aceptan no llevar a cabo ni permitir que otros lleven a cabo medidas que puedan conducir a acciones prohibidas en las especificaciones anteriores o que puedan facilitarlas. QIAGEN se reserva el derecho de emprender acciones legales ante cualquier tribunal para el cumplimiento de las prohibiciones especificadas en este Acuerdo de licencia limitada y recuperará todos los gastos derivados de la investigación y de los costes judiciales, incluidas las costas procesales, en cualquier acción emprendida para hacer cumplir este Acuerdo de licencia limitada o cualquier otro derecho de propiedad intelectual en relación con este kit y/o con sus componentes.

Para obtener los términos de licencia actualizados, visite www.qiagen.com.

Marcas comerciales: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIASymphony®, Rotor-Disc®, Rotor-Gene® (QIAGEN Group); DECON-QUAT® (Veltek Associates, Inc.); DNA-ExitusPlus™ (Applchem GmbH); Excel®, Microsoft®, Windows® (Microsoft Corporation); Gigasept®, Mikroziid® (Schülke & Mayr GmbH); Incidin® (Ecolab, Inc.); LightCycler® (Roche Group); Sarstedt® (Sarstedt AG and Co.). Los nombres registrados, las marcas comerciales, etc., utilizados en este documento, incluso cuando no aparecen marcados como tales, están protegidos por la legislación.

HB-3072-001 05/2022 © 2022 QIAGEN. Todos los derechos reservados.

