

Nota importante

therascreen[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, REF 874111

therascreen[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), REF 870311

Prezado usuário do *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit,

Você foi informado anteriormente de que a QIAGEN revisou as instruções de uso dos *therascreen* EGFR PCR Kits para reduzir quaisquer riscos resultantes de artefatos de fluorescência que levam a execuções inválidas ou falsos resultados positivos para mutações e para enfatizar a importância de uma mistura completa de reagentes. Um cut-off menor para o delta C_T (ΔC_T) e uma verificação manual adicional para os valores de delta CT (ΔCT) foram introduzidos para evitar quaisquer resultados falso-positivos devido a tais artefatos de fluorescência.

Nesta Nota importante, gostaríamos de informá-lo de que a determinação automática de resultados no software Rotor-Gene foi atualizada e as novas revisões do manual do kit correspondente foram lançadas:

- Revisão 7 para REF 874111 do *therascreen*[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2
- Revisão 5 para REF 870311 do *therascreen*[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24)

Essas novas revisões do manual incluem todas as alterações correspondentes nas instruções de uso. Consulte o Histórico de revisões do documento do Manual do *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit aplicável para obter mais detalhes.

O Pacote de ensaios para determinação automática de resultados (disponível somente para a REF 874111) está disponível para download na página do produto do *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit em www.qiagen.com. Acesse Product Resources (Recursos do produto) > Supplementary Protocols (Protocolos suplementares) para baixar o Pacote de ensaios.

Traduções desta Nota importante

A QIAGEN fornece a versão impressa desta Nota importante em inglês. As traduções desta Nota importante estão disponíveis em formato eletrônico em PDF. Você poderá acessar os documentos traduzidos na guia Product Resources (Recursos do produto) da página do produto correspondente em www.qiagen.com.

Se tiver qualquer dúvida ou problema, entre em contato com o Departamento de Assistência Técnica local da QIAGEN. Para obter informações de contato, visite as seguintes páginas:

Subsidiárias da QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

Parceiros comerciais e importadores da QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

Atenciosamente,

QIAGEN

www.qiagen.com