

Nota importante

therascreen[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, REF 874111

therascreen[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), REF 870311

Prezado utilizador do *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit,

Foi informado previamente que a QIAGEN reviu as Instruções de utilização dos Kits *therascreen* EGFR PCR de modo a reduzir qualquer risco resultante de artefactos de fluorescência que conduzam a execuções inválidas ou falsos resultados positivos quanto a mutação e para salientar a importância de uma mistura uniforme reagentes. Um valor de cut-off inferior para o delta C_T (ΔC_T) e uma verificação manual adicional para os valores delta CT (ΔCT) foram introduzidos para evitar quaisquer resultados falso-positivos devido a esses artefactos de fluorescência.

Nesta nota importante, gostaríamos de informar que a determinação automática de resultados no software do Rotor-Gene foi atualizada e foram lançadas novas revisões do manual do kit correspondente:

- Revisão 7 para REF 874111 *therascreen*[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2
- Revisão 5 para REF 870311 *therascreen*[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24)

Estas novas revisões do manual incluem todas as alterações correspondentes às Instruções de utilização. Consulte o Histórico de revisões do documento do manual *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit aplicável para obter mais detalhes.

O pacote de ensaio para a determinação automática de resultados (apenas disponível para REF 8741111) está disponível para transferência na página Web do produto *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit em www.qiagen.com. Acesse a Product Resources (Recursos do produto) > Supplementary Protocols (Protocolos suplementares) para transferir o pacote de ensaio.

Traduções desta Nota importante

A QIAGEN fornece a Nota importante impressa em inglês. As traduções da Nota importante estão disponíveis eletronicamente no formato Portable Document Format (PDF). Pode aceder aos documentos traduzidos no separador Product Resources (Recursos do produto) da página do produto correspondente em www.qiagen.com.

Se tiver alguma dúvida ou questão, contacte o departamento de assistência técnica local da QIAGEN. Para obter as informações de contacto, visite as seguintes páginas Web:

Filiais da QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

Parceiros comerciais e importadores da QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

Com os melhores cumprimentos,

QIAGEN

www.qiagen.com