

2020 年 8 月

重要須知

therascreen® EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, REF 874111

therascreen® EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), REF 870311

therascreen EGFR RGQ PCR Kit 客戶您好，

您先前收到了通知，QIAGEN 已修訂 *therascreen* EGFR PCR Kit 的使用說明，以降低螢光假影造成的風險，避免發生無效運行或出現偽陽性突變結果，並強調徹底混合試劑的重要性。設定較低的 ΔC_T (ΔC_T) 臨界值，並額外手動檢查 ΔC_T 值 (ΔC_T)，以避免因這些螢光假影而造成偽陽性結果。

本公司想透過這份重要須知通知您，目前已更新 Rotor-Gene 軟體的結果自動調用功能，並發佈了新修訂的相應試劑組使用手冊：

- 874111 *therascreen*® EGFR RGQ PCR Kit (24), V2 第 7 修訂版
- REF 870311 *therascreen*® EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24) 第 5 修訂版

這些新修訂的使用手冊中，包含相應使用說明的所有變更。如需詳細資訊，請參閱適用的 *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit 使用手冊文件修訂歷程記錄。

結果自動調用功能（僅適用於 REF 874111）的 Assay Package，可從 www.qiagen.com 網站的 *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit 產品頁面下載。前往 Product Resources（產品資源）> Supplementary Protocols（補充方案）下載檢測套件。

本重要須知的翻譯版

QIAGEN 提供英文版的紙本重要須知，重要須知的翻譯版製作為可攜式文件格式 (PDF) 的電子檔案。請瀏覽 www.qiagen.com 網站該產品網頁的產品資源索引標籤，您可以在此下載翻譯文件。

如有任何問題或疑問，請聯絡當地 QIAGEN 技術服務部門。聯絡資訊請瀏覽下列網頁：

QIAGEN 子公司：

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

QIAGEN 商業合作夥伴和進口商：

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

敬祝 順心

QIAGEN

www.qiagen.com