

Důležitá poznámka

Vážený zákazníku,

Objevili jsme chybu v příručce k soupravě *therascreen*[®] KRAS RGQ PCR (kat. č. 874011), která by mohla způsobit selhání cyklů. Tato chyba může ovlivnit výsledky kanálu interní kontroly (žlutá) při provádění manuální interpretace výsledků. Tato chyba nemá vliv na automatickou interpretaci výsledků ani na existující platné výsledky.

V pokynech pro 7. krok „Nastavení softwarové analýzy“ je nesprávně uvedeno:

7. Zvolte „Slope Correct“ (Křivka správně).

Souhrn **SPRÁVNÝCH** nastavení manuální analýzy je uveden v přiložené tabulce.

Vezměte prosím na vědomí, že:

- „Slope correct“ (Křivka správně) **SE NEMÁ** používat při analýze kteréhokoli z kanálů.
- Toto neovlivní zákazníky používající balíček analýz *therascreen* KRAS Assay Package.
- Pokud byl slope correct (křivka správně) omylem použit, bude důsledkem selhání cyklu kvůli interní kontrole v reakci „No Template Control“ (reakce NTC, kontrola bez templátu) a výsledky pacientů nemají být interpretovány.

Parametry analýzy	Cycling A. Green (Cyklování A. Zelená)	Cycling A. Yellow (Cyklování A. Žlutá)
Threshold	0.05	0.05
Dynamic Tube	ON	ON
Linear Scale	ON	ON
Outlier Removal – NTC Threshold	10%	10%

Opravené pokyny budou součástí příští revize *příručky pro soupravu theascreen KRAS RGQ PCR*.

Pokud máte jakékoli otázky, kontaktujte prosím oddělení technických služeb místního zastoupení společnosti QIAGEN.

S pozdravem,

Váš tým společnosti QIAGEN

Ochranné známky: QIAGEN®, Sample to Insight®, theascreen® (skupina QIAGEN).
1101673CS 01/2016 HB-2097-001
© 2016 QIAGEN, všechna práva vyhrazena.