

april 2016

Važna napomena

Poštovani klijenti,

Uočili smo grešku u priručniku za komplet *therascreen*® KRAS RGQ PCR (kat. Br. 874011), koja može dovesti do neuspelih ciklusa. Ova greška može da utiče na rezultate za kanal interne kontrole (žute boje) prilikom ručnog tumačenja rezultata. Ova greška ne utiče na automatizovano tumačenje rezultata i nema uticaja na postojeće ispravne cikluse.

U uputstvu za korak 7 u odeljku „Postavke softverske analize“ pogrešno je navedeno sledeće:

7. Izaberite „Slope Correct“ (Ispravka nagiba).

Sažetak **ISPRAVNE** postavke ručne analize nalazi se u priloženoj tabeli.

Imajte u vidu sledeće:

- Ispravka nagiba **SE NE TREBA** koristiti prilikom analize bilo kog kanala.
- Ovo neće imati uticaja ukoliko koristite *therascreen* KRAS paket za analizu.
- Ukoliko je ispravka nagiba pogrešno primenjena, rezultat će biti neuspešan ciklus jer je interna kontrola reakcija kontrole bez matrice (NTC), te rezultate za pacijenta ne bi trebalo tumačiti.

Parametar analize	Cycling A. Green (Ciklus A. Zeleno)	Cycling A. Yellow (Ciklus A. Žuto)
Threshold	0.05	0.05
Dynamic Tube	ON	ON
Linear Scale	ON	ON
Outlier Removal – NTC Threshold	10%	10%

Tačno uputstvo će biti uvršteno u sledeće revidirano izdanje *priručnika za komplet theascreen KRAS RGQ PCR*.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, obratite se lokalnoj službi za tehničku podršku kompanije QIAGEN.

S poštovanjem,

Vaš QIAGEN tim

Zaštićeni znakovi: QIAGEN®, Sample to Insight®, theascreen® (QIAGEN grupa).
1101673SR 01/2016 HB-2097-001
© 2016 QIAGEN, sva prava zadržana.