

Önemli not

Değerli müşterimiz,

therascreen[®] KRAS RGQ PCR Kiti (kat no. 874011) el kitabında hatalı çalışmaya neden olabilecek bir hata tespit ettik. Bu hata sonuçların manuel olarak yorumlanması sırasında İnternal Kontrol (sarı) kanalının sonuçlarını etkileyebilir. Bu hata sonuçların otomatik yorumunu etkilemez ve mevcut geçerli çalışmalar üzerinde etkisi yoktur.

“Yazılım analiz ayarları” bölümündeki 7. adımda yer alan talimat yanlıştır:

7. “Slope Correct” (Eğim düzeltme) ögesini seçin.

Ekteki tabloda **DOĞRU** manuel analiz ayarlarının bir özeti verilmektedir.

Lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Kanalların analizinde eğim düzeltme **KULLANILMAMALIDIR**.
- Bu durum *therascreen* KRAS Test Paketi kullanan müşterileri etkilemeyecektir.
- Eğim düzeltme yanlışlıkla uygulanırsa, Şablonsuz Kontrol'deki (NTC reaksiyonu) İnternal Kontrol nedeniyle çalışma hatalı olacaktır ve hasta sonuçları yorumlanmamalıdır.

Analiz Parametresi	Cycling A. Green (Döngü A. Yeşil)	Cycling A. Yellow (Döngü A. Sarı)
Threshold	0.05	0.05
Dynamic Tube	ON	ON
Linear Scale	ON	ON
Outlier Removal – NTC Threshold	10%	10%

Düzeltilen talimatlar therascreen *KRAS RGQ PCR Kiti El Kitabının* sonraki revizyonuna da eklenecektir.

Sorunuz varsa lütfen yerel QIAGEN Teknik Servis Departmanınızla görüşün.

Saygılarımızla,

QIAGEN Ekibiniz

Ticari markalar: QIAGEN®, Sample to Insight®, therascreen® (QIAGEN Grup).
1101673TR 01/2016 HB-2097-001
© 2016 QIAGEN, tüm hakları saklıdır.